

**Rx Sahaja**

**STERIL**

**Pemalut Penutup Pembedahan Hydrofiber™ dengan Perak**

**ARAHAN PENGGUNAAN**

**BAHASA MELAYU**

**PENERANGAN PRODUK**

Pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL™ Ag merupakan pemalut pasca operatif yang terdiri daripada pad dalaman (tempat terkena luka) bukan tenunan terdiri daripada teknologi Hydrofiber™ dan perak ionik yang dijahit dengan nilon dan benang elastan. Pad ditahan di tempatnya di antara lapisan atas Hidrokoloid yang terikat kepada lapisan poliuretana dan lapisan terkena kulit bertingkap yang terdiri daripada lapisan poliuretana yang dikapit di antara dua lapisan tambahan Hidrokoloid.

Lapisan luar poliuretana pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL Ag menyediakan sawar bakteria dan virus untuk mengurangkan risiko jangkitan dengan syarat pemalut kekal kemas dan tidak terdapat sebarang kebocoran.

Perak di dalam pemalut membantu mengurangkan risiko jangkitan luka.

Pad Hydrofiber tengah yang sangat menyerap, menyerap dan mengekalkan kebocoran serosanguinous dan mengubahnya menjadi gel lembut yang mengekalkan persekitaran lembap untuk menyokong proses penyembuhan badan.

Komponen hidrokoloid pemalut menyediakan lekatan yang kemas, mesra kulit dan menyokong penanggalan tidak traumatik pemalut sambil meminimumkan kerosakan kepada kulit sekitar yang ada.

Pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL Ag merupakan pemalut kalis air, sawar bakteria dan viral yang direka untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam geometri luka/insisi semasa pergerakan badan dan edema pasca operatif.

**Indikasi**

**Di bawah penyeliaan pakar kesihatan, pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL Ag boleh digunakan untuk pengurusan:**

Penyembuhan luka melalui intensi primer (cth. luka/insisi traumatik dan pasca elektif) dan sebagai halangan berkesan kepada penembusan bakteria untuk membantu mengurangkan jangkitan.

**Kontraindikasi**

Pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL Ag tidak seharusnya digunakan pada individu yang sensitif kepada pemalut atau komponennya atau mempunyai tindak balas alergi kepada pemalut atau komponennya.

**Langkah Berjaga-jaga dan Pemerhatian**

**Amaran: Kesterilan adalah dijamin melainkan jika beg telah rosak atau dibuka sebelum digunakan.**

Peranti ini hanya untuk penggunaan tunggal sahaja dan tidak boleh digunakan semula. Penggunaan semula boleh menyebabkan peningkatan risiko jangkitan dan pencemaran silang. Sifat fizikal peranti mungkin tidak lagi optimum.

Oleh sebab proses pensterilan mungkin ada sedikit bau semasa membuka pakej utama.

Jangan mengenakan pemalut di bawah ketegangan.

Adalah tidak disyorkan untuk memotong pemalut.

Pilih saiz pemalut untuk memastikan hubungan langsung antara luka/insisi dan pad Hydrofiber. Kawasan pelekat tidak seharusnya terkena luka/insisi.

Pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL Ag tidak direka sebagai ganti kepada kaedah penutupan utama seperti kokot atau sutur.

Sekiranya jangkitan terbentuk semasa penggunaan pemalut, terapi antibiotik yang sesuai perlu dimulakan. Penggunaan pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL Ag boleh diteruskan, tetapi kemajuan luka/insisi perlu dipantau dengan teliti dan semua rawatan perlu di bawah penyeliaan perubatan.

Pemalut tidak serasi dengan produk berasaskan minyak seperti petrolatum.

Walaupun ia telah diperhatikan bahawa produk tertentu yang mengandungi perak boleh menyebabkan penyahwarnaan kulit berikutan penggunaan berpanjangan, kajian klinikal dengan produk yang mengandungi Teknologi Hydrofiber dengan perak ionik telah menunjukkan tiada penyahwarnaan.

### Arahan Penggunaan

1. Sebelum mengenakan pemalut, bersihkan tapak luka/insisi, bilas dengan salin steril dan keringkan kulit di sekelilingnya.
2. Pilih saiz pemalut untuk memastikan hubungan langsung antara luka/insisi dan pad Hydrofiber.
3. Keluarkan pemalut dari pek steril.
4. Mula-mula keluarkan 3/4 daripada kertas lapik sepanjang panjang pemalut dengan meminimumkan sentuhan jari dengan pad tengah dan permukaan pelekat. Letakkan di satu sisi baris luka/insisi. Gulingkan pemalut perlahan-lahan di atas luka/garisan insisi dan bentukkan di tempatnya.
5. Keluarkan baki 1/4 kertas lapik dan bentuk perlahan-lahan pemalut di tempatnya menggunakan tangan untuk lekatan yang kemas. Jangan regangkan.
6. Sokongan hidrokoloid lutcahaya membolehkan klinisian untuk memantau pad Hydrofiber tengah dan menilai masa pemalut perlu ditukar. Pemalut boleh dibiarkan di tempatnya selama sehingga 7 hari tertakluk kepada penilaian klinikal dan protokol pemalut setempat.
7. Semua luka/insisi perlu dipantau secara kerap. Tanggalkan pemalut penutup PEMBEDAHAN AQUACEL Ag apabila dinyatakan secara klinikal (iaitu kebocoran, pendarahan berlebihan, rasa syak mengenai jangkitan atau pada 7 hari).

**Untuk memalut insisi lutut. Lutut perlu berada lebih kurang pada 30 sudut darjah untuk penggunaan pemalut optimum.**

### Penanggalan Pemalut

Untuk menanggalkan pemalut, tekan ke bawah dengan lembut ke atas kulit dan dengan berhati-hati angkat satu dan berhati-hati angkat hujung pemalut dengan tangan anda yang lain. Regangkan pemalut untuk memecahkan meterai pelekat dan tanggalkan.

### Langkah Berjaga-jaga Storan

Produk ini hanya untuk penggunaan tunggal sahaja dan dibekalkan steril.

Jika pakej dalaman rosak, jangan gunakan pemalut.

Simpan pada suhu bilik (10°C – 25°C/50°F – 77°F). Pastikan kering.

	Ujian aktiviti berterusan 7 hari (model luka simulasi)	Ujian zon Inhibisi (spektrum aktiviti)
Stafilokokus aureus	✓	✓
Pseudomonas aeruginosa	✓	✓
Candida albicans	✓	✓
MRSA		✓
VRE		✓
Serratia marscesens (tahan abtc)		✓
P. aeruginosa (tahan abtc)		✓

<b>Enterobacter doacae</b>		✓
<b>Klebsiella pneumoniae</b>		✓
<b>Escherichia coli</b>		✓
<p>Sekiranya maklumat atau panduan lanjut diperlukan, sila hubungi Perkhidmatan Profesional ConvaTec atau lawati kami dalam talian di <a href="http://www.convatec.com">www.convatec.com</a></p> <p>Dibuat di Republik Dominica</p> <p>©2016 ConvaTec Inc.  ®/™ menunjukkan tanda dagangan ConvaTec Inc. AQUACEL dan HYDROFIBER adalah tanda dagangan berdaftar ConvaTec Inc. di Amerika Syarikat.</p>		



Jangan Guna Semula



Disterilkan dengan Sinaran Gamma



Baca Arahan Penggunaan



Nombor Pesanan



Simpan pada Suhu Bilik



Pastikan Kering



Nombor Lot



Tarikh Tamat Tempoh



Jangan Guna jika Bungkusannya Rosak