

A woman in a white dress and hat is lifting a child in a white dress and hat on a beach. The background is a clear blue sky and the ocean. The woman is smiling and looking at the child. The child is also smiling and looking towards the camera. The scene is bright and sunny.

neria™


neria™ INFUZNÍ SET
Vaše volba pro podkožní infuzi

 **ConvaTec**


Infuzní set neria™

je přímo určen pro subkutánní podání léčiva. Je tvořen ocelovou jehlou s lepicí plochou pro fixaci a infuzní hadičkou, která propojí injekční dávkovač s tělem pacienta. Jehla je navržena tak, aby umožňovala snadnou aplikaci a byla diskretní pro každodenní nošení. **Infuzní set Neria™** je aplikován v úhlu 90° k pokožce pacienta. Jednoduchost zavedení infuzního setu umožňuje aplikaci pacientem samotným bez asistence jiných osob. Samolepicí podložka s adhezivem eliminuje používání dalších náplastí. Jehla je zapíchnuta kolmo do podkoží a je pevně přichycena na kůži pacienta. Hadičky s dvojitou stěnou se nezalamují a zajišťují konstantní průtok léčiva.


Infuzní set neria™ – postup aplikace:

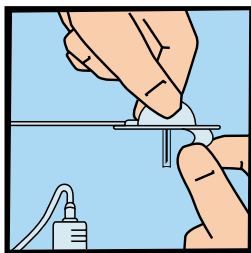


1. Připojte hadičku infuzního setu ke stříkačce. Uchopte jehlu sklopením křídélek v její horní části. Ze spodní části lepicí plochy sejměte ochranný papír.

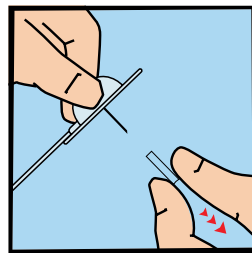

2. Uchopte ochranný kryt jehly a mírným pootočením a zatáhnutím ho odstraníte.

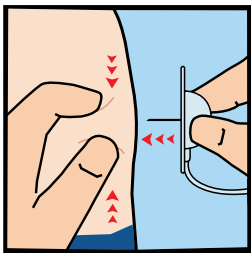

3. Stiskněte lehce kůži v oblasti vpichu a jehlu **neria™** zapíchněte kolmo do podkoží.

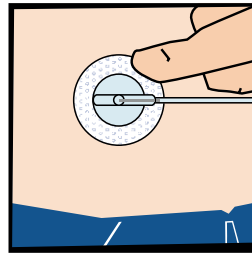

4. Flexibilní lepicí okraj jehly přitiskněte ke kůži. Přesvědčte se, že jehla je dobře fixována.



Infuzní set neria™ – úhrada infuzního setu:

Neria™ je od listopadu 2018 zařazena do Úhradové vyhlášky, z čehož vyplývá, že pojišťovny hradí pacientovi 75 % její ceny. To znamená, že při nákupu jehly **Neria™** uhradíte pouze 62 Kč za kus. Ročně máte nárok čerpat 156 ks těchto jehel. Tuto jehlu mohou předepisovat alergologové a lékaři pracující v centrech Klinické imunologie, které pravidelně navštěvujete.

Kód pojišť.	Název	Průměr jehly	Délka jehly	Délka hadičky	Počet v balení	Měs. limit	Výše úhrady	Doplatek
0142789	Podkožní INFUZNÍ SET pro imunoglobulíny neria™	G27	8 mm	80 cm	10 ks	13 ks	75 %	62 Kč/ks
0142788	Podkožní INFUZNÍ SET pro imunoglobulíny neria™	G27	10 mm	80 cm	10 ks	13 ks	75 %	62 Kč/ks