

Příslušenství pro ošetřování stomií pro každého stomika



me+



convatec

— forever caring —

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

JAK POUŽÍVAT PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství slouží k řádnému ošetření kůže v okolí stomie. Díky jeho používání šetříme naši kůži a zajistíme, že pomůcka bude dobře držet. Pokud chceme mít kůži v okolí stomie zdravou, stačí, když budeme dodržovat **4 jednoduché kroky** a můžeme si být jistí, že pomůcka bude vždy dobře držet a my se na ni budeme moci spolehnout.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Produkty zmíněné v tomto letáku patří mezi zdravotnické prostředky, čtěte pozorně příbalové letáky.



ODSTRANĚNÍ A OČIŠTĚNÍ

- Odstraňovače podložky
- Čisticí prostředky



VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE

- Adhezivní pasty
- Těsnící manžety



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU

- Zásypové pudry
- Ochranné krémy a filmy
- Pohlcovače pachu
- Prostředky zahušťovací



VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

- Pásky vyrovnávací
- Stomické přídržné a břišní pásy



ODSTRANĚNÍ POMŮCKY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY



ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY SION

Jemně odstraňuje zbytky adheziv (lepidel) z kůže, a tím snižuje diskomfort, který byste mohli při odstraňování pomůček cítit. Účinně rozpouští adheziva používaná v lékařských páskách nebo ve stomických podložkách. Napomáhá účinnému odstranění bez poškození kůže, což je pro stomiky velmi důležité. Při výměně pomůcky se jemně nadzvedne její okraj a ubrousek se vloží mezi kůži a lepicí vrstvu a za stálého potírání se pomůcka sejme. Pokožka se následně omyje teplou vodou a čisticí pěnou, a poté osuší.

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY SILIKONOVÉ

ESENTA™ ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL – UBROUSKY NEBO SPREJ



ESENTA™ je nepálivý odstraňovač náplasti, který neobsahuje alkohol ani parfémy. Je vyroben ze silikonové směsi, která nepálí, tudíž je velmi šetrný k pokožce. K dispozici je ve formě ubrousků anebo spreje. K odlepení pomůcky stačí jen pár stříknutí.



ČISTICÍ PĚNY

ČISTICÍ PĚNA STOMFOAM®

Speciálně vyvinutá pěna určená pro čištění kůže v okolí stomie. Snadno se aplikuje, při použití nestéká. Má neutrální pH a je zcela přírodní, bez barviv a konzervantů. Nezanedbává zbytky lepidla, které snižují přilnavost pomůcky. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.



VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE

ADHEZIVNÍ PASTY



PASTA VYROVNÁVACÍ STOMAHESIVE® 60 g

Používá se k vyrovnání kožních záhybů a nerovností. Je lepicí a aplikuje se přímo na kůži do prohlubní a záhybů k jejich vyrovnání nebo na spodní (lepicí) stranu pomůcky v okolí

předstříženého otvoru. Po vyprchání alkoholu, který obsahuje, pasta ztvrdne a vytvoří bariéru. Zabraňuje tak případnému podtékání a zlepšuje přilnavost pomůcky. Pastu aplikujte pomocí navlhčeného prstu.

TĚSNICÍ MANŽETY

TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE®

Slouží k vyplnění kožních záhybů a nerovností. Je elastický, velice dobře se tvaruje a upravuje dle individuálních potřeb. Je možné ho trhat a použít jen část nebo opět spojit či vrstvit tak, aby stomická pomůcka přilnula po celé své lepicí ploše. Těsnicí kroužek je vyroben z hmoty Stomahesive®. Snadno se odstraňuje zároveň se stomickou pomůckou. Po odstranění nezanechává téměř žádné zbytky hmoty na kůži. Absorbuje tekutinu a jemně gelovatí. Neobsahuje alkohol.



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU

ZÁSYPOVÉ PUDRY, OCHRANNÉ KRÉMY A FILMY



PUDR OCHRANNÝ STOMAHESIVE®

Pomáhá chránit kůži před nadměrnou vlhkostí, která může poškodit kůži. Používá se ve velmi tenké vrstvě na čistě omytou a osušenou pokožku. Lahvičku s pudrem držte vodorovně, asi 7–10 cm od těla a zmačkněte. Vytvoří se obláček, který pudr rovnoměrně rozptýlí na požadovaném místě. Před nalepením nové pomůcky odstraňte přebytečný pudr pomocí buničité vaty a poté můžete přetřít Ochranným filmem Sion nebo Esenta™ nebo rovnou nalepit pomůcku.

OCHRANNÝ FILM ESENTA™

Ochranný film Esenta™ vytvoří prodyšný film, který chrání kůži před agresivním střevním obsahem. Neobsahuje alkohol, tudíž je šetrný k pokožce a neštípe. Použití ho můžete buď ve formě ubrousků anebo spreje.



convatec

— forever caring —



OCHRANNÝ FILM SION

Ochranný film pomáhá chránit kůži před podrážděním způsobeným adhezivou/lepidly, obsaženými ve stomických pomůckách. Na kůži v okolí stomie zanechává jemný prodyšný film, který pomáhá snižovat tření, ke kterému dochází mezi pomůckou a kůží. Ochranný film zasychá velmi rychle a nezanechává žádné zbytky na kůži. Kůže je tedy po několika sekundách připravena na nalepení nové stomické pomůcky.

Aplikujte jej na čistě omytou a osušenou pokožku do okolí stomie před nasazením pomůcky a nechte zaschnout. Obsahuje alkohol.

POHLCOVAČE PACHU

POHLCOVAČ PACHU STOMODOR SPRAY

Efektivně odstraňuje nepříjemné pachy ze stomických sáčků a materiálů v okolí stomie. Při tuhé stolici se aplikuje přímo do sáčku před nasazením. Pro zvýšení efektu odstraňování pachu můžeme neředěný rozprašovat také do prostoru anebo na jakýkoliv materiál. Postupujte dle návodu na rozprašovači. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.



POHLCOVAČ PACHU STOMODOR DROPS

Efektivně odstraňuje pachy ze stomických sáčků. Promíchává se s obsahem sáčku, kde pohlcuje pachy přímo u zdroje a poté uzavře hladinu sáčku nepropustným filmem. Aplikujte do sáčku před nasazením 10–20 kapek. Dle potřeby je možné dávkování zvýšit. Prodlužuje a zefektivňuje funkci a životnost filtru.

PROSTŘEDKY ZAHUŠŤOVACÍ

GELUJÍCÍ SÁČKY DIAMONDS®

Slouží k zahuštění střevního obsahu a jsou určeny pro všechny stomiky s řídkou či vodnatou stolicí. Aplikace je velice jednoduchá. Sáček nerozbalujte, rovnou vhodte horním otvorem do sáčku (před nasazením) nebo aplikujte výpustí (po vypuštění obsahu a očištění výpustí). Jakmile se sáček dostane do styku s tekutinou, obal se rozpustí a jednotlivé granulky přemění tekutinu v gel. Sáčky obsahují složku ActiveOne™, jež je na bázi aktivního uhlí a spolehlivě pohlcuje zápach. Zároveň zabarví obsah do černá. Gelující sáčky zabraňují podtékání, nafukování sáčku a navíc pohlcují zápach. Balení obsahuje 100 ks gelujících sáčků.






VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

PÁSKY VYROVNÁVACÍ



VYROVNÁVACÍ PÁSKY ESENTA™

Pásky ESENTA™ zajistí dokonalou fixaci pomůcky ke kůži. Jsou vyrobeny z hydrokoloidní hmoty, která je šetrná ke kůži a zcela se přizpůsobí křivkám a pohybům těla. Výborně drží pomůcku i v kožních záhybech. Pásky jsou voděodolné, takže pomůcku skvěle chrání i při plavání. Lze stříhat dle potřeby a spolehlivě ochrání i před mechanickým poškozením – např. při nošení přídržného pásu.

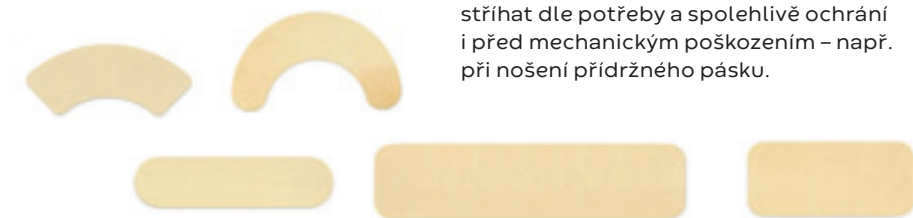

STOMICKÉ PÁSKY – PŘÍDRŽNÉ

PÁSEK

Pásek se doporučuje uživatelům konvexních pomůcek a všem dalším uživatelům, kteří používají sáčky vybavené poutky k uchycení pásu. Zvyšuje pocit jistoty a bezpečí a podporuje přilnavost pomůcky.



STOMICKÉ BŘIŠNÍ PÁSKY

STOMEX – KÝLNÍ PÁS

Břišní podpora Stomex je určena pacientům – stomikům, kteří trpí parastomální kýlou nebo i pacientům, kteří potřebují v pooperační fázi zpevnit břišní stěnu. Je vyroben z elastické, netěpivé tkaniny, která se velmi dobře přizpůsobuje tělesnému tvaru. Pomocí tří pásků ze suchých zipů jej lze optimálně přitáhnout a zabránit nežádoucímu pohybu pásu. Do pásu lze v místě stomie

vystříhnout otvor pro vyvedení stomického sáčku. Pás se přiloží na tělo, označí se místo pro vystřížení otvoru a otvor se vystříhne. Průměr vystříženého otvoru by měl být cca o 15 mm menší než je průměr stomie. Po vystřížení otvoru se pás na těle utáhne tak, aby neomezoval odvod stolice ze stomie do sáčku. Pás musí zpevnit oslabenou stěnu břišní bez omezení dýchání nebo pohybu. Přesný postup nasazení pásu naleznete na stránkách [convatec.cz](https://www.convatec.cz/pece-o-stomie/edukacni-vidoa/) (<https://www.convatec.cz/pece-o-stomie/edukacni-vidoa/>).

Odstraňovače stomické podložky – limit 292,32 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.04.01
5016531	Odstraňovač podložky Sion	ubrousky, 100 ks	584,34 *
Odstraňovače stomické podložky – silikonové – limit 487,20 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.04.02
5014529	Odstraňovač lepidel Esenta™	sprej, 50 ml	243,37
5014528	Odstraňovač lepidel Esenta™	ubrousky, 30 ks	486,95
Čistící roztoky, čistící pěny, tělové čistící ubrousky – limit 292,32 Kč/měs.			kategorie: 03.09.02.01
5014245	Čistící pěna StomFoam® Maxi	200 ml	292,32
5014244	Čistící pěna StomFoam® Mini	50 ml	146,14
Adhesivní pasty a gely – limit 1 ks/měsíc			kategorie: 03.08.01.03
5006803	Pasta vyrovnávací Stomahesive®	60 g	plně hrazeno
Těsnící manžety – limit 60 ks/měsíc			kategorie: 03.08.01.05
5006685	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, 10 ks	plně hrazeno
5006663	Těsnící kroužek Stomahesive®	48 mm, tenký, 10 ks	plně hrazeno
5006652	Těsnící kroužek Stomahesive®	98 mm, 10 ks	plně hrazeno
Destičky a roušky – limit: plná úhrada			kategorie: 03.08.01.04
5006851	Destička vyrovnávací Stomahesive®	10 x 10 cm, 5 ks	plně hrazeno
5006853	Destička vyrovnávací Stomahesive®	20 x 20 cm, 3 ks	plně hrazeno
Zásypové pudry, ochr. krémy a filmy, přídržné proužky – limit 974,4 Kč/měsíc			kategorie: 03.09.01.01
5016532	Ochranný film Sion	ubrousky, 100 ks	486,95
5014531	Film ochranný Esenta™	sprej, 50 ml	500,25
5014530	Film ochranný Esenta™	ubrousky, 30 ks	974,40
5006849	Pudr Stomahesive®	zásypový, 25 g	486,95
Prostředky zahušťovací – limit 350,56 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.03.01
5006635	Sáčky gelující Diamonds®	100 ks	1 051,81 ***
Pohlcovače pachu – limit 340,48 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.05.01
5002118	Pohlcovač pachu StomOdor Spray Maxi	210 ml	166,60
5002119	Pohlcovač pachu StomOdor Spray Mini	50 ml	128,66
5002120	Pohlcovač pachu StomOdor Drops	35 ml	166,60
Pásky vyrovnávací – limit 120 ks/měsíc			kategorie: 03.08.01.02
5016486	Vyrovňovací pásek Esenta™ půlkruh	3 x 15 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno
5016485	Vyrovňovací pásek Esenta™ čtvrtkruh	3 x 9 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5016484	Vyrovňovací pásek Esenta™ rovný tvar	3 x 11 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5005988	Vyrovňovací pásek Varimate rovný tvar	5 x 11 cm, hydrokoloidní, 30 ks	plně hrazeno
5005987	Vyrovňovací pásek Varimate rovný tvar	5 x 22 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno
Stomické pásky – maximálně 194,88 Kč včetně DPH/kus; max. 2 ks/rok			kategorie: 03.08.02.01
5006860	Pásek	přídržný, 1 ks	plně hrazeno
Stomické břišní pásy – limit 584,64 Kč včetně DPH/kus; max. 2 ks/rok			kategorie: 03.08.02.02
5005629	Břišní podpurný pás STOMEX 2700	1 ks	584,64 **

Úhrady a limity jsou včetně DPH, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, ** s doplatkem 395,00 *** plná úhrada 1 balení na 3 měsíce

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY U Radima

Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služby prodejen Zdravotnických potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti Convatec.

PRAHA: Vínohradská 60, 130 00 Praha 3, Tel.: 224 254 007
Dopravní spojení: metro trasa A, stanice Jiřího z Poděbrad, tramvaj č. 11
Otevřeno: Po–Pá: 9–12, 14–18 hodin



Od 1. 7. 2024 se bude výdejna nacházet na nové adrese:

Gemini – budova B – zadní strana budovy

Na Pankráci 1683/127 a 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4

Dopravní spojení: metro trasa C – stanice Pankrác



OSTRAVA: Českobratrská 63, 702 00 Ostrava, Tel.: 596 618 459
Dopravní spojení: autobus č. 37, 38, 50, trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českobratrská. Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hodin

zásilková služba
800 321 222

Zásilková služba

Poukaz potvrzený lékařem zašlete poštou na adresu: ConvaTec Česká republika s. r. o., P.O.BOX 142, 110 00 Praha 1. ePoukaz můžete zaslat na telefonní číslo 778 778 770 nebo na e-mail: epoukaz@convatec.cz. Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu v distribučním centru zboží připraví a společnost DPD vám je doveze až domů v diskrétním obalu. Doručení zdarma – veškeré náklady na poštovné a balné hradí společnost Convatec. Chráníme vaše soukromí.



Stomalinka®
convatec



program
pro stomiky



[www.facebook.com/
stomikradimconvatec](https://www.facebook.com/stomikradimconvatec)



[@stomikradim_convatec](https://www.instagram.com/stomikradim_convatec)



[@convatecceskairepublika](https://www.youtube.com/channel/UC...)

convatec.cz

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1