

## ESENTA™ nepálivý ochranný film ve spreji

Základní kroky pro jednoduché použití:



### První krok

Před použitím dobře protřepejte.  
Pokožku očistěte a osušte.



### Snadná aplikace

Ze vzdálenosti asi 10 cm kůži  
rovnoměrně postříkejte.



### Zkontrolujte, zda je kůže suchá

Ujistěte se, že je kůže zcela suchá, než na ni  
začnete lepit stomické pomůcky.




### Aplikujte opakovaně

Pro dokonalou ochranu používejte  
Ochranný film ESENTA™ při každé výměně  
pomůcek. Ochranný film ESENTA™  
se opakovaným použitím na pokožce  
nevrství.



## ESENTA™ ubrousky s nepálivým ochranným filmem

Základní kroky pro jednoduché použití:

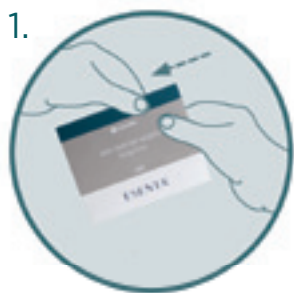

### První krok

Pokožku očistěte a osušte. Natrhnutím otevřete balení ubrousku a ubrousek vyjměte.



### Snadná aplikace

Kůži lehce ubrouskem otřete a nechte zaschnout.



### Zkontrolujte, zda je kůže suchá

Ujistěte se, že je kůže zcela suchá, než na ni začnete lepit stomické pomůcky.



### Aplikujte opakovaně

Pro dokonalou ochranu používejte Ochranný film ESENTA™ při každé výměně pomůcek. Opětovná aplikace se doporučuje každých 12 až 72 hodin v závislosti na stavu pokožky. Film ESENTA™ se opakovaným použitím na pokožce nevrství.



Více se dozvíte na [www.convatec.cz](http://www.convatec.cz) nebo nás můžete kontaktovat na naší bezplatné StomaLince® 800 122 111.



Podrobné informace naleznete v příbalovém letáku.