

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro ošetřování stomií



me+

POMÁHÁME TVOŘIT NOVOU CESTU ŽIVOTEM
stomickými výrobky, podporou a kompletní péčí

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
 Produkty zmíněné v tomto letáku patří mezi zdravotnické prostředky, čtěte pozorně příbalový leták.

JAK POUŽÍVAT PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství slouží k řádnému ošetření kůže v okolí stomie. Díky jeho používání šetříme naši kůži a zajistíme, že pomůcka bude dobře držet. Pokud chceme mít kůži v okolí stomie zdravou, stačí, když budeme dodržovat **4 jednoduché kroky** a můžeme si být jistí, že pomůcka bude vždy dobře držet a my se na ni budeme moci spolehnout.



ODSTRANĚNÍ A OČIŠTĚNÍ



- Odstraňovače podložky
- Čisticí prostředky



VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE

- Adhezivní pasty
- Těsnící manžety



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU

- Zásypové pudry
- Ochranné krémy a filmy
- Pohlcovače pachu
- Prostředky zahušťovací



VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

- Pásky vyrovnávací
- Stomické přídržné a břišní pásy



ODSTRANĚNÍ POMŮCKY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY



ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY CONVACARE®

Odstraňovač podložky napomáhá k jednoduchému a pohodlnému sejmutí pomůcky. Slouží zároveň k omytí kůže od případných zbytků želatiny a k regeneraci pokožky. Je nedráždivý a nevysušuje kůži. Při výměně pomůcky se jemně nadzvedne její okraj a ubrousek se vloží mezi kůži a lepicí vrstvu a za stálého potírání se pomůcka sejme. Pokožka se následně omyje teplou vodou a mýdlem a osuší.

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY SILIKONOVÉ ESENTA™ ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL – UBROUSKY NEBO SPREJ



Esenta™ je nepálivý odstraňovač náplasti, který neobsahuje alkohol ani parfémy. Je vyroben ze silikonové směsi, která nepálí, tudíž je velmi šetrný k pokožce. K dispozici je ve formě ubrousků anebo spreje. Sprej se používá vždy ve svislé poloze a k odlepení pomůcky stačí jen pár stříknutí.



ČISTICÍ PĚNY ČISTICÍ PĚNA STOMFOAM®


Speciálně vyvinutá pěna určená pro čištění kůže v okolí stomie. Snadno se aplikuje, při použití nestéká. Má neutrální pH a je zcela přírodní, bez barviv a konzervantů. Nezanechává zbytky lepidla, které snižují přilnavost pomůcky. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.



VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE ADHEZIVNÍ PASTY

PASTA VYPLŇOVACÍ STOMAHESIVE® 30 g

Tato pasta se používá až po nalepení podložky. Je určena pro vyplnění mezer mezi podložkou a okolím stomie. Pasta nelepí, ale zabraňuje podtékání, a tím i chrání pokožku. Je mastná, proto ji neaplikujte pod pomůcku! Výrazně by se snížila její lepivost.

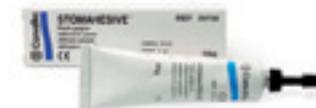



PASTA VYROVNÁVACÍ STOMAHESIVE® 60 g

Používá se k vyrovnání kožních záhybů a nerovností. Je lepkavá a aplikuje se přímo na kůži do prohlubní a záhybů k jejich vyrovnání nebo na spodní (lepící) stranu pomůcky v okolí předstříženého otvoru. Po vypřechání alkoholu, který obsahuje, pasta ztvdne a vytvoří bariéru. Zabraňuje tak případnému podtékání a zlepšuje přilnavost pomůcky. Pastu aplikujte pomocí navlhčeného prstu.

TĚSNICÍ MANŽETY

TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE®

Slouží k vyplnění kožních záhybů a nerovností. Je elastický, velice dobře se tvaruje a upravuje dle individuálních potřeb. Je možné ho trhat a použít jen část nebo opět spojit či vrstvit tak, aby stomická pomůcka přilnula po celé své lepící ploše. Těsnicí kroužek je vyroben z hmoty Stomahesive®, která chrání kůži a podporuje hojení. Snadno se odstraňuje zároveň se stomickou pomůckou. Po odstranění nezanechává zbytky hmoty na kůži. Absorbuje tekutinu a jemně gelovatí. Neobsahuje alkohol.



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU ZÁSYPOVÉ PUDRY, OCHRANNÉ KRÉMY A FILMY

PUDR OCHRANNÝ STOMAHESIVE®

Slouží ke zklidnění podrážděné pokožky pod pomůckou. Používá se ve velmi tenké vrstvě na čistě omytou a osušenou pokožku, zejména je-li kůže v okolí stomie rozbolavělá nebo došlo-li k jejímu podráždění v důsledku vniknutí stolice nebo moči pod pomůcku. Lahvičku s pudrem držte vodorovně, asi 7–10 cm od těla a zmáčkněte. Vytvoří se obláček, který pudr rovnoměrně rozptýlí na požadovaném místě. Před nalepením nové pomůcky odstraňte přebytečný pudr pomocí buničité vaty a poté můžete přetřít Ochranným filmem ConvaCare® nebo Esenta™ nebo rovnou nalepit pomůcku.



OCHRANNÝ FILM ESENTA™

Ochranný film Esenta™ vytvoří prodyšný film, který chrání kůži před agresivním střečním obsahem. Neobsahuje alkohol, tudíž je šetrný k pokožce a neštípe. Použít ho můžete buď ve formě ubrousků anebo spreje.



OCHRANNÝ FILM CONVACARE®

Ubrousky jsou nasyceny látkou, která vytváří mezi pokožkou a pomůckou ochranný film, chrání pokožku před podrážděním, odřením nebo tvorbou puchýřků. Zároveň může napomoci i zlepšení přilnavosti pomůcky. Ochranný film umožňuje dýchání pokožky, rychle zasychá, je pružný a neloupe se. Aplikujte jej na čistě omytou a osušenou pokožku do okolí stomie před nasazením pomůcky a nechte zaschnout. Pokud přípravek aplikujete na podrážděnou pokožku, může se přechodně objevit pocit pálení či štípání.

POHLCOVAČE PACHU

POHLCOVAČ PACHU STOMODOR® SPRAY

Efektivně odstraňuje nepříjemné pachy ze stomických sáčků a materiálů v okolí stomie. Při tuhé stolici se aplikuje přímo do sáčku před nasazením. Pro zvýšení efektu odstraňování pachu můžeme neředěný rozprašovat také do prostoru anebo na jakýkoliv materiál. Postupujte dle návodu na rozprašovači. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.



POHLCOVAČ PACHU STOMODOR® DROPS

Efektivně odstraňuje pachy ze stomických sáčků. Promíchává se s obsahem sáčku, kde pohlcuje pachy přímo u zdroje a poté uzavře hladinu sáčku nepropustným filmem. Aplikujte do sáčku před nasazením 10–20 kapek. Dle potřeby je možné dávkování zvýšit. Prodlužuje a zefektivňuje funkci a životnost filtru.



PROSTŘEDKY ZAHUŠŤOVACÍ

GELUJÍCÍ SÁČKY DIAMONDS®

Slouží k zahuštění střečního obsahu a jsou určeny pro všechny stomiky s řídkou či vodnatou stolicí. Aplikace je velice jednoduchá. Sáček nerozbalujte, rovnou vhodte horním otvorem do sáčku (před nasazením) nebo aplikujte výpustí (po vypuštění obsahu a očištění výpustí). Jakmile se sáček dostane do styku s tekutinou, obal se rozpustí a jednotlivé granulky přemění tekutinu v gel. Sáčky obsahují složku ActiveOne™, jež je na bázi aktivního uhlí a spolehlivě pohlcuje zápach. Zároveň zabarví obsah do černa. Gelující sáčky zabraňují podtékání, nafukování sáčku a navíc pohlcují zápach. Balení obsahuje 100 ks gelujících sáčků.





VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

PÁSKY VYROVNÁVACÍ



VYROVNÁVACÍ PÁSKY VARIMATE®

Pásky Varimate® zajistí dokonalou fixaci pomůcky ke kůži. Jsou vyrobeny z přírodní hydrokoloidní hmoty, která nedráždí pokožku a zcela se přizpůsobí křivkám a pohybům těla. Výborně drží pomůcku i v kožních záhybech. Pásky jsou voděodolné, takže pomůcku skvěle chrání i při plavání. Lze je stříhat dle potřeby a spolehlivě ochrání i před mechanickým poškozením – např. při nošení přídržného pásu.



STOMICKÉ PÁSKY – PŘÍDRŽNÉ

PÁSEK

Pásek je určen uživatelům dvoudílného systému Natura®, jednodílného urostomického sáčku Esteem® a jednodílného sáčku Esteem®+ konvexního. Je vhodný při zvýšené fyzické námaze nebo jako prostředek pro zvýšení ochrany a pocitu jistoty. Připevňuje se na boční očka přírubového kroužku sáčku Natura®+ nebo očka lepicí části sáčku Esteem®.



STOMICKÉ BŘIŠNÍ PÁSY

STOMEX – KÝLNÍ PÁS

Břišní podpora Stomex je určena pacientům – stomikům, kteří trpí parastomální kýlou nebo i pacientům, kteří potřebují v pooperační fázi zpevnit břišní stěnu. Je vyroben z elastické, netřepivé tkaniny, která se velmi dobře přizpůsobuje tělesnému tvaru. Pomocí tří pásků ze suchých zipů jej lze optimálně přitáhnout a zabránit nežádoucímu pohybu pásu. Do pásu lze v místě stomie vystřihnout otvor pro vyve-

dení stomického sáčku. Pás se přiloží na tělo, označí se místo pro vystřížení otvoru a otvor se vystříhne. Průměr vystříženého otvoru by měl být cca o 15 mm menší než je průměr stomie. Po vystřížení otvoru se pás na těle utáhne tak, aby neomezoval odvod stolice ze stomie do sáčku. Pás musí zpevnit oslabenou stěnu břišní bez omezení dýchání nebo pohybu.

KÓD SÚKL	NÁZEV	DOPLNĚK	ÚHRADA ZDR. POJIŠŤOVNY
----------	-------	---------	------------------------

Odstraňovače stomické podložky – limit 300,15 Kč/měsíc kategorie: 03.08.04.01
 5006778 Odstraňovač podložky ConvaCare® ubrousky, 100 ks 600,00 *

Odstraňovače lepidel – silikonové – limit 500,25 Kč/měsíc kategorie: 03.08.04.02
 5014529 Odstraňovač lepidel Esenta™ sprej, 50 ml 250,12
 5014528 Odstraňovač lepidel Esenta™ ubrousky, 30 ks 500,01

Čistící roztoky, čistící pěny, tělové čistící ubrousky – limit 300,15 Kč/měsíc kategorie: 03.09.02.01
 5014245 Čistící pěna StomFoam® Maxi 200 ml 300,15
 5014244 Čistící pěna StomFoam® Mini 50 ml 156,06

Pásky vyrovnávací – limit 120 ks/měsíc kategorie: 03.08.01.02
 5014137 Vyrovnávací pásek Varimate® půlkruh 4 x 14 cm, hydrokoloidní, 20 ks plně hrazeno
 5005989 Vyrovnávací pásek Varimate® čtvrtkruh 3 x 9 cm, hydrokoloidní, 60 ks plně hrazeno
 5005990 Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar 3 x 11 cm, hydrokoloidní, 60 ks plně hrazeno
 5005988 Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar 5 x 11 cm, hydrokoloidní, 30 ks plně hrazeno
 5005987 Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar 5 x 22 cm, hydrokoloidní, 20 ks plně hrazeno

Adhezivní pasty a gely – limit 1 ks/měsíc kategorie: 03.08.01.02
 5006795 Pasta vyplňovací Stomahesive® 30 g plně hrazeno
 5006803 Pasta vyrovnávací Stomahesive® 60 g plně hrazeno

Těsnicí manžety – limit 60 ks/měsíc kategorie: 03.08.01.05
 5006685 Těsnicí kroužek Stomahesive® 48 mm, 10 ks plně hrazeno
 5006663 Těsnicí kroužek Stomahesive® 48 mm, tenký, 10 ks plně hrazeno
 5006652 Těsnicí kroužek Stomahesive® 98mm, 10 ks plně hrazeno

Zásypové pudry, ochranné krémy a filmy, přídržné proužky – limit 1 050 Kč/měsíc kategorie: 03.09.01.01
 5006844 Film ochranný ConvaCare® ubrousky, 100 ks 500,01
 5014531 Film ochranný Esenta™ sprej, 50 ml 500,01
 5014530 Film ochranný Esenta™ ubrousky, 30 ks 1 000,00
 5006849 Pudr Stomahesive® zásyrový, 25 g 500,01

Destičky a roušky – limit: plná úhrada kategorie: 03.08.01.04
 5006851 Destička vyrovnávací Stomahesive® 10 x 10 cm, 5 ks plně hrazeno
 5006853 Destička vyrovnávací Stomahesive® 20 x 20 cm, 3 ks plně hrazeno

Stomické pásky – přídržné – limit 2 ks/rok kategorie: 03.08.02.01
 5006860 Pásek přídržný, 1 ks plně hrazeno

Stomické břišní pásy – limit 2 ks/rok kategorie: 03.08.02.02
 5005629 Břišní podpurný pás STOMEX 2700 1 ks 600,30 **

Prostředky zahušťovací – limit 359,95 Kč/měsíc kategorie: 03.08.03.01
 5006635 Sáčky gelující Diamonds® 100 ks 1079,99 ***

Pohlcovače pachu – limit 367,84 Kč/měsíc kategorie: 03.08.05.01
 5002118 Pohlcovač pachu StomOdor® Spray Maxi 210 ml 180,00
 5002119 Pohlcovač pachu StomOdor® Spray Mini 50 ml 139,01
 5002120 Pohlcovač pachu StomOdor® Drops 35 ml 180,00

Úhrady a limity jsou včetně DPH, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, ** s doplatkem 340,00 ***plná úhrada 1 balení na 3 měsíce

Zdravotnické potřeby

Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravotnických potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti ConvaTec.



ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
U RADIMA

PRAHA:

Vinohradská 60, 130 00 Praha 3,
Tel.: 224 254 007

Dopravní spojení:

metro trasa A
stanice Jiřího z Poděbrad,
tramvaj č. 11

Otevřeno: Po–Pá: 9–12, 14–18 hodin

OSTRAVA:

Českobratrská 63, 702 00 Ostrava,
Tel.: 596 618 459

Dopravní spojení:

autobus č. 37, 38, 50,
trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českobratrská

Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hodin

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

Zásilková služba

Poukaz potvrzený lékařem zašlete poštou na adresu: ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1. Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu v distribučním centru zboží připraví a společnost DPD vám je doveze až domů v diskretním obalu. Doručení zdarma – veškeré náklady na poštovné a balné hradí společnost ConvaTec. Chráníme vaše soukromí.

StomaLinka[®]
ConvaTec

800 122 111
pro volajícího zdarma



PROGRAM PRO STOMIKY

WWW
convatec.cz



@stomikradim_convatec



www.facebook.com/
stomikradim-convatec