

ESTEEM™+ tvarovatelný

POMÁHÁME TVOŘIT
NOVOU CESTU ŽIVOTEM
výrobky, podporou
a kompletní péčí

me+



JE ČAS NA TVAROVÁNÍ

Již žádné podtékání a kožní komplikace



ConvaTec

Péče o stomie

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

JAK POUŽÍVAT JEDNODÍLNÝ SYSTÉM ESTEEM™+ TVAROVATELNÝ

1. Postup tvarování a nasazení

Mějte na paměti, že před nalepením pomůcky musí být kůže čistá, suchá a v případě potřeby oholená.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
 Produkty zmíněné v tomto letáku patří mezi zdravotnické prostředky, čtěte pozorně příbalový leták.




Oddělte tvarovatelnou část od sáčku.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 1. Odkryje se vám tvarovatelná část.



Rolujte a tvarujte otvor do požadovaného tvaru a velikosti, které budou odpovídat vaší stomii. **Hmotu nenatahujte, nestříhejte.**

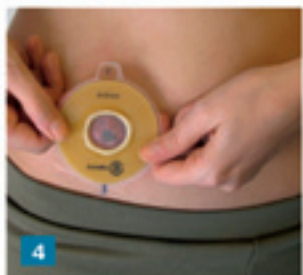

Zkontrolujte vytvarovaný otvor přiložením ke stomii.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 2.




Přilepte na kůži tak, aby vytvarovaný otvor jemně a přitom těsně obemknul stomii. Přitlačte hmotu, aby dobře přilnula ke kůži. Kůže před nalepením musí být čistá, suchá a v případě potřeby oholená.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 3.



Odstraňte ochrannou fólii z lepicí části stomického sáčku.

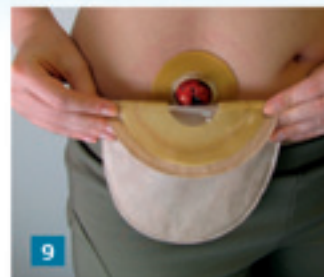

Sáček přehněte zhruba v polovině a začněte nalepovat od dolní poloviny směrem nahoru.



Sáček přitiskněte k tělu a přidržte po dobu cca 30 sekund, aby stomická pomůcka dobře přilnula po celé ploše.



Pomocí okénka zkontrolujte správné nalepení pomůcky.

KOMBINUJE VÝHODY TVAROVATELNÉ TECHNOLOGIE...

- pružná manžetka se přizpůsobí tvaru a velikosti stomie
- eliminace podtékání
- hmota se tvaruje, nemusí se stříhat nůžkami
- zdravější kůže v okolí stomie



...A JEDNODÍLNÉHO SYSTÉMU

- diskrétní
- flexibilní
- příjemný
- jednoduchý



Esteem™+ tvarovatelný je určen **pacientům s kolostomií nebo ileostomií, jejichž stomie vyčnívá alespoň 0,5 cm nad úroveň břišní stěny.**

KÓD SÚKL NÁZEV

DOPLNĚK

Sáčky Esteem™+ tvarovatelné uzavřené

5006765 Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený
 5006682 Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený
 5006707 Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený

20–30 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
 30–40 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
 40–50 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks

2. Postup uzavření a vypouštění výpusti InvisiClose® s chlopní



Výpust InvisiClose® s chlopní.



Výpust přehněte přes béžový výztužný proužek a otočte 3x směrem k chlopní.



Suchý zip chlopně přitiskněte na suchý zip výpusti.



Oba zipy k sobě dobře přitiskněte, aby byla výpust důkladně uzavřena. Správné zacvaknutí uslyšíte i ucítíte v prstech.



Poté vsuňte oba palce do okrajů reverzní kapsičky a ohněte ji, aby byla výpust schovaná.



Zajistíte tak absolutní bezpečnost i komfort zmenšeného sáčku.



Přehnutím nazpět uvolníte uzavřenou výpust z reverzní kapsičky.



Pomocí chlopně od sebe oddělíte suché zipy a výpust uvolníte. Stisknutím výztužných proužků proti sobě výpust rozevřete a sáček vyprázdníte. Výpust důkladně očistěte a osušte. Před opětovným uzavřením musí být výpust čistá a suchá.

KÓD SÚKL NÁZEV

DOPLŇEK

Sáčky Esteem™ + tvarovatelné výpustné

5006702	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	20–30 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
5006708	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	20–30 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
5006701	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	30–40 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
5006762	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	30–40 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
5006696	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	40–50 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
5006710	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný	40–50 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks

KONEČNĚ V POHODLÍ BALÍČEK DISKRÉTNĚ AŽ K VAŠIM DVEŘÍM

Pro stomiky děláme vše.
Postaráme se o vás od první objednávky
až po diskretní doručení balíčku
na vaši adresu.

ZÁSILKOVÁ  SLUŽBA



Poukaz potvrzený lékařem zašlete poštou na adresu:
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1.
Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu v distribučním centru
zboží připraví a společnost DPD vám je doveze až domů v diskretním obalu.
Doručení zdarma – veškeré náklady na poštovné a balné
hradí společnost ConvaTec. Chráníme vaše soukromí.

 ConvaTec

Zdravotnické potřeby

Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravotnických potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti ConvaTec.



ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
U RADIMA

PRAHA:

Vinohradská 60, 130 00 Praha 3,
Tel.: 224 254 007

Dopravní spojení:

metro trasa A
stanice Jiřího z Poděbrad,
tramvaj č. 11

Otevřeno: Po–Pá: 9–12, 14–18 hodin

OSTRAVA:

Českoobrátská 63, 702 00 Ostrava,
Tel.: 596 618 459

Dopravní spojení:

autobus č. 37, 38, 50,
trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českoobrátská

Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hodin

StomaLinka  **ConvaTec**

800 122 111
pro volajícího zdarma



PROGRAM PRO STOMIKY



[www.facebook.com/
stomikradim-convatec](https://www.facebook.com/stomikradim-convatec)

WWW
convatec.cz

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):

ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1