

ESTEEM™ + tvarovatelný

POMÁHÁME TVOŘIT
NOVOU CESTU ŽIVOTEM
výrobky, podporou
a kompletní péčí

me+



JE ČAS NA TVAROVÁNÍ

Již žádné podtékání a kožní komplikace



ConvaTec

Péče o stomie

JAK POUŽÍVAT JEDNODÍLNÝ SYSTÉM ESTEEM™ + TVAROVATELNÝ

1. Postup tvarování a nasazení


Mějte na paměti, že před nalepením pomůcky musí být kůže čistá, suchá a v případě potřeby oholená.




Oddělte tvarovatelnou část od sáčku.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 1. Odkryje se vám tvarovatelná část.

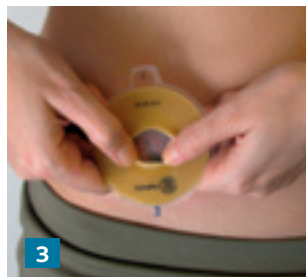

Rolujte a tvarujte otvor do požadovaného tvaru a velikosti, které budou odpovídat vaší stomii. **Hmotu nenatahujte, nestříhejte.**

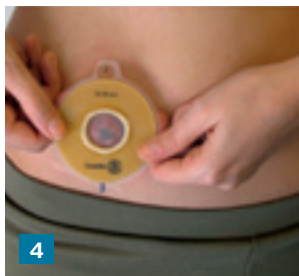

Zkontrolujte vytvarovaný otvor přiložením ke stomii.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 2.



Přilepte na kůži tak, aby vytvarovaný otvor jemně a přitom těsně obemknul stomii. Přitlačte hmotu, aby dobře přilnula ke kůži. Kůže před nalepením musí být čistá, suchá a v případě potřeby oholená.



Odstraňte ochrannou fólii s číslem 3.



Odstraňte ochrannou fólii z lepicí části stomického sáčku.




9

Sáček přehněte zhruba v polovině a začněte nalepovat od dolní poloviny směrem nahoru.



10

Sáček přitiskněte k tělu a přidržte po dobu cca 30 sekund, aby stomická pomůcka dobře přilnula po celé ploše.

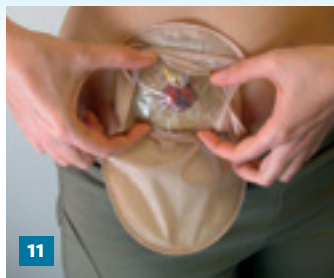

11

Pomocí okénka zkontrolujte správné nalepení pomůcky.

KOMBINUJE VÝHODY TVAROVATELNÉ TECHNOLOGIE...

- pružná manžetka se přizpůsobí tvaru a velikosti stomie ■ eliminace podtékání
- hmota se tvaruje, nemusí se stříhat nůžkami ■ zdravější kůže v okolí stomie



...A JEDNODÍLNÉHO SYSTÉMU

- diskrétní ■ flexibilní ■ příjemný
- jednoduchý



Esteem™+ tvarovatelný je určen **pacientům s kolostomií nebo ileostomií, jejichž stomie vyčnívá alespoň 0,5 cm nad úroveň břišní stěny.**

KÓD SÚKL NÁZEV

DOPLNĚK

Sáčky Esteem™+ tvarovatelné uzavřené

5006765	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený
5006682	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený
5006707	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný uzavřený

20–30 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
30–40 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
40–50 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks



3. Postup uzavření a vypouštění výpusti InvisiClose® s chlopní



Výpust InvisiClose® s chlopní.



Výpust přehněte přes běžový výztužný proužek a otočte 3x směrem k chlopní.



Suchý zip chlopně přitiskněte na suchý zip výpusti.



Oba zipy k sobě dobře přitiskněte, aby byla výpust důkladně uzavřená. Správné zacvaknutí uslyšíte i ucítíte v prstech.



Poté vsuňte oba palce do okrajů reverzní kapsičky a ohněte ji, aby byla výpust schovaná.



Zajistíte tak absolutní bezpečnost i komfort zmenšeného sáčku.



Přehnutím nazpět uvolníte uzavřenou výpust z reverzní kapsičky.



Pomocí chlopně od sebe oddělíte suché zipy a výpust uvolníte. Stisknutím výztužných proužků proti sobě výpust rozevřete a sáček vyprázdníte. Výpust důkladně očistíte a osušíte. Před opětovným uzavřením musí být výpust čistá a suchá.

KÓD SÚKL NÁZEV

DOPLNĚK

Sáčky Esteem™ + tvarovatelné výpustné

5006702	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný
5006708	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný
5006701	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný
5006762	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný
5006696	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný
5006710	Sáček 1D Esteem+ tvarovatelný výpustný

20–30 mm, běžový, standard, filtr, 10 ks
20–30 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
30–40 mm, běžový, standard, filtr, 10 ks
30–40 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
40–50 mm, běžový, standard, filtr, 10 ks
40–50 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks

KONEČNĚ V POHODLÍ

BALÍČEK DISKRÉTNĚ AŽ K VAŠIM DVEŘÍM

Pro stomiky děláme vše.
Postaráme se o vás od první objednávky
až po diskretní doručení balíčku
na vaši adresu.

ZÁSILKOVÁ  SLUŽBA



Poukaz potvrzený lékařem zašlete poštou na adresu:
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1.
Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu v distribučním centru
zboží připraví a společnost DPD vám je doveze až domů v diskretním obalu.
Doručení zdarma – veškeré náklady na poštovné a balné
hradí společnost ConvaTec. Chráníme vaše soukromí.

 **ConvaTec**

Zdravotnické potřeby

Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravotnických potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti ConvaTec.



**ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
U RADIMA**

PRAHA:

Vinohradská 60, 130 00 Praha 3,
Tel.: 224 254 007

Dopravní spojení:

metro trasa A
stanice Jiřího z Poděbrad,
tramvaj č. 11

Otevřeno: Po–Pá: 9–12, 14–18 hodin

OSTRAVA:

Českobratrská 63, 702 00 Ostrava,
Tel.: 596 618 459

Dopravní spojení:

autobus č. 37, 38, 50,
trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českobratrská

Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hodin

StomaLinka



ConvaTec

800 122 111

pro volajícího zdarma



PROGRAM PRO STOMIKY



www.facebook.com/stomikradim

**www
convatec.cz**

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):

ConvaTec Česká republika s. r. o., Olívova 2096/4, 110 00 Praha 1