

Radim

výrobky & služby

02
21



**StomaLinka®
ConvaTec**



**Webové
stránky**



Webináře



**Facebook Stomik
Radim - ConvaTec**



Časopis Radim



**Vzorky pomůcek
zdarma**



Zásilková služba



**Výdejny
U Radima**



**Cvičení
pro stomiky**



**Agentura
domácí péče
Lastrona**



**Stomická
centra**

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

30 LET


ConvaTec
ČESKÁ REPUBLIKA


ESTEEM™+

NATURA™+

HMOTA
STOMAHESIVE®

TVAROVATELNÁ TECHNOLOGIE®

STOMALINKA® WEBOVÉ STRÁNKY

WEBINÁŘE FACEBOOK EDUKAČNÍ VIDEA EDUKAČNÍ BROŽURY

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA LASTRONA STOMICKÁ CENTRA

SETKÁNÍ STOMIKŮ® ČASOPIS RADIM

POMÁHÁME TVOŘIT NOVOU CESTU ŽIVOTEM
stomickými výrobky, podporou a kompletní péčí

HISTORIE SPOLEČNOSTI CONVATEC V ČESKU

STĚŽEJNÍ MILNÍKY A ÚSPĚCHY, KTERÝCH JSME DÍKY VÁM DOSÁHLI

Letos slavíme 30 let působení na českém trhu. Kulaté narozeniny jsou pro nás vždy příležitostí poohlédnout se zpět, co se za ty roky událo a co se nám i vám společně podařilo.

1991

ZAČÍNÁME – 1. listopadu

vznikla společnost ConvaTec v České republice.



1992

Pomůcky společnosti ConvaTec až domů

Povolena zásilková služba, vůbec první podobné povolení subjektu zdravotní péče v tehdejší ČSFR, první výdejna s vlastními produkty, stomické pomůcky ConvaTec jako jediné zařazeny do historicky prvního číselníku VZP (září 1992).

1994

První počtení pro stomiky

Vychází časopis Radim a začínáte používat oblíbené příslušenství ConvaCare®.



1995

Výdejny „U Radima“


Pro stomické pomůcky si můžete dojít do výdejen „U Radima“.



1995

Bezplatná informační linka

pro stomiky 0606/22 111

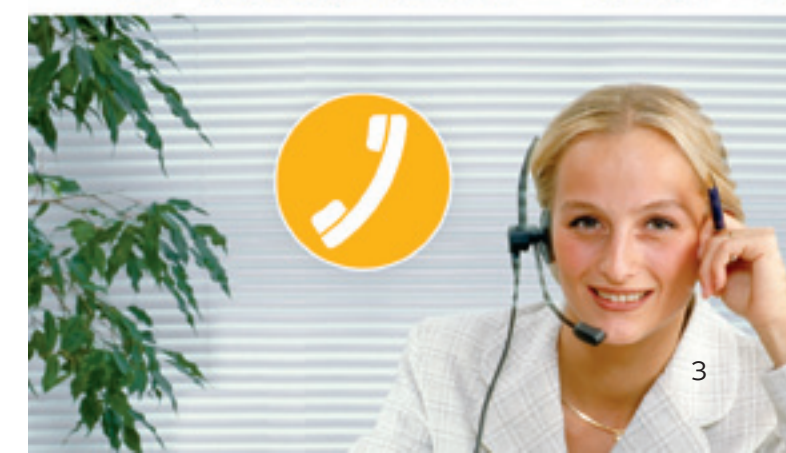

1998

Nový dvoudílný systém Combihesive® 2S

Nahrazuje původní systém Combihesive® a je tu první konvexní podložka.

1999

Nový jednodílný systém Naturess

Uzavřený i výpustný (nahradil Stomadress®), gel Ile-Sorb (k zahuštění řídké stolice v sáčku).

2001

Nový jednodílný systém Esteem®

Na trh přichází moderní jednodílný systém Esteem®, zákaznická linka dostává svůj název StomaLinka® a nové telefonní číslo 800 122 111, vzniká vzdělávací program pro zdravotníky ConvaTec Academy a ConvaTec slaví 10 let.

2002

GOLD CARD SERVICE

Vzniká program pro stomasestry i stomiky.

2003

Adhezní technologie Esteem synergy®

Představujeme nový stomický systém – adhezní technologii Esteem synergy®, začínáme se scházet na Setkáních stomiků®.

2004

Webové stránky a sáčky InvisiClose®

Odpovědi na vaše dotazy najdete i na internetu – máme vlastní webové stránky www.convatec.cz, přicházíme s novým sáčkem InvisiClose® – uzavírání pomocí suchých zipů.



StomaLinka®
ConvaTec

800 122 111
pro volání zdarma

ConvaTec
ACADEMY



Little Ones™

**Nová, tvarovatelná technologie**

Přinášíme unikátní tvarovatelnou technologii na dvoudílném systému na konvexní podložce.

Dětská řada Little Once®

I miminka mohou mít stomii, rozšiřujeme naše portfolio o produkty pro nejmenší – Little Ones®.

Nová tvarovatelná podložka

Na trh přichází další tvarovatelná podložka – tentokrát plochá tvarovatelná, rozšiřujeme řadu příslušenství o tři produkty Sensi-Care®.

Nové Pohlcovače pachu ALP


Začíná spolupráce s firmou ALP ecology s.r.o., do nabídky společnosti ConvaTec je zařazen Pohlcovač pachu ALP.

Natura® nahrazuje Combihesive® 2S

Něco končí a jiné začíná – na trh uvádíme novou dvoudílnou pomůcku Natura® a ukončujeme prodej předešlého systému Combihesive® 2S.

1. bezsáčková pomůcka pro stomiky

Pro zájem o něco revolučního v oblasti stomických pomůcek přichází na trh bezsáčková pomůcka Vitala®.

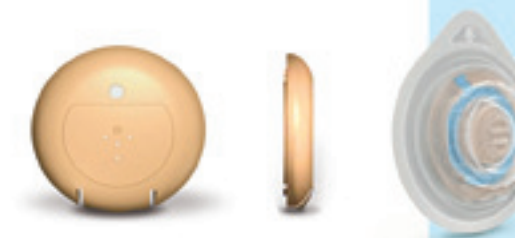

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nový projekt Velké návraty® v ČR

První vyhlášení Velkých návratů®, ConvaTec slaví 20. let v České republice.



2012

Nový jednodílný konvexní sáček Esteem®+

Přichází celé nové + (plus) portfolio a nový jednodílný konvexní sáček Esteem®+. Vzniká specializovaná agentura domácí péče Lastrona, se kterou hned začínáme spolupracovat.



2013

Nová silikonová alternativa ke ConvaCare®

Přichází silikonová alternativa k produktům ConvaCare® a ještě něco navíc – Niltac®, Silesse® a gelující sáčky Diamonds®.

2014

Těsnicí kroužky Stomahesive®

Novinka na nerovnosti v okolí stomie.

2015

Tvarovatelný Esteem®+ a Natura® s harmonikovým kroužkem

Uvádíme na trh další unikátní sáček, tentokrát se jedná o tvarovatelnou technologii na jednodílném sáčku Esteem®+ a představujeme tvarovatelnou podložku Natura® s harmonikovým kroužkem.

2016

25 let ConvaTecu na českém trhu

Díky vám slavíme 25 let na českém trhu. Inovujeme naši výpusť InvisiClose® a přinášíme nový a ještě účinnější pohlcovač pachů StomOdor®.

**SLAVÍME 25 LET
ÚSPĚCHŮ A POMOCI**

Díky vám!



ConvaTec



[www.facebook.com/
stomikradim-convatec](https://www.facebook.com/stomikradim-convatec)



2017

Esteem™+ Flex Convex a Varimate®

Na podzim přicházíme s konvexní stříhatelnou podložkou s harmonikovým kroužkem. Rozšiřujeme portfolio jednodílných sáčků o středně konvexní sáčky Esteem™+ Flex Convex a v neposlední řadě přinášíme novinku v příslušenství – dlouho očekávané vyrovnávací pásy Varimate®. Nově nás najdete i na Facebooku.

2018

S Radimem v kondici

Unikátní cvičební program pro stomiky S Radimem v kondici je tu. Cvičení zaměřené na snížení rizika vzniku parastomální kýly, na rychlejší rekonvalescenci po operaci a na to, jak být se stomií fit.

2020

Nové sáčky ConvaTec s okénkem

Představujeme nové sáčky Esteem™+ Soft Convex, které dokáží vyřešit celou řadu komplikací a přinášíme sáčky s okénkem – Kouknu, vidím a jsem OK. Je světová pandemie, není možné pořádat Setkání stomiků®, a proto přicházíme s přednáškami na internetu – webináři.

Kouknu, vidím a jsem OK
NOVÉ SÁČKY CONVATEC

**Slavíme třicáté výročí společnosti**

K třicátinám si nadělujeme nový rozměr vyrovnávacích pásek Varimate® – půlkruh a novou čisticí pěnu StomFoam®, na kterou jste se moc těšili.

Vážíme si toho, že jste stále s námi.

Bc. Jana Handlová,
šéfredaktorka

POMÁHAT
nás baví

Novinky letošního roku – podzim plný příslušenství

Milí čtenáři, letošní podzim byl v ConvaTecu ve jménu představování nových produktů z řady příslušenství. Vaše zpětné vazby jsou velmi pozitivní. To nás samozřejmě těší a žene dál. Ale pojďme popořadě.

Vyrovnávací pásy Varimate®

Vyrovnávací pásy Varimate® máme v našem portfoliu již nějaký rok a získaly si u vás velikou oblibu i díky materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Jedná se o tzv. hydrokoloid – přírodní materiál, který je velmi jemný ke kůži, a pokud je kůže poraněná, dokáže ji vyhojit. Právě vyrovnávací pásy Varimate® jsou díky svému materiálu přijímány velmi pozitivně a alergické reakce v podobě začervenání či svědění pokožky jsou eliminovány na minimum.

Vyrovnávací pásy obecně jsou určeny k tomu, aby se zvětšila lepicí plocha pomůcky a pomůcka ještě lépe držela na těle.

V naší nabídce jste mohli až do letošního září najít varianty rovných pásů různých rozměrů a dále pásy ve tvaru čtvrtkruhu, které se vám dobře aplikovaly právě díky tomu, že jsou menší a dobře se s nimi pracuje. Nicméně setkávali jsme se i se zpětnou vazbou, že byste měli zájem o pásy Varimate® ve tvaru půlkruhu a to i z toho důvodu, že s nimi lépe vystačíte v rámci měsíčního limitu, který je 120 ks pásů bez ohledu na velikost.

Společnost ConvaTec vyslyšela přání vás – stomiků i stomasester a vyrobila přímo pro vás nový tvar pásů Varimate® půlkruh. Jsme moc rádi, že v tomto případě jsme mohli rychle zareagovat na vaše



potřeby, a jako ConvaTec Česká republika jsme pyšní na to, že tyto pásy prodáváme jako první a zatím jediní na světě. Poslouchali jsme vaše náměty, jak by pásy měly ideálně vypadat, a na jejich základě vznikla finální pomůcka.

Pásy mají zaoblené konce. To je důležité proto, aby se neodlepovaly dřív, než mají, a aby se za ně nezachytávalo např. oblečení. Půlkruhové pásy jsou uprostřed širší, aby opravdu co nejlépe fixovaly pomůcku na těle. Samozřejmě jsme mysleli i na to, aby se vám s pásy dobře pracovalo,



!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Pásy Varimate® patří mezi zdravotnické prostředky, čtěte pozorně příbalový leták.

Aplikace různých tvarů vyrovnávacích pásů při fixaci podložky.



VYROVNÁVACÍ PÁSKY VARIMATE® PRO POCIT JISTOTY A BEZPEČÍ

aby se dobře nalepovaly. Z tohoto důvodu je zadní ochranná fólie na dvou místech perforovaná, abyste ochrannou fólii mohli odlepit po částech a pásek se vám nelepil na prsty a nekroutil se. Připravili jsme i krátké video, na kterém uvidíte, jak je nalepování nových pásů snadné. Vedle tabulky s kódy naleznete tzv. QR kód. Stačí si na telefonu otevřít fotoaparát, nasměrovat kameru telefonu na daný QR kód a budete se moci na vi-

deo podívat. Případně video můžete zhlédnout i na našich webových stránkách www.convatec.cz.

Pokud byste chtěli pásy jakéhokoli rozměru vyzkoušet, zavolejte na naši bezplatnou StomaLinku® 800 122 111 a kolegyně vám rády pošlou vzorky pásů Varimate®.

Ať vám vaše pomůcky vyhovují a můžete díky nim žít bezstarostný život.



! Pásy jsou vyrobeny z **přírodní hydrokoloidní hmoty**, která nedráždí pokožku.

! **Zcela se přizpůsobí** křivkám a pohybům vašeho těla.

! Výborně **drží pomůcku i v kožních záhybech**.

! Jsou **voděodolné**, takže pomůcku budou chránit i při všech vodních aktivitách.

! **Chrání kůži i před mechanickým poškozením** – např. při nošení přídržného pásu.

! **Pásy lze stříhat** dle potřeby.

KÓD SÚKL	NÁZEV	DOPLNĚK	ÚHRADA *
PÁSKY VYROVNÁVACÍ VARIMATE – limit: 120 ks/měsíc (kategorie 03.08.01.02)			
5014137	Vyrovnávací pásek Varimate půlkruh	4 x 14 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno
5005989	Vyrovnávací pásek Varimate čtvrtkruh	3 x 9 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5005990	Vyrovnávací pásek Varimate rovný tvar	3 x 11 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plně hrazeno
5005988	Vyrovnávací pásek Varimate rovný tvar	5 x 11 cm, hydrokoloidní, 30 ks	plně hrazeno
5005987	Vyrovnávací pásek Varimate rovný tvar	5 x 22 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plně hrazeno



Bc. Jana Handlová,
šéfredaktorka

*) úhrada zdravotní pojišťovny

Novinky letošního roku – podzim plný příslušenství

StomFoam®

Další novinkou podzimu je čistící pěna pro stomiky StomFoam®, která je primárně určena pro čištění kůže v okolí stomie.

Pěna pro stomiky StomFoam®

Před téměř dvěma lety jsme ukončili prodej čistící pěny Aloe Vesta®. Bylo to náhlé a my neměli adekvátní náhradu. Jelikož jsme si byli vědomi toho, že vám tímto způsobíme minimálně diskomfort, snažili jsme se přicházet alespoň s dočasnými alternativami v podobě křišťálového mýdla nebo čistící pěny Dentimed. Hledali jsme řešení, jak dál, ale nebylo to vůbec jednoduché. Produkty dostupné na trhu nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh jako zdravotnické prostředky, a tudíž nebylo možné ani požádat o jejich úhradu ze zdravotního pojištění. Myšlenky jsme tedy museli směřovat jiným směrem než k již existujícím produktům.

Nasměřovali jsme je tedy k městu Ostrava, kde sídlí náš dlouholetý obchodní partner, my bychom řekli náš bratr, společnost ALP ecology s. r. o. Pokud je vám jméno této společnosti povědomé, máte

pravdu. ALP ecology s. r. o. vyrábí známé pohlčovače pachu Stom-Odor®. Alpičci jsou sice menší než společnost ConvaTec, ale o to flexibilnější, a to je jejich síla. Tak jsme požádali našeho „bratra“, zda by mohl vyrobit on sám čistící pěnu pro stomiky. V tu chvíli, zjednodušeně řečeno, již bylo vše vyřešeno.

Jednatel společnosti Ing. David Rašmadžian začal usilovně pracovat na vývoji této pěny a následně na splnění všech legislativních podmínek, aby bylo nejen možné pěnu uvést na trh, ale aby splňovala i výše zmíněné podmínky pro zařazení mezi zdravotnické prostředky. Rovněž se soustředili, aby jak pěna, tak dávka odpovídaly potřebám stomiků. Tým pod vedením Davida vše zvládl na výbornou, a byť se to možná nezdá, vše ve velmi krátkém čase.

1. listopadu 2021 jsme vám tedy mohli představit novou čistící pěnu pro stomiky StomFoam®.

Tato pěna je inspirována odličovači očí. Ptáte se proč? Já se také ptala a odpověď mě příjemně překvapila. Odličovače očí musí být velmi jemné, protože s nimi odličujete citlivé oční okolí.



Nesmí dráždit, musí být šetrné ke kůži, ale přitom musí odstranit make up. A proto je na této bázi vyrobena i čistící pěna StomFoam®. Je také jemná, ale zároveň účinná. Je ryze přírodní, což nás už možná nepřekvapí, protože pohlčovače pachu Stom-Odor® jsou přírodní také. Pěna neobsahuje žádná barviva ani konzervační látky. Příjemně voní a dobře se nanáší, protože nestéká. Má neutrální pH, což je pro kůži velmi důležité.

Můžete si být jisti, že používáním této pěny uděláte pro svou kůži v okolí stomie maximum. 😊

Další výbornou zprávou je, že pěna je pro vás k dispozici ve dvou velikostech. **Jednak v 200ml balení anebo v 50ml balení, které**

je vhodné např. na cesty. Pěna je plně hrazena ze zdravotního pojištění. V rámci preskripčního limitu si můžete nechat předepsat jedno velké balení na měsíc, anebo dvě malá balení. Je to zcela na vás.

Pokud se chcete podívat na krátké video o pění StomFoam®, můžete si načíst QR kód na konci článku, anebo můžete opět navštívit naše stránky www.convatec.cz, kde ho naleznete v sekci **Stomické pomůcky**.

Věříme, že pro celou řadu z vás je tato pěna takovým malým darem pod stromeček, který vám zkvalitní váš ošetrovatelský postup a pomůže vám udržet vaši kůži v okolí stomie zdravou.

V případě zájmu si můžete zavolat na StomaLinku® o bezplatný vzorek.

Ať je vaše kůže v okolí stomie vždy čistá a zdravá.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Produkt patří mezi zdravotnické prostředky, čtěte pozorně příbalový leták.



- Přírodní produkt (bez barviv a konzervantů)
- Jednoduchá aplikace (nestéká)
- Má výborné čistící vlastnosti
- Má neutrální pH



Bc. Jana Handlová,
šéfredaktorka

www.convatec.cz

Čistící pěna StomFoam® patří do kategorie 03.09.02.01:
Čistící roztoky, čistící pěny, tělové čistící ubrousky – limit 300,15 Kč/měsíc

MĚSÍČNÍ MOŽNÉ KOMBINACE



**1x
MAXI**

NEBO

**2x
MINI**



SÚKL KÓD 5014244

SÚKL KÓD 5014245

StomaLinka®
ConvaTec

800 122 111
pro volajícího zdarma

VHODNÉ NEJEN NA CESTY



DŮLEŽITÉ NOVINKY ZE SVĚTA ČESKÉ LEGISLATIVY – ABY VÁM NIC NEUNIKLO



Milí čtenáři, rádi bychom vás seznámili s třemi velmi důležitými novinkami v oblasti české legislativy, které se nás bezprostředně týkají, protože přímo souvisí s tématem stomie. V tomto příspěvku se budeme věnovat novému ZÁKONU O REGULACI REKLAMY NA ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY, dále MOŽNOSTI PŘEDEPISOVÁNÍ STOMICKÝMI SESTRAMI OD 1. LEDNA 2022 a v neposlední řadě i POUŽITÍ ePOUKAZU OD 1. BŘEZNA 2022.

Tak pojďme do toho.

Zákon o regulaci reklamy na zdravotnické prostředky.

Zákonem č. 90/2021 Sb. došlo od 26. 5. 2021 k rozsáhlé úpravě právních předpisů v oblasti zdravotnických prostředků. Jedná se o historicky největší regulaci reklamy na zdravotnické prostředky. Do května letošního roku se zákon o regulaci reklamy vztahoval pouze na léčivé přípravky, potraviny, doplňky stravy či kojeneckou výživu. Od května se tedy zákon o regulaci reklamy vztahuje i na zdravotnické prostředky, mezi které patří např. stomické pomůcky, inkontinentní pomůcky, intermitentní katétry či prostředky pro vlhké hojení ran.

Zákon o regulaci reklamy rozlišuje to, na koho je reklama směřována, zda cílí na širokou laickou veřejnost či na zdravotní profesionály. My se v našem příspěvku budeme věnovat hlavně reklamě zaměřené na širokou laickou veřejnost. Hlavním principem této nové regulace ve vztahu k široké laické veřejnosti je její ochrana a neumožnění vystupování lidí se společenským vlivem (např. známé osobnosti, herci, ale i lékaři).

Co je vlastně považováno za reklamu? Reklamou se podle Zákona o regulaci reklamy rozumí „oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, pokud není dále stanoveno jinak.“ Je tedy nutné říci, že pod pojem reklama nespadá např. pouze placená reklama v médiích či v televizi, ale reklamou se rozumí jakákoli prezentace zdravotnického prostředku jako jsou např. předešlé dva příspěvky o novinkách v našem portfoliu, ale i např. popisky produktů na webových stránkách, pokud obsahují více informací než je napsáno v návodu na použití, nebo příspěvky na sociálních sítích anebo i naše Setkání stomiků®. Zákon tyto aktivity nezakazuje, ale výrazným způsobem je reguluje. Abychom naplňovali zákon o reklamě, musí reklama splňovat tyto náležitosti: z reklamy musí být zřejmé, že se jedná o zdravotnický prostředek (ZP), musí obsahovat obchodní název ZP, účel použití ZP a musí obsahovat výzvu k přečtení návodu k použití. Z těchto důvodů nově naleznete na všech našich materiálech, které se věnují našim produktům, červený obdélník s upozorněním, že se jedná o ZP atd. Bohužel v souvislosti s touto regulací reklamy již např. není možné, aby se nám zdravotní profesioná-

lové vyjadřovali k našim produktům např. v časopise RADIM nebo na Setkání stomiků®. To již dovoleno není a k daným produktům už se můžeme vyjadřovat pouze my, zaměstnanci společnosti ConvaTec a upozornit vás, že se jedná o reklamní sdělení. Proto jsou také předcházející dva články umístěny v inzertní příloze časopisu RADIM.

Na základě výše uvedeného jsme se rozhodli časopis RADIM rozdělit na dvě části. Na část, řekněme „hlavní“, odbornou, kde budete i nadále nacházet rubriky tak, jak jste byli zvyklí a my i nadále budeme moci spolupracovat s celou řadou odborníků a na část druhou inzertní, kde vás budeme informovat o našich produktech či službách.

Pro webináře (online přednášky) platí podobná omezení. Pokud na našich webinářích budou prezentovat vám stomikům zdravotní profesionálové, nebudou již ve svých prezentacích např. zmiňovat naše produkty, ale „pouze“ obecná pravidla, doporučení bez uvádění konkrétních názvů produktů. Pokud vás budeme chtít seznámit s nějakou produktovou novinkou, uděláme to osobně my, zaměstnanci, a budeme vás viditelně informovat o tom, že se jedná o reklamní sdělení.

Tato regulace reklamy má dopad na většinu našich aktivit. Výše jsem pro vaši představu zmínila jen některé. Udělali jsme revizi všech stávajících aktivit a přizpůsobili je nové regulaci reklamy. Můžete tak sledovat drobné či větší změny v našich službách. 😊

Možnost předepisování stomickými sestrami od 1. ledna 2022

Pravomoc předepisování pomůcek stomickými sestrami upravuje nový zákon č. 371/2021 Sb., který nabývá platnost od 1. 1. 2022. Až dosud mohl stomické pomůcky předepisovat pouze lékař určitých odborností jako např. chirurg, urolog, onkolog, PL, atp. Zjednodušeně řečeno nově bude moci tyto

pomůcky předepisovat i sestra z domácí péče nebo sestra pracující např. v ambulanci, kde se předepisují stomické pomůcky. Tato novela zákona o předepisování sestrami se netýká jen stomických pomůcek, ale i dalších zdravotnických prostředků, které budou moci předepisovat. Konkrétně jsou to skupiny 01 – Krycí materiály, 02 – ZP pro inkontinentní pacienty, 03 – ZP pro stomické pacienty, 06 – ZP

pro kompresivní terapii a 07 – ZP pro imobilní pacienty. Je však nutné dodat, že **sestry bohužel nebudou moci předepisovat celý sortiment stomických pomůcek, tak jak je mohou předepisovat lékaři, ale budou moci předepisovat 26 kategorií z celkových 57.** Přesný seznam pomůcek, které mohou předepisovat sestry, naleznete v číselníku SÚKL a od ledna i na našich stránkách www.convatec.cz.

Použití ePoukazu od 1. března 2022

Posledním bodem tohoto příspěvku je ePoukaz, který budeme moci používat od 1. března 2022. Jedná se o obdobu eReceptu, který jste už zřejmě zvyklí používat. Jedná se tedy o elektronickou verzi Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku, který budete moci obdržet a následně přeposlat třeba formou e-mailu či SMS. Své pomůcky si budete moci vyzvednout na základě předloženého občanského průkazu. Na

elektronickém poukazu již nebude nutný váš podpis. Platnost ePoukazu bude stejná jako u papírového Poukazu, to znamená 30 dnů. I s ePoukazem budete moci i nadále využívat např. naši zásilkovou službu. Vše se tím zjednoduší a zrychlí. Vy nám přepošlete svůj ePoukaz, který tak obdržíme téměř okamžitě a budeme vám moci ihned vyexpedovat vaše předepsané pomůcky. Vy tak obdržíte své pomůcky ještě rychleji. Takže neváhejte a vzhůru za ePoukazem. 😊

Veškeré důležité informace můžete najít na našich webových stránkách www.convatec.cz, pravidelně vás o nich informujeme na našem facebookovém profilu Stomik Radim – Convatec anebo vám je zasíláme emailem. Budte s námi a nic vám neunikne.

Bc. Jana Handlová, šéfredaktorka ■

Pečujeme o pacienty se stomií



Bezplatná konzultační a ošetřovatelská služba.

Nabízíme vám:

- + konzultaci s velmi zkušenou sestrou ve vašem domácím prostředí,
- + pomůžeme vám s ošetřováním stomie, doporučíme tipy a triky, jak ošetřování zvládnout co nejlépe,
- + budeme za vás hlídat limity stomických pomůcek, abyste jich vždy měli dost a zároveň limity nepřekročili,
- + můžeme vám pomůcky dovážet domů,
- + poskytneme případně i konzultaci vašemu praktickému lékaři, jak předepisovat stomické pomůcky,
- + zajištění preskripce stomických pomůcek včetně jejich diskrétního doručení až domů,
- + působíme v celé ČR,
- + rovněž se o vás postaráme v našich stomických centrech v Praze a Plzni.



**Stomické
centrum Praha**

Chirurgie Barrandov s.r.o.
Kršková 807/21
152 00 Praha 5



**Stomické
centrum Plzeň**

Chirurgie Skvrňany s.r.o.
Terezie Brzkové 15
318 00 Plzeň

Volejte zdarma StomaLinku®

Domluvíme vám schůzku s vaší budoucí stomasestrou.

Stomíí život nekončí!

www.lastrona.cz



800 122 111
pro volajícího zdarma

StomaLinka® ConvaTec

jsme tu pro vás
a vždy jsme připraveni
vám pomoci

Výdejny U Radima

Máte radši
osobní kontakt?
Přijďte za námi
do zdravotnických
potřeb v Praze
a Ostravě

Lastrona
specializovaná
agentura
domácí péče
pro stomiky



Webové stránky

naleznete na nich
vše podstatné

Facebook Stomik Radim - ConvaTec

budte s námi v kontaktu
i na sociálních sítích



Časopis Radim

nejen pro stomiky plný
aktuálních informací, rad,
tipů a vašich příběhů



Vzorky pomůcek zdarma

vyzkoušejte
naše pomůcky,
vy určujete, jaký
bude váš život,
ne stomie



Webináře

poslechněte si
z pohodlí domova
užitečné informace
o životě se stomií



Zásilková služba

nezdržujte se sháněním
pomůcek, doručíme vám je
bezplatně až domů

Cvičení pro stomiky

speciální program
pro pacienty se stomií



*) PRO MĚ PLUS

Být s ConvaTecem se vyplatí



Společná
péče o stomie



ConvaTec



Stomická
centra

REKLAMNÍ SDĚLENÍ

ZAVOLEJTE NÁM!

S NÁMI SI O STOMII MŮŽETE POVÍDAT TŘEBA CELÝ DEN.
ZEPTEJTE SE NÁS NA COKOLIV.

PORADÍME

POMŮŽEME

ZNÁME

VYŘEŠÍME

VYSLECHNEME

POCHOPÍME VÁS

O stomii víme vše.
V našem týmu pracují
zdravotní profesionálové
i samotní stomici.



Rádi vám pomůžeme, protože pomáhat nás baví.

StomaLinka  ConvaTec

800 122 111
pro volajícího zdarma