

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro ošetřování stomií



me+

POMÁHÁME TVOŘIT NOVOU CESTU ŽIVOTEM
stomickými výrobky, podporou a kompletní péčí

JAK POUŽÍVAT PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství slouží k řádnému ošetření kůže v okolí stomie. Díky jeho používání šetříme naši kůži a zajistíme, že pomůcka bude dobře držet. Pokud chceme mít kůži v okolí stomie zdravou, stačí, když budeme dodržovat **4 jednoduché kroky** a můžeme si být jistí, že pomůcka bude vždy dobře držet a my se na ni budeme moci spolehnout.



ODSTRANĚNÍ POMŮCKY



- Odstraňovače podložky




VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE

- Adhezivní pasty
- Těsnicí manžety



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU

- Zásypové pudry
- Ochanné krémy a filmy
- Pohlcovače pachu
- Prostředky zahušťovací

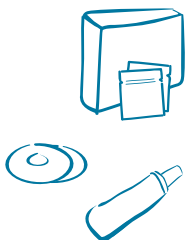

VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

- Pásky vyrovnávací
- Stomické přídržné a břišní pásy



ODSTRANĚNÍ POMŮCKY

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY

ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY CONVACARE®



Odstraňovač podložky napomáhá k jednoduchému a pohodlnému sejmutí pomůcky. Slouží zároveň k omytí kůže od případných zbytků želatiny a k regeneraci pokožky. Je nedráždivý a nevysušuje kůži. Při výměně pomůcky se jemně nadzvedne její okraj a ubrousek se vloží mezi kůži a lepicí vrstvu a za stálého potírání se pomůcka sejme. Pokožka se následně omyje teplou vodou a mýdlem a osuší.

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY – SILIKONOVÉ

ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY NILTAC®

Nedráždivý odstraňovač pomůcek, který neobsahuje parfémy, alkohol ani oleje, je hypoalergenní a neštípe. Je dokonalou směsí 100% silikonu. Snadno se používá, rychle zasychá. Je určen k nebolestivému odstranění pomůcky ať už pomocí ubrousku (1 balení obsahuje 30 ks), nebo spreje (obsah 50 ml). Sprej se používá vždy ve svislé poloze, nikdy vodorovně! Nezpůsobuje chladivý šok a aplikátor je uzpůsoben tak, že obsah se zcela využije. Po aplikaci se okolí stomie doporučuje omýt teplou vodou a mýdlem. Nezanedbává stopy na oděvěch.



VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ V OKOLÍ STOMIE

ADHEZIVNÍ PASTY

PASTA VYPLŇOVACÍ STOMAHESIVE® 30 g

Tato pasta se používá až po nalepení podložky. Je určena pro vyplnění mezer mezi podložkou a okolím stomie. Pasta nelepí, ale zabráňuje podtékání, a tím i chrání pokožku. Je **mastná**, proto ji neaplikujte pod pomůcku! Výrazně by se snížila její lepidlost.





PASTA VYROVNÁVACÍ STOMAHESIVE® 60 g



Používá se k vyrovnání kožních záhybů a nerovností. Je lepkavá a aplikuje se přímo na kůži do prohlubní a záhybů k jejich vyrovnání nebo na spodní (lepicí) stranu pomůcky v okolí předstříženého otvoru. Po vypřechání alkoholu, který obsahuje, pasta ztvdne a vytvoří bariéru. Zabraňuje tak případnému podtékání a zlepšuje přilnavost pomůcky. Pastu aplikujte pomocí navlčeného prstu.

TĚSNICÍ MANŽETY

TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE®

Slouží k vyplnění kožních záhybů a nerovností. Je elastický, velice dobře se tvaruje a upravuje dle individuálních potřeb. Je možné ho trhat a použít jen část nebo opět spojit či vrstvit tak, aby stomická pomůcka přilnula po celé své lepicí ploše. Těsnicí kroužek je vyroben z hmoty Stomahesive®, která chrání kůži a podporuje hojení. Snadno se odstraňuje zároveň se stomickou pomůckou. Po odstranění nezanechává zbytky hmoty na kůži. Absorbuje tekutinu a jemně gelovatí. Neobsahuje alkohol.



OCHRANA KŮŽE A PREVENCE PROTI ZÁPACHU

ZÁSYPOVÉ PUDRY, OCHRANNÉ KRÉMY A FILMY

PUDR OCHRANNÝ STOMAHESIVE®



Slouží ke zklidnění podrážděné pokožky pod pomůckou. Používá se ve velmi tenké vrstvě na čistě omytou a osušenou pokožku, zejména je-li kůže v okolí stomie rozbolavělá nebo došlo-li k jejímu podráždění v důsledku vniknutí stolice nebo moči pod pomůcku. Lahvičku s pudrem držte vodorovně, asi 7–10 cm od těla a zmáčkněte. Vytvoří se obláček, který pudr rovnoměrně rozptýlí na požadovaném místě. Před nalepením nové pomůcky odstraňte přebytečný pudr pomocí buničité vaty a poté můžete přetřít Ochranným filmem ConvaCare® nebo Silesse® nebo rovnou nalepit pomůcku.

OCHRANNÝ FILM SILESE®

Ochranný film Silesse® je nedráždivý a hypoalergenní, neboť je vyroben na bázi 100% silikonu. Vytváří příjemný prodyšný film, který chrání kůži před agresivním střevním obsahem. Rychle zasychá a zlepšuje přilnavost pomůcky. V nabídce je ve formě ubrousků (1 balení obsahuje 30 ks) nebo spreje (obsah 50 ml). Sprej se neucpává, stejnoměrná vrstva je dosažena díky speciálnímu aplikátoru – pumpičce. Před upotřebením je vhodné obsah protřepat.



OCHRANNÝ FILM CONVACARE®



Ubrousky jsou nasyceny látkou, která vytváří mezi pokožkou a pomůckou ochranný film, chrání pokožku před podrážděním, odřením nebo tvorbou puchýřků. Zároveň může napomoci i zlepšení přilnavosti pomůcky. Ochranný film umožňuje dýchání pokožky, rychle zasychá, je pružný a neloupe se. Aplikujte jej na čistě omytou a osušenou pokožku do okolí stomie před nasazením pomůcky a nechte zaschnout. Pokud přípravek aplikujete na podrážděnou pokožku, může se přechodně objevit pocit pálení či štípání.

POHLCOVAČE PACHU

POHLCOVAČ PACHU STOMODOR SPRAY

Efektivně odstraňuje nepříjemné pachy ze stomických sáčků a materiálů v okolí stomie. Při tuhé stolici se aplikuje přímo do sáčku před nasazením. Pro zvýšení efektu odstraňování pachu můžeme neředěný rozprašovat také do prostoru anebo na jakýkoliv materiál. Postupujte dle návodu na rozprašovači. K dispozici je varianta MAXI a cestovní balení MINI.



POHLCOVAČ PACHU STOMODOR DROPS

Efektivně odstraňuje pachy ze stomických sáčků. Promíchává se s obsahem sáčku, kde pohlcuje pachy přímo u zdroje a poté uzavře hladinu sáčku nepropustným filmem. Aplikujte do sáčku před nasazením 10–20 kapek. Dle potřeby je možné dávkování zvýšit. Prodlužuje a zefektivňuje funkci a životnost filtru.

PROSTŘEDKY ZAHUŠŤOVACÍ

GELUJÍCÍ SÁČKY DIAMONDS®

Slouží k zahuštění střevního obsahu a jsou určeny pro všechny stomiky s řídkou či vodnatou stolicí. Aplikace je velice jednoduchá. Sáček nerozbalujte, rovnou vhodte horním otvorem do sáčku (před nasazením) nebo aplikujte výpustí (po vypuštění obsahu a očištění výpustí). Jakmile se sáček dostane do styku s tekutinou, obal se rozpustí a jednotlivé granulky přemění tekutinu v gel. Sáčky obsahují složku ActiveOne™, jež je na bázi aktivního uhlí a spolehlivě pohlcuje zápach. Zároveň zabarví obsah do černa. Gelující sáčky zabraňují podtékání, nafukování sáčku a navíc pohlcují zápach. Balení obsahuje 100 ks gelujících sáčků.





VĚTŠÍ FIXACE POMŮCKY PŘI JEJÍM NOŠENÍ

PÁSKY VYROVNÁVACÍ



VYROVNÁVACÍ PÁSKY VARIMATE®

Pásky Varimate® zajistí dokonalou fixaci pomůcky ke kůži. Jsou vyrobeny z přírodní hydrokoloidní hmoty, která nedráždí pokožku a zcela se přizpůsobí křivkám a pohybům těla. Výborně drží pomůcku i v kožních záhybech. Pásky jsou voděodolné, takže pomůcku skvěle chrání i při plavání. Lze je stříhat dle potřeby a spolehlivě ochrání i před mechanickým poškozením – např. při nošení přídržného pásu.



STOMICKÉ PÁSKY – PŘÍDRŽNÉ PÁSEK

Pásek je určen uživatelům dvoudílného systému Natura®, jednodílného urostomického sáčku Esteem® a jednodílného sáčku Esteem®+ konvexního. Je vhodný při zvýšené fyzické námaze nebo jako prostředek pro zvýšení ochrany a pocitu jistoty. Připevňuje se na boční očka přírubového kroužku sáčku Natura®+ nebo očka lepicí části sáčku Esteem®.



STOMICKÉ BŘIŠNÍ PÁSY

STOMEX – KÝLNÍ PÁS

Břišní podpora Stomex je určena pacientům – stomikům, kteří trpí parastomální kýlou nebo i pacientům, kteří potřebují v pooperační fázi zpevnit břišní stěnu. Je vyroben z elastické, netřepivé tkaniny, která se velmi dobře přizpůsobuje tělesnému tvaru. Pomocí tří pásků ze suchých zipů jej lze optimálně přitáhnout a zabránit nežádoucímu pohybu pásu. Do pásu lze v místě stomie vystříhnout otvor pro vyve-

dení stomického sáčku. Pás se přiloží na tělo, označí se místo pro vystřížení otvoru a otvor se vystříhne. Průměr vystřiženého otvoru by měl být cca o 15 mm menší než je průměr stomie. Po vystřížení otvoru se pás na těle utáhne tak, aby neomezoval odvod stolice ze stomie do sáčku. Pás musí zpevnit oslabenou stěnu břišní bez omezení dýchání nebo pohybu.

Příslušenství pro ošetřování stomií

KÓD SÚKL	NÁZEV	DOPLNĚK	ÚHRADA POJ. S DPH
Odstraňovače stomické podložky – limit 300,15 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.04.01
5006778	Odstraňovač podložky ConvaCare®	ubrousky, 100 ks	600,00 *
Odstraňovače stomické podložky – silikonové – limit 500,25 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.04.02
5006662	Odstraňovač podložky Niltac®	sprej, 50 ml	250,12
5006650	Odstraňovač podložky Niltac®	ubrousky, 30 ks	500,01
Pásky vyrovnávací – limit 120 ks/měsíc			kategorie: 03.08.01.02
5005989	Vyrovnávací pásek Varimate® čtvrtkruh	3 x 9 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plná
5005990	Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar	3 x 11 cm, hydrokoloidní, 60 ks	plná
5005988	Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar	5 x 11 cm, hydrokoloidní, 30 ks	plná
5005987	Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar	5 x 22 cm, hydrokoloidní, 20 ks	plná
Adhesivní pasty a gely – limit 1 ks/měsíc			kategorie: 03.08.01.02
5006795	Pasta vyplňovací Stomahesive®	30 g	plná
5006803	Pasta vyrovnávací Stomahesive®	60 g	plná
Těsnicí manžety – limit 60 ks/měsíc			kategorie: 03.08.01.05
5006685	Těsnicí kroužek Stomahesive®	48 mm, 10 ks	plná
5006663	Těsnicí kroužek Stomahesive®	48 mm, tenký, 10 ks	plná
5006652	Těsnicí kroužek Stomahesive®	98mm, 10 ks	plná
Zásypové pudry, ochranné krémy a filmy, přídržné proužky – limit 1 050 Kč/měsíc			kategorie: 03.09.01.01
5006844	Film ochranný ConvaCare®	ubrousky, 100 ks	500,01
5006567	Film ochranný Silesse®	sprej, 50 ml	500,01
5006563	Film ochranný Silesse®	ubrousky, 30 ks	1 000,00
5006849	Pudr Stomahesive®	zásypový, 25 g	500,01
Destičky a roušky – limit: plná úhrada			kategorie: 03.08.01.04
5006851	Destička vyrovnávací Stomahesive®	10 x 10 cm, 5 ks	plná
5006853	Destička vyrovnávací Stomahesive®	20 x 20 cm, 3 ks	plná
Stomické pásky – přídržné – limit 2 ks/rok			kategorie: 03.08.02.01
5006860	Pásek	přídržný, 1 ks	plná
Stomické břišní pásy – limit 2 ks/rok			kategorie: 03.08.02.02
5005629	Břišní podpůrný pás STOMEX 2700	1 ks	600,30 **
Prostředky zahušťovací – limit 359,95 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.03.01
5006635	Sáčky gelující Diamonds®	100 ks	1079,99 ***
Pohlcovače pachu – limit 367,84 Kč/měsíc			kategorie: 03.08.05.01
5002118	Pohlcovač pachu StomOdor® Spray Maxi	210 ml	180,00
5002119	Pohlcovač pachu StomOdor® Spray Mini	50 ml	139,01
5002120	Pohlcovač pachu StomOdor® Drops	35 ml	180,00

Úhrady a limity jsou včetně DPH, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, ** s doplatkem 340,00 ***plná úhrada 1 balení na 3 měsíce

Zdravotnické potřeby

Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravotnických potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti ConvaTec.



**ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
U RADIMA**

PRAHA:

Vinohradská 60, 130 00 Praha 3,
Tel.: 224 254 007

Dopravní spojení:

metro trasa A
stanice Jiřího z Poděbrad,
tramvaj č. 11

Otevřeno: Po–Pá: 9–12, 14–18 hodin

OSTRAVA:

Českobratrská 63, 702 00 Ostrava,
Tel.: 596 618 459

Dopravní spojení:

autobus č. 37, 38, 50,
trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českobratrská

Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hodin

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

Zásilková služba

Poukaz potvrzený lékařem zašlete poštou na adresu: ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1. Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu v distribučním centru zboží připraví a společnost DPD vám je doveze až domů v diskrétním obalu. Doručení zdarma – veškeré náklady na poštovné a balné hradí společnost ConvaTec. Chráníme vaše soukromí.



ConvaTec
800 321 222
pro volajícího zdarma



800 122 111
pro volajícího zdarma



www.facebook.com/stomikradim