


Er Avelle™ NPWT egnet til din patient? Guide til bandagering af incisioner¹

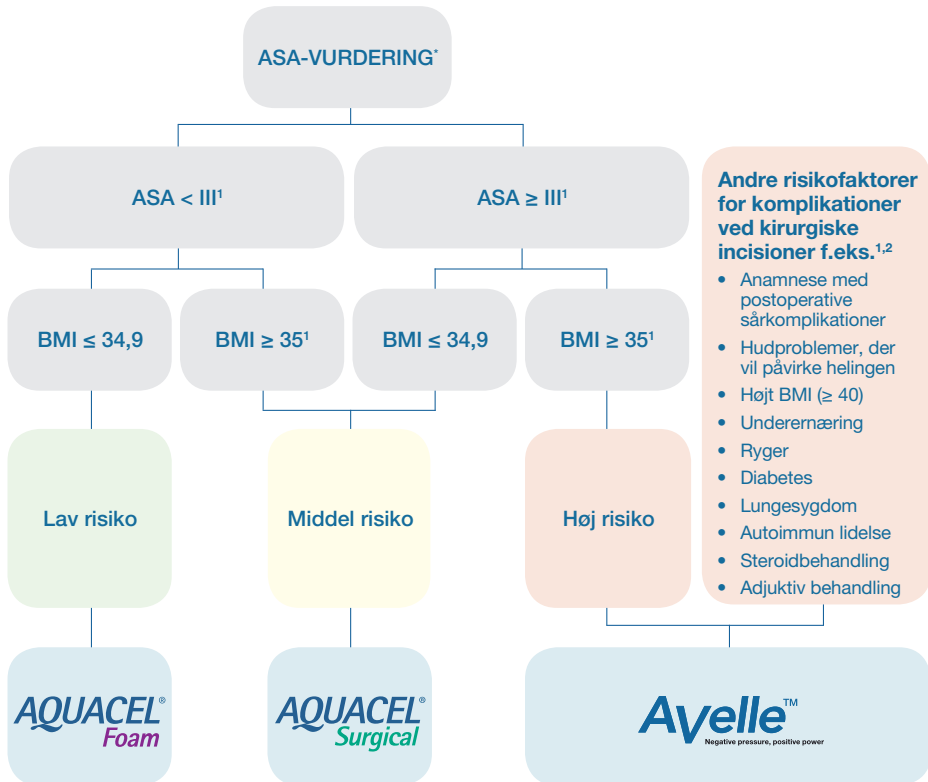

**ConvaTec har et omfattende sortiment indenfor avanceret sårbehandling
til postoperativ bandagering af incisioner**

Man skal altid konsultere egen behandlingsprotokol for bandagering af incisioner. Vurderingen af patientens risiko for postoperative komplikationer og beslutninger vedrørende deres efterfølgende incisionsbehandling sker efter klinikerens skøn. Patienter med lav/ middel risiko kan stadig være egnet til NPWT-behandling af incisioner. Patienter kan være i risiko for postoperative komplikationer, men behandling med NPWT er måske ikke acceptabelt for patienten.

Hvis du ønsker flere oplysninger eller hjælp, kan du ringe til: ConvaTec kundeservice på telefon **48 16 74 74**



Applicering af Avelle™ NPWT-systemet på lukkede kirurgiske incisioner

Der henvises til indlægssedlen for den fuldstændige brugsanvisning.

VALG AF BANDAGE




Følgende bør sikres ved valg af bandage:

Porten kan placeres over intakt hud og væk fra incisionen

Porten er anbragt øverst i forhold til incisionen

Der er et overlap på 1 cm mellem bandagens absorberende pude og den omkringliggende hud

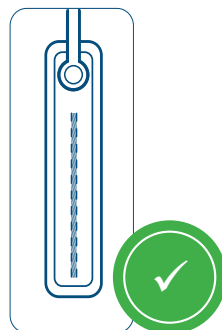

APPLICERING

Applicere



Anbring bandagen hen over incisionen, så porten er øverst (hvor det er muligt) og over intakt hud. Undgå folder, repositionér ved behov.

Forsegle



Applicér fikseringsbåndene på alle sider af bandagen med et overlap på 1 cm for at sikre en god forsegling (2).

Forbinde



Forbind pumpen, pumpe-slangen og bandagen forsvarligt ved at dreje koblingerne sammen.

Starte



Tryk på den blå knap i 3 sekunder for at starte brug med negativt tryk.

Kontraindikationer

Avelle™ NPWT-systemet bør IKKE anvendes i følgende situationer:

- ▶ Patienter, der er følsomme over for eller har kendte allergier over for silikone/akrylater, natriumcarboxymethylcellulose eller nylon.
- ▶ Maligne sår (i sårbund og/eller sårkanter) (undtagen i palliativ behandling med henblik på at forbedre livskvaliteten).
- ▶ Sår med bekræftet og ubehandlet osteomyelitis.
- ▶ Ikke-enteriske og uudforskede fistler.
- ▶ Nekrotiske sår eller sår med nekrotisk væv.
- ▶ Sår med blottagte arterier, vener, nerver eller organer.
- ▶ Anastomosesteder.
- ▶ Til akut luftvejsaspiration.
- ▶ Pleural-, mediastinal eller thoraxdrænage.
- ▶ Kirurgisk sugning.
- ▶ Forbrændinger, herunder 2. grads forbrændinger.

Overvejelser før brug

Patientegnethed

Valg af patienter bør baseres på følgende:

- ▶ Patientens/behandlernes forståelse af systemet og brugen af dette.
 - ▶ Patient compliance og patientens evne til at betjene systemet dagligt.
 - ▶ Mulighed for opnåelse af god hæmostase
- Behandleren skal sikre, at brugeren er uddannet i den daglige brug og afsnittet om fejlsøgning i brugsanvisningen.

Såret

- ▶ Vil det være muligt at opnå og opretholde en god forsegling?
- ▶ Der må ikke være knæk på slangene, og de skal være fri af bandagen. Slangerne må ikke være årsag til trykskader eller placeres, hvor der kan være fare for, at man snubler over dem.
- ▶ Fremspringende skarpe knogler eller fragmenter skal beskyttes med en passende bandage, eller de skal fjernes inden brug af Avelle™ NPWT-systemet.
- ▶ Hvis der anvendes et kirurgisk dræn, skal det fungere uafhængigt af Avelle™ NPWT-systemet og være placeret væk fra bandagens kant.
- ▶ Der anbefales en vinkel på 30 grader for applicering på knæ.