

ESTEEM SYNERGY™

ZWEITEILIGE STOMAVERSORGUNG

mit Klebekopplung

**GEMEINSAM
WEGE FINDEN.**

Mit unseren Produkten und Serviceleistungen zu
einem aktiven und unbeschwerten Leben mit Stoma.



ConvaTec

Stomaversorgung



Bei unseren Produkten der Reihe Esteem synergy™ handelt es sich um ein zweiteiliges System, bei dem Basisplatte und Beutel über eine Klebekopplung miteinander verbunden werden. So ist das System besonders diskret und flexibel. Die Versorgung folgt den Bewegungen des Körpers und verschwindet unter der Kleidung.

In der Regel wird der Beutel nach spätestens 24 Stunden gewechselt, während die Basisplatte bis zu drei Tage auf der Haut bleiben kann.

Entwickelt für Patienten, die:

- ✓ ihre Stomaversorgung ohne jeglichen Druck anbringen möchten
- ✓ ein flexibles und flaches System bevorzugen
- ✓ ihre Basisplatte mehrere Tage auf der Haut belassen möchten
- ✓ ihre Haut schonen wollen
- ✓ verschiedene Kombinationsmöglichkeiten aus Basisplatte und Beutel bevorzugen

„Esteem synergy™ ist die bequemste und zuverlässigste Stomaversorgung, die ich je hatte. Der Versorgungswechsel geht schnell und ist absolut hygienisch. Die Versorgung passt perfekt zu meinem aktiven Lebensstil.“

HELEN
SURREY

Helen hat seit 2004 ein Ileostoma und verwendet die zweiteilige Stomaversorgung von Esteem synergy™.



AUSWAHL DES RICHTIGEN HAUTSCHUTZMATERIALS



Die Stomaversorgung haftet rund um die Uhr auf der empfindlichen Bauchdecke. Deshalb ist es wichtig, dass die Beschaffenheit des Hautschutzes von ganz besonderer Qualität ist und die Haut sicher vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten schützt. Daher bieten wir unterschiedliche Hautschutzmaterialien an.

STOMAHESIVE™

Das Stomahesive™ Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patienten mit festen bis breiigen Ausscheidungen. Es schützt die Haut um das Stoma optimal, haftet sicher und nimmt gleichmäßig Feuchtigkeit auf.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ festen bis breiigen Ausscheidungen
- ✓ häufigen Versorgungswechseln
- ✓ empfindlicher Haut
- ✓ einer normalen Tagedauer

DURAHESIVE™

Das Durahesive™ Hautschutzmaterial eignet sich besonders für Patienten mit flüssigen, aggressiven Ausscheidungen. Es nimmt hohe Feuchtigkeitsmengen auf und ermöglicht eine sichere Abdichtung. Das Material quillt um das Stoma herum auf und dichtet durch diesen sogenannten Rollkragen-Effekt sicher ab.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ breiigen bis flüssigen Ausscheidungen
- ✓ einer längeren Tragedauer

Zusätzliche Sicherheit bieten unsere zwei Versionen der Haftränder:

- ✓ hydrokolloider Haftrand: zusätzliche Sicherheit bei trockener Haut; besonders geeignet für Patienten mit Pflasterrandallergie
- ✓ flexibler Kleberand: zusätzliche Sicherheit bei feuchter, mit Schweiß bedeckter Haut



DIE MODELLIERBARE TECHNOLOGIE


Einige unserer Basisplatten sind mit der modellierbaren Technologie ausgestattet. Damit lässt sich der Hautschutz ganz einfach mit den Fingern an die jeweilige Größe und Form des Stomas anpassen – ohne diesen zuschneiden zu müssen. Der modellierbare Hautschutz passt sich sicher an die individuelle Form eines jeden Stomas an und dichtet so zuverlässig ab.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ kleinen, großen, runden, ovalen und unregelmäßigen Stomaformen
- ✓ Problemen beim Zuschneiden

VORTEILE

- ✓ lückenlose Abdichtung
- ✓ Zeitersparnis beim Versorgungswechsel
- ✓ kein Ausschneiden mehr notwendig
- ✓ keine Zubehörmaterialien wie Schablone und Schere nötig
- ✓ einfach in der Handhabung und leicht zu erklären

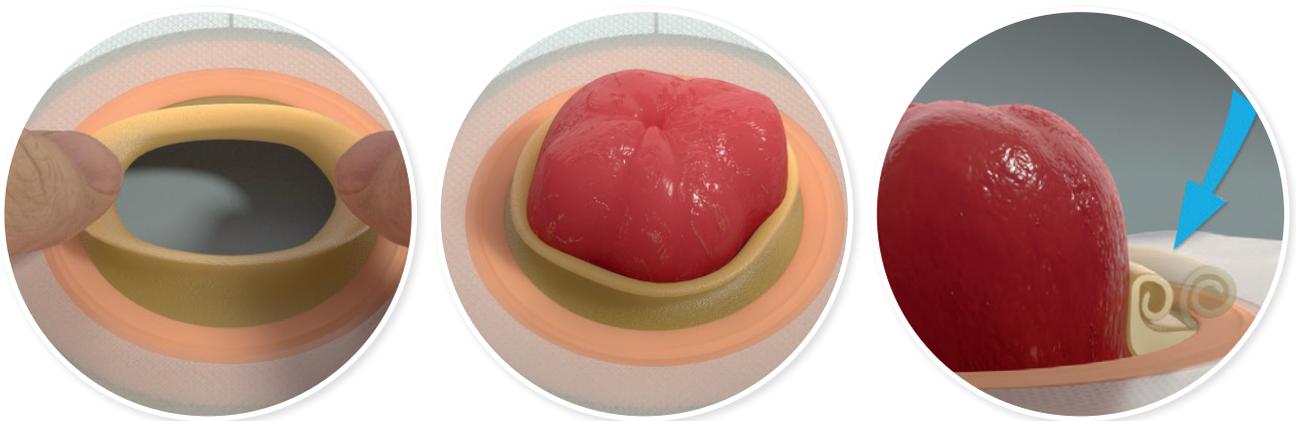

DIE UNTERSCHIEDLICHEN BEUTELARTEN

Je nach Stomaart unterscheiden sich die Ausscheidungen. Daher sollte für jede Stomaart auch der richtige Beutel ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen geschlossene Beutel, Ausstreifbeutel und Urostomiebeutel.

GESCHLOSSENE BEUTEL

Ein geschlossener Beutel muss nicht entleert werden. Sobald er voll ist, wird er entsorgt und durch einen neuen Beutel ersetzt.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ festem bis breiigem Stuhl, welcher ein- bis zweimal täglich ausgeschieden wird



AUSSTREIFBEUTEL

Ausstreifbeutel können mehrmals pro Tag entleert werden, ohne gewechselt werden zu müssen.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ flüssigem Stuhl, welcher über den ganzen Tag hinweg ausgeschieden wird



UROSTOMIEBEUTEL


Urostomiebeutel können mehrmals pro Tag entleert werden, ohne gewechselt werden zu müssen. Das Entleeren erfolgt über einen sogenannten Ablasshahn.

Entwickelt für Patienten mit:

- ✓ einem Urostoma



DAS MACHT UNSERE BEUTEL AUS

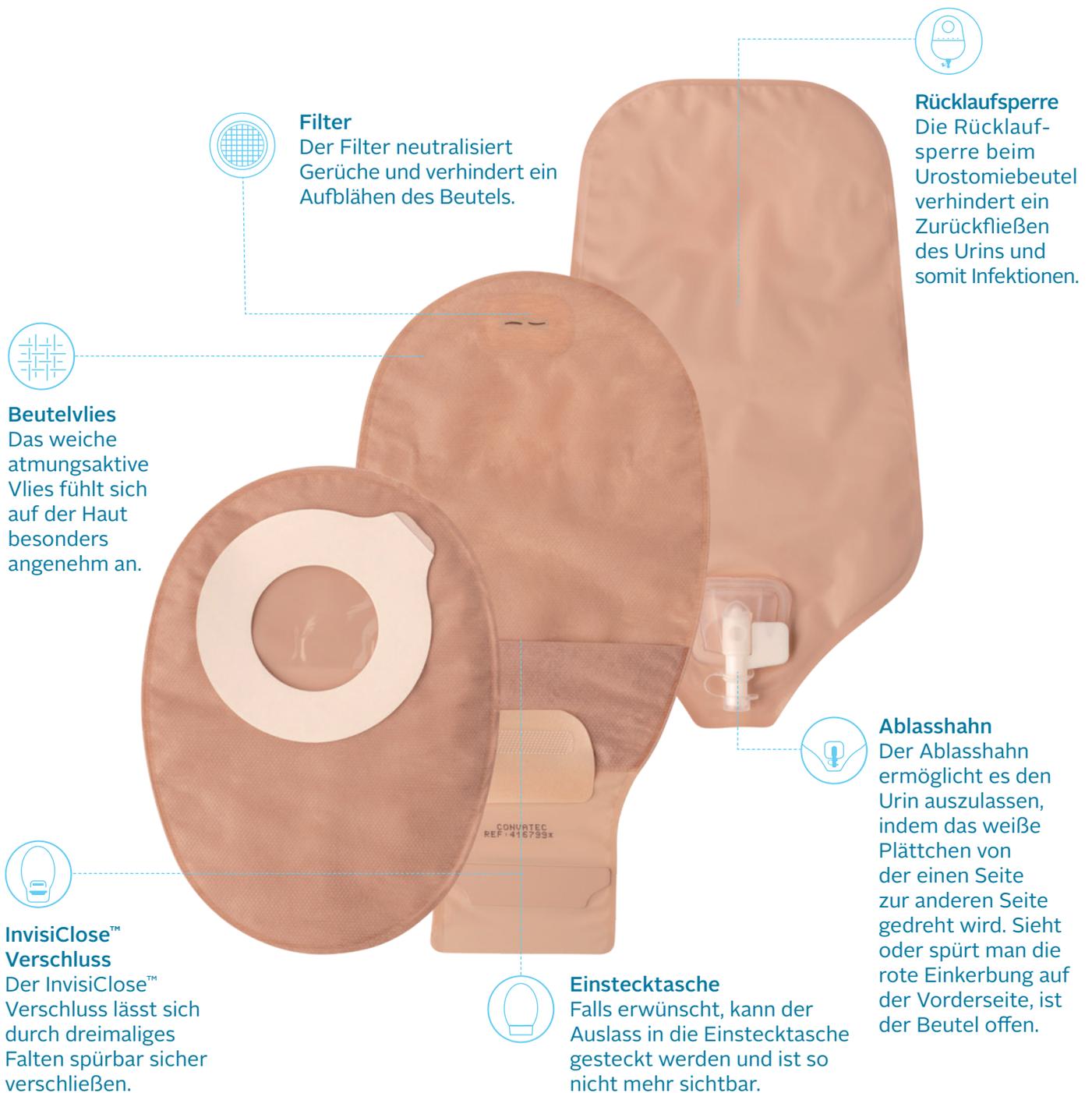

Filter
Der Filter neutralisiert Gerüche und verhindert ein Aufblähen des Beutels.



Rücklaufsperr
Die Rücklaufsperr beim Urostomiebeutel verhindert ein Zurückfließen des Urins und somit Infektionen.



Beutelvlies
Das weiche atmungsaktive Vlies fühlt sich auf der Haut besonders angenehm an.



Ablasshahn
Der Ablasshahn ermöglicht es den Urin auszulassen, indem das weiße Plättchen von der einen Seite zur anderen Seite gedreht wird. Sieht oder spürt man die rote Einkerbung auf der Vorderseite, ist der Beutel offen.



InvisiClose™ Verschluss
Der InvisiClose™ Verschluss lässt sich durch dreimaliges Falten spürbar sicher verschließen.



Einstecktasche
Falls erwünscht, kann der Auslass in die Einstecktasche gesteckt werden und ist so nicht mehr sichtbar.



InvisiClose™ Verschluss



Einstecktasche



Offene Position des Ablasshahns



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

Klebekopplung | modellierbarer Stomahesive™ und Durahesive™ Hautschutz mit Memory Effekt
hydrokolloider Haftrand | HMV-Nr. 29.26.05.0134¹ | 29.26.05.1071²

Option	Farbcode	Haftring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	48 mm	13-22 mm	10	411657 ¹	06415400	4715902	D - A - CH
	●	48 mm	22-33 mm	10	411658 ¹	06415417	4715960	D - A - CH
	●	61 mm	33-45 mm	10	411659 ²	06415423	4715983	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

Klebekopplung | durchgehender Stomahesive™ Hautschutz | in der Schweiz: Basisplatte Duoflex
HMV-Nr. 29.26.05.0092¹ | 29.26.05.1045² | 29.26.05.2021³

Option	Farbcode	Haftring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	35 mm	13-35 mm	10	405467 ¹	02197834	2534042	D - A - CH
	●	48 mm	13-48 mm	10	405468 ²	02197840	2534059	D - A - CH
	●	61 mm	13-61 mm	10	403948 ²	02197857	2534065	D - A - CH
	●	89 mm	13-89 mm	10	405483 ³	02197863	2534071	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

Klebekopplung | Stomahesive™ Hautschutz | hydrokolloider Haftrand | in der Schweiz: Basisplatte
Flexibel Hydroflex | HMV-Nr. 29.26.05.0099¹ | 29.26.05.1050²

Option	Farbcode	Haftring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	35 mm	13-35 mm	10	409288 ¹	00015036	2828039	D - A - CH
	●	48 mm	13-48 mm	10	409289 ²	00015042	2828045	D - A - CH
	●	61 mm	13-61 mm	10	409290 ²	00015059	2828051	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

Klebekopplung | Stomahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand | in der Schweiz: Basisplatte Flexibel
bzw. Pre-Cut | HMV-Nr. 29.26.05.0089¹ | 29.26.05.1042² | 29.26.05.1043³ | 29.26.05.0093⁴

Option	Farbcode	Haftring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	35 mm	13-35 mm	10	405456 ¹	02197745	2534007	D - A - CH
	●	48 mm	13-48 mm	10	405457 ²	02197811	2534013	D - A - CH
	●	61 mm	13-61 mm	10	405458 ³	02197828	2534036	D - A - CH
	●	35 mm	19 mm	10	405474 ⁴	02197521	2535076	D - A - CH
	●	35 mm	22 mm	10	405475 ⁴	02197538	2535082	D - A - CH
	●	35 mm	25 mm	10	405476 ⁴	02197544	2535099	D - A - CH
	●	35 mm	28 mm	10	405477 ⁴	02197596	2535107	D - A - CH
	●	35 mm	32 mm	10	405478 ⁴	02197610	2535113	D - A - CH
	●	35 mm	35 mm	10	405479 ⁴	02197662	2535136	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ BASISPLATTE

Klebekopplung | modellierbarer, konvexer Durahesive™ Hautschutz | flexibler Kleberand
in der Schweiz: Basisplatte Konvex | HMV-Nr. 29.26.06.1014

Option	Farbcode	Hafring- größe	Stoma- größe	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharma- code (CH)	verfügbar in
	●	35 mm	13-22 mm	5	409271	02463069	2535142	D - A - CH
	●	48 mm	22-33 mm	5	409272	02463075	2535159	D - A - CH
	●	61 mm	33-45 mm	5	409273	02463098	2535165	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | klein

Aktivkohlefilter | beidseitiges, weiches Beutelvlies | Volumen: 200 ml | HMV-Nr. 29.26.04.1068

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	30	416777	06461618	4719679	D - A - CH
●	48 mm	30	416781	06461653	4719774	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

opak (beige) | standard

Aktivkohlefilter | beidseitiges, weiches Beutelvlies | Volumen: 450 ml | HMV-Nr. 29.26.01.0065

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	30	416775	06461593	4719610	D - A - CH
●	48 mm	30	416779	06461630	4719722	D - A - CH
●	61 mm	30	416783	06461682	4719805	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ GESCHLOSSENER BEUTEL

transparent | standard

Aktivkohlefilter | einseitiges, weiches Beutelvlies | Volumen: 450 ml | HMV-Nr. 29.26.01.0065

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	30	416774	06461587	4719604	D - A - CH
●	48 mm	30	416778	06461624	4719691	D - A - CH
●	61 mm	30	416782	06461676	4719797	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ AUSSTREIFBEUTEL

opak (beige) | standard

InvisiClose™ Verschluss | Aktivkohlefilter | beidseitiges, weiches Beutelvlies | praktische Einstecktasche
Volumen: 500 ml | HMV-Nr. 29.26.02.0084

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	416796	06461742	4719857	D - A - CH
●	48 mm	10	416799	06461765	4719892	D - A - CH
●	61 mm	10	416902	06461788	4719946	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™+ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | standard

InvisiClose™ Verschluss | Aktivkohlefilter | einseitiges, weiches Beutelvlies | praktische Einstecktasche
Volumen: 500 ml | HMV-Nr. 29.26.02.0084

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	416795	06461736	4719840	D - A - CH
●	48 mm	10	416798	06461759	4719863	D - A - CH
●	61 mm	10	416901	06461771	4719917	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ AUSSTREIFBEUTEL

transparent | extragrob

einseitige, weiche Textiloberfläche | 10 Klammern | HMV-Nr. 29.26.02.0043

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	89 mm	10	405406	02249844	2535202	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | klein

Hahn | Rücklaufsperrre | einseitige, weiche Textiloberfläche | Volumen: 350 ml | 2 Adapter
 HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405446	02197900	2535610	D - A - CH
●	48 mm	10	405447	02197946	2535627	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ UROSTOMIEBEUTEL

opak (beige) | groß

Hahn | Rücklaufsperrre | einseitige, weiche Textiloberfläche | Volumen: 550 ml | 2 Adapter
 HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405448	02197952	2535544	D - A - CH
●	48 mm	10	405449	02197969	2535550	D - A - CH
●	61 mm	10	405450	02197975	2535567	D - A - CH



ESTEEM SYNERGY™ UROSTOMIEBEUTEL

transparent | groß

Hahn | Rücklaufsperrre | einseitige, weiche Textiloberfläche | Volumen: 550 ml | 2 Adapter
 HMV-Nr. 29.26.03.0031

Farbcode	Haftringgröße	Inhalt Packung	Art.-Nr. REF	PZN (D)	Pharmacode (CH)	verfügbar in
●	35 mm	10	405451	02197981	2535573	D - A - CH
●	48 mm	10	405452	02197998	2535596	D - A - CH
●	61 mm	10	405453	02198006	2535604	D - A - CH

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Bestellung eines zweiteiligen Systems bei der Basisplatte und beim Beutel die gleiche Größe wählen. Nutzen Sie am besten die unterschiedliche Farbcodierung zur Orientierung, die auf der Verpackung angebracht ist.

FARBCODE	●	●	●	●
HAFTRING-GRÖSSE	35 mm	48 mm	61 mm	89 mm
ICONS				
	modellierbar	ausschneidbar	vorgestanzt	

Deutschland

ConvaTec (Germany) GmbH
Gisela-Stein-Straße 6
81671 München
www.convatec.de

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 78 66 200
E-Mail: convatec.servicede@convatec.com
Mo.-Fr.: 8.30-16.30 Uhr

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 16 24 381
E-Mail: de.kundenservice@convatec.com

Österreich

ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
1010 Wien
www.convatec.at

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 21 63 39
Mo.-Fr.: 8.30-16.30 Uhr
E-Mail: convatec.austria@convatec.com

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 20 40 34
E-Mail: at.kundenservice@convatec.com

Schweiz

ConvaTec (Switzerland) GmbH
Mühlentalstraße 38
8200 Schaffhausen
www.convatec.ch

Kundenberatung:

Telefon: 0 800 / 55 11 10
Mo.-Fr.: 8.30 - 17.00 Uhr
E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Bestellungen:

Telefon: 0800 / 55 11 10
E-Mail: ch.kundenservice@convatec.com

Unsere Kundenberatung ist kostenfrei und vertraulich.

