




ESTEEM®

Einteilige Stomaversorgung




1

Anbringen des Beutels

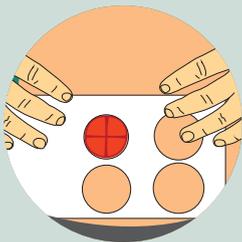

Messen und bestimmen Sie die korrekte Stomagröße.

Für die ausschneidbare Stomaversorgung:

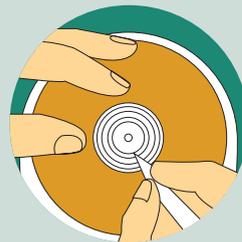

Belassen Sie die Abziehfolie zunächst auf dem Hautschutz und nutzen Sie die vorgezeichneten Linien als Hilfe zum Anzeichnen der Kontur des Stomas.



Schneiden Sie den Hautschutz etwas außerhalb der angezeichneten Linie aus und achten Sie dabei darauf, nicht die Beutelfolie zu beschädigen. Schneiden Sie nicht über die äußerste Linie auf dem Abziehpapier hinaus.


Für die modellierbare Stomaversorgung:



Entfernen Sie die modellierbare Hautschutz-Scheibe vom Beutel.




Entfernen Sie die Abziehfolie, die mit der „1“ gekennzeichnet ist. Diese ist die Seite, die modelliert wird.

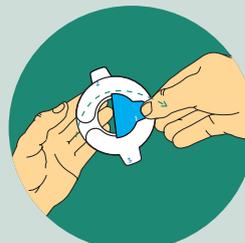


Rollen und modellieren Sie die Hautschutz-Scheibe, bis die Größe des Stomas erreicht ist. **Bitte dehnen oder schneiden Sie die Hautschutz-Scheibe nicht zu.** Halten Sie die Öffnung der Scheibe fest, wenn sie die richtige Größe und Form hat.




Entfernen Sie nun die Abziehfolie, die mit der „2“ gekennzeichnet ist. Diese Seite wird auf die Haut aufgebracht.

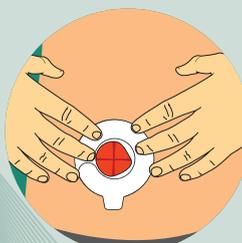


Platzieren Sie die Hautschutz-Scheibe um das Stoma. Modellieren Sie den Rollkragen um das Stoma herum an, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

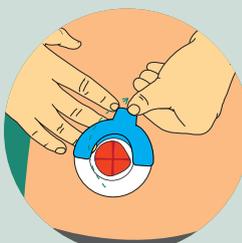

Entfernen Sie die Abziehfolie, die mit der „3“ gekennzeichnet ist.

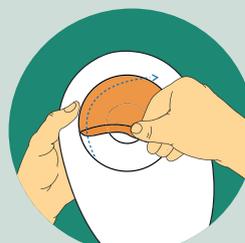


Entfernen Sie die Abziehfolie vom Hautschutz des Beutels.

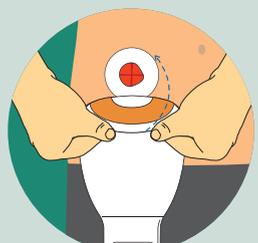

Platzieren Sie den Beutel auf der Hautschutz-Scheibe. Drücken Sie den Hautschutz des Beutels 30 Sekunden lang sanft auf der Haut an.

2


Verschließen, Entleeren und Reinigen der Ausstreifbeutel mit integriertem InvisiClose® Verschluss

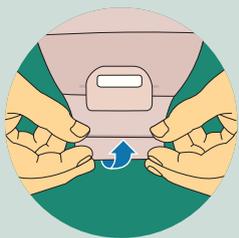


Falten Sie den InvisiClose® Verschluss am Ende beginnend zusammen, bis die Verschluss-Streifen übereinander liegen.



Drücken Sie die Verschluss-Streifen auf der gesamten Breite fest zusammen, bis sie fest geschlossen sind.

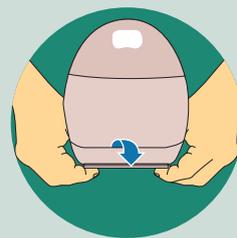

Falls erwünscht, können Sie den Auslass in die Einstecktasche stecken. Dazu einfach die Einstecktasche mit Daumen und Zeigefinger um den Auslass stülpen.

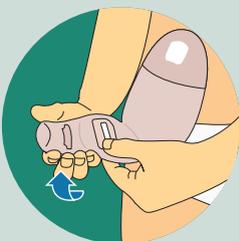

Um den Beutel zu entleeren, heben Sie den Auslass an und öffnen Sie die Sicherheitslasche. Anschließend klappen Sie das Beutelige vollständig auf.




Reinigungsempfehlung:
Halten Sie den Ausstreifbeutel mit einer Hand fest. Zum Entleeren drücken Sie den Auslass an beiden Enden mit den Fingern der anderen Hand zusammen.



Reinigen Sie die Innenfläche des Auslasses mit Toilettenpapier oder Feuchttüchern. Der Auslass kann auch behutsam mit pH-neutraler Seife und Wasser gereinigt werden.

3

Verschließen, Entleeren und Reinigen der Urostomiebeutel mit integriertem Knickverschluss

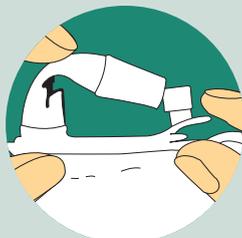


Knicken Sie den integrierten Auslass in Richtung des Verschluss-Stopfens.



Stülpen Sie den integrierten Auslass über den Verschluss-Stopfen und drücken Sie beide fest zusammen.



Um den Beutel zu entleeren heben Sie den Auslass an und ziehen Sie den Auslass vom Verschluss-Stopfen.

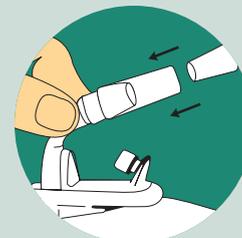


Zum Anschluss an einen Nachtbeutel verbinden Sie den Adapter mit dem Knickverschluss. Verbinden Sie den Konus des Nachtbeutels mit dem Schlauchende des Adapters.

Achtung! Verwenden Sie bei den Esteem® Urostomiebeuteln nur den beiliegenden Adapter.

4


Entfernen des Beutels

Für die ausschneidbare und vorgestanzte Stomaversorgung:

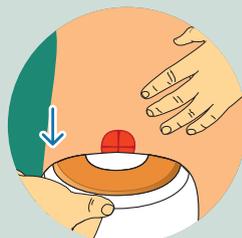

Zum Entfernen des alten Beutels lösen Sie langsam mit einer Hand die Haftfläche von oben nach unten ab, während Sie mit der freien Hand die Haut oberhalb der Haftfläche sanft zurückdrücken.

Für die modellierbare Stomaversorgung:

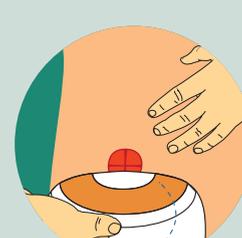

Wenn der Beutel gewechselt werden muss, werden Beutel und Hautschutz-Scheibe in einem Stück entfernt.