



NATURA™

BASISPLATTE MIT AKKORDEON-RASTRING

ausschneidbar oder modellierbar | plan und konvex



1 Anbringen der Basisplatte



Messen und bestimmen Sie die korrekte Stomagröße.



ausschneidbar

Markieren Sie die Stomagröße auf der Stomaschablone, die auf der Rückseite des Hautschutzes aufgebracht ist. **Schneiden Sie die Öffnung ca. 3 mm größer als die Markierung aus.**



modellierbar

Oder: Auf der Rückseite der Basisplatte befindet sich eine Abziehfolie. Bitte belassen Sie sie vorerst, denn sie ist als Modellierhilfe nützlich. **Rollen und modellieren Sie den Hautschutz, bis die Größe des Stomas erreicht ist. Bitte dehnen, ziehen oder schneiden Sie die Hautschutzfläche nicht zu. Halten Sie die Öffnung im Hautschutz fest, wenn sie die richtige Größe und Form hat.**



Entfernen Sie nun die Abziehfolie und zentrieren Sie die Öffnung über dem Stoma. Bitte bringen Sie die Basisplatte auf trockener und sauberer Haut an.



Entfernen Sie das Trägerpapier und platzieren Sie die Basisplatte um das Stoma.



Drücken Sie das dem Stoma am nächsten liegende modellierte Hautschutzmaterial mit einer kreisförmigen Bewegung an und halten Sie es für ca. 30 Sekunden fest.

2 Anbringen des Beutels



Ziehen Sie die Beutelfolien leicht auseinander, damit Luft eindringen kann.



Greifen Sie mit beiden Händen unter den Akkordeon-Rastring und **ziehen Sie ihn heraus**. Richten Sie den Rastring der Basisplatte und den Rastring des Beutels aufeinander aus.



Verbinden Sie die beiden Rastringe, indem Sie mit den Daumen rundherum leichten Druck auf den Beutelastring ausüben, bis Sie einen „Klick“ hören. Durch leichtes Zusammendrücken erhält der Rastring ein flaches Profil.

3 Für Ausstreifbeutel mit integriertem InvisiClose™ Verschluss



Falten Sie den InvisiClose™ Verschluss am Ende beginnend zusammen, bis die Verschluss-Streifen übereinander liegen.



Drücken Sie die Verschluss-Streifen auf der gesamten Breite fest zusammen, bis sie fest geschlossen sind.



Falls erwünscht, können Sie den Auslass in die Einstecktasche stecken. Dazu einfach die Einstecktasche mit Daumen und Zeigefinger um den Auslass stülpen.



Um den Beutel zu entleeren, heben Sie den Auslass an und öffnen Sie die Sicherheitslasche. Anschließend klappen Sie das Beutelende vollständig auf.



Reinigungsempfehlung: Halten Sie den Ausstreifbeutel mit einer Hand fest. Zum Entleeren drücken Sie den Auslass an beiden Enden mit den Fingern der anderen Hand zusammen.



Reinigen Sie die Innenfläche des Auslasses mit Toilettenpapier oder Feuchttüchern. Der Auslass kann auch behutsam mit pH-neutraler Seife und Wasser gereinigt werden.

4 Für Urostomiebeutel mit integriertem Softverschluss



Verschließen Sie den Urostomiebeutel, indem Sie den Stopfen des Softverschlusses fest in den Auslass stecken. Um den Beutel zu entleeren, entfernen Sie den Stopfen wieder.



Zum Anschließen an einen Nachtbeutel verbinden Sie das Anschluss Stück des Adapters mit dem Softverschluss. Verbinden Sie den Konus des Nachtbeutels mit dem Schlauchende des Adapters.

Achtung! Verwenden Sie bei den NATURA™ Urostomiebeuteln nur den beiliegenden Adapter.

5 Entfernen des Beutels und der Basisplatte



Um den Beutel von der Basisplatte zu trennen, halten Sie den Rastring mit einer Hand vorsichtig zurück und nehmen Sie den Beutel ab.



Ziehen Sie den Hautschutz vorsichtig von oben nach unten ab. Halten Sie die umgebende Haut dabei leicht fest.

ConvaTec (Germany) GmbH
Gisela-Stein-Straße 6
81671 München
www.convatec.de

Kundenberatung:
Telefon: 0 800 / 78 66 200
Mo.-Fr.: 8.30 - 16.30 Uhr
E-Mail: convatec.servicede@convatec.com

ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
1010 Wien
www.convatec.at

Kundenberatung:
Telefon: 0 800 / 21 63 39
Mo.-Fr.: 8.30 - 16.30 Uhr
E-Mail: convatec.austria@convatec.com

ConvaTec (Switzerland) GmbH
Mühlentalstraße 38
8200 Schaffhausen
www.convatec.ch

Kundenberatung:
Telefon: 0 800 / 55 11 10
Mo.-Fr.: 8.30 - 17.00 Uhr
E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com