
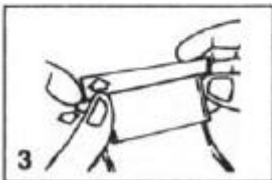
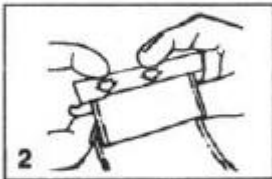


SUR-FIT®/ACTIVE LIFE®

### PENUTUP EKOR

Arahan penggunaan

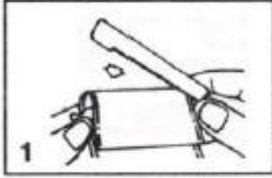


BAHASA MELAYU-Arahan penggunaan

**NOTA:** Sekiranya kolar tali pinggang akan digunakan, penutup ekor hendaklah dipasang selepas kantung telah dilalukan melalui bukaan kolar.

1. Penutup ekor boleh dipasang *sebelum* penggunaan kantung. Lipat ekor kantung di atas hujung "pisau" penutup *hanya sekali* seperti yang ditunjukkan. Pegang di tempatnya.
2. Tekan dengan kemas di atas palang bar yang dinaikkan (terutama di tengah) sehingga ia "terkunci" tutup dengan kemas.
3. Untuk menanggalkan penutup, pisahkan hujung "pisau" dari palang seperti yang ditunjukkan.

BAGAIMANA IA DIBEKALKAN

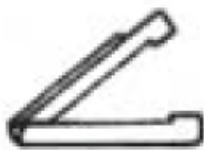

### PENUTUP EKOR

Sekotak dengan 10 penutup