



# Diamonds™

SACHET KAWALAN PENGEGELAN DAN BAU

bm

**Penerangan Produk:** Sachet Kawalan Pengegelan dan Bau

**Tujuan Penggunaan:** ConvaTec Diamonds™ bertujuan untuk mengegel kandungan ileostomi atau Kantung kolostomi, atau beg koleksi sistem pengurusan tinja, dan untuk membantu mengurangkan atau menghilangkan bau yang tidak diinginkan dan berlebihan

**Petunjuk untuk digunakan:** Untuk digunakan dengan najis separuh terbentuk hingga cair

**Pengguna yang dimaksudkan:** Profesional Penjagaan Kesihatan, Penjaga dan pesakit yang mempunyai stoma

#### Arahan penggunaan:

1- Letakkan satu sachet penuh ke dalam kantung anda. Jangan buka sachet.

2- Kosong dan buang kandungan kantung seperti biasa.

Sachet tambahan boleh ditambah melalui outlet kantung selepas mengosongkannya.

**Sila ambil perhatian:** Output anda mungkin kelihatan lebih gelap daripada biasa dan/atau mungkin mengandungi tompok hitam. Hal ini merupakan petunjuk jelas sistem Kawalan Bau ActiveOne™. Jika pemantauan mengeluarkan warna, hentikan penggunaan buat sementara.



**Amaran dan Langkah Berjaga-Jaga:** Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.

Jangan Makan. Guna hanya seperti diarahkan. Untuk kegunaan luar sahaja. Jika terkena mata, bilas segera dengan air bersih dan dapatkan nasihat perubatan. Selepas digunakan, produk ini mungkin ada potensi bahaya. Kendalikan dan buang sesuai dengan amalan perubatan yang diterima dan sesuai dengan tempat setempat undang-undang dan peraturan. Sekiranya semasa penggunaan peranti ini atau akibat penggunaannya kejadian serius telah berlaku sila laporkan kepada pengilang dan

SI2174GA  
Disemak 2015-07

pihak berkuasa nasional anda.

**Storan:** Simpan di tempat yang kering dan sejuk.



Berhati-hati



Pastikan Kering



Wakil yang diberi kuasa



Pengilang



Nombor katalog



Baca Arahan  
Penggunaan



Peranti Perubatan