



## Penampal Stomahesive

### Sawar & Pengisi Kulit Pelindung

#### Arahan Penggunaan

#### PENERANGAN PRODUK

Penampal Stomahesive adalah sawar kulit yang mudah, pengisi yang sangat berkesan, dan pelindung yang direka khas untuk digunakan di sekitar kolostomi, ileostomi, atau stoma kencing. Penampal ini juga boleh digunakan untuk melindungi kulit yang terdedah di sekeliling tapak fistula, di antara pangkal stoma dan bukaan di sawar kulit, dan sebagai pengisi untuk lipatan kulit, permukaan kulit yang tidak rata dan parut.

#### KONTRAINDIKASI

Jangan gunakan pada individu yang diketahui mempunyai sensitiviti terhadap penampal atau bahan-bahannya:

#### PENTING:

1. Untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan sapu ke dalam luka terbuka atau ulser kulit.
2. Mengandungi alkohol.
3. Sekiranya kerengsaan berlaku, hentikan penggunaan dan rujuk pakar kesihatan.

#### ARAHAN PENGGUNAAN

##### PEMASANGAN KEPADA SAWAR KULIT

- Sediakan sawar kulit seperti yang diterangkan dalam *Arahan Penggunaan* yang disertakan bersama sawar kulit.
- Sapu bulatan tampalan di bahagian belakang sawar kulit di sekeliling lubang. Jangan sebarkan penampal. Tunggu satu minit sebelum menggunakan sawar kulit.
- Untuk hasil yang terbaik, picit tiub dari bahagian bawah dan ratakan sambil anda naik ke atas.

##### PEMASANGAN KEPADA KULIT

- Sapu Penampal Stomahesive untuk mengisi lekukan dan kontur kulit yang tidak teratur. Sekiranya diperlukan, gunakan jari atau spatula yang dibasahkan untuk menyebarkan tampalan agar sama rata. (1)

#### ARAHAN UMUM

- Pasang sawar kulit dan tekan dengan kuat di sekitar pangkal stoma. (2)
- Tampalan tambahan boleh dipasang untuk lebih melindungi kulit di sekeliling stoma pada bila-bila masa.
- Ketatkan penutup dengan kemas.

#### MENANGGALKAN PENAMPAL STOMAHESIVE

Penampal Stomahesive mudah dikeluarkan selepas ia telah diletakkan selama 48 jam. Sekiranya penampal mesti dikeluarkan lebih awal, gunakan air suam. Ia tidak perlu untuk mengeluarkan semua kesan penampal sebelum pemasangan baharu.

#### PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ConvaTec, hubungi kami di alamat di bawah.

© 2017 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.



Baca Arahan Penggunaan

**REF**

Nombor Kod



Suhu storan

**LOT**

Nombor lot/kawalan



Tarikh Tamat Tempoh



Pengilang