

1024926G3  
Disemak 2018-09

## STERIL

### GEL Hydroactive™

#### bm PENERANGAN PRODUK

Gel DuoDERM™ merupakan gel steril yang terdiri daripada hidrokoloid semula jadi (pektin, sodium karboksimetilselulosa) dalam alat yang jelas dan likat. Gel DuoDERM membentuk persekitaran luka lembap yang menyokong proses penyembuhan dengan membantu debridmen autolitik dan membenarkan penanggalan tidak traumatik pembalut sekunder tanpa merosakkan tisu yang baru terbentuk.

#### INDIKASI

Gel DuoDERM Gel direka untuk penghidratan dan pengurusan luka separa dan dalam seperti luka tekan, ulser kaki, dan ulser diabetik.

#### KONTRAINDIKASI


Jangan gunakan pada individu dengan sensitiviti yang diketahui kepada gel atau komponennya.

#### LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

- 1) Penjajahan luka kronik adalah biasa dan bukan kontraindikasi terhadap penggunaan Gel DuoDERM.
- 2) Di mana jangkitan disyaki atau membentuk semasa penggunaan Gel DuoDERM, terapi antibiotik yang sesuai perlu dimulakan. Penggunaan Gel DuoDERM boleh diteruskan, tetapi kemajuan penyembuhan luka perlu dipantau dengan teliti dan semua rawatan perlu di bawah penyeliaan perubatan. Dengan kehadiran jangkitan anaerobik, terapi oklusif tidak disyorkan.
- 3) Kawalan glukosa darah serta langkah bantuan tekanan perlu disediakan dengan ulser kaki diabetes.
- 4) Persekitaran luka lembap yang dihasilkan oleh gel boleh menyebabkan debridmen autolitik yang boleh menyebabkan luka akan kelihatan lebih besar selepas beberapa penukaran pembalut pertama.

#### APLIKASI DAN PENANGGALAN

1. Membersihkan tapak luka, bilas dengan baik dan keringkan kulit sekitar.
2. Buka penutup tiub dan tanggalkan gelang putih keselamatan.
3. Gantikan topi untuk menusuk membran tiub.

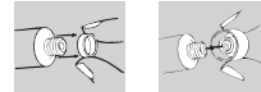

4. Guna Gel DuoDERM secara terus ke dalam luka. Jangan menutupi luka di luar paras kulit sekitar.
5. Gel DuoDERM perlu ditukarkan apabila pembalut peutup bocor atau ditanggalkan untuk rutin pertukaran pembalut. Masa pemakaian maksimum yang disyorkan adalah tujuh hari.

#### LANGKAH BERJAGA-JAGA STORAN

Simpan sehingga 25°C; elakkan pembekuan.

Untuk kegunaan tunggal. Produk ini dibekalkan steril. Jika bungkus produk rosak, jangan gunakan.

Dibuat di U.K.

© 2018 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagangan ConvaTec Inc.



Jangan Guna Semula



Batas suhu



Nombor lot



Baca Arahan Penggunaan



Disterilkan dengan stim atau  
haba kering



Tarikh Tamat Tempoh



Jangan guna jika  
Bungkus Rosak



Nombor katalog



Jangan Steril Semula