

## STERIL

### PEMBALUT CGF™ EKSTRA NIPIS

#### *Untuk perlindungan dan pengurusan ulser dermis superfisial*

### PENERANGAN PRODUK

Pemalut DuoDERM Ekstra Nipis adalah sangat fleksibel, pemalut formula gel kawalan yang direka untuk digunakan pada luka kering kepada luka eksudat ringan. Pemalut DuoDERM Ekstra Nipis sangat sesuai di kawasan yang tertakluk kepada geseran dan yang memerlukan kontur, cth., siku, tumit.

Pemalut DuoDERM Ekstra Nipis berinteraksi dengan kelembapan luka menghasilkan jisim lembut yang membolehkan penanggalan pemalut dengan sedikit atau tiada kerosakan pada tisu yang baru terbentuk. Ia membantu mengasingkan luka terhadap bakteria dan pencemaran luaran yang lain.

### INDIKASI

- Pengurusan ulser dermis superfisial kering kepada eksudat ringan.
- Luka pasca pembedahan.
- Pemalut pelindung.

### KONTRAIKASI

Tidak seharusnya digunakan pada individu yang sensitif kepada atau yang mempunyai tindak balas alahan terhadap pemalut atau komponennya.

### LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

Apabila Digunakan pada Ulser Dermis:

1. Penggunaan awal produk ini perlu berada di bawah arahan pakar kesihatan.
2. Pemalut DuoDERM Ekstra Nipis menyediakan pengurusan setempat dari tapak luka. Dalam luka kronik aspek lain seperti penyusunan semula sokongan pesakit dan pemakanan tidak seharusnya diabaikan.
3. Peningkatan Saiz Luka: Kerosakan tisu yang lebih dalam mungkin sudah berlaku di bawah ulser dermal superfisial yang jelas. Apabila menggunakan sebarang pemalut oklusif, khususnya dalam kehadiran bahan nekrotik, luka mungkin meningkat dalam saiz dan kedalaman semasa fasa awal pengurusan. Ulser kaki yang disebabkan oleh vaskulitis boleh dengan cepat merosot semasa eksaserbasi gangguan asas.

**Bau:** Luka, terutamanya yang besar atau nekrotik, adalah sering disertai dengan bau yang tidak menyenangkan; walau bagaimanapun, ini tidak semestinya menunjukkan jangkitan. Bau sepatutnya hilang apabila luka itu dibersihkan (lihat jangkitan).

**Jangkitan:** Sekiranya tanda jangkitan klinikal terbentuk, seperti: bau busuk tidak dikenali atau perubahan dalam warna eksudat, demam atau selulitis (kelembutan dan eritema di kawasan luka), kultur bakteria tapak luka perlu diambil. Jika terdapat tanda klinikal jangkitan, rawatan perubatan yang sesuai perlu dimulakan. Pemalut DuoDERM boleh diteruskan semasa rawatan mengikut budi bicara doktor.

### MENYEDIAKAN DAN MEMBERSIHKAN TAPAK LUKA

Pemalut DuoDERM Ekstra Nipis adalah steril dan perlu dikendalikan dengan betul. Pilih pemalut yang akan memanjang sekurang-kurangnya 1 ¼ inchi di luar margin luka. Bersihkan luka mengikut amalan hospital. Irigasi dengan salin dan keringkan kulit di sekelilingnya untuk memastikan ia bebas daripada sebarang bahan berminyak.

### MEMASANG PEMBALUT

- 1) Minimumkan sentuhan jari dengan permukaan pelekat.
- 2) Pasang dalam gerakan menggulung, elakkan regangan.

3) Ratakan pada tempatnya, terutamanya di sekitar tepi.

4) Apabila memasang pada tumit atau siku, ia mungkin berguna untuk memotong torehan kira-kira 1/3 di setiap sisi pembalut untuk memudahkan pemasangan.

5) Pada ulser sakral, tekan ke lipatan anus (a) Bergantung pada lokasi dan kedalaman ulser sakral, pembalut yang berbentuk segi tiga boleh dipasang dalam bahagian berbeza (b).

6) Arah ini boleh memberi manfaat kepada ulser yang dekat dengan pinggir anus.

7) Gunakan pita hipoalergenik di sekitar tepi untuk mengemaskannya.

#### **MENANGGALKAN PEMBALUT**

1) Tekan pada kulit dan angkat tepi pembalut dengan berhati-hati. Terus di sekitarnya sehingga semua sisi telah bebas. Ulangi prosedur pembersihan. Ia adalah tidak perlu untuk menanggalkan semua sisa bahan pembalut dari kulit sekitarnya.

Biarkan pembalut di tempatnya (tidak lebih daripada 7 hari) kecuali jika tidak selesa, bocor atau terdapat tanda klinikal mengenai jangkitan.

Dibuat di Republik Dominica



Jangan Guna Semula

**STERILE R**

Disterilkan dengan Sinaran Gamma

**REF**

Nombor katalog



Pastikan kering



Batas suhu



Jangan Guna jika Bungkus Rosak



Baca Arahan Penggunaan

**LOT**

Nombor Lot



Tarikh Tamat Tempoh



Pengilang