

1704695G2
Disemak 2017-06

Rx sahaja
STERIL

Pemalut Hydrofiber™ dengan Fiber Penguat

ARAHAN PENGGUNAAN
BAHASA MELAYU

PENERANGAN PRODUK

Pemalut AQUACEL™ EXTRA™ Hydrofiber™ dengan Fiber Penguat adalah pemalut yang lembut, steril, bukan tenunan yang terdiri daripada fiber hidrokoloid (sodium karboksimetilselulosa). Pemalut yang amat menyerap ini menyerap bendalir luka dan mencipta gel lembut, mengekalkan persekitaran lembap yang menyokong proses penyembuhan badan dan membantu pengeluaran bahan yang tidak perlu dari luka (debridmen autolitik), tanpa merosakkan tisu yang baru terbentuk.

Pemalut primer ini perlu digunakan dengan pemalut penutup sekunder.

INDIKASI

Di bawah pengawasan seorang pakar kesihatan, Pemalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat boleh digunakan untuk pengurusan:

- Ulser kaki, ulser tekanan (Peringkat II-IV) dan ulser diabetik
- Luka pembedahan (pasca pembedahan, tapak penderma, dermatologi)
- Luka terbakar ketebalan separa (darjah kedua)
- Luka traumatik atau pembedahan yang dibiarkan sembuh melalui intensi sekunder seperti insisi pembedahan yang membengkak
- Luka pembedahan yang disembuhkan dengan intensi primer, seperti insisi dermatologi dan pembedahan (cth., ortopedik dan vaskular)
- Luka traumatik
- Luka yang mudah berdarah, seperti luka yang telah dikeluarkan secara mekanikal atau pembedahan dan tapak derma
- Luka menyakitkan

KONTRAINDIKASI

Pemalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat tidak boleh digunakan pada individu yang sensitif kepada atau yang mempunyai reaksi alahan terhadap pemalut atau komponennya.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMBERHATIAN

• **Amaran:** Kesterilan adalah dijamin melainkan jika beg telah rosak atau dibuka sebelum penggunaan.

• Peranti ini hanya untuk penggunaan tunggal sahaja dan tidak boleh digunakan semula. Penggunaan semula boleh menyebabkan peningkatan risiko jangkitan dan pencemaran silang. Sifat fizikal peranti mungkin tidak lagi optimum untuk kegunaan asal.

• Sekiranya anda mendapati kerengsaan (kemerahan, keradangan), maserasi (pemutihan kulit), hipergranulasi (pembentukan tisu yang berlebihan) atau sensitiviti (tindak balas alergi), rujuk pakar kesihatan.

• Sekiranya anda mengalami kesukaran untuk menanggalkan pemalut, pemalut perlu tepu sepenuhnya dengan salin steril dan dibiarkan menyerap ke dalam pemalut.

• Pemalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat menyediakan persekitaran yang lembap yang menyokong pertumbuhan saluran darah baharu, oleh itu, saluran darah yang baru terbentuk mungkin sekali-sekala menghasilkan bendalir luka yang bercampur darah.

• Pemalut boleh digunakan pada luka yang dijangkiti hanya di bawah pakar kesihatan.

• Pemalut luka ini tidak seharusnya digunakan dengan produk penjagaan luka yang lain tanpa terlebih dahulu berunding dengan pakar kesihatan.

Di samping itu, untuk ulser kaki, ulser tekanan, ulser diabetik, luka terbakar darjah kedua, tapak penderma, luka pembedahan atau traumatik yang dibiarkan sembuh dengan intensi utama atau sekunder:

• Rawatan luka yang disenaraikan di atas perlu berada di bawah pengawasan daripada seorang pakar kesihatan.

• Langkah sokongan yang sesuai hendaklah diambil di mana ditunjukkan (cth., penggunaan pemalut mampatan berperingkat dalam pengurusan ulser kaki vena atau langkah pelepasan tekanan dalam pengurusan ulser tekanan).

- Penjajahan luka kronik adalah perkara biasa dan bukannya kontraindikasi kepada penggunaan pembalut. Pembalut boleh digunakan pada luka yang dijangkiti di bawah penyeliaan perubatan bersama dengan terapi yang sesuai dan pemantauan luka yang kerap.

- Kawalan glukosa darah, serta langkah sokongan yang bersesuaian, perlu diberikan dengan ulser kaki diabetes.

- Dalam luka terbakar darjah kedua, pertimbangkan prosedur pembedahan alternatif jika luka belum diepithelialias semula selepas 14 hari.

- Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai span pembedahan.

Penggunaan Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat belum dikaji dalam luka yang disebabkan oleh herpes simpleks atau impetigo.

ARAHAN PENGGUNAAN

- Sebelum mengenakan pembalut, bersihkan kawasan luka dengan pembersih luka yang sesuai.

- Pasang pembalut kepada luka dan tutup dengan kasa pembalut penahan kelembapan (iaitu DuoDERM™ Ekstra Nipis, Versiva™ XC™) atau pembalut lain yang sesuai. Lihat sisipan pakej individu untuk mendapatkan arahan lengkap. Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat perlu bertindih 1 cm atau ½ inci ke atas kulit sekitar luka.

- Semua luka perlu diperiksa secara kerap. Tanggalkan Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat apabila dinyatakan secara klinikal (iaitu kebocoran, pendarahan berlebihan, rasa syak mengenai jangkitan).

- Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat direka untuk kekal di tempatnya selama maksimum tujuh hari. Pembalut perlu ditukar apabila ia tepu dengan bendalir luka atau jika pembalut penutup bocor atau tepi pembalut penutup berkumpul atau menggulung ke atas.

- Di tapak penderma, Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat boleh dibiarkan di tempatnya sehingga 14 hari.

UNTUK LUKA TERBAKAR DARJAH KEDUA

- Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat perlu bertindih 5 cm atau 2 inci ke atas kulit yang mengelilingi luka terbakar atau Pembalut AQUACEL Hydrofiber lain di sebelah.

- Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat perlu ditutup dengan kasa steril dan dikemaskan dengan pita perubatan.

- Tanggalkan pembalut penutup kasa secara berkala dan periksa Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat ketika ia masih berada di tempatnya pada luka terbakar.

- Tanggalkan Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat apabila dinyatakan secara klinikal (cth. kebocoran, pendarahan berlebihan, tanda klinikal jangkitan). ***Untuk luka terbakar darjah kedua, Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat boleh dibiarkan di tempatnya selama 14 hari dengan syarat tiada bukti klinikal jangkitan. Sambil luka terbakar diepithelialias semula, Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat akan terpisah atau mudah ditanggalkan.***

UNTUK LUKA KERING DAN MELELEH MINIMUM

- Letakkan Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat di dalam luka dan kemudian basahkan dengan salin steril di atas kawasan luka sahaja. Ciri penyerapan menegak bagi Pembalut AQUACEL EXTRA Hydrofiber dengan Fiber Penguat akan membantu mengekalkan kawasan lembap di atas luka sahaja dan mengurangkan risiko maserasi.

- Tutup pembalut dengan pembalut penahan kelembapan seperti DuoDERM Ekstra Nipis untuk mengelakkan mengering daripada pembalut dan lekatan pembalut kepada luka.

Produk ini hanya untuk penggunaan tunggal sahaja dan dibekalkan steril.

Buang mana-mana bahagian produk yang tidak digunakan selepas membalut luka.

Jika pembungkusan produk rosak, jangan gunakan.

Simpan di tempat yang sejuk dan kering.

Sekiranya maklumat atau panduan lanjut diperlukan, sila hubungi Perkhidmatan Profesional ConvaTec.

Dibuat di UK

©2017 ConvaTec Inc.

™ menunjukkan tanda dagangan ConvaTec Inc. AQUACEL, logo AQUACEL, Hydrofiber, DuoDERM, Versiva dan Versiva XC adalah tanda dagangan berdaftar di Amerika Syarikat.



Jangan Guna jika Bungkus Rosak



Jangan Guna Semula




Disterilkan dengan Sinaran Gamma



Nombor katalog



Pastikan kering

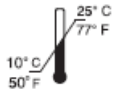

Batas suhu



Baca Arahan Penggunaan



Nombor Lot



Tarikh Tamat Tempoh



Pengilang