

BAHASA MELAYU
Wafer Durahesive®
Durahesive® FLEKSIBEL
Wafer dengan kolar fleksibel
Arahan Penggunaan

INDIKASI

Untuk pengurusan output stoma.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

INGATAN: Perlu berhati-hati apabila menggunakan produk pelekat di sekitar urostomi mengalir terutamanya apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing. Jarang sekali, laporan klinikal telah didokumenkan mengenai kewujudan pelekat dalam sistem pengumpulan buah pinggang pesakit ini. Sekiranya massa dikesan dalam saluran kencing, nilai penggunaan berterusan produk pelekat dan mulakan pengurusan klinikal yang sesuai.

Nota: Sekiranya kerengsaan berlaku, hentikan penggunaan dan rujuk pakar kesihatan.

Kulit peristom **mesti** bersih, kering dan bebas daripada bahan pelarut atau berminyak.

ARAHAN PENGGUNAAN

PERSEDIAAN WAFER

Dengan menggunakan panduan yang disediakan, pilih wafer dengan bibir yang sekurang-kurangnya 1/2 inci (13 mm) lebih besar daripada diameter paling luas stoma. **(Rajah 1)**

Jejaki garis stoma yang sama ke kertas pelepas wafer. **(Rajah 2)**

Potong di sepanjang lakaran meninggalkan sekurang-kurangnya 1/4 inci (7 mm) sawar kulit di antara lubang permulaan yang diperbesarkan dan bibir. Tanggalkan kertas pelepas. **(Rajah 3)**

PEMASANGAN WAFER


Pastikan padanan kemas di sekeliling stoma. **(Rajah 4)**

PEMASANGAN KANTUNG

Untuk memeriksa kedap bibir, tekan di bahagian bawah bibir dan gerakkan ke bahagian atas bibir. Beberapa "klik" mungkin kedengaran. **(Rajah 5)**

MENGGUNAKAN PENAPIS


UNTUK KANTUNG TERTUTUP DENGAN PENAPIS

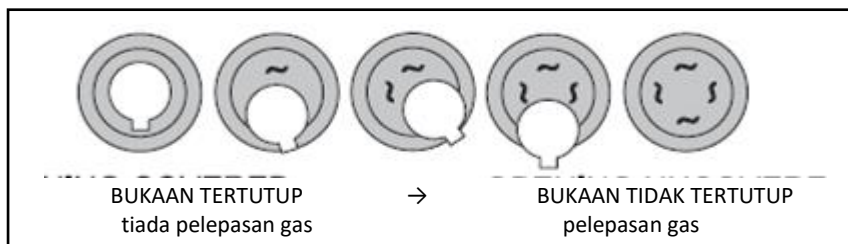

Anda mesti menutup bukaan penapis dengan penutup penapis lekatan yang disediakan semasa semua aktiviti air (mandi, mandi hujan atau berenang). Untuk membantu mengelakkan kantung terlebih kembung, jangan lupa untuk menanggalkan penutup selepas aktiviti air selesai dan kantung telah kering.

Sekiranya anda menggunakan kantung yang ditapis empat celahan, gunakan penutup penapis untuk mengawal aliran udara untuk membantu mengelakkan runtuh dan/atau kantung terlebih kembung. Biarkan satu celahan terdedah untuk aliran udara minimum. Kedudukan ini akan membantu menghalang keruntuhan kantung.

UNTUK KANTUNG TERTUTUP DENGAN PENAPIS

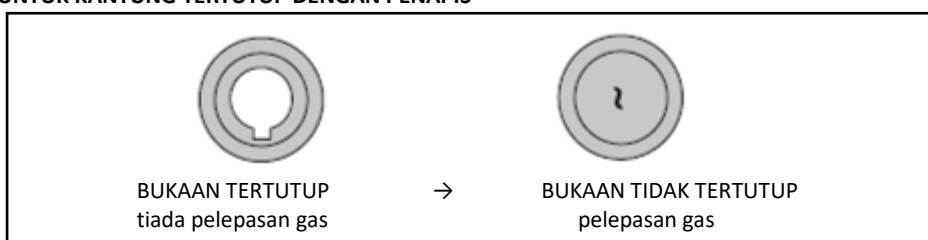

Anda mesti menutup bukaan penapis dengan penutup penapis lekatan yang disediakan semasa semua aktiviti air (mandi, mandi hujan atau berenang). Untuk membantu mengelakkan kantung terlebih kembung, ingat untuk menanggalkan penutup selepas aktiviti air selesai dan kantung telah kering.

PENANGGALAN KANTUNG (Rajah 6)

PENANGGALAN WAFER (Rajah 7)

MENGGUNAKAN OUTLET INVICICLOSE™

ARAHAN UNTUK MENUTUP KANTUNG:

Sistem penutup ekor InvisiClose terdiri daripada penutup keselamatan (A), penutup bercantum (B) dan jaluran hujung outlet (C). **(Rajah 8)**

Pegang penutup keselamatan di hadapan kantung yang mendedahkan penutup bercantum. **(Rajah 9)**

Lipat hujung ekor ke arah anda empat kali dan pastikan penutup bercantum bertindih. **(Rajah 10)**

Tekan penutup bercantum bersama-sama sehingga anda merasakan ia mengunci (KLIK) ke tempatnya di sepanjang keseluruhan kepanjangannya. (Rajah 11)

Balut penutup keselamatan di sekeliling hingga ke belakang kantung (bahagian tubuh) dan tekan penutup bercantum bersama-sama sehingga anda merasakan ia mengunci (KLIK) ke tempatnya. **(Rajah 12)**

ARAHAN UNTUK MENYALIRKAN KANTUNG:

Pusingkan bahagian belakang kantung (bahagian badan) ke arah anda. Berhati-hati angkat penutup keselamatan ke arah anda untuk membuka kunci. **(Rajah 13)**

Sambil memegang penutup keselamatan terhadap bahagian depan kantung, buka kunci penutup bercantum dengan mengangkat di sudut (A) dan bongkar lipatan sebanyak empat kali. (B) **(Rajah 14)**

Untuk memudahkan penyaliran dan/atau pembersihan, anda boleh membuka hujung ekor dengan menolak kedua-dua hujung salur hujung outlet menggunakan ibu jari dan jari telunjuk anda. **(Rajah 15)**

Sekiranya dikehendaki, ekor kantung boleh dibersihkan dengan sabun lembut dan air. Tepuk sehingga kering.

MENGGUNAKAN PENUTUP EKOR LURUS (Rajah 16)

MENGGUNAKAN PENUTUP EKOR MELENGKUNG (Rajah 17)

MENGGUNAKAN PAIP ACCUSEAL® (Rajah 18)

Untuk sambungan ke sistem saliran malam: **(Rajah 19)**

MENGGUNAKAN PAIP SALIRAN LIPATAN (Rajah 20)

Untuk sambungan ke sistem saliran malam: **(Rajah 21)**

Produk ini boleh kekal di tempatnya semasa mandi, mandi hujan atau berenang. Untuk kantung dengan penapis, tutup penapis dengan penutup penapis yang disediakan. Ketuk sehingga kering selepas terdedah kepada air.

PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ConvaTec, hubungi kami di alamat di bawah.

© 2017 ConvaTec Inc.


®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.



Baca arahan penggunaan



Penggunaan tunggal

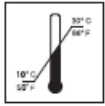

Suhu storan.



Pastikan kering. Elakkan kelembapan tinggi.



Nombor lot/kawalan