

1024973G2
Disemak 2018-10

STERIL

CarboFlex™

Pemalut Kawalan Berturutan

PENERANGAN PRODUK

Pemalut Carboflex™ merupakan pemalut tidak melekat yang steril dengan lapisan sentuhan luka penyerap (mengandungi Alginat dan Hidrokoloid), pad tengah diaktifkan arang, dan lapisan atas tahan air yang licin.

INDIKASI

Pemalut CarboFlex perlu digunakan bagi pengurusan luka berbau akut dan kronik. Ia boleh digunakan sebagai pemalut utama untuk luka cetek atau dengan luka lebih dalam sebagai pemalut sekunder di atas pengisi luka.

Pemalut CarboFlex boleh digunakan pada luka berbau yang dijangkiti di bawah penyeliaan perubatan bersama-sama dengan terapi bersesuaian dan pemantauan kerap luka.

KONTRAINDIKASI

Jangan gunakan pada individu dengan sensitiviti yang diketahui kepada pemalut atau komponennya.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

1. Langkah sokongan yang sesuai hendaklah diambil di mana dinyatakan (cth., penggunaan pemalut mampatan berperingkat dalam pengurusan ulser kaki vena, atau langkah pelepasan tekanan dalam pengurusan ulser tekanan).
2. Jarang sekali, kerengsaan dan/atau maserasi kulit dan hipergranulasi telah dilaporkan.
3. Produk ini dibekalkan steril. Jika bungkusan produk rosak, jangan gunakan.
4. Penggunaan pemalut luka CarboFlex tidak disyorkan untuk bayi yang kurang daripada 12 bulan.

PEMASANGAN PEMALUT CARBOFLEX

Pemalut ini adalah steril dan perlu dikendalikan dengan sesuai. Jika diperlukan, luka perlu didebrid dan tisu nekrotik dikeluarkan. Bersihkan tapak luka, bilas dengan baik dan keringkan kulit di sekelilingnya.

Jangan potong pemalut.

1. Pilih saiz pemalut supaya ia lebih besar daripada kawasan luka untuk memastikan pemalut menindih tepi luka sekurang-kurangnya 1 1/4" (3.2 cm). Untuk luka cetek, pemalut boleh ditempatkan terus ke atas luka sebagai pemalut utama dan untuk luka kaviti, pemalut CarboFlex boleh diletakkan di atas pengisi/gel luka sebagai pemalut sekunder.

2. Letakkan permukaan berserat (tidak berkilat) di atas luka atau pengisi luka.

3. Kemaskan pemalut CarboFlex di tempatnya di atas luka menggunakan pita atau bahan lain yang sesuai.

4. Lapisan sentuhan luka penyerap akan menarik ke atas lelehan dan membentuk gel.

5. Tukar pemalut apabila dinyatakan secara klinikal atau jika terdapat lelehan terkeluar dari lapisan atas atau jika bau tidak lagi diserap. Dengan luka berbau yang tidak dijangkiti, pemalut CarboFlex boleh ditinggalkan tanpa diganggu sehingga tiga hari. Sekiranya luka dijangkiti, pemalut CarboFlex perlu ditukar lebih kerap.

MENANGGALKAN PEMALUT CARBOFLEX

Secara berhati-hati angkat keluar dari luka dengan memegang satu sudut pemalut.

LANGKAH BERJAGA-JAGA STORAN

Simpan pada suhu bilik; elakkan simpan di dalam peti sejuk dan pendedahan kepada kelembapan tinggi.

Disterilkan dengan sinaran gamma. Untuk kegunaan tunggal.

Dibuat di UK

© 2018 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagangan ConvaTec Inc.