

bm Sawar kulit bebas sakit

Arahan penggunaan - GONCANG BETUL-BETUL SEBELUM DIGUNAKAN

- Bersihkan dan keringkan kulit sepenuhnya.
- Pegang kira-kira 10cm dari bahagian yang akan dirawat dan sapukan salutan sekata dalam gerakan menyapu.
- Pastikan ConvaTec Silesse™ benar-benar kering sebelum menyapu produk pelekat, seperti aplians atau pembalut.
- ConvaTec Silesse™ perlu diganti pada setiap perubahan pembalut atau aplians untuk mengekalkan perlindungan yang lengkap.
- Apabila tidak digunakan di bawah produk pelekat, pemasangan semula disyorkan setiap 12-72 jam, bergantung kepada keadaan permukaan kulit.
- Pembuangan biasanya tidak diperlukan. Walau bagaimanapun, ConvaTec Silesse™ boleh dibuang dengan mudah menggunakan Penghilang Pelekat Perubatan ConvaTec Niltac™.

ConvaTec Silesse™ tidak menjejaskan lekatan pembalut atau aplians, atau menyebabkan pembentukan lapisan penghalang pada permukaan kulit.

Kandungan: Kopolimer Siloksana



Ingatan:

- Gunakan hanya seperti diarahkan.
- Elakkan penggunaan di bahagian kulit yang halus atau sensitif (mata, mulut, telinga, hidung, vagina).
- Sekiranya ragu-ragu, lakukan ujian ke atas bahagian kecil sebelum digunakan.
- Hentikan penggunaan jika kerengsaan berlaku.

AMARAN! Jangan sembur pada api terbuka atau sebarang bahan pijar. Jangan merokok. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Elakkan daripada inhalasi secara langsung.



SUHU STORAN JAUHKAN DARIPADA CAHAYA MATAHARI RUJUK ARAHAN PENGGUNAAN

AMAT MUDAH TERBAKAR