

bm

**Penyingkir pelekat perubatan bebas sakit**

**Arahan penggunaan**

- Sembur ConvaTec Niltac™ di sekitar bucu pelekat dan tunggu beberapa saat.
- Perlahan-lahan tanggalkan pelekat dari kulit menggunakan ConvaTec Niltac™ tambahan untuk memudahkan penanggalannya, jika perlu.
- ConvaTec Niltac™ boleh disembur dengan aerosol terbalik; walau bagaimanapun, elakkan penggunaan berpanjangan dalam kedudukan melintang untuk memastikan bahan dorong tidak habis sebelum kandungan digunakan sepenuhnya.

Kandungan: Siloksana, bahan dorong



**Ingatan:**

- Gunakan hanya seperti diarahkan.
- Elakkan penggunaan di bahagian kulit yang halus atau sensitif (mata, mulut, telinga, vagina).
- Sekiranya ragu-ragu, lakukan ujian ke atas bahagian kecil sebelum digunakan.
- Hentikan penggunaan jika kerengsaan berlaku.

**BAHAYA!** Aerosol Sangat Mudah Terbakar. Bekas bertekanan; Boleh meletus jika dipanaskan. Lindungi daripada cahaya matahari. Jangan dedahkan kepada suhu melebihi 50°C/122°F. Jangan cucuk atau bakar, walaupun selepas digunakan. Jauhkan daripada haba/percikan api/api terbuka/permukaan panas. — Jangan merokok. Jangan sembur pada api terbuka atau sumber pencucuhan lain. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak dan haiwan peliharaan. Elakkan daripada inhalasi secara langsung.



SUHU STORAN



JAUHKAN DARIPADA CAHAYA MATAHARI



RUJUK ARAHAN PENGGUNAAN



AMAT MUDAH TERBAKAR