

1117441G3
Disemak 2018-09

STERIL

Pembalut Luka Kalsium-Sodium Alginat
ARAHAN PENGGUNAAN



Jangan gunakan semula



Disterilkan menggunakan sinaran

PENERANGAN PRODUK

Pembalut luka KALTOSTAT™ adalah lembut, putih-keputihan, pad bukan tenunan steril atau pembalut reben daripada serat alginat kalsium sodium. Serat alginat menyerap cecair luka dan bertukar kepada gel/gentian teguh. Gel ini membentuk persekitaran lembap pada antara muka luka. Gel membolehkan penanggalan bebas trauma dengan sedikit atau tiada kerosakan kepada tisu yang baru terbentuk. Bergantung pada luka, pembalut mungkin dibiarkan di tempatnya sehingga tujuh hari. Apabila bersentuhan dengan luka berdarah, Pembalut Luka KALTOSTAT™ menggalakkan hemostasis. Pembalut primer ini perlu digunakan dengan pembalut penutup sekunder.

INDIKASI

Untuk kegunaan di Kaunter, Pembalut Luka KALTOSTAT™ boleh digunakan untuk:

- melecet ringan
- pelecetan ringan
- melecur dan luka terbakar kecil

Di bawah pengawasan pakar kesihatan, Pembalut Luka KALTOSTAT™ boleh digunakan untuk pengurusan luka luaran seperti:

- ulser kaki (ulser stasis vena, ulser arteri dan ulser kaki etiologi campuran), ulser diabetik dan ulser tekanan (ketebalan separa dan penuh);
- tapak penderma, luka pembedahan yang dibiarkan sembuh oleh intensi sekunder, luka traumatik.

Pembalut Luka KALTOSTAT™ boleh juga digunakan dalam:

- pengurusan setempat pendarahan luka: melecet, pelecetan, pendarahan hidung, ekstraksi pergigian, dan debridemen luka selepas pembedahan;
- penyerapan eksudat dalam luka onkologi seperti: tumor kulit kulat, metastasis kulit dan sarcoma Kaposi.

KONTRAIKASIKASI

Pembalut Luka KALTOSTAT™ tidak boleh digunakan pada individu yang sensitif kepada atau yang mempunyai reaksi alahan terhadap pembalut atau komponennya. Pembalut Luka KALTOSTAT™ tidaksesuai untuk digunakan sebagai span pembedahan. Pembalut Luka KALTOSTAT™ tidak sesuai untuk luka berdarah yang banyak.

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

- Penggunaan pembalut luka KALTOSTAT™ tidak disyorkan untuk bayi berumur kurang daripada 12 bulan.
 - Amaran:** Kesterilan adalah dijamin melainkan jika beg telah rosak atau dibuka sebelum penggunaan. Penggunaan tunggal. •Pembalut luka ini tidak seharusnya digunakan dengan produk penjagaan luka yang lain tanpa terlebih dahulu berunding dengan pakar kesihatan.
 - Sekiranya anda mendapati kerengsaan (kemerahan, keradangan), maserasi (pemutihan kulit), hipergranulasi (pembentukan tisu yang berlebihan) atau kepekaan (tindak balas alergi), rujuk pakar kesihatan.
 - Pembalut Luka KALTOSTAT™ direka untuk mewujudkan persekitaran lembap yang membantu dalam penyembuhan luka. Sekiranya Pembalut Luka KALTOSTAT™ pada mulanya telah membentuk gel yang dibiarkan kering, penanggalan luka boleh menjadi sukar. Pengeringan biasanya tidak menjadi masalah dengan lelehan luka. Pembalut Luka KALTOSTAT™ mestilah ditanggalkan hanya dengan steril salin biasa. Aplikasi semula salin mungkin diperlukan untuk mengekalkan gel. Jika gel tersebut menjadi kering, menepukan gel kering dengan salin untuk menghidrat semula; proses ini boleh mengambil masa beberapa jam untuk melembutkan gel kering.
 - Pembalut boleh digunakan pada luka yang dijangkiti hanya di bawah penjagaan pakar kesihatan.
- Di samping itu, untuk ulser tekanan, ulser stasis vena, ulser arteri, ulser diabetik, tapak penderma, luka pembedahan yang dibiarkan sembuh dengan intensi sekunder, luka traumatik, luka onkologi dan pengurusan setempat luka berdarah:*
- Pengurusan jenis luka yang disenaraikan di atas mestilah di bawah pengawasan pakar kesihatan.

- Langkah sokongan yang sesuai hendaklah diambil di mana ditunjukkan (cth., penggunaan pembalut mampatan berperingkat dalam pengurusan ulser kaki vena atau langkah pelepasan tekanan dalam pengurusan ulser tekanan).
- Penjajahan luka kronik adalah perkara biasa dan bukannya kontraindikasi kepada penggunaan pembalut. Pembalut boleh digunakan pada luka yang dijangkiti di bawah penyeliaan perubatan bersama dengan terapi yang sesuai dan pemantauan luka yang kerap.
- Kawalan glukosa darah, serta langkah sokongan yang bersesuaian, perlu diberikan dengan ulser kaki diabetes.
- Untuk luka onkologi, pembalut sekunder penyerapan tinggi adalah disyorkan.
- Dalam luka kaviti, pembalut reben boleh digunakan untuk membalut luka. Untuk luka seperti fistula dan saluran sinus, gunakan teknik yang sesuai semasa pemasangan dan penanggalan pembalut.
- Pembalut Luka KALTOSTAT™ tidak bertujuan untuk digunakan sebagai span pembedahan. Pembalut Luka KALTOSTAT™ tidak bertujuan untuk mengawal pendarahan berat. Langkah alternatif mesti dipertimbangkan dalam keadaan kecemasan di mana jumlah darah yang banyak mungkin hilang.

ARAHAN PENGGUNAAN

1.Persediaan dan Pembersihan Tapak Luka

Sebelum menggunakan Pembalut Luka KALTOSTAT™, bersihkan kawasan tersebut dengan pembersih luka yang sesuai. Di bawah penjagaan pakar kesihatan, jika perlu, sebelum menggunakan Pembalut Luka KALTOSTAT™, luka harus didebrid daripada tisu nekrotik yang berlebihan dan keruping dan irigasi dengan larutan pembersih tidak toksik yang sesuai.

2.Penyediaan dan Aplikasi Pembalut

- a. Pembalut Luka KALTOSTAT™ perlu dipotong menjadi saiz luka yang tepat untuk mengelakkan sebarang pertindihan ke atas kulit sekitar.
- b. Untuk luka yang sangat meleleh, Pembalut Luka KALTOSTAT™ perlu digunakan kering ke atas luka. Pembalut sekunder yang sesuai perlu digunakan untuk mengemaskan Pembalut Luka KALTOSTAT™ di tempatnya.
- c. Untuk luka meleleh yang sedikit, Pembalut Luka KALTOSTAT™ perlu diletakkan pada luka dan dilembapkan dengan salin biasa steril. Pembalut sekunder yang sesuai perlu digunakan untuk mengemaskan Pembalut Luka KALTOSTAT™ di tempatnya.

- d. Apabila menggunakan reben KALTOSTAT™ dalam luka kaviti yang dalam, biarkan sekurang-kurangnya 2.5 cm atau 1 inci di luar luka untuk memudahkan pengeluaran.

3.Penukaran dan Penanggalan Pembalut

- a. Pada luka meleleh yang banyak, tukarkan Pembalut Luka KALTOSTAT™ ketika penembusan pembalut sekunder berlaku atau apabila Amalan Klinikai Baik menentukannya.
- b. Penanggalan seharus tanpa ada sebarang masalah ke atas luka meleleh yang berat. Pembalut Luka KALTOSTAT™ akan melekat pada luka/antara muka pembalut dan terangkat keluar.
- c. Penanggalan dari luka meleleh yang ringan boleh dibantu dengan penepuan pembalut dengan salin biasa steril.
- d. Bersihkan tapak luka dengan pembersih luka yang sesuai sebelum memakai pembalut baharu.
- e. Seperti mana-mana pembalut, Pembalut Luka KALTOSTAT™ perlu ditanggalkan dari luka dan luka dibersihkan pada jarak masa yang sesuai.

4.Luka Berdarah

Pasangkan Pembalut Luka KALTOSTAT™ ke kawasan pendarahan untuk menggalakkan hemostasis. Tanggalkan apabila pendarahan telah berhenti. **Pembalut tidak seharusnya dibiarkan di tempatnya selama lebih daripada 7 hari.** Pasangkan Pembalut Luka KALTOSTAT™ tambahan seperti yang digariskan di atas.

Buang mana-mana bahagian produk yang tidak digunakan selepas membalut luka.

Jika pembungkusan produk rosak, jangan gunakan.

Lindungi daripada cahaya.

Simpan di tempat yang sejuk dan kering (<25°C/77°F).

Sekiranya maklumat atau panduan lanjut diperlukan, sila hubungi Perkhidmatan Profesional ConvaTec.

© 2018 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagangan ConvaTec Inc.

Dibuat di UK