



BAHASA MELAYU

Satu Kepingan Potong Suai atau Satu Kepingan Siap dipotong Sistem Ostomi

ARAHAN PENGGUNAAN

LANGKAH BERJAGA-JAGA DAN PEMERHATIAN

Ingatan: Pesakit yang mempunyai urostomi yang mengalir, apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing, perlu tahu bahawa terdapat kes pelekat yang dilaporkan ditemui dalam saluran kencing. Mulakan pengurusan klinikal yang sesuai dan nilai penggunaan berterusan produk pelekat jika massa dikesan.

Penting: Seorang pakar perubatan perlu menilai keperluan untuk sawar kulit dengan kecembungan sebelum digunakan.

1. Persediaan Kulit

Tangan dan kulit anda yang mengelilingi stoma mestilah bersih, kering dan bebas daripada bahan berminyak sebelum dipasang.

2. Persediaan Kantung

A) Bagi Kantung Potong Suai (Rajah 1)

Jejak bentuk stoma ke atas pelapik pelepas pelindung kulit. Potong sawar kulit sedikit di luar lakaran dengan memastikan agar tidak memotong lapisan kantung. Jangan potong melepasi baris terakhir. Ratakan bukaan potongan dengan jari anda.

B) Bagi Kantung Siap Dipotong

Pilih kantung dengan bukaan stoma siap dipotong sedikit lebih besar daripada stoma anda.

Nota: 1) Kolar pita boleh menyebabkan kerengsaan kulit bagi pengguna yang memakai lampin. Sekiranya kerengsaan berlaku, potong kolar dari sawar kulit.

2) Lindungi stoma daripada trauma atau kecederaan.

3. Memasang Kantung (Rajah 2)

Pisahkan lapisan kantung untuk membolehkan udara masuk. Tanggalkan pelapik pelepas. Tanggalkan bukaan sawar kulit di atas stoma. Sapukan sawar kulit di atas

kulit di sekitar stoma selama 30 saat. Sekiranya terdapat sempadan fabrik, tanggalkan pelapik pelepas yang masih ada. Ratakan di tempatnya dan hilangkan kedutan.

Pakai selagi selesa dan selamat. Masa memakai mungkin berbeza-beza.

4. Menutup Kantung

A) Kantung Boleh Salir dengan Penutup Ekor INVISICLOSE™ (Rajah 3)

Tutup penutup ekor bermula dengan jalur hujung outlet putih sehingga penutup bercantum bertindih. Tekan penutup bercantum bersama-sama merentasi lebar ekor dan tekan sehingga anda merasakannya ditutup. Sekiranya dikehendaki, keluarkan poket dari dalam ke luar untuk menyembunyikan penutup ekor, atau balut penutup ke bawah di sekitar ekor kantung.

NOTA: Kantung ESTEEM™ Ekstra Kecil tidak mempunyai penutup atau poket.

B) Kantung Boleh Salir dengan Klip Ekor (Rajah 4)

C) Kantung Peditriatik Boleh Salir dengan Penutup Ekor (Rajah 5)

Tanggalkan pelapik pelepas daripada jaluran pelekat. Tekan penutup di tempatnya ke arah hujung ekor kantung, di sebelah tepi tanpa sawar kulit.

D) Kantung Urostomi dengan Paip ACCUSEAL™ (Rajah 6)

E) Kantung Urostomi dengan Paip Lipat: (Rajah 7)

5. Mengosongkan Kantung

A) Kantung Boleh Salir dengan Penutup Ekor INVISICLOSE: (Rajah 4)

Buka kunci penutup kantung dan buka ekor dengan menolok kedua-dua hujung tali hujung outlet menggunakan jari; salirkan kantung.

B) Kantung Boleh Salir dengan Penutup Klip Ekor: (Rajah 9)

C) Kantung Urostomi dengan Paip ACCUSEAL: (Rajah 10)

D) Kantung Urostomi dengan Paip Lipat: (Rajah 11)

Sambungan ke Sistem Saliran Malam:

Paip ACCUSEAL: (Rajah 12)

Paip Lipat: (Rajah 13)

6. Maklumat Mengenai Kantung dengan Penapis

Tutup penapis dengan pelekat yang disediakan semasa mandi, berenang, dll. Tanggalkan selepas aktiviti air.

7. Menanggalkan Kantung (Rajah 14)

8. Pelupusan

Sila patuh semua peraturan pelupusan tempatan.

© 2020 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagangan ConvaTec Inc. ESTEEM, INVISICLOSE dan ACCUSEAL adalah tanda dagangan berdaftar ConvaTec Inc. di Amerika Syarikat.



Baca arahan
penggunaan



Pastikan kering



Jangan guna
semula



Tarikh tamat tempoh



Nombor lot



Peranti perubatan