

bm

Sawar kulit bebas sakit

Arahan penggunaan

- Bersihkan dan keringkan kulit sepenuhnya.
- Koyakkan sachet untuk membukanya dan membuka lipatan tisu.
- Lap di kawasan yang dilindungi dengan lembut dan tunggu beberapa saat sehingga ia kering.

Kandungan: Kopolimer Siloksana



Ingatan:

- Gunakan hanya seperti diarahkan.
- Elakkan penggunaan di bahagian kulit yang halus atau sensitif (mata, mulut, telinga, hidung, vagina).
- Sekiranya ragu-ragu, lakukan ujian ke atas bahagian kecil sebelum digunakan.
- Hentikan penggunaan jika kerengsaan berlaku.



RUJUK ARAHAN PENGGUNAAN



AMAT MUDAH TERBAKAR



PENGILANG (EU)