

1050636G3  
Disemak 2020-06

ActiveLife®

Satu Kepingan Kantung Boleh Salir  
Arahan Penggunaan



Bagi pengurusan output stoma.

**INGATAN:** Perlu berhati-hati apabila menggunakan produk pelekat di sekitar urostomi mengalir, terutamanya apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing. Jarang sekali, laporan klinikal telah didokumentasikan mengenai kewujudan pelekat di dalam sistem pengumpulan buah pinggang pesakit ini. Sekiranya massa dikesan dalam saluran kencing, nilai penggunaan berterusan produk pelekat dan mulakan pengurusan klinikal yang sesuai.

#### PERSEDIAAN KANTUNG

Kulit peristom **mesti** bersih, kering dan bebas daripada bahan pelarut atau berminyak.

**Untuk kantung dengan bukaan stoma yang siap dipotong:**

Pilih kantung dengan bukaan stoma yang siap dipotong sekurang-kurangnya 1/8 inci (3mm) **lebih besar** daripada diameter stoma terbesar.

**JANGAN besarkan bukaan stoma yang siap dipotong.** Tanggalkan perisai plastik pelindung daripada cakera Stomahesive®.

**Untuk kantung potongan tersuai:**



Ukur stoma menggunakan panduan yang disediakan. Tanggalkan perisai plastik pelindung daripada cakera Stomahesive®.



Sebelum memotong, pisahkan panel hadapan dan belakang.



Menggunakan garis panduan pada kertas pelepas, potong lubang tengah mengikut saiz yang sama dengan stoma. **Jangan potong melepasi baris terakhir.**

#### PEMASANGAN KANTUNG



Tanggalkan kertas pelepas B dan C. Pastikan kemasan selesa di sekeliling stoma.

#### MENGGUNAKAN PENUTUP EKOR



#### PENANGGALAN KANTUNG



Produk ini boleh kekal di tempatnya semasa mandi, mandi hujan atau berenang. Tepuk sehingga kering selepas terdedah kepada air.

#### PELUPUSAN

Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

#### KEADAAN STORAN



Suhu Storan



Nombor lot/kawalan



Pastikan kering.

Elakkan kelembapan tinggi



Tarikh Tamat Tempoh



Baca arahan penggunaan

Nota: Sekiranya kerengsaan berlaku, hentikan penggunaan dan rujuk profesional penjagaan kesihatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk ConvaTec, hubungi kami di alamat di bawah.

©2020 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.