

Kedap Stomahesive™

Arahan Penggunaan

bm BAHASA MELAYU

Penerangan Produk

Kedap Stomahesive™ merupakan sawar kulit yang boleh dibentuk dan boleh menyerap kelembapan yang direka untuk membantu melindungi kulit daripada terkena cecair badan.

Indikasi

Kedap Stomahesive™ boleh digunakan untuk perlindungan kulit sebagai:

- kedap ostomi untuk ileostomi, kolostomi dan urostomi
- agen pengisian luaran pada kulit yang tidak sekata

Kontraindikasi

Jangan gunakan untuk melindungi kulit yang pecah atau luka terbuka, atau digunakan oleh individu yang sensitif kepada atau yang telah membentuk sensitiviti atau tindak balas alergi kepada produk.

Langkah Berjaga-jaga dan Pemerhatian

- Amaran: Pesakit dengan urostomi leleh, apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing, perlu tahu bahawa telah dilaporkan kes pelekat yang terdapat dalam saluran kencing. Mulakan pengurusan klinikal yang sesuai dan nilai penggunaan berterusan produk pelekat jika massa dikesan.
- Peranti ini hanya untuk penggunaan tunggal dan tidak boleh digunakan semula. Penggunaan semula mungkin menyebabkan peningkatan risiko jangkitan dan pencemaran silang. Sifat fizikal peranti mungkin tidak lagi optimum untuk kegunaan asal.
- Perlu berhati-hati semasa menggunakan kedap dan peranti ostomi untuk melindungi stoma dan kulit sekitar daripada trauma atau kecederaan.

Pemasangan

1. Pastikan kulit bersih dan kering.
2. Tanggalkan pelapik pelepas dari kedua-dua belah kedap.
3. Perlahan-lahan bentuk, gulung, regang atau mampatkan kedap agar sesuai di sekeliling stoma. Kedap boleh dipotong, disusun atau disambung semula untuk disesuaikan di sekitar tapak yang sukar dipasang.
4. Perlahan-lahan sapukan dan licinkan kedap ke arah pangkal stoma anda. Sambil mengenakan sedikit tekanan, tahan kedap di tempatnya selama lebih kurang 30 saat.
5. Letakkan aplians Ostomi betul-betul di atas permukaan kedap dan tahan di tempatnya selama 30 saat dengan tekanan lembut sehingga kemas.
6. **Pakai selagi selesa dan kemas. Masa pemakaian mungkin berbeza. Nota:** Sekiranya kerengsaan berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan rujukan pakar kesihatan.

Pembuangan

Perlahan-lahan tanggalkan sistem kantung dari badan. Sebarang sisa boleh dikeluarkan dari kulit dengan menggulung dan menanggalkan atau menggunakan Sensi-Care™ atau Penanggal Pelekat Bebas Pedih Niltac™.

Pelupusan: Patuhi keperluan/peraturan pelupusan tempatan.

©2015 ConvaTec Inc.

®/™ menunjukkan tanda dagangan ConvaTec Inc.



Baca Arahan Penggunaan



Jangan Guna Semula



Nombor lot/kawalan



Pastikan kering



Tarikh Tamat Tempoh



Pengilang



Nombor Rujukan