

1050893G1

Disemak 2015-03

Little Ones™

Satu Kepingan Kantung Dipotong Suai Boleh Salir dengan Sawar Kulit Stomahesive®
Arahan Penggunaan



Penggunaan Tunggal



Baca arahan penggunaan.

KEADAAN STORAN



Julat suhu storan.



Pastikan kering. Elakkan pendedahan kepada kelembapan tinggi.



Nombor lot/kawalan

PENERANGAN PRODUK

Kantung Boleh Salir ConvaTec Little Ones™ merupakan kantung satu kepingan dengan sawar kulit pelekat. Direka khusus untuk kegunaan pediatrik, kantung ini menawarkan kelebihan berikut:

1. Kualiti perlindungan kulit yang sama seperti yang ditawarkan oleh sawar kulit Stomahesive®, tetapi diubah suai agar lembut pada kulit.
2. Lubang permulaan yang boleh diperbesarkan untuk menampung stoma sebarang saiz dan bentuk sehingga diameter 2" (50mm).
3. Panel belakang kantung seperti fabrik untuk keselesaan yang meningkat.
4. Lapisan sawar bau yang lembut dan senyap.
5. Penutup ekor lembut yang boleh dibentuk untuk kegunaan pediatrik.

INGATAN: Perlu berhati-hati apabila menggunakan produk pelekat di sekitar urostomi mengalir, terutamanya apabila dikaitkan dengan megaureter dan ketiadaan takungan air kencing. Jarang sekali, laporan klinikal telah didokumentasikan mengenai kewujudan pelekat di dalam sistem pengumpulan buah pinggang pesakit ini. Sekiranya massa dikesan dalam saluran kencing, nilai penggunaan berterusan produk pelekat dan mulakan pengurusan klinikal yang sesuai.

PERSEDIAAN PRODUK



1. Ukur stoma menggunakan panduan yang disediakan. Dengan lembut bersihkan kawasan dengan air dan lap kering sepenuhnya. Kulit peristoma MESTI bebas daripada sebarang bahan pelarut atau berminyak.



2. Lakar saiz stoma ke atas kertas sokongan putih, berpusat di sekitar lubang permulaan.



3. PENTING: Sebelum memotong, pisahkan panel depan dan belakang supaya tidak terpotong panel hadapan kantung.




4. Menggunakan gunting melengkung, besarkan lubang pusat sedikit lebih besar daripada lakaran. JANGAN memotong melebihi bulatan pada kertas pelepas.

SAMBUNGAN KEPADA PENUTUP EKOR

PENTING:

- a) Memasang penutup ekor seperti yang diterangkan adalah penting untuk mengelakkan kebocoran.
- b) Sambung penutup ekor sebelum memasang kantung ke badan.

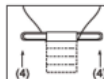

1. Menanggalkan kertas pelepas dari jalur pelekat pada penutup ekor. Tepatkan penutup di lebih kurang 1/4" dari hujung ekor kantung, di sebelah tepi kantung tanpa sawar kulit. Tekan ke tempatnya.
2. Lipat dengan ketat ekor kantung ke atas 4 KALI seperti yang ditunjukkan.



3. Lipat dengan ketat hujung penutup ekor seperti yang ditunjukkan ke arah tepi kantung dengan sawar kulit, memastikan ekor tersebut **licin, rata dan tidak berkedut**.

PEMASANGAN KANTUNG

PENTING: Perlu berhati-hati agar mengenakan hanya tekanan lembut ke atas abdomen bayi apabila memasang sebarang sistem kantung.



1. Tanggalkan kertas pelepas daripada sawar kulit, meminimumkan hubungan jari dengan pelekat. **NOTA:** Apabila Pelekat Stomahesive® digunakan, adalah disyorkan supaya ia digunakan sebagai gelang di sekeliling lubang yang diperbesarkan di sisi pelekat sawar kulit.



2. Pegang kedua-dua belah sawar kulit dan letakkan lubang yang diperbesarkan di atas stoma.



3. Secara lembut tekan sawar pada kulit, dengan memberikan perhatian khusus kepada kawasan yang paling dekat dengan stoma.

Kantung boleh dipakai seberapa lama selagi ia selesa dan tiada tanda kerengsaan.

PENANGGALAN KANTUNG



1. Penanggalan boleh dilakukan dari atas ke bawah dengan menarik lembut sawar kulit dari kulit, sambil menggunakan tekanan lembut pada kulit bersebelahan dengan tangan anda yang bebas. Tidak perlu menanggalkan semua sisa.

Dikilang oleh:



ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

ConvaTec Limited, Deeside, CH5 2NU, UK

www.convatec.com
Diedarkan di Kanada oleh:
ConvaTec Canada Ltd.

Montreal, Quebec, Kanada
1-800-465-6302

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™ menunjukkan tanda dagang ConvaTec Inc.