

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

สโตมาเดรส พลัส ถุงอุจจาระปลายเปิดชนิดขึ้นเดียว

Stomadress Plus One-Piece Drainable Pouch

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สโตมาเดรส พลัส ถุงอุจจาระปลายเปิดสี่เสี้ยว สามารถระบายของเสียได้ ใช้ร่วมกับคลิปปิดปลายถุง

ข้อบ่งใช้

ใช้เก็บของเสียจากทวารเทียม

วิธีการใช้

การเตรียมถุงเก็บ



ผิวบริเวณรอบๆ ทวารเทียมต้องสะอาดแห้ง และปลอดจากตัวทำละลายหรือสารที่ฉีก

สำหรับถุงที่มีรอยปรุช่องรูเปิด:

เลือกถุงที่มีรอยปรุช่องรูเปิดที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางทวารเทียมที่ใหญ่ที่สุดอย่างน้อย $\frac{1}{8}$ นิ้ว (3 มม.)

ห้ามขยายรอยปรุช่องรูเปิด ลอกแผ่นป้องกันพลาสติกออกจากแป้น Stomahesive



สำหรับถุงที่ตัดขนาดแป้นได้:

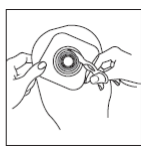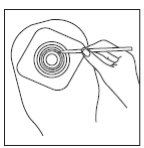

ก่อนตัด ให้แยกถุงด้านหน้าและด้านหลังออกจากกัน




ดูเส้นบอกแนวบนกระดาษหุ้ม แล้วตัดรูตรงกลางให้มีขนาดเท่ากับทวารเทียม อย่าตัดเลยเหนือเส้นสุดท้าย

วิธีการติดถุงเก็บ

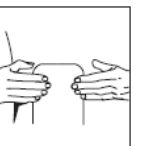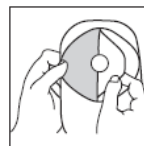

ลอกกระดาษหุ้มออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอดีกับทวารเทียม

วิธีการใช้คลิปปิดปลายถุง

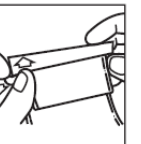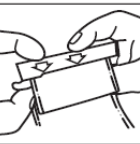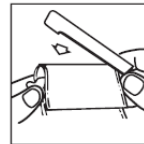

วิธีการดึงถุงอุจจาระออก



ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดไว้ได้ในขณะแช่น้ำ อาบน้ำ หรือว่ายน้ำ เช็ดให้แห้งหลังโดนน้ำ

การกำจัดทิ้ง

ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ข้อบังคับในการกำจัดทิ้งในแต่ละประเทศ

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีคราบขาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผู้ป่วยเหล่านั้นๆ ครั้ง หากตรวจพบก้อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม
- หากเกิดอาการระคายเคือง ควรหยุดใช้และปรึกษานักวิชาการทางการแพทย์

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

1 กล่องบรรจุ 30 ชิ้น และคลิปปิดปลายถุงจำนวน 2 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

LOT

หมายถึง รุ่นการผลิต

EXP. DATE หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพับลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 02-6147000