

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

แผ่นปิดแผลดูโอเดิร์มซีจีเอฟ

DuoDerm™ CGF™ Control Gel Formula Dressing

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

แผ่นปิดแผล DuoDERM™ CGF™ Control Gel Formula Dressing เป็นวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว (ไฮโดรคอลลอยด์) ไฮโดรคอลลอยด์บรรจุอยู่ในเนื้อวัสดุของแผ่นปิดแผล ชั้นกาวประกอบด้วยพอลิเมอร์ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของแผ่นปิดแผลในการรองรับสารคัดหลั่งของบาดแผลโดยการสร้างเจลเหนียว แผ่นปิดแผลชนิดยึดเกาะได้เองในตัวเองสามารถดูดซับของเหลวบริเวณบาดแผลและรักษาสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้น ซึ่งสนับสนุนกระบวนการสมานแผลของร่างกายและช่วยในการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากบาดแผล (กระบวนการกำจัดเนื้อตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหม่ แผ่นปิดแผล DuoDerm CGF Control Gel Formula Dressing อาจใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลแผลอื่นๆ ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ DuoDerm CGF Control Gel Formula Dressing ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันบาดแผลจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ไวรัส และการปนเปื้อนภายนอกอื่นๆ แผ่นปิดแผลผ่านการทดสอบจากการทดลองในห้องปฏิบัติการในการป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียและไวรัส รวมถึงเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus: HIV-1) ในกรณีแผ่นปิดแผลติดแน่นโดยไม่มีการรื้อไหล การใช้อุปกรณ์นี้ไม่รับประกันว่าจะป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีได้

ข้อบ่งใช้

สำหรับการใช้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์:

DuoDerm CGF อาจนำไปใช้สำหรับ:

- แผลถลอกเล็กน้อย
- แผลฉีกขาด
- แผลเล็กน้อยจากการโดนบาด
- แผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกเล็กน้อย
- ผิวนางฉีกขาด

ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ อาจใช้ DuoDerm CGF สำหรับบาดแผล เช่น:

- แผลเรื้อรังที่ขา (แผลเรื้อรังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรื้อรังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรื้อรังที่ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง) แผลเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน และแผลกดทับ (แผลที่ผิวนางถูกทำลายลึกเป็นบางส่วนและทั้งหมด)
 - แผลผ่าตัด (แผลหลังการผ่าตัด, แผลบริเวณผู้ให้ (donor site), แผลบริเวณผิวนาง)
 - แผลไฟไหม้ (ระดับหนึ่งหรือระดับสอง)
 - แผลจากอุบัติเหตุ
- * ลดโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรคติดเชื้อหรือเชื้อก่อโรคจากเชื้อในโรงพยาบาล

ข้อห้ามใช้


ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้หรือเคยมีปฏิกิริยาแพ้ต่อแผ่นปิดแผลนี้หรือส่วนประกอบของแผ่นปิดแผล DuoDERM™ CGF™

ไม่ควรใช้แผ่นปิดแผล DuoDERM™ CGF™ Dressings กับยาสเตรียรอยด์เฉพาะที่ในกรณีที่ไม่ได้ขออนุญาตจำเป็นต้องทำแผลแบบระบบปิด

วิธีการใช้

ก่อนใช้แผ่นปิดแผล ให้ทำความสะอาดบริเวณแผลด้วยน้ำยาทำความสะอาดแผลหรือน้ำเกลือชนิดนอร์มัลซาลิน (normal saline) และซับผิวนางโดยรอบให้แห้ง ขนาดของแผ่นปิดแผลที่จะใช้กับแผลควรยาวเกินขอบแผลอย่างน้อย 1 1/4 นิ้ว (3.2 ซม.)

1. ดึงกระดาษห่อออกจากด้านหลังของแผ่นปิดแผล ระวังอย่าให้นิ้วสัมผัสกับพื้นผิวกาว
2. จับแผ่นปิดแผลไว้บนแผลและจัดแนวกึ่งกลางของแผ่นปิดแผลให้อยู่กึ่งกลางของแผล
3. ค่อยๆ ม้วนแผ่นปิดแผลให้เข้าที่บนแผล
4. ลูบแผ่นปิดแผลให้เข้าที่ด้วยมือของคุณ
5. ยึดขอบของแผ่นปิดแผลด้วยเทปทางการแพทย์หรือเทปกาวหากต้องการยึดให้ติดแน่นเป็นพิเศษ
6. ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทำแผล

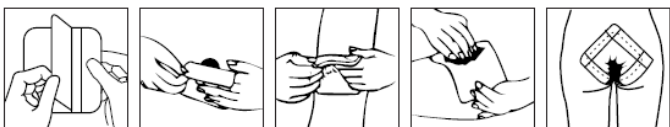

หมายเหตุ: ควรตรวจสอบแผ่นปิดแผลบ่อยๆ เพื่อหารอยรั่วและการพันกันม้วนที่ขอบของแผ่นปิดแผล หากมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ควรเปลี่ยนแผ่นปิดแผล เนื่องจากแผ่นปิดแผลจะดูดซึมสารคัดหลั่งจากแผล จึงอาจทำให้เกิดเจลที่สามารคมองเห็นได้จากผิวด้านนอกของแผ่นปิดแผล



การลอกแผ่นปิดแผลออก

1. ใช้มือข้างหนึ่งกดลงบนผิวหนังและลอกขอบของแผ่นปิดแผลออกด้วยมืออีกข้างอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ ลอกแผ่นปิดแผลออกจากแผล
ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดที่แนะนำคือไม่เกินเจ็ดวัน

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

• ข้อควรระวัง: รับประทานสภาพปลอดเชื้อ เว้นแต่ว่าของบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิดออกก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ
การนำมาใช้ซ้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination)

คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป

- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแผลอื่นๆ โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อน
- ในระหว่างกระบวนการสมานแผลตามปกติของร่างกาย สิ่งที่ไม่จำเป็นจะถูกกำจัดออกจากบาดแผลซึ่งอาจทำให้แผลมีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากเปลี่ยนแผ่นปิดแผลในสองสามครั้งแรก หากแผลยังคงมีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากเปลี่ยนแผ่นปิดแผลประมาณสองถึงสามครั้งในช่วงแรก ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
- หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง การอักเสบ) การเปื่อยยุ่ย (ผิวหนังซีดขาว) การสร้างเนื้อเยื่อเหนียวระดับผิวหนัง (การสร้างเนื้อเยื่อมากเกินไป) หรืออาการแพ้ (ปฏิกิริยาภูมิแพ้) ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
- ไม่แนะนำให้เปลี่ยนแผ่นปิดแผลบ่อยๆ ในแผลที่ผิวหนังถูกทำลายหรือมีผิวที่บอบบางรอบๆ แผล ควรตรวจสอบบาดแผลระหว่างการเปลี่ยนแผ่นปิดแผล ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์หากพบว่า

(1) มีอาการของการติดเชื้อเกิดขึ้น (ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น มีเลือดออก มีสารคัดหลั่งออกจากแผล)

(2) มีการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือกลิ่นของแผล (3) แผลไม่เริ่มแสดงสัญญาณของการสมานแผลและ (4) มีอาการอื่น ๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

• การใช้แผ่นปิดแผลกับบาดแผลที่ติดเชื้อจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

• การใช้อุปกรณ์นี้ไม่รับประกันว่าจะป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีได้

นอกจากนี้ สำหรับแผลเรื้อรังที่ขา (แผลเรื้อรังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรื้อรังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรื้อรังที่ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง), แผลเรื้อรังเนื่องจากเบาหวาน แผลกดทับ, แผลไฟไหม้ (ระดับที่หนึ่งและที่สอง), แผลผ่าตัด และแผลจากอุบัติเหตุ:

- การรักษาบาดแผลที่จัดอยู่ในประเภทข้างต้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
- ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีข้อบ่งชี้ (เช่น การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนื้อที่บีบรัดแบบลดหลั่น (graduated compression bandaging) ในการดูแลรักษาแผลเรื้อรังที่ขาเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดดำหรือวิธีการบรรเทาแรงกดทับในการดูแลรักษาแผลกดทับ)
- การแบ่งตัวของเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรังเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และไม่ถือเป็นข้อห้ามในการใช้แผ่นปิดแผล อาจใช้แผ่นปิดแผลกับแผลติดเชื้อภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ร่วมกับการรักษาที่เหมาะสม และการตรวจสอบแผลบ่อยๆ ในกรณีที่มีการติดเชื้อแอนแอโรบิคแบคทีเรีย ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการรักษาด้วยการทำให้แผลเป็นระบบปิด
- ควรให้การรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับแผลเรื้อรังที่เท้าอันเนื่องมาจากเบาหวาน

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการแช่เย็นและการสัมผัสกับความชื้นสูง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 187660, 187661, 187662 ใน 1 กล่องบรรจุ 5 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



หมายถึง รุ่นการผลิต



หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพับลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส เฟลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000