

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เข็มขัดช่วยพยุงอุจจาระ/ปัสสาวะ

Ostomy Appliance Belt

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

เข็มขัดช่วยพยุงอุจจาระ/ปัสสาวะมีสีขาว ใช้ร่วมกับพยุงอุจจาระ/ปัสสาวะที่มีห่วงสำหรับติดเข็มขัด สามารถปรับขนาดได้ถึง 42 นิ้ว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำกิจกรรมแต่ละวัน

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับช่วยพยุงอุจจาระ/ปัสสาวะ

วิธีการใช้

1. ตัดแป้นและถูงให้เรียบร้อย
2. ปรับขนาดเข็มขัดให้พอดี
3. เกี่ยวปลายเข็มขัดเข้ากับที่ห่วงด้านใดด้านหนึ่งของถูงโดยหันด้านปลายแหลมออกด้านนอกจากตัว
4. จากนั้นเกี่ยวปลายเข็มขัดเข้ากับห่วงอีกด้านหนึ่งของถูง

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- เข็มขัดสามารถซักได้

วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 175507 ใน 1 กล่องบรรจุ 1 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

LOT

หมายถึง รุ่นการผลิต

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพับลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000