

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

ไดมอนด์ ซองลดกลิ่นชนิดเจล

Diamonds™ Gelling and Odour Control Sachets

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ซองควบคุมการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ข้อบ่งใช้

ใช้เพื่อเปลี่ยนสารคัดหลั่งให้กลายเป็นเจลจากถุงทวารเทียมหรือถุงเก็บอุจจาระ เพื่อช่วยลดหรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และคราบไขมันส่วนเกิน ใช้สำหรับอุจจาระเหลว

วิธีการใช้

- ใส่ซองทั้งหมดหนึ่งซองลงในถุงเก็บ ห้ามเปิดซอง
- ระบายทิ้งและกำจัดสารคัดหลั่งในถุงตามปกติ สามารถใส่ซองเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องใส่ของถุงเก็บหลังจากเททิ้ง
- โปรดทราบ: สารคัดหลั่งในถุงเก็บอาจมีสีเข้มกว่าปกติและ/หรืออาจมีเศษชิ้นเล็กๆ สีดำ
- นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่สามารถมองเห็นได้จากระบบควบคุมกลิ่น ActiveOne™ หากต้องการตรวจสอบสีของสารคัดหลั่ง ให้หยุดใช้งานชั่วคราว

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ หลังใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นอันตรายทางชีวภาพได้
- จัดการและกำจัดทิ้งตามหลักปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากในระหว่างการใช้อุปกรณ์นี้หรือจากการใช้งานแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น โปรดรายงานไปยังผู้ผลิตและหน่วยงานในประเทศของคุณ


วิธีการเก็บรักษา

เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 420791 ใน 1 กระปุกบรรจุ 100 ชิ้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

 หมายถึง รุ่นการผลิต

 หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท วอลเทอร์ ฮอทตัน ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000