

Avelle™

Presión negativa, poder positivo

Sistema de presión negativa para heridas



Información para pacientes

A usted le han entregado este folleto puesto que su herida está siendo tratada con el sistema de presión negativa para heridas Avelle™.

Por favor lea la información detenidamente y si tiene alguna duda contacte con su profesional sanitario.



ConvaTec

Sistema de presión negativa para heridas

¿Qué es el sistema Avelle™?

El sistema Avelle™ incluye un apósito conectado a una pequeña bomba que provee la terapia llamada de presión negativa.



¿Cómo funciona?

El apósito se aplica en la lesión. Se conecta a la bomba. Cuando se enciende, la succión se aplica al apósito, y el aire y el fluido de la herida es absorbido a través del apósito. El apósito se asegura con las tiras de fijación. Esta aplicación de presión negativa a su herida, combinada con la retirada del fluido de la lesión, y las bacterias contenidas en él, está diseñada para ayudar al proceso de cicatrización.

¿Por qué han aplicado esta terapia a mi herida?

Su profesional sanitario ha decidido que usted puede beneficiarse de la aplicación de la terapia de presión negativa y que usted es candidato para el sistema Avelle™.

¿Me dolerá?

La primera vez que la bomba de Avelle™ se pone en funcionamiento, usted puede experimentar una ligera sensación de tirantez. De todos modos, si usted experimentara dolor debe comunicárselo a su


profesional sanitario.

¿Durante cuánto tiempo voy a necesitar llevarlo aplicado?

Esto puede variar según las características de de la persona Su profesional sanitario podrá comentar con usted cuánto tiempo, en su caso, deberá continuar con la terapia. El mismo apósito puede permanecer en la lesión hasta 7 días, y la misma bomba se podrá utilizar hasta 30 días.

¿Se necesita cambiar de apósito?

Sí. La frecuencia de cambio varía de paciente a paciente y depende mucho del tipo de herida que usted tiene y cuánto fluido produce. En algunos casos el apósito podrá permanecer hasta 7 días sobre la lesión, en otros casos deberá cambiarse mucho más a menudo. Su profesional sanitario le podrá decir cuándo es necesario realizar el cambio de apósito. Usted puede sentir un pequeño disconfort durante el cambio de apósito. Si es su caso, comuníquelo a la persona que le realiza el cambio.

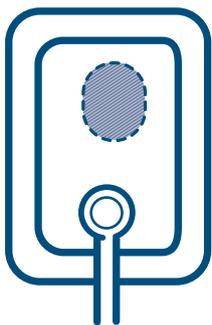

El apósito se posiciona de forma correcta.




El apósito necesita ser cambiado.




El apósito necesita ser cambiado.

¿Debo desconectar la bomba por la noche?


No. Para poder asegurar la continua aplicación de la terapia de presión negativa, la bomba deberá permanecer conectada al apósito y encendida en todo momento (excepto para ducha - ver página 3). El sistema es silencioso y no debe molestarle para dormir. Deberá colocar la bomba en un lugar seguro mientras duerme, evitando que caiga al suelo.

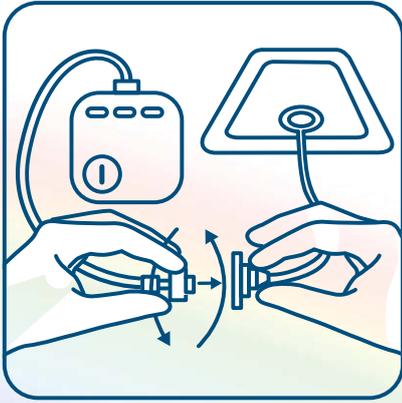

Presione el botón azul para apagar y desenrosque los conectores para desconectar el apósito de la bomba antes de la ducha.

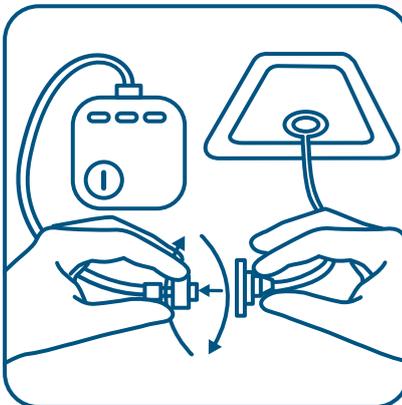

Enrosque los conectores para volver a conectar el apósito a la bomba y presione el botón azul para reiniciar la terapia después de la ducha.

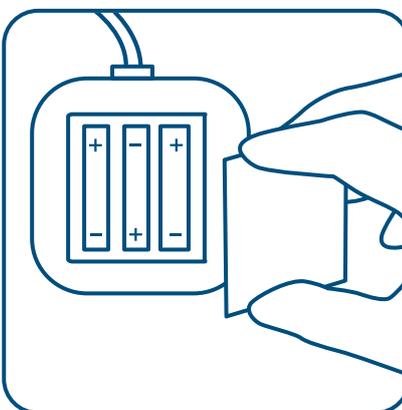

3.

¿Me puedo duchar o bañar?

Se puede duchar de forma rápida, pero el apósito no debe ser sumergido en agua o irrigado directamente. Antes de la ducha, la bomba debe desconectarse del apósito. Para ello presione el botón azul durante 3 segundos para apagar la bomba (el indicador verde “✓” dejará de iluminarse), desconecte la bomba (si está conectada directamente al apósito) o el tubo del apósito desenroscando la conexión. Coloque la bomba en un lugar seco y seguro mientras se ducha. Cuando esté listo vuelva a conectar la bomba al apósito, enrosque los conectores y presione el botón azul durante 3 segundos para que se encienda. El indicador verde “✓” volverá a iluminarse indicando que la bomba funciona correctamente.

¿Puedo limpiar la bomba?

Sí. Para limpiar la bomba, limpie con un paño ligeramente humedecido con agua jabonosa. Si se contaminara de fluidos orgánicos puede utilizar algún limpiador con base alcohólica o algún líquido antimicrobiano con base acuosa. No sumerja la bomba en ningún fluido.

¿Cómo debo cambiar las pilas?

Si la luz del indicador amarillo “🔋” se ilumina las pilas deberán cambiarse en las siguientes 24 horas. Presione el botón azul durante 3 segundos para apagar la bomba. Introduzca las pilas en la parte posterior de la bomba retirando la tapa del compartimento para las pilas, deberá introducir 3 unidades de pilas AAA (recomendamos que sean alcalinas) en la dirección correcta tal y como se indica en el compartimento. Todas las luces indicadoras se iluminarán de forma simultánea indicando que se han colocado correctamente. Cierre la tapa del compartimento.



¿Cómo saber que está funcionando correctamente?


La luz del indicador verde “✓” se iluminará de forma continuada para indicar que la bomba está funcionando correctamente.

¿Qué significa el indicador luminoso?

Las luces de la dispositivo le indicarán si existe algún problema:


Si el indicador amarillo “🔋” se ilumina las pilas deberán cambiarse en las siguientes 24 horas. Presione el botón azul durante 3 segundos para apagar la bomba y cambiar las pilas (ver página 3). Presione el botón azul durante 3 segundos para encender la bomba y verá que el botón verde “✓” se ilumina indicando que se ha restaurado la terapia de presión negativa.

En este caso, si no cambia las pilas en 24 horas, la bomba se apagará de manera automática, la terapia cesará, y la luz amarilla del indicador “🔋” se iluminará cuando el botón azul se presione.

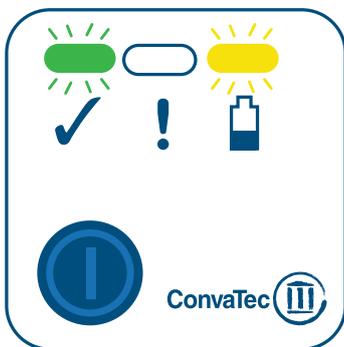

La luz amarilla del indicador “!” se iluminará cuando haya alguna fuga y la bomba no pueda aplicar correctamente la terapia de presión negativa. La bomba se apagará en 30 segundos. Asegúrese que el apósito está bien adherido y repase el borde del apósito y las tiras de fijación para ver dónde puede estar la fuga. Del mismo modo revise que los conectores de los tubos estén bien acoplados. Después presione el botón azul durante 3 segundos para reanudar la terapia de presión negativa y el indicador verde “✓” se iluminará. Si de nuevo se iluminara el indicador amarillo “!”, repita el proceso y vuelva a presionar el botón azul. Si de nuevo volviera a iluminarse el botón amarillo “!”, deberá contactar con un profesional sanitario puesto que podría requerir un cambio de apósito.



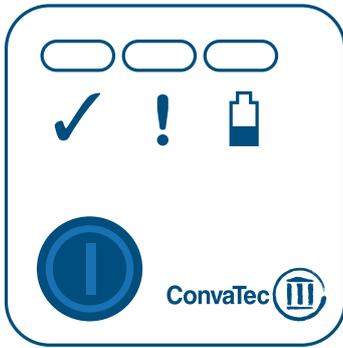

¿Qué ocurre si la bomba deja de funcionar?

1. Si ninguna de las luces indicadoras está iluminada presione el botón azul durante 3 segundos. Si la bomba no inicia la terapia, y ningún indicador se ilumina, pruebe a cambiar las pilas.



2. Si la bomba no funciona pese a presionar el botón azul y haber cambiado las pilas, pero las luces amarillas de los indicadores “!” y “🔋” se iluminan de forma alternada, la bomba le está indicando que se han excedido los 30 días de uso y que se requiere una nueva bomba. Contacte con su profesional sanitario.

Contacte con su profesional sanitario de forma inmediata ante las siguientes circunstancias:

- Si experimenta irritación o aumento de dolor.
- Si el fluido de la lesión sobrepasa el apósito.
- Si advierte señales de sangrado.
- Si la piel de alrededor de la lesión se vuelve roja, caliente o dolorosa.
- Si el apósito se desprende o se cae.

Por favor, contacte con su profesional sanitario ante cualquier duda que pueda tener.

5.

InfoTec - Teléfono de atención al cliente: **900 30 40 50**
www.convatec.es