

C.N.	Código UnoMedical	Descripción	Unidades / caja
196417.5	704012-5226	Neria™ Guard tubo de 12cm/cánula de 6mm	10
196418.2	704012-5229	Neria™ Guard tubo de 12cm/cánula de 9mm	10
196419.9	704060-5229	Neria™ Guard tubo de 60cm/cánula de 9mm	10
196420.5	704080-5229	Neria™ Guard tubo de 80cm/cánula de 9mm	10



Referencias

(1) Parsons J., Infusion Line Preferences of Patients Prescribed Apomorphine for Complex Parkinson's Disease. British Journal of Neuroscience Nursing. December 2009, Vol 5 No 12. (2) EU Sharps Directive of 10 May 2010 & Needlesticks, Medical Device Reporting, Guidance for User Facilities, Manufacturers, and Importers. Document issued on: November 12, 2002. (3) Chan G.C.F., NgD.M.W. Et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion-Dependant Thalassaemia Patients by the Intrapersonal Cross-Over Assessment Model, Am.J. Hematol, 76;398-404. (4) Biological Safety Testing, October 2011, Data on File, Unomedical a/s.

NER1902 © ConvaTec Inc 2018 • Neria™ es una marca de Unomedical a/s
AP-020570-ES



Neria™ Guard: Facilitando la infusión subcutánea

Neria™ Guard es un set de infusión subcutánea con cánula de teflón, que presenta un dispositivo de inserción automática y una aguja retráctil que contribuye a eliminar los pinchazos accidentales, así como a mejorar la comodidad del paciente y a facilitar la inserción de la cánula.

Neria™ Guard es la solución ideal para la infusión subcutánea:

- Fácil de usar, fomentando la autonomía del paciente.
- Minimiza errores de inserción.
- Ayuda a reducir el dolor en la inserción¹.
- Ayuda a prevenir pinchazos accidentales.
- Cumple con las recomendaciones de la Unión Europea sobre sistemas con bioseguridad pasiva².



Especificaciones del producto:

Cánula	Teflón	Adhesivo:	Adhesivo acrílico incorporado, poliéster no tejido suave con la piel
Ángulo de inserción:	90 grados (recto)	Sistema de bioseguridad:	Sí, pasivo (La aguja no es visible antes, durante, ni después de la inserción)
Desconexión:	Sí, en el lugar de inserción	Dispositivo de inserción:	Sí, incorporado
Calibre de la aguja:	27G		
Diámetro de la cánula de teflón:	0.68mm (≈ G23)		

Dispositivo de inserción automática de un solo uso

- Técnica de inserción sencilla e intuitiva.
- Sin necesidad de ejercer presión contra el cuerpo durante la inserción.

Tubo de doble capa anti-acodamiento

- Previene el acodamiento.
- Minimiza el desperdicio de medicación³.

Conexión Luer-lock estándar

Desconexión en el punto de infusión

- Posibilidad de desconexión temporal de la bomba de infusión (p.ej. durante la ducha).

Adhesivo incorporado

- No requiere sujeción extra.
- Suave con la piel e hipoalergénico. (demostrado mediante estudios in vitro)⁴.

Aguja retráctil

- Ayuda a prevenir pinchazos accidentales.
- No es visible en ningún momento.
- Ideal para usuarios con miedo a las agujas.


Cánula de teflón

- Cánula flexible de teflón para mayor comodidad.


Colocación flexible

- Alcanza áreas de difícil inserción.
- Compatible con la rotación del lugar de inserción.


Guía de uso para el set de infusión Neria™ Guard

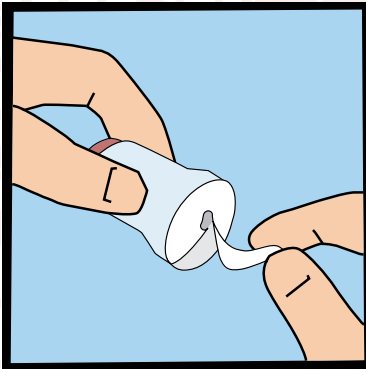


1. Retire suavemente el papel protector del apósito adhesivo.

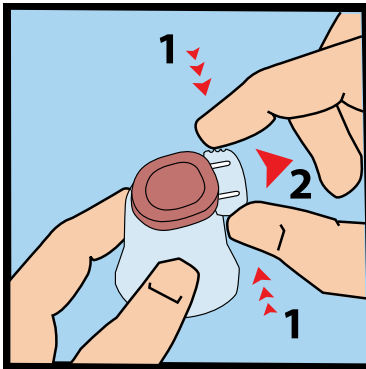


2. Retire el protector del dispositivo de inserción apretando ligeramente los laterales del protector mientras lo retira para que salga recto.

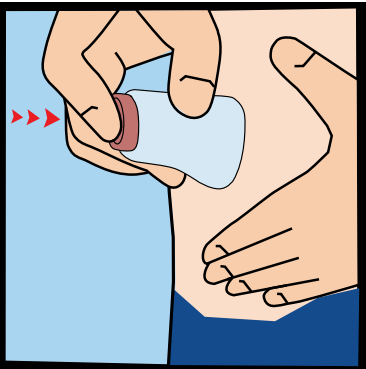


3. Coloque el dispositivo de inserción en la piel y pulse el botón rojo de activación para insertar el equipo de infusión.

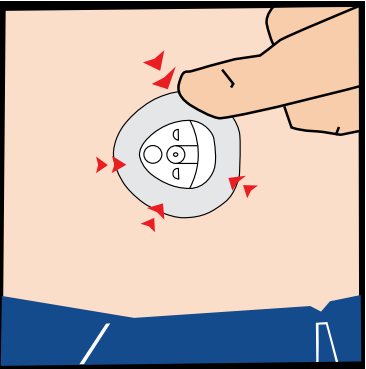

4. Presione el apósito adhesivo sobre la piel.

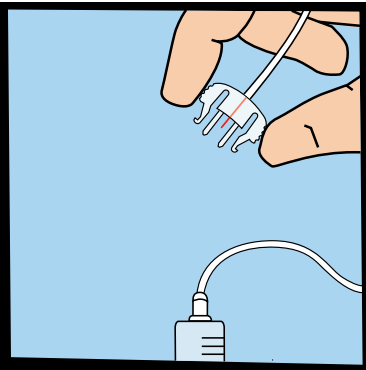

5. Conecte el tubo a la bomba de infusión y cebe el tubo conforme a las instrucciones suministradas por el fabricante de la bomba.

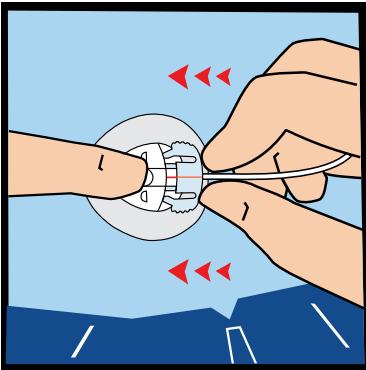

6. Coloque un dedo en el revestimiento de la cánula mientras presiona el conector para que entre recto, hasta que se oiga un "clic".

Por favor, tenga en cuenta que esta guía solamente ilustra alguno de los pasos a seguir en la aplicación de los sets de infusión Neria™ Guard, y que en ningún caso sustituye la lectura de las instrucciones de uso completas que figuran en el prospecto incorporado en la caja del producto.