

ConvaTec le ofrece una **línea completa para la protección cutánea** y para satisfacer las necesidades de los pacientes y profesionales sanitarios.

Código SAP	Código ConvaTec	Descripción
1708249	413502	SENSI-CARE™ Protector cutáneo Spray 50ml
1706535	420797	SENSI-CARE™ Protector cutáneo Spray 28ml
1708248	413501	SENSI-CARE™ Protector cutáneo Toallitas (30 unidades/caja)
1706532	420794	SENSI-CARE™ Protector cutáneo aplicador de 1ml (25 unidades)
1706534	420796	SENSI-CARE™ Protector cutáneo aplicador de 3ml (25 unidades)
1706537	420798	SENSI-CARE™ Eliminador de adhesivos spray 150 ml

- ✓ No irritante – 100% silicona
- ✓ Se seca rápidamente para una adhesividad eficaz
- ✓ No deja residuos
- ✓ Inoloro, sin alcohol
- ✓ Aplicación sencilla



Para obtener más información sobre la gama de apósitos de Advanced Wound Care de ConvaTec o para concertar una visita con su representante local de ConvaTec:
www.convatec.es

Llame al **93 602 37 37** o escriba un email a infotec@convatec.com

©/™ indica marcas de ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc. AP-020903-ES SSC1901

InfoTec
93 602 37 37

SUS ALIADOS PARA LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ALTERACIONES DE LA PIEL

Sensi-Care™
la nueva línea
para la protección
cutánea

CREA UNA BARRERA QUE PROTEGE LA PIEL DE DAÑOS CAUSADOS POR ADHESIVOS, FRICCIÓN O SECRECIONES.



Instrucciones de uso:

- ◇ Los sprays deben agitarse bien previo a su uso.
- ◇ Limpiar y secar la piel.
- ◇ Mantener a unos 10cm del área a tratar y aplicar de manera uniforme.
- ◇ El protector cutáneo Sensi-Care™ debe re-aplicarse con cada cambio de apósito para mantener la protección.
- ◇ La re-aplicación se recomienda cada 12-72h dependiendo de las condiciones de la piel.
- ◇ Su formulación no produce la acumulación de película protectora sobre la superficie cutánea

RETIRADA ATRAUMÁTICA DE ADHESIVOS MÉDICOS, APÓSITOS O DISPOSITIVOS



Instrucciones de uso:

- ◇ Pulverice el eliminador de adhesivo Sensi-Care™ alrededor del adhesivo y espere unos segundos.
- ◇ Retire con cuidado el adhesivo de la piel, pulverizando adicionalmente eliminador de adhesivo Sensi-Care™ si fuera necesario.
- ◇ El secado se produce en segundos. Una vez seco el eliminador de adhesivo Sensi-Care™ no afecta la adhesión de apósitos o dispositivos.
- ◇ El eliminador de adhesivo Sensi-Care™ se puede pulverizar en cualquier posición.

SIMPLIFICA, RETIRA Y PROTEGE PARA MANTENER LA INTEGRIDAD CUTÁNEA Y REDUCIR EL DOLOR.




Irritación en pliegues cutáneos



Necrólisis epidérmica tóxica en paciente con edad avanzada



Fijadores de vías

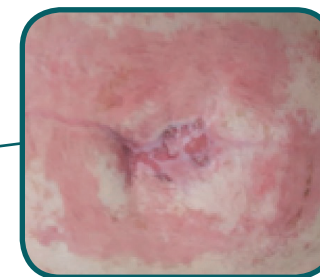

Dermatitis



Ostomías



Lesiones por humedad



Dermatitis del pañal



Apósitos