



Ce guide illustre comment appliquer correctement le pansement AQUACEL<sup>MD</sup> Foam sur votre plaie.

# Changer son pansement AQUACEL<sup>MD</sup> Foam à la maison

## Pourquoi est-ce que je dois changer mon pansement ?

Un pansement est conçu pour couvrir et protéger une zone de peau et garder ainsi une plaie propre. Le pansement agit comme barrière pour réduire la quantité de bactéries susceptibles de pénétrer la plaie et qui pourraient causer une infection.

## Quand est-ce que je dois changer mon pansement ?

Vous devez changer votre pansement selon les conseils de votre professionnel de la santé ou si votre pansement fuit.



**Il est important que votre plaie soit en tout temps recouverte d'un pansement pour réduire les risques d'infections.**



## Qu'est-ce qu'un pansement AQUACEL<sup>MD</sup> Foam ?

Le pansement AQUACEL<sup>MD</sup> Foam est un pansement mousse avec Hydrofiber<sup>MD</sup> qui forme un gel doux lorsqu'il entre en contact avec l'exsudat de plaie, ce qui est normal; ce pansement aide à absorber l'exsudat de la plaie et à garder celle-ci propre et humide.

# Avant de changer son pansement

## 1. Hygiène des mains



Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, puis asséchez-les complètement avec une serviette propre.

## 2. Rassemblement de toutes les fournitures nécessaires



Gants jetables, propres



Miroir pour voir la plaie, au besoin



Dissolvant pour adhésif, au besoin




Sac en plastique jetable pour pansements usagers



Nettoyant pour plaie ou eau propre du robinet



Pansement

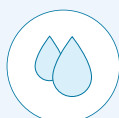

Agents hydratants, au besoin




Ruban adhésif et ciseaux propres

## 3. Retrait et mise au rebut de l'ancien pansement





Les mains propres et gantées, retirez le pansement et mettez-le dans un sac de plastique pour le jeter.

# Application

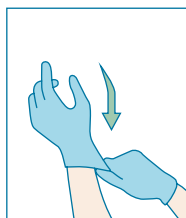



## 1 Se laver les mains

Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, puis asséchez-les complètement avec une serviette propre. Ensuite, mettez des gants propres.

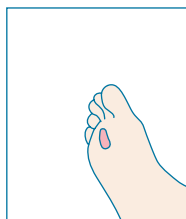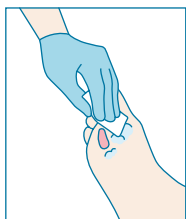



## 3 Assécher la peau

Assurez-vous que la peau autour des bords de la plaie est propre et sèche.

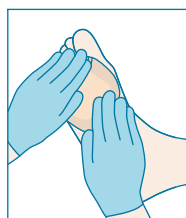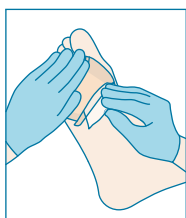


## 5 Appliquer le pansement

Assurez-vous que le pansement dépasse de 1 cm les bords de la plaie. Maintenez d'une main le pansement en place, et de l'autre main, retirez le premier papier protecteur en plastique transparent tout en lissant les bords du pansement.

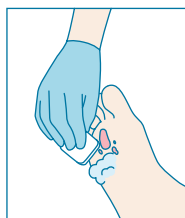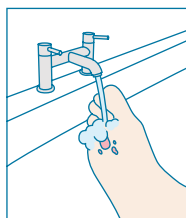



## 2 Nettoyer la plaie

Nettoyez votre plaie avec de l'eau propre ou un nettoyant spécifiquement conçu pour les plaies si votre professionnel de la santé vous le conseille.

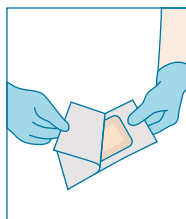

## 4 Ouvrir l'emballage du pansement

Répétez l'étape 1. Retirez avec précaution les pellicules de plastique transparent jusqu'aux bords du pansement. Évitez de toucher au côté du pansement qui entre en contact avec la plaie.

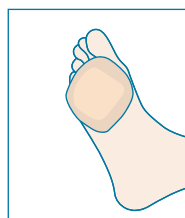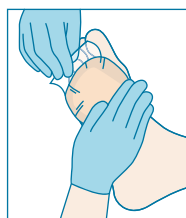

## 6 Fixer le pansement

Maintenez le pansement en place, et de l'autre main, retirez le deuxième papier protecteur en plastique transparent tout en lissant les bords du pansement. Suivez les directives d'un professionnel de la santé pour fixer un pansement non adhésif.



**Si vous présentez l'un des signes ou des symptômes suivants, communiquez avec votre professionnel de la santé.**

- Changement ou augmentation des dimensions de la plaie
- Rougeur ou enflure récente ou étendue sur le pourtour de la plaie
- Douleur récente ou s'intensifiant
- Odeur récente ou plus intense après le nettoyage de la plaie
- Plus d'exsudat que d'habitude

### **Précautions/Mises en garde**

- Les pansements ne doivent pas rester en place pendant plus de 7 jours.
- Si le pansement est difficile à retirer, imbibez-le de solution saline stérile ou d'eau propre.
- N'utilisez pas le pansement si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Entreposez le pansement dans un endroit sec et à la température ambiante.

**Veillez indiquer le code fourni dans le tableau ci-dessous pour vous assurer de recevoir le pansement souhaité.**

### **AQUACEL***Foam*

Dimensions du pansement	Qté/boîte	Code de produit
<b>Pansements AQUACEL<sup>MD</sup> Foam Adhésif</b>		
8 cm x 8 cm (3,2 po x 3,2 po)	10	420804
10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	10	420680
12,5 cm x 12,5 cm (5 po x 5 po)	10	420619
17,5 cm x 17,5 cm (7 po x 7 po)	10	420621
21 cm x 21 cm (8,5 po x 8,5 po)	5	420623
19,8 cm x 14 cm (Talon) (8 po x 5,5 po)	5	420625
20 cm x 16,9 cm (Sacrum)(8 po x 7 po)	5	420626
10 cm x 20 cm (4 po x 8 po)	5	421150
10 cm x 10 cm (4 po x 10 po)	5	421152
10 cm x 30 cm (4 po x 12 po)	5	421154
25 cm x 30 cm (10 po x 12 po)	5	420624
<b>Pansements AQUACEL<sup>MD</sup> Foam Non-Adhésif</b>		
5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)	10	420631
10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	10	420633
15 cm x 15 cm (6 po x 6 po)	5	420635
20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)	5	420636
15 cm x 20 cm (6 po x 8 po)	5	420637
10 cm x 20 cm (4 po x 8 po)	5	421156

**Pour obtenir plus d'informations sur les indications et les précautions, consultez le mode d'emploi dans l'emballage.**

## **Nous sommes là pour vous aider**

Cette brochure est conçue pour vous aider à comprendre comment appliquer et retirer votre pansement correctement et de façon atraumatique. Si vous avez besoin de plus de conseils :

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre des relations avec la clientèle de ConvaTec (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à **[www.convatec.ca](http://www.convatec.ca)**