



NOUS POUVONS

aider à améliorer des vies

Gamme de produits ESTEEM^{MD} 

Appareillage à une pièce, convexe



Gamme de produits **ESTEEM**^{MD} **Convex**

Pourquoi choisir la convexité

Aucun corps n'est identique. Les barrières cutanées convexes sont conçues pour aider à prendre en charge les stomies et les abdomens irréguliers et aider ainsi à réduire les fuites et simplifier la prise en charge des stomies.

- La convexité est la courbure vers l'extérieur de la barrière cutanée^{1,2}.
- La convexité applique une pression uniforme sur la peau touchant à la stomie pour améliorer la saillie de celle-ci et faciliter l'écoulement des excréta³.
- Une barrière cutanée convexe aide à maintenir l'étanchéité entre le sac et la peau⁴.

La gamme de produits **ESTEEM**^{MD+} à une pièce convexes est étendue et conçue pour différentes formes et tailles de stomies : convexité faible et ferme, à profondeurs variées pour favoriser le confort, la liberté, l'étanchéité et la confiance.

TYPES DE BARRIÈRES CUTANÉES



Plate - la barrière cutanée est à plat sur la peau.



Convexe - courbure vers l'extérieur, vers la peau^{1,2}.



Quand choisir la convexité




Stomies à ras de peau

Au même niveau que la surface de la peau de l'abdomen et ne fait pas saillie⁵



Stomies rétractées

Entrées dans l'abdomen sous le niveau de la peau, ou peu ou pas de bec⁶

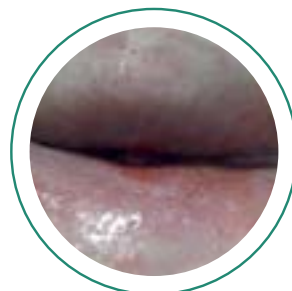

Plis de la peau

Une stomie dans un pli profond⁷




Abdomens mous et flasques

Un abdomen nécessitant un support ferme pour stabiliser l'appareillage⁵

L'importance de la largeur du plateau

Une barrière cutanée avec une convexité efficace doit exercer une pression suffisante sur la peau péristomiale pour obtenir une étanchéité autour de la base de la stomie et favoriser la saillie⁷.

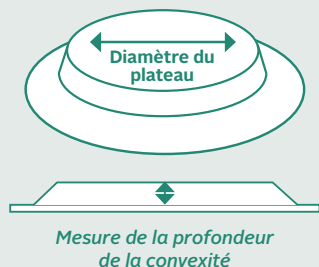


Pression associée à la convexité

Un plateau de petit diamètre crée une pression directement autour de la stomie; la pression diminue à mesure que le plateau s'élargit.

Largeur du plateau

Un plateau de plus grand diamètre aide à aplatir les plis de la peau, les éloignant ainsi de la stomie.

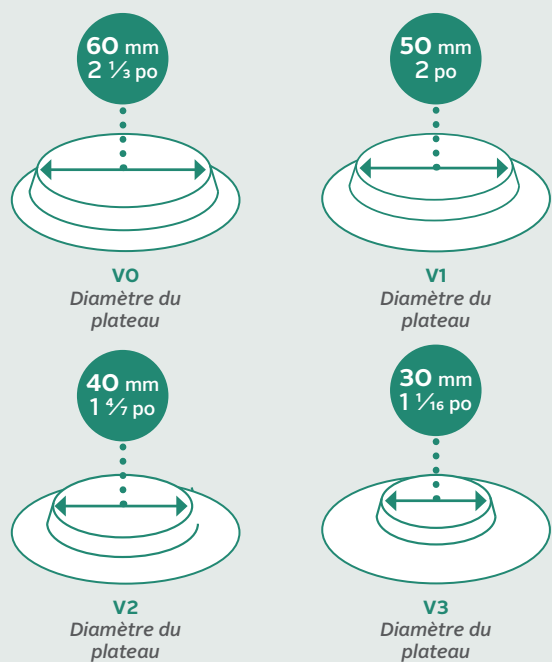

Gamme de produits

ESTEEM^{MD} Convex

Esteem^{MD} + Soft Convex

Offert en version à découper

Options vidable et pour urostomie

Profondeur de la convexité = 4 mm (1/8 po)

Principaux avantages

- Une faible convexité réduit la pression et favorise la conformabilité au corps
- Convient à une utilisation postopératoire immédiate



Esteem^{MD} + Flex Convex

Offert en version à découper

Options vidable et pour urostomie

Profondeur de la convexité = 7 mm (2/3 po)

Principaux avantages

- Allie le confort et la liberté qu'offre la flexibilité avec la fermeté de la convexité



Esteem^{MD} + (Firm) Convex

Offert en version prédécoupée

Option vidable

Profondeur de la convexité = 5 mm (3/16 po)

Principaux avantages

- Convient aux patients avec un abdomen mou et flasque
- Favorise la saillie d'une stomie à ras de peau ou rétractée



Esteem^{MD} + Soft Convex

Sacs vidables | À découper

Code de produit	Taille du plateau	Zone à découper	Quantité
422363	V1 (GRAND)	20-47 mm (¾ po - 1 ⅞ po)	10
422364	V2 (MOYEN)	15-40 mm (⅝ po - 1 ⅝ po)	10
422365	V3 (PETIT)	10-28 mm (⅜ po - 1 ⅛ po)	10

Sacs pour urostomie | À découper

Code de produit	Taille du plateau	Diamètre de l'ouverture	Quantité
422551	V1 (GRAND)	20-47 mm (¾ po - 1 ⅞ po)	10
422557	V2 (MOYEN)	15-40 mm (⅝ po - 1 ⅝ po)	10
422562	V3 (PETIT)	10-28 mm (⅜ po - 1 ⅛ po)	10

Esteem^{MD} + Flex Convex

Sacs vidables | À découper

Code de produit	Taille du plateau	Zone à découper	Quantité
422159	VO (TRÈS GRAND)	20-57 mm (¾ po - 2 ⅝ po)	10
421615	V1 (GRAND)	20-43 mm (¾ po - 1 ⅞ po)	10
421619	V2 (MOYEN)	20-35 mm (¾ po - 1 ⅜ po)	10
421622	V3 (PETIT)	20-25 mm (¾ po - 1 po)	10

Sacs pour urostomie | À découper

Code de produit	Taille du plateau	Zone à découper	Quantité
421623	V1 (GRAND)	10-43 mm (⅜ po - 1 ⅞ po)	10
421626	V2 (MOYEN)	10-35 mm (⅜ po - 1 ⅜ po)	10
421628	V3 (PETIT)	10-25 mm (⅜ po - 1 po)	10

Esteem^{MD} + (Firm) Convex

Sacs vidables | Prédécoupée (transparent)

Code de produit	Diamètre de l'ouverture	Quantité
416738	19 mm (¾ po)	10
416740	22 mm (⅞ po)	10
416742	25 mm (1 po)	10
416744	28 mm (1 ⅛ po)	10
416746	32 mm (1 ¼ po)	10
416748	35 mm (1 ⅜ po)	10
416750	38 mm (1 ½ po)	10

Sacs vidables | Prédécoupée (opaque)

Code de produit	Diamètre de l'ouverture	Quantité
416739	19 mm (¾ po)	10
416741	22 mm (⅞ po)	10
416743	25 mm (1 po)	10
416745	28 mm (1 ⅛ po)	10
416747	32 mm (1 ¼ po)	10
416749	35 mm (1 ⅜ po)	10
416751	38 mm (1 ½ po)	10



Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à www.convatec.ca