

AQUACEL^{MD} Foam Pro




Les gardiens de la peau



Guide d'application

Le seul pansement mousse multicouche en silicone offrant la puissance de la technologie Hydrofiber^{MD}.

Utilisé dans le cadre d'un protocole de soins, le pansement **AQUACEL^{MD} Foam Pro** est conçu pour protéger la peau contre les ruptures causées par l'humidité, les frictions et les forces de cisaillement[†].

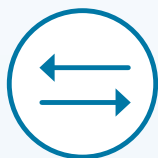

Aide à protéger la peau contre les frictions et les cisaillements

- Le pansement AQUACEL^{MD} Foam Pro est multicouche et est conçu pour aider à réduire les effets du cisaillement et des frictions*^{°1}.



Aide à défendre la peau contre l'humidité

- La pellicule du pansement AQUACEL^{MD} Foam Pro joue le rôle de barrière antibactérienne et antivirale pour protéger la plaie des contaminants extérieurs*^{1,2}.
- Le pansement est étanche à l'eau et peut rester en place sous la douche*¹.



Facile à appliquer

- Une couche adhésive perforée en silicone, douce pour la peau, permet une adhérence fiable et atraumatique*¹.
- Permet de réappliquer le pansement après une évaluation de la peau*¹.



Aide à maintenir un microclimat sain pour la peau

- La couche AQUACEL^{MD} aide à constituer un microclimat sain pour la peau en absorbant et en emprisonnant l'excès d'humidité*^{°1,2}.

Le pansement AQUACEL^{MD} Foam Pro offre les avantages suivants :



Conçu pour aider à protéger la peau contre les ruptures[°]



Adhésif ne colle pas aux gants ou à lui-même[†]



Facile à appliquer et à retirer[†]



Étanche à l'eau — peut rester en place dans la douche[†]



Barrière antivirale et antibactérienne^{†*}



Durée de port maximale recommandée : 7 jours




Doux, atraumatique, flexible et confortable^{†*}


* Selon des tests *in vitro*. ° Lorsque le pansement est utilisé dans le cadre d'un protocole de soins.

† Consultez la notice dans l'emballage du pansement AQUACEL^{MD} Foam Pro pour obtenir le mode d'emploi détaillé.


La gamme de pansements AQUACEL^{MD} Foam Pro est maintenant offerte en six tailles pour protéger la peau de toutes les zones du corps contre les ruptures.

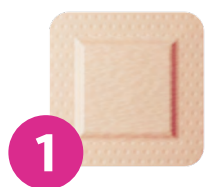

8 cm x 8 cm / 3 po x 3 po

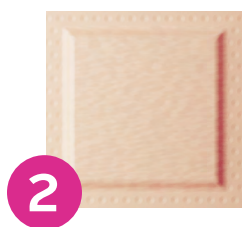

10 cm x 10 cm / 4 po x 4 po

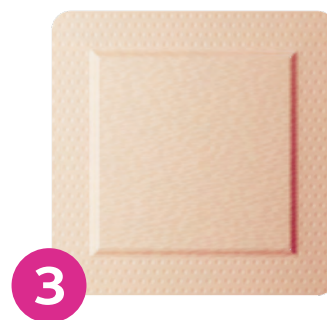

15 cm x 15 cm / 6 po x 6 po



Talon
19,8 cm x 14 cm /
8 po x 5,5 po





Sacrum – standard
20 cm x 16,9 cm /
8 po x 7 po



Sacrum – grand
24 cm x 21,5 cm /
9,4 po x 8,4 po

Le pansement **AQUACEL^{MD} Foam Pro** peut être utilisé sur plusieurs sites anatomiques.

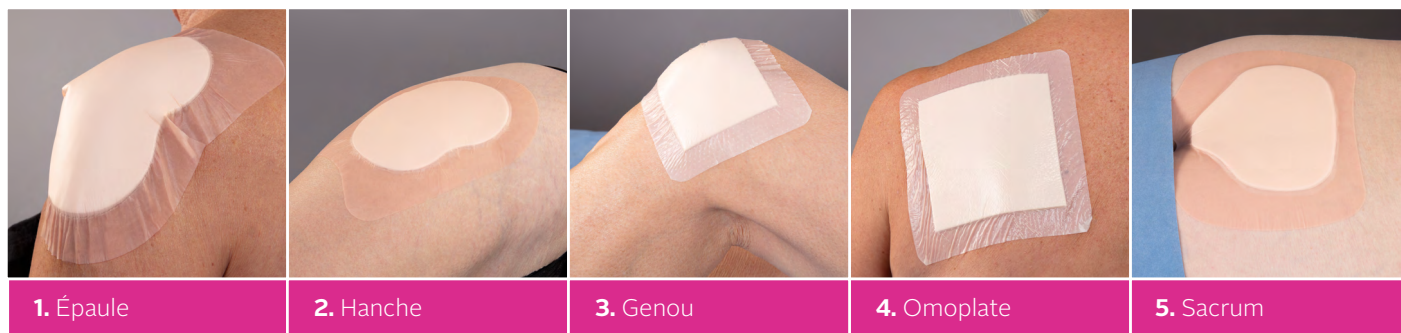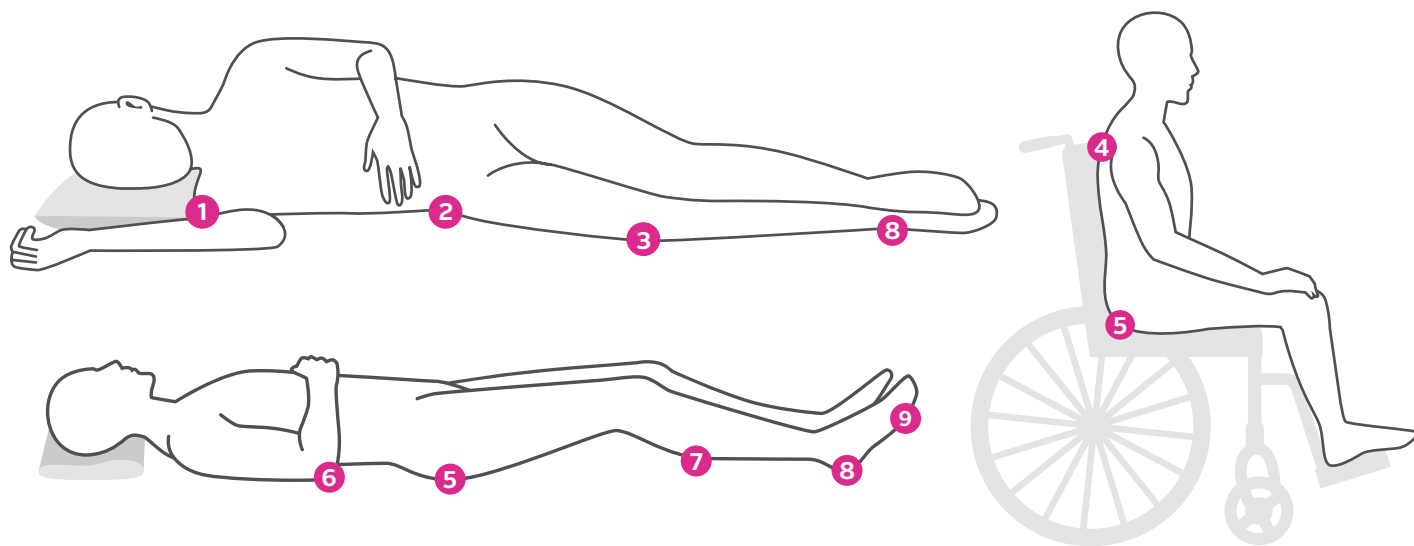


*Le pansement AQUACEL^{MD} Foam Pro peut être utilisé dans le cadre d'un protocole de soins complet pour assurer une protection contre la rupture de la peau.

Lignes directrices pour l'application*

Protection de la peau

Pansement primaire

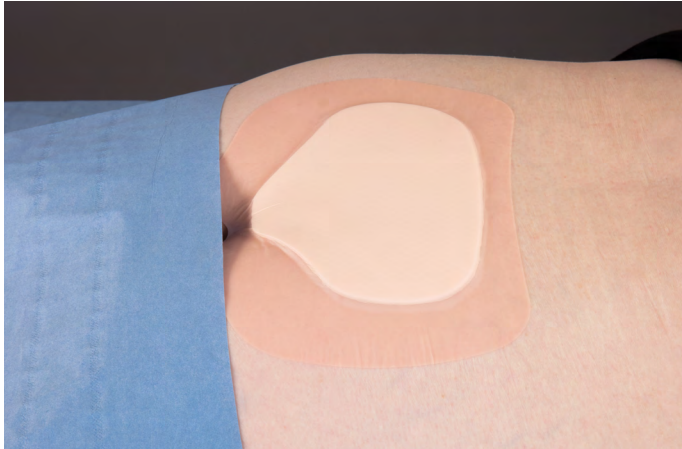

Sacrum

1. Évaluez la zone à protéger avant d'appliquer le pansement.
2. Assurez-vous de nettoyer cette zone avec un nettoyant approprié, puis asséchez la peau.
3. Retirez d'abord le papier protecteur central.
4. En tenant les bords du pansement, pliez-le en deux et placez-le dans le pli interfessier.
5. Lissez les bords du pansement.



Talon

1. Évaluez, nettoyez et mesurez la zone.
2. En partant du tendon d'Achille, appliquez fermement le pansement et collez les bords supérieurs sur la peau.
3. Retirez le papier protecteur en appliquant les ailes du pansement autour du pied.
4. Repliez les bords et lissez parfaitement le pansement.

Conseils pour l'application et la prise en charge

- Appliquez le pansement seulement sur une peau intacte, propre et asséchée.
- Appliquez le pansement sur les patients affichant 18 ou moins à l'échelle Braden et s'ils sont incapables de repositionner eux-mêmes le pansement.
- Remplacez le pansement selon la politique de l'hôpital (durée de port maximale de 7 jours) ou si des selles ou de l'urine pénètrent sous le pansement.
- Apposez vos initiales et inscrivez la date au moment de l'application du pansement.
- Consultez un infirmier ou une infirmière spécialiste en soins des stomies, des plaies et de la continence ou en soins des plaies si vous soupçonnez la présence d'une lésion de pression.

Destiné exclusivement au service des urgences


Appliquez le pansement si le patient est admis à l'hôpital, mais reste au service des urgences pendant plus de 4 heures et que, sur la civière, il est impossible de soulager la pression sur le sacrum.

Destiné exclusivement aux salles d'opération

Appliquez sur le sacrum ou d'autres zones à risque pendant les opérations durant 4 heures ou plus.

Information pour commander

Code de produit	Dimensions du pansement	Dimensions de la compresse	Nbre de pansements/ emballage
422359	8 cm x 8 cm / 3 po x 3 po	5 cm x 5 cm / 2 po x 2 po	10
422357	10 cm x 10 cm / 4 po x 4 po	6,5 cm x 6,5 cm / 2,5 po x 2,5 po	10
422358	15 cm x 15 cm / 6 po x 6 po	11 cm x 11 cm / 4 po x 4 po	10
422356	19,8 cm x 14 cm / 8 po x 5,5 po	14 cm x 8,7 cm / 5,5 po x 3,4 po	10
421579	20 cm x 16,9 cm / 8 po x 7 po	11,4 cm x 13,5 cm / 4,5 po x 5,3 po	5
421580	24 cm x 21,5 cm / 9,4 po x 8,4 po	16,4 cm x 13,8 cm / 6,4 po x 5,4 po	5

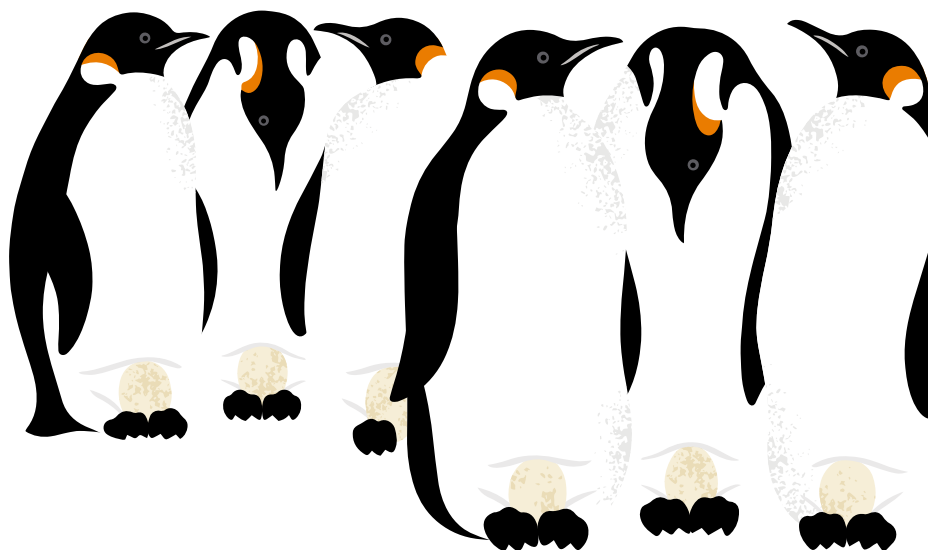

AQUACEL^{MD} Pro
Foam

Les gardiens de la peau
Protéger, défendre et soigner

Pour obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web au **www.convatec.ca**

1. In-vitro Performance Characteristics of AQUACEL® Foam Pro WHRI4536MS129. 2015. Data on File. ConvaTec.
2. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (AQUACEL®) and alginate dressings. Biomaterials. 2003;24(5):883-890.

MD et MC indiquent respectivement une marque déposée et une marque de commerce de ConvaTec Inc.
©2018 ConvaTec Inc. AP-020788-MM V1576

