




ESTEEM^{MD} (+) Flexible avec Convexité

MODE D'EMPLOI DE LA FERMETURE DE SAC SANS ATTACHE


1 FERMETURE DU SAC




Étape 1 : Saisir les bandelettes à l'extrémité du sac, puis replier les bandelettes vers le haut (vers soi) jusqu'à ce que les dispositifs de fermeture se juxtaposent.

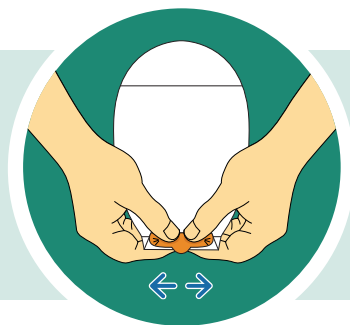


Étape 2 : Appuyer sur toute la largeur des dispositifs de fermeture jusqu'à ce que l'on sente, sous les doigts, le verrouillage s'effectuer.

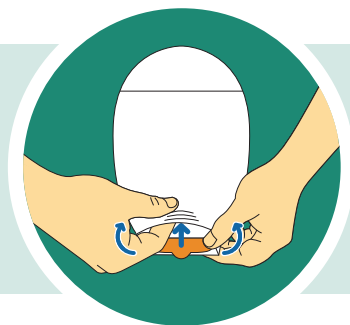

Étape 3 : Placer un doigt dans l'ouverture sous le tissu et y faire entrer le dispositif de fermeture (au choix).

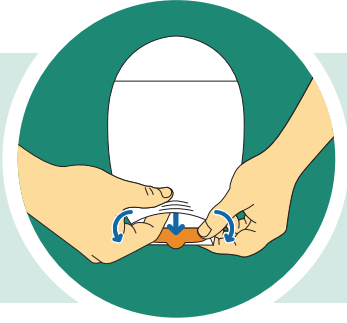

Étape 1 : Sortir le dispositif de fermeture de l'espace sous le tissu.

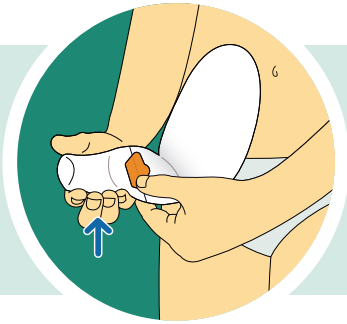

Étape 2 : Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut (vers soi), détacher la fermeture, puis déplier l'extrémité.



Étape 3 : Tenir l'extrémité du sac d'une main, et de l'autre, ouvrir l'extrémité en appuyant sur les deux côtés des bandelettes pour vider le sac.

Conseil : Tirer sur l'onglet pour faciliter l'ouverture du sac.



Étape 4 : Nettoyer délicatement la surface à l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes, et au choix, avec du savon au pH neutre et de l'eau.



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web au **www.convatec.ca**

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d'emploi détaillé.