



Vidable Pour urostomie

ESTEEM^{MD} Flex Convex

Avec barrières cutanées à découper

1 Obtenir la bonne taille




Barrière cutanée à découper



La bordure de l'ouverture au centre de la barrière cutanée doit épouser la stomie le plus étroitement possible. Il faut donc découper l'ouverture à la taille de la stomie. Prendre garde de ne pas découper au-delà du cercle extérieur (marqué) ni d'exposer l'anneau intérieur en plastique.


2 Application du sac

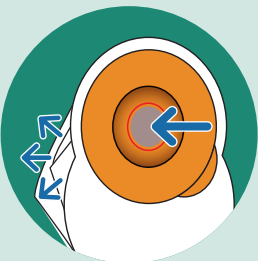


Gonfler légèrement le sac en soufflant pour séparer les parois internes.




Réchauffer la barrière cutanée avec la paume de la main pendant quelques secondes pour faciliter l'adhérence.

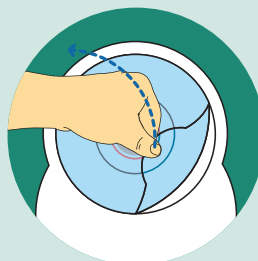

Retirer le papier protecteur transparent de la barrière cutanée en tirant sur l'onglet.

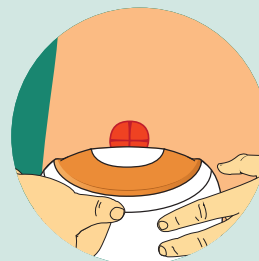

Placer la barrière cutanée en dessous de la stomie. En partant du bas, appliquer avec précaution la barrière cutanée sur la peau autour de la stomie.

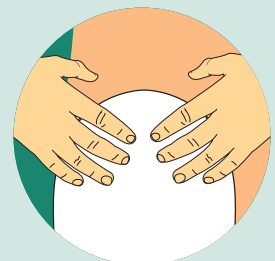

Lisser le dos de la zone de l'adhésif avec les doigts et, avec précaution, mais fermeté, exercer une pression autour de la stomie.

 Pour un sac **vidable**, passer à l'étape 3.


 Pour un sac **pour urostomie**, passer à l'étape 5.

3

Fermeture du sac vidable



Replier les bandelettes vers le haut (vers soi) jusqu'à ce que les dispositifs de fermeture se juxtaposent. Appuyer partout sur les dispositifs de fermeture pour s'assurer que le sac est bien fermé.

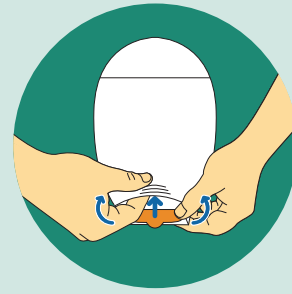

Au choix, faire entrer le dispositif de fermeture dans l'ouverture sous le tissu.

4

Vidange et nettoyage du sac vidable




Pour vider le sac, relever l'extrémité vers le haut (vers soi), détacher la fermeture, puis déplier l'extrémité.




Ouvrir l'extrémité en appuyant sur les deux côtés des bandelettes, puis vider le sac.

Conseil : Tirer sur l'onglet pour faciliter l'ouverture du sac.

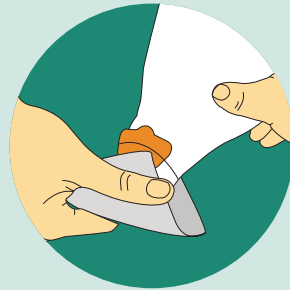


Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d'une main, et de l'autre, essuyer l'extrémité du sac avec un mouvement vers le bas au moyen de papier de toilette.

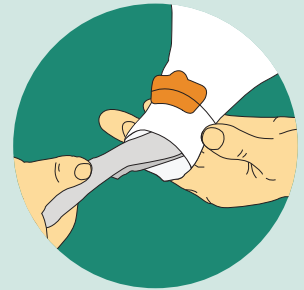

Nettoyer délicatement la surface à l'intérieur de l'extrémité avec du papier de toilette ou des lingettes.

5

Retrait du sac

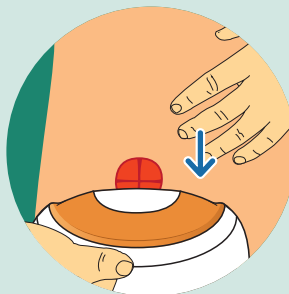

Pour retirer un sac et le mettre au rebut, le détacher délicatement en partant de la partie supérieure **tout en appuyant l'autre main sur la peau au-dessus de la barrière cutanée.**

me+

soutien

Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au **1-800-465-6302**, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à **www.convatec.ca**

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d'emploi détaillé.

MD et MC indiquent respectivement une marque déposée et une marque de commerce de ConvaTec inc.
© 2020 ConvaTec inc. AP-021137-CA V1461

 ConvaTec