


幅広い用途に

滲出液の少ない、または、ない創傷部位にご使用ください。

スキンテア

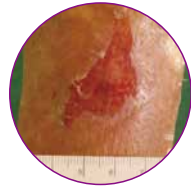

皮膚の擦過



ごく浅い熱傷



貼付例

やわらかくてなじみやすい。



すね

ひじ



手首

ひざ

足首

※写真は承諾を得て複製しています。
皮膚擦過-C Espinosa IDE (Toulouse)、スキンテア-F Jullien IDE (Nice)
※写真提供: ConvaTec image library (AP-01725-US)



<はがし方>

1 皮膚を抑えながら慎重にドレッシングの隅を注意深く持ち上げます。

❗ シャワー・入浴時に交換することも可能です。

2 この要領で全周を皮膚から浮かせ、ゆっくりと慎重にはがしてください。

❗ 固着の可能性がある場合は、生理食塩水や微温湯などで濡らしてから除去してください。

販売名: ふぉーむらいと

規格	包装	注文番号
5.5×12cm	10枚/箱	00475
8×8cm	10枚/箱	00476
10×10cm	10枚/箱	00477
15×15cm	10枚/箱	00478

【禁忌・禁止】

再使用禁止
本品又は本品の構成成分に過敏な患者、又はアレルギー反応を有する患者には使用しないこと。

届出番号: 13B1X10071000004
医療用品 (04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード: 34864000
保管方法: 室温保存。高温、多湿を避ける。

参考文献

- MS D Kesteven. In Vitro Performance Characteristics of Foam Lite™ ConvaTec. WHRI4680 MS132 Rev1. 16 May 2016; 1-9.
- Meuleneire F, Rücknagel H. Soft silicones Made Easy. Wounds International 2013 (May). Available from: www.woundsinternational.com



創傷部位をまもる うす型フォームドレッシング登場。

新発売!

ふぉーむらいと
FoamLite
ConvaTec



通気性のある外層フィルムは
うす桃色で目立たない。

体にフィットして、
貼るのもはがすのもやさしい!

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

®はConvaTec Inc.の登録商標です。© 2017 ConvaTec Inc.

ConvaTec

製造販売元
コンバテック ジャパン株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

お客様相談窓口
0120-532384
<http://www.convatec.com>

ConvaTec

新発売!

創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシング

「ふぉーむらいと」

ふぉーむらいとは、滲出液の少ない、または、ない創傷部位に貼付するドレッシングとして開発されました。創傷部位をまもりたい、毎日のニーズに寄り添います。



- 外力からまもる
- 感染リスクからまもる
- ムレと乾燥からまもる¹

8つの製品特長

- やわらかい、なじみやすい¹
- 粘着層がグローブにねん着しにくい
- ウイルスや細菌の侵入を防ぐ¹
- 1枚のドレッシングで最長7日間まで貼付が可能¹
- カットできる
- 貼り付け、貼り直し、剥離が容易^{1,2}
- 軽くやわらかな装着感¹
- 防水仕様、シャワー浴可能¹

注目!
創傷部位を
やさしくまもる
3層構造



1 防水性外層 <ポリウレタン>

ずれ・摩擦の軽減につながるすべりの良い外層フィルム¹。通気性があり、紫外線を遮り、防水仕様でウイルスや細菌の侵入を防ぎます。

2 吸水性パッド <ポリウレタン>


うすくてやわらかいフォーム層は、少量の滲出液を吸収し、創傷部位をやさしく覆います。

3 創傷接触面 <シリコーン>

開孔構造でやわらかな全面シリコーン粘着層は、貼り付け、貼り直しが容易で交換時にやさしくはがせます^{1,2}。

ふぉーむらいと
FoamLite
Convatec

製品ラインナップ

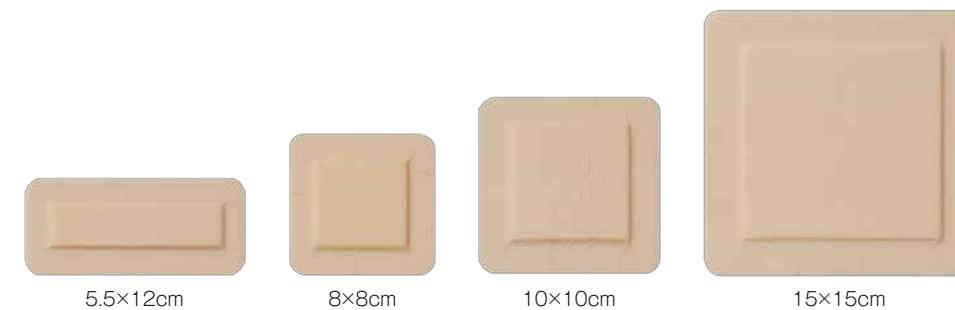

規格	包装
5.5×12cm	10枚/箱
8×8cm	10枚/箱
10×10cm	10枚/箱
15×15cm	10枚/箱

Skin's Guardians
PROTECT. DEFEND. NURTURE