

ふぉーむらいと

FoamLite
ConvaTec

ご使用ガイド



医療機器届出番号:13B1X0071000004
医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード:34864000

販売名:ふぉーむらいと

注文番号	規格(パッドサイズ)	包装	メーカー希望小売価格
00475	5.5×12cm (2.5×9.5cm)	10枚/箱	¥2,100+消費税
00476	8×8cm (5×5cm)		¥2,100+消費税
00477	10×10cm (6.5×6.5cm)		¥2,600+消費税
00478	15×15cm (11×11cm)		¥5,200+消費税
* 00479	5×5cm (2.5×2.5cm)		¥1,500+消費税
* 00480	10×20cm (6.5×15cm)		¥5,200+消費税

*2018年春 発売予定

参考文献

1.MS D Kesteven. In Vitro Performance Characteristics of Foam Lite TM ConvaTec. WHRI4680 MS132 Rev1. 16 May 2016; 1-9.
2.Meuleneire F, Rücknagel H. Soft silicones Made Easy. Wounds International 2013 (May). Available from: www.woundsinternational.com

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

®はConvaTec Inc.の登録商標です。© 2018 ConvaTec Inc.



キズを保護する
救急絆創膏

貼るのも、はがすのも
やさしい

 ConvaTec

製造販売元
コンバテック ジャパン株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

お客様相談窓口
 0120-532384
<http://www.convatec.com>

ふぉーむらいと FoamLite ConvaTec

お肌に優しいシリコーン粘着技術を取り入れた救急絆創膏です。

キズをやさしくまもる3層構造

防水性外層<ポリウレタン>
シャワー・入浴ができます¹。
紫外線をカットします。

吸水性パッド<ポリウレタン>
吸収力があります。
やわらかいクッションになります。

創傷接触面<シリコーン>
やさしく安全に貼りつきます。
はがすときにもやさしい
粘着剤です^{1,2}。

様々な部位にフィットします。




❗ 本品をカットして使用する場合は、包帯やテープで固定して下さい。

貼り方

❶ 本品を貼付する前に、
キズを洗浄し水分を拭き取ります。



❷ 吸水性パッドの大きさが
キズよりも周囲1cm程度
大きいサイズの製品を選びます。

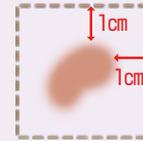

❸ 外周の部分に
シワが入らないように
注意してお貼りください。



❗ 関節など曲がる部位には曲げた状態で本品を貼付します。

はがし方

● 本品をはがす時は、
周囲の皮膚を押えながら
本品の隅をゆっくりと
持ち上げるようにはがしてください。



交換の時期

キズから出てくるジクジクした液体が漏れ出してくる前、
または、貼付中の本品パッド部の汚れが確認出来た時点で、
新しいものに交換してください。

※最長でも7日以内に新しい本品に交換してください。

使用上の注意

❗ 本品を使用中にキズの周辺が赤く熱を持つ、腫れる、痛みが持続する場合には
本品の使用を中止し、医療機関にて適切な治療を受けてください。

