

# コンバテック ストーマケア製品 総合力タログ

ConvaTec Ostomy Care Product Catalogue

コンバテック ストーマケア製品 総合力タログ ConvaTec Ostomy Care Product Catalogue



## わたしたちの理念、ビジョン、ミッション

**理念** 私たちは、企業活動を通じて人々の生活をより豊かにします。

**ビジョン** 私たちは、医療技術分野で最も成功したグローバル企業として  
人々から敬愛されることを目指し、競合優位性の創造を図ります。

**ミッション** 私たちは、あらゆる活動においてエクセレンスを追求します。  
先進の技術と最高の製品・サービスでお客様に寄り添いニーズにお応えします。

# Contents

Our History .....	4
コンバテックの皮膚保護剤 .....	4
コンバテックの面板の構造・形状 .....	5
コンバテック モルダブル テクノロジー™ .....	6
コンバテックの新設計ストーマ袋 .....	8
やわらかシリーズのストーマ袋 .....	10
主要製品紹介早見表 .....	12

### 製品紹介

単品系ストーマ装具 .....	19
やわらか シリーズ .....	20
エスティーム シリーズ .....	23
アクティブライフ シリーズ .....	27
二品系ストーマ装具 .....	29
ナチュラ・アコーディオン シリーズ .....	30
ナチュラ シリーズ .....	34
バリケア オートロック シリーズ .....	41
エスティーム シナジー シリーズ .....	43

小児用ストーマ装具 .....	45
アクセサリー製品 .....	47

洗腸製品 .....	54
------------	----

製品の使用方法 .....	56
単品系ストーマ装具の使用方法 .....	57
二品系ストーマ装具の使用方法 .....	59
ストーマ袋の閉鎖具の使用方法 .....	61
アクセサリー製品の使用方法 .....	64

索引 .....	66
----------	----



コンバテックからの提言  
**再現性の高いシンプルケア**

誰でもシンプルに漏れないケアを実現できる。  
ストーマ装具とは、そうあるべきだと、私たちは考えます。

病院の機能分化や急激な高齢化に伴い、高齢者の入院・入所施設も多様化しました。高齢の入院患者を、退院後に施設サービスや在宅サービスへ円滑に移行するうえで、必ずしも医療専門職の配置が、病院に比べて厚くない場合、ストーマ管理を含む医療管理の対応がしにくい状況にあります。在宅への移行の場合も同様です。

ご家族、訪問看護師、施設配置看護師および介護職者等、一人のオストメイトに関わるケア提供者が経時的に多様化すると「シンプルに漏れないケアを実現できること」が重要になります。

しかし、単にシンプルなだけでは意味がありません。「誰でも」シンプルに、漏れないケアを実現できることが重要なことです。例えば、コンバテック モルダブル テクノロジー™の確かな保護力は臨床研究において立証されています。コンバテック モルダブル テクノロジー™採用製品を使用した新規ストーマ造設者の95%以上が、皮膚を健康な状態に保っています。また同技術採用製品を使用したストーマ保有者の86%以上が、皮膚トラブルを改善しています<sup>1)</sup>。

私たちは、オストメイト、そしてストーマケアに従事するすべての人に寄り添い、誰もが簡単に扱えて、漏れのない生活を過ごして頂きたいという思いを持ち続け、「誰でもシンプルに漏れないケアを実現できる」その様なストーマケア製品を提案します。

それがコンバテックの「再現性の高いシンプルケア」という提言です。

1) Szewczyk MT, Majewska GM, Cabral MV, Hözel-Piontek K. Osmose Study: Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Poster Presented at ECET, Paris, France, June 2013.

# Our History

コンバテックは、世界で初めて皮膚保護性を有する湿潤粘着剤を開発し、現在の皮膚保護剤のスタンダードであるポリマー・ブレンド系皮膚保護剤のはじまりとなった「バリケア」として製品化するなど、ストーマ装具の技術的基盤を築き、ストーマをお持ちの皆様の生活の質(Q.O.L)向上に貢献して参りました。「バリケア」をはじめとするコンバテックの皮膚保護剤は、世界中の医療従事者より高い評価と信頼を頂き、多くのストーマをお持ちの皆様にご使用頂いております。

- 1960年代 スクイブ・コーポレーションが開発した歯科用粘着材をストーマケア製品として製品化。画期的な製品として高い支持を得る。
- 1978 日本における、スクイブ・コーポレーションの独立部門としてコンバテック事業部設立。バリケアウェハーと世界最初の二品系ストーマ装具バリケア システム2を発売。
- 1999 バリケア ナチュラ発売
- 2000 バリケア オートロック発売
- 2004 コンバテック モルダブル テクノロジー製品発売
- 2010 新設計ストーマ袋(エスティーム／エスティーム シナジー)発売
- 2012 新設計ストーマ袋(ナチュラプラス)発売  
エスティームCVX発売  
ニルタック／シレッセ発売
- 2013 エスティーム インビジクローズ ドレンパウチ 中長期発売
- 2014 コンバテック シール発売  
エスティーム モルダブル発売
- 2016 エスティームやわらか凸発売
- 2017 やわらか凸イレオ、やわらか平面イレオ発売  
二品系浮動型フランジ「ナチュラ・アコードィオン シリーズ」発売
- 2018 パナソニックの先進技術で生まれた「ニオフ消臭潤滑剤」発売

## 面板

# コンバテックの面板の構造・形状

## フランジの構造



### 浮動型フランジ

面板から浮き上がっているフランジです。



### 固定型フランジ

面板に固定されているフランジです。

## 面板の構造




### 全面皮膚保護剤タイプ

全面に、皮膚保護剤を使用している肌に優しいタイプです。




### 外周テープ付タイプ

皮膚保護剤の外周に、テープを使用しており、腹壁に沿って密着します。

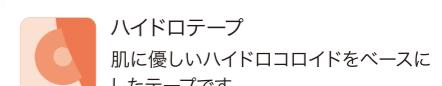

#### ハイドロテープ

肌に優しいハイドロコロイドをベースにしたテープです。

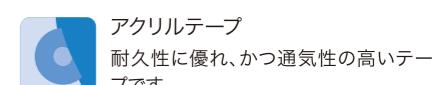

#### アクリルテープ

耐久性に優れ、かつ通気性の高いテープです。

## 面板の形状



### 平面型

平面の面板。



### 凸面型

凸型嵌め込み具が内蔵された面板です。高さのないストーマや、しわ・くぼみのあるストーマ周囲の皮膚への面板の密着を高めます。



#### 凸型内蔵(硬い凸型)

### やわらかい凸面型

やわらかいのにコシがある凸型はめ込み具が、近接部を押さえて漏れを防ぎます。また、身体の動きに追従するため、硬い凸面型面板で不可避だった違和感を軽減します。



#### やわらかい凸面



## 面板

# コンバテックの皮膚保護剤

コンバテックの皮膚保護剤は4種類です。目的に応じて、使い分けていただくことができます。

### 肌に優しい

#### バリケア(CPB系)

- 短期交換でも剥離刺激が少なく、皮膚に優しく安心です。
- 水分を素早く吸収してゲル化するため、湿った皮膚にも粘着します。



#### やわらか皮膚保護剤(CPBS系)

- 初期粘着が非常に優れ、早期に密着を確保します。



#### デュラプラス(CPS系)

- 皮膚に優しく、耐久性、密着性、柔軟性にも優れています。
- 初期粘着に優れ、腹壁にしっかりとフィットします。



#### デュラヘーシブ(CPBS系)

- 水様性排泄物のストーマ(イレオストミーやウロストミー)に最適です。
- 水分を吸収して膨潤し、ストーマとの隙間を埋めて、排泄物のもぐり込みを防ぎます。



# コンバテック モルダブル テクノロジー™

隙間なく、漏れも少ない優れた皮膚保護剤が、  
ストーマ近接部を強力に保護します。



特長1

指で成形、ハサミは不要  
皮膚保護剤を指で巻き広げて成形することで、さまざまな形状やサイズのストーマに対応可能。正確にストーマサイズを測る必要も、ハサミを使う必要もありません。



特長2

リバウンディングメモリー™  
皮膚保護剤が自然に巻き戻り、日々変化するストーマにも隙間をつくりません。




特長3

タートルネック作用  
水分に触れるとき皮膚保護剤部分が膨潤し、タートルネックのようにストーマ近接部にフィットし、より強力に隙間を防ぎます。

必要なのは、ストーマ近接部へのしっかりとした“フィット”。

ストーマ周囲の皮膚を保護するうえで大切なことは、皮膚保護剤がストーマ近接部にしっかりとフィットし、隙間をつくらないこと。  
隙間があると、皮膚は排泄物の刺激にさらされてしまいます。  
コンバテック モルダブル テクノロジー™採用製品は、術後日々変化していくストーマに合わせて、自然に穴の大きさを変えていくので、常に隙間のない状態を保つことができます。

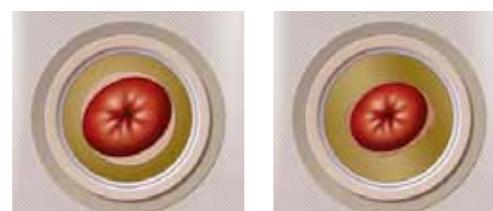

皮膚保護剤がフィットしていないと、ストーマ周囲は排泄物の刺激にさらされます。



コンバテック モルダブル テクノロジー™採用製品は、皮膚保護剤とストーマの間に隙間をつくりません。  
これにより、排泄物のもぐり込みを防ぐことができます。

ストーマ保有者の半数がスキントラブルを経験

ストーマ保有者の50%が皮膚トラブルを抱えているという事実<sup>1,2</sup>。  
その皮膚トラブルの大部分は、「漏れ」に関するものです。

# 34% 47% 52%

ストーマ保有者の34%が、術後3週間以内に皮膚トラブルを起こしています<sup>3</sup>。

ストーマ保有者の47%が、術後2ヵ月以内に皮膚トラブルを起こしています<sup>4</sup>。


ストーマ保有者の52%が、術後1年以内に皮膚トラブルを起こしています<sup>2</sup>。

臨床的に証明された高い皮膚保護力

臨床研究において、コンバテック モルダブル テクノロジー™の確かな保護力が立証されています。


# 95%

コンバテック モルダブル テクノロジー™採用製品を使用して60日目の新規ストーマ造設者は、95%以上が皮膚を健康な状態に保っています。<sup>5</sup>

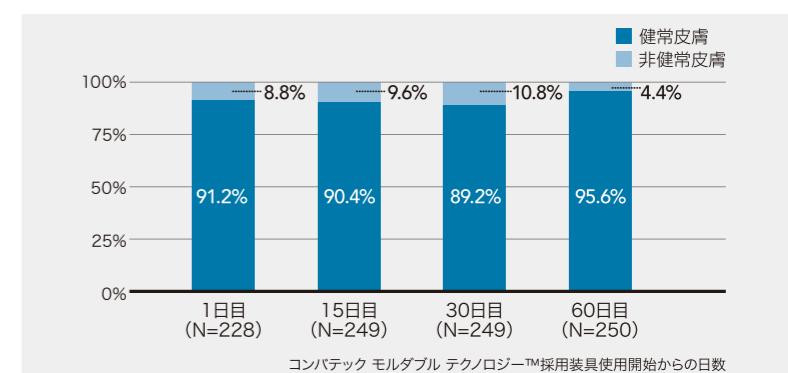

# 86%

コンバテック モルダブル テクノロジー™採用製品を使用して60日目のストーマ保有者が、86%以上が、皮膚トラブルを改善しています。<sup>5</sup>

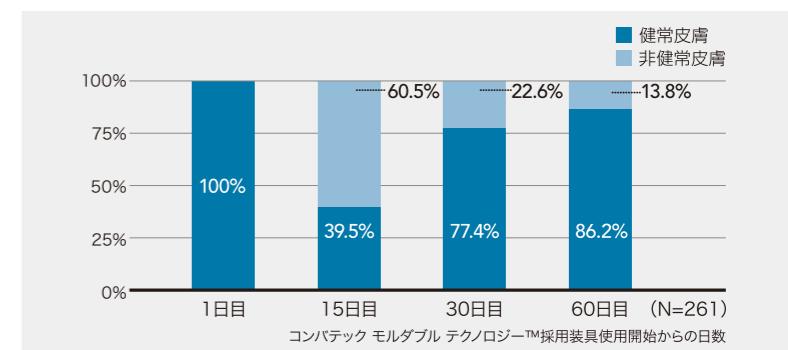

## 参考文献

- 1.Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, et al. Ostomy skin study: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs 2006;15(16):854-862.
- 2.Bosio G, Pisani F, Lucibello L. A Proposal for Classifying Peristomal Skin Disorders: Results of a Multicenter Observational Study. OWM. 2007; 53(9): 38-43.
- 3.Cottam J, Richards K, Haslett A, Blackman A. Results of a nationwide prospective audit of stoma complications within 3 weeks of surgery. Colorectal Dis 2007; 9: 834-8.
- 4.Rattif CR. Early Peristomal Skin Complications Reported by WOC Nurses. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2010; 37(5): 505-510.
- 5.Szewczyk MT, Majewska GM, Cabral MV, Hötzel-Piontek K. Osmose Study: Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Poster presented at ECET, Paris, France, June 2013.

# コンバテックの新設計ストーマ袋

新設計ストーマ袋は、ストーマケアに携わる医療従事者と400名以上のオストメイト、計1,000名以上から意見を聞いて研究を重ね、開発されました。高性能かつ今まで以上に使

## 1 新フィルター

高機能なメンブレンフィルターを採用。さらにフィルター位置を上部へ移動することで、より詰まりにくくなり、高い消臭効果を発揮。入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。



## 2 逆流防止弁

排泄物の逆流を防ぐ逆流防止弁がストーマ周囲を排泄物の刺激から保護。フィルターの詰まりも防ぎます。

## 3 新形状・新素材

快適性に優れ、目立たない、流線型デザイン。高い速乾性と、衣ずれ音がしにくい快適素材の不織布。



※フィルターシール貼付時

## 4 折りたためる


収納ポケットに垂れた排出口を隠すことができ、ソ径部にあたりません。安全性と快適性が向上しました。



※写真は改良型ストーマ袋

## 5 排出が簡単

排出口が広くなり、排出が手早く簡単に。改良型ストーマ袋には新たに指をそえるくぼみを追加。さらに使いやすくなりました。

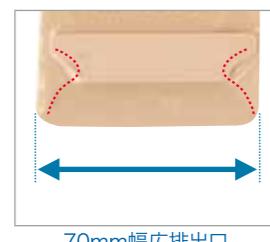

70mm幅広排出口


いやすくなった新設計のストーマ袋で、確かな安全性と快適性を皆さまに実感していただけると思います。



## ストーマ袋の素材

### 5層の積層プラスチックフィルムが、においや水分を漏らしません。

排泄物を蓄え、においや水分を漏らさず、外部からの衝撃に対する強度があります。  
(厚さ:消化管用 0.075mm、尿路用 0.100mm)

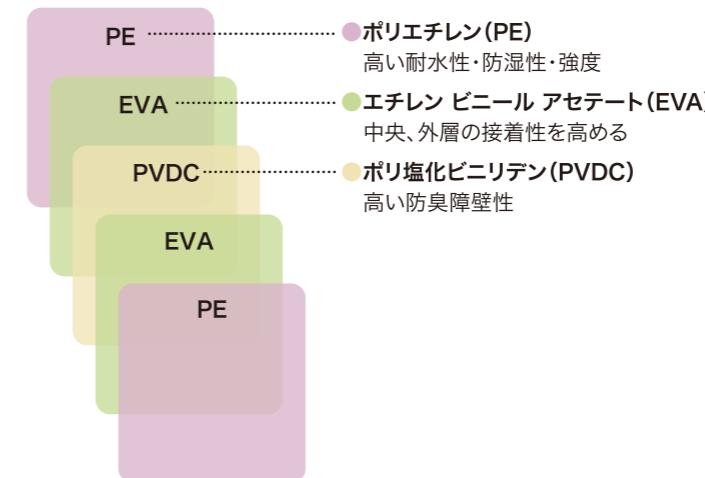


ストーマ袋の色には  
透明タイプと肌色タイプの  
2種類があります。

## コンバテック独自のメンブレンフィルター<sup>※</sup>

においと膨らみを抑え快適な生活を送れるコンバテック独自のメンブレンフィルター<sup>※</sup>。


フィルターの目詰まりや漏れの心配がより軽減されました。

入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。

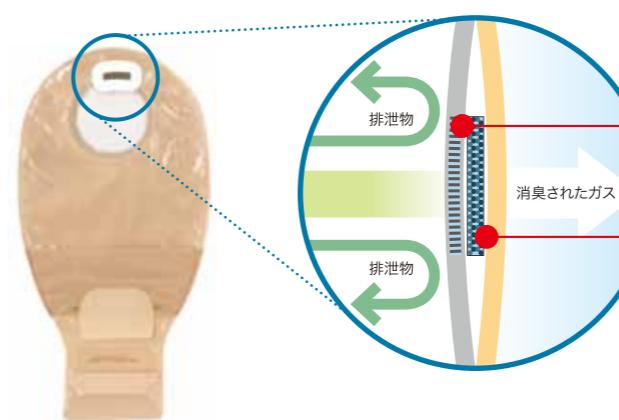

**メンブレン（液体遮断性の高い膜）**  
メンブレンが排泄物をブロック、ガスだけを透過します。排泄物によるフィルターの目詰まりや漏れの心配がありません。

**高性能フィルター**  
においの元となる有機臭や硫化水素に優れた消臭効果があります。

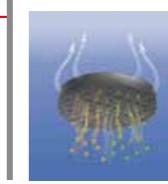

※メンブレンフィルターはフィルター付のドレインパウチ（インビジクローズを含む）に付いているフィルターです。イレオストミーパウチに付いているフィルターは防臭フィルターです。

# やわらか シリーズのストーマ袋


## エスティーム やわらか凸(消化管用/尿路用)

### 防臭フィルター


ガスを透過させ、液体を通さないメンブレン採用の防臭フィルターが、バルーニング<sup>※</sup>を軽減します。  
※ガスがストーマ袋内に溜まり膨らむこと。

### フィルター保護構造

ストーマ袋の中を多層構造化し、便汁からフィルターを保護します。ストーマ袋の中に仕切りのフィルムが1枚あり、S字の切れ込みからガスが通過します。

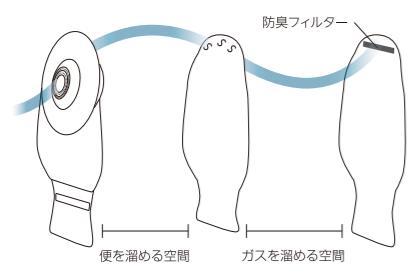

### 尿路用

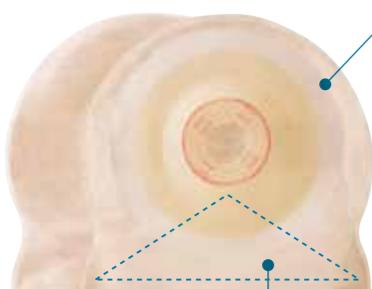

### ベルトタブ

装具の装着を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。パリケアベルトをご一緒に使いいただくことが可能です。



### 不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性の不織布を採用。

### 逆流防止弁


ストーマ袋内の尿がストーマに向かって逆流せず、逆行性感染を防止します。  
※尿路用ストーマ袋のみ採用。

### キャップ式排出口


尿が漏れない、確実閉鎖が可能な設計。

### 4つのサイズの凸型はめ込み具

高さ7mmの凸型はめ込み具。内径に4つのサイズのバリエーションをご用意。よりストーマの近くを押さえて、漏れを防ぎます。

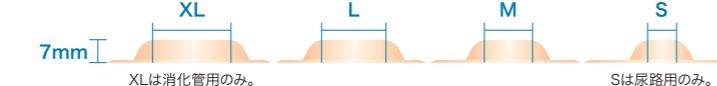

### 消化管用

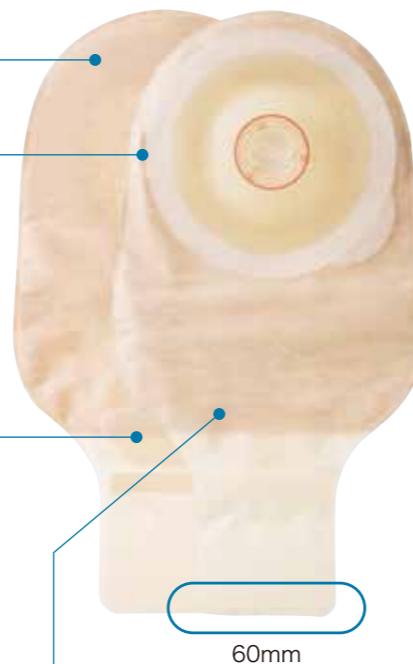

### セーフシール排出口

気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口を採用。排出口を留めるためのフランプを排出口の上部に配置。内寸が約60mmなので、コロストミーの方のみならずイレオストミーの方にも、しづら出しやすい排出口です。

### スリット

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。



## やわらか凸 イレオ / やわらか平面 イレオ

### 不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性に優れた不織布を採用。


### スリット

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。



### 消臭フィルター

半透過性膜のメンブレンがガスのみ透过させ、水分の透過を防ぎます。

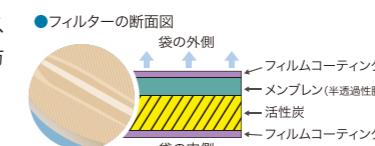


### やわらか凸 イレオ



### フィルター保護構造

ストーマ袋の中を多層構造化し、便汁からフィルターを保護します。ストーマ袋の中に仕切りのフィルムが1枚あり、S字の切れ込みからガスが通過します。

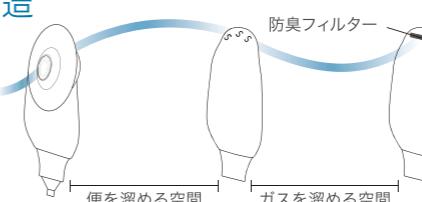

※入浴・シャワー・水泳などの際は、付属のフィルターシールをフィルターに貼付してください。

### やわらか平面 イレオ



術直後から使用可能で  
様々なニーズに適応します。  
有効径は60mm。

### やわらか平面 イレオ 装具の適応症例

- 術後の浮腫の大きなストーマに
- 双孔式ストーマに
- 不整形なストーマに

### スーパースリムフィット構造

極めて薄く密着性の高いスーパースリムフィット構造の皮膚保護剤辺縁部が、腹壁にしなやかに密着・追従し、辺縁部の浮きあがりを防止します。



### ベルトタブ(やわらか凸 イレオのみ)

装具の装着を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。パリケアベルトをご一緒に使いいただくことが可能です。



### イレオストミーに適した4つの排出口の利点

やわらかく大口径の排出口で、破棄が簡単にできます。厚みがあり、くびれた形状のキャップは、手指巧緻性に不安のある方でも容易にお使いいただけます。キャップの付け根が排出口から離れているので、処理の際も衛生的です。

やわらかい大口径(11mm)  
キャップ式出口で、  
破棄が簡単



排出口上部の幅が、  
40mmとワイド設計で、  
ミルキングしやすい



排出口まわりをクレットと  
拭き取れる設計で、  
衛生的



くびれた形状のキャップは、  
厚みも9mmあり、滑りにくく  
つまみやすい



# 主要製品紹介早見表

単品系: 消化管用/尿路用

## 単品系 消化管用ストーマ装具

### 下部開放型 平面

平面自在孔	エスティーム モルダブル		23ページ
平面	エスティーム インビジクローズ ドレンパウチ		23ページ
	エスティーム インビジクローズ ドレンパウチ 中長期		24ページ
	やわらか平面 イレオ		22ページ

### 下部開放型 凸面

やわらか凸	エスティーム やわらか凸(消化管用)		21ページ
	やわらか凸 イレオ		21ページ
凸面	エスティーム インビジクローズ ドレンパウチCVX		25ページ

### 閉鎖型 平面

平面	エスティーム クローズパウチ		25ページ
	エスティーム クローズパウチ(コンパクト)		26ページ

## 単品系 尿路用ストーマ装具

### 平面

平面	エスティーム ウロ 長期		26ページ
	アクティブライフ ウロストミーパウチ(尿路用)		27ページ
	アクティブライフ ユリナパウチ(尿路用)		27ページ

### 凸面

やわらか凸	エスティーム やわらか凸 ウロ(尿路用)		22ページ
凸面	アクティブライフ ユリナパウチ CD(尿路用)		28ページ

# 主要製品紹介早見表

二品系:消化管用/尿路用装具

## 二品系 嵌合式面板(消化管用・尿路用共通)

### 浮動型面板 平面

平面自在孔 テープ付	バリケア ナチュラ Mフランジ アコーディオン			32ページ
	デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ アコーディオン			32ページ
平面 テープ付	バリケア ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン			32ページ
	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン			32ページ

### 固定型面板 平面

平面自在孔 テープ付	バリケア ナチュラ Mフランジ		34ページ
	バリケア ナチュラ ソフトMフランジ		34ページ
	デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ		34ページ
	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトMフランジ		35ページ
平面 テープ付	バリケア ナチュラ ハイドロフランジ		35ページ
	バリケア ナチュラ ソフトフランジ		35ページ
	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ		36ページ
平面 全面皮膚保護剤	バリケア ナチュラ フランジ		36ページ
	デュラヘーシブ ナチュラ フランジ		36ページ

### 固定型面板 凸面

凸面自在孔 テープ付	デュラヘーシブ ナチュラ MCフランジ		37ページ
凸面 テープ付	デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ		37ページ

# 主要製品紹介早見表

二品系:消化管用/尿路用装具

## 二品系 嵌合式 ストーマ袋

### ストーマ袋 消化管用 下部開放型

閉鎖具内蔵型	ナチュラプラス インビジクローズ ドレンパウチ		38ページ
	バリケア ナチュラ インビジクローズ ドレンパウチ		38ページ
クリップ式	バリケア ナチュラ ドレンパウチ		38ページ
キャップ式	バリケア ナチュラ イレオストミーパウチ		39ページ

### ストーマ袋 消化管用 閉鎖型

閉鎖型	ナチュラプラス クローズパウチ DX-P		39ページ
	ナチュラプラス クローズパウチ		39ページ
	ナチュラプラス クローズパウチ S		39ページ

### ストーマ袋 尿路用

キャップ式	ナチュラプラス ウロストミーパウチ		40ページ
タップ式	バリケア ナチュラ ウロストミーパウチ(尿路用)		40ページ

## 二品系 粘着式面板 消化管用

### 平面

平面 テープ付	エスティーム シナジー ハイドロウェハー		43ページ
平面 全面皮膚保護剤	エスティーム シナジー ウェハー		43ページ

### 凸面

凸面自在孔 テープ付	エスティーム シナジー デュラヘーシブ MCウェハー		44ページ
---------------	----------------------------	---	-------

## 二品系 粘着式 ストーマ袋

### ストーマ袋 消化管用 下部開放型

閉鎖具内蔵型	エスティーム シナジー インビジクローズ ドレンパウチ		44ページ
クリップ式	エスティーム シナジー ドレンパウチ ELサイズ		44ページ

### ストーマ袋 消化管用 閉鎖型

エスティーム シナジー クローズパウチ		44ページ
エスティーム シナジー クローズパウチ(コンパクト)		44ページ

# アクセサリー早見表

## 臭いを防ぐ

消臭潤滑剤	ニオフ消臭潤滑剤ボトル ニオフ消臭潤滑剤ミニパック		48ページ
消臭・吸収ゲル化剤	ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤 ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用		50ページ

## 漏れを防ぐ

用手成形皮膚保護剤	コンバテック シール		51ページ
練状皮膚保護剤	バリケア ペースト		51ページ
板状皮膚保護剤	バリケア ウェハー		51ページ
粉状皮膚保護剤	バリケア パウダー		51ページ

## 皮膚を守る

剥離剤	ニルタック 粘着剥離剤 スプレー ニルタック 粘着剥離剤 ワイプ		52ページ
被膜剤	シレッセ 皮膚被膜剤 スプレー シレッセ 皮膚被膜剤 ワイプ		52ページ
剥離剤	コンバケア リムーバー		52ページ
被膜剤	コンバケア バリア		52ページ

## その他

バリケア ベルト		53ページ
オストミーシークレット		53ページ

# One Piece

## 単品系ストーマ装具

面板とストーマ袋が一体となった

単品系ストーマ装具。

- やわらか シリーズ 快適で漏れのない安心のために
- エスティーム シリーズ より使いやすくなった新設計ストーマ袋を採用
- アクティブライフ シリーズ さまざまなストーマに対応・装着はシンプルで簡単

# やわらか シリーズ

やわらかいのにコシがある

## やわらか凸

やわらかさは「快適」のために、コシは「安心」のために

従来の硬い凸面型面板で不可避だった違和感。

やわらか凸は、からだの動きにしなやかに追従し違和感を軽減します。

しかし、やわらかいただけでは意味がありません。

やわらか凸の特有のコシが、ストーマ近接部を押さえて漏れを防ぎ、漏れの不安を解消します。

### やわらかいのに コシがある

- ➡ 体の動きに追従する ➡ 違和感がない
- ➡ 近接部を押さえて漏れを防ぐ ➡ 安心

### 初期タックと皮膚保護性に優れた

#### 「やわらか皮膚保護剤」

優れた初期タックで素早く皮膚に密着します。

また、優れたpH緩衝能、吸水能、そして膨潤性能で、排泄物から皮膚を守ります。

※主成分はベクチン、ゼラチン、CMC、PIB、SIS。


### 辺縁部も密着、スーパースリムフィット構造

極めて薄く密着性能の高いスーパースリムフィット構造の皮膚保護剤の辺縁部が、腹壁にしなやかに密着・追従し、辺縁部の浮きあがりを防止します。

### 4つのサイズの凸型はめ込み具

高さ7mmの凸型はめ込み具。内径に4つのサイズのバリエーションをご用意。

よりストーマの近くを押さえて、漏れを防ぎます。

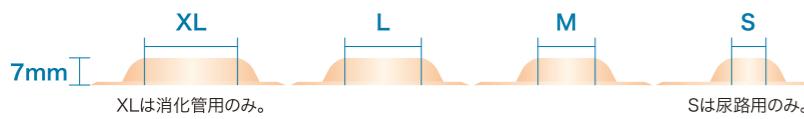

### 消化管下部開放型

#### やわらかい凸面

#### エスティーム やわらか凸(消化管用)



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいのにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型はめ込み具がストーマ近接部を押えます

#### カスタムカット<sup>\*1</sup>(クリップ<sup>\*2</sup>1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421619		20mm	30mmまで	M		
421615	肌色 <sup>*1</sup>	20mm	40mmまで	L	10枚	8,500円
422159		20mm	55mmまで	XL		

※非課税



#### プレカット(クリップ<sup>\*2</sup>1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421621		30mm	30mmまで	M		
421617	肌色 <sup>*1</sup>	30mm	40mmまで	L	10枚	8,500円
421618		35mm	40mmまで	L		

※非課税

貼付日数の目安



\*1:スリット(観察窓)付き

\*2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

### やわらか凸 イレオ



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいのにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型はめ込み具がストーマ近接部を押えます
- 気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口

#### カスタムカット(クリップ<sup>\*2</sup>1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格*
421937		15mm	20mmまで	S		
421936	肌色 <sup>*1</sup>	15mm	30mmまで	M	10枚	7,800円
421935		15mm	40mmまで	L		

※非課税

貼付日数の目安



\*1:スリット(観察窓)付き

\*2:排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

## 単品系ストーマ装具

## エスティーム シリーズ

さらなる安心感とライフスタイルに合わせた快適性。

エスティームとは“尊重・尊厳”を意味します。

ストーマ保有者の意見を尊重した新設計ストーマ袋で、ストーマ保有者の皆さまの尊厳を保つため、さらなる安心感と快適性をお届けします。

消化管ストーマの方の短期交換から中長期交換が可能なタイプまで、ニーズに合わせてお選びいただけます。

## 消化管下部開放型

## 平面

## エスティーム モルダブル



※写真は改良型ストーマ袋

- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 付属のモルダブルディスクが巻き戻り、ストーマ近接部を強力に保護
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 肌色タイプはストーマが見えるウインドウ付

## フィルター付



注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
413515		M	21~30mm		
413516	透明	L	31~40mm	10枚	5,500円
413517		XL	41~50mm		
413521		M	21~30mm		
413522	肌色	L	31~40mm	10枚	5,500円
413523		XL	41~50mm		

※非課税

## フィルターなし



注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
413518	透明	M	21~30mm		
413519		L	31~40mm	10枚	5,400円
					※非課税

貼付日数の目安	0	1	2	3	4	5	6	7
●排泄物の性状や発汗量により変化します。								

※非課税

## エスティーム インビジクローズ ドレンインパウチ



カスタムカット プレカット



※写真は改良型ストーマ袋

- 面板全面に肌に優しい「バリケア」を使用の薄型面板
- 術直後からの使用が可能
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能

## カスタムカット



注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416718	透明	20mm	20mmまで	10枚	3,950円
416719	肌色		70mmまで		

※非課税

## プレカット



注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416724		25mm	25mmまで		
416728	透明	30mm	25~30mm	10枚	3,950円
416732		35mm	30~35mm		
416736		40mm	35~40mm		
416725		25mm	25mmまで		
416729	肌色	30mm	25~30mm	10枚	3,950円
416733		35mm	30~35mm		
416737		40mm	35~40mm		

※非課税

貼付日数の目安	0	1	2	3	4	5	6	7
●排泄物の性状や発汗量により変化します。								

## 消化管下部開放型

## 平面

## やわらか平面 イレオ



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 60mmまでのストーマに対応し、術直後から使用できます
- 気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口

## カスタムカット(クリップ\*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421934	肌色*	20mm	60mmまで	10枚	7,000円

※非課税

貼付日数の目安



\*1:スリット(観察窓)付き  
\*2:排出口をクリップで留めたい場合に  
使用ください。  
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 尿路用

## やわらかい凸面



## エスティーム やわらか凸 口(尿路用)

- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいのにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型はめ込み具がストーマ近接部を押えます

## カスタムカット(アダプター\*3個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421628		10mm	18mmまで	S		
421626	肌色*	10mm	30mmまで	M	10枚	10,000円
421623		10mm	40mmまで	L		


※非課税

## プレカット(アダプター\*3個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421625	肌色*	20mm	40mmまで	L	10枚	10,000円

※非課税

貼付日数の目安

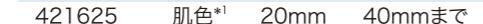

\*1:スリット(観察窓)付き  
\*3:導尿バッグなどに接続する際に  
必要です。通常は使用しません。  
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 消化管下部開放型

### 平面

#### エスティーム インビジクローズ ドレンパウチ 中長期



カスタムカット

プレカット

- 皮膚保護剤には追従性、耐久性に優れた「デュラプラス」を使用
- 皮膚粘着面が広い安心タイプのカスタムカットと、一回り小さな面板で使い勝手の良いタイプのプレカットのラインアップをご用意
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- フィルター付



##### カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416976	透明	19mm ■	64mmまで	10枚	5,800円
416975	肌色				

※非課税

##### プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421020		25mm ■	25mmまで		
421021		28mm ■	25~28mm		
421022	透明	32mm ■	28~32mm	10枚	5,800円
421023		35mm ■	32~35mm		
421024		38mm ■	35~38mm		
421025		25mm ■	25mmまで		
421026		28mm ■	25~28mm		
421027	肌色	32mm ■	28~32mm	10枚	5,800円
421028		35mm ■	32~35mm		
421029		38mm ■	35~38mm		

※非課税

貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

※写真は改良型ストーマ袋

#### エスティーム ドレンパウチ



カスタムカット

プレカット

- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- クリップタイプ
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- フィルター付



##### カスタムカット (クリップ2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416717	肌色	20mm ■	70mmまで	10枚	3,100円

※非課税

##### プレカット (クリップ2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416723		25mm ■	25mmまで		
416727	肌色	30mm ■	25~30mm	10枚	3,100円
416735		40mm ■	35~40mm		

※非課税

貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

### 凸面

#### エスティーム インビジクローズ ドレンパウチCVX



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- なだらかな凸面が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- フィルター付



新設計 フィルター付 ベルト対応

##### プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416738		19mm ■	19mmまで		
416740		22mm ■	19~22mm		
416742		25mm ■	22~25mm		
416744	透明	28mm ■	25~28mm	10枚	9,500円
416746		32mm ■	28~32mm		
416748		35mm ■	32~35mm		
416750		38mm ■	35~38mm		
416739		19mm ■	19mmまで		
416741		22mm ■	19~22mm		
416743		25mm ■	22~25mm		
416745	肌色	28mm ■	25~28mm	10枚	9,500円
416747		32mm ■	28~32mm		
416749		35mm ■	32~35mm		
416751		38mm ■	35~38mm		

※非課税

貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 消化管閉鎖型

### 平面

#### エスティーム クローズパウチ



カスタムカット

プレカット

- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 下部閉鎖型ストーマ袋
- フィルター付

##### カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416700	透明	20mm ■	70mmまで	30枚	8,100円
416701	肌色				


※非課税

##### プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416703		25mm ■	25mmまで		
416706	透明	30mm ■	25~30mm	30枚	8,100円
416712		40mm ■	35~40mm		
416704		25mm ■	25mmまで		
416707	肌色	30mm ■	25~30mm	30枚	8,100円
416713		40mm ■	35~40mm		

※非課税

貼付日数の目安

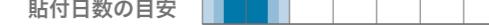

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 消化管閉鎖型

## 平面

## エスティーム クローズパウチ(コンパクト)



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 入浴やスポーツ時に便利なミニサイズの下部閉鎖型ストーマ袋
- フィルター付

## カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
416702	肌色	20mm ■	70mmまで	30枚	8,100円

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 尿路用

## 平面

## エスティーム ウロ 長期



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 平面装具でありながら、ベルトタブを装備
- 排出口の開閉状態が目視でわかる赤い開閉目印付き回転タップ式排出口

## カスタムカット(アダプター\*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421631	透明	13mm	45mmまで	10枚	8,000円

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。



カスタムカット パリケア 新設計 フィルター付

※非課税

## 単品系ストーマ装具

## アクティブライフ シリーズ

## 消化管下部開放型

## 平面

## アクティブライフ ドレンパウチ ST-2



- 面板全面に肌に優しい「バリケア」を使用
- 術直後からの使用が可能
- クリップタイプ

カスタムカット  
(ワイヤークリップ10本、クリップ2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00200	透明	19mm	64mmまで	30枚	8,100円

※非課税

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## アクティブライフ ドレンパウチ DX



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- クリップタイプ

カスタムカット  
(クリップ1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
ADD6410	透明	19mm	64mmまで	10枚	4,320円

※非課税

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 凸面

## アクティブライフ ドレンパウチ CD



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- ならかな凸が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- クリップタイプ

プレカット  
(クリップ1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
ADC1905		19mm ■	19mmまで		
ADC2205		22mm ■	19~22mm		
ADC2505		25mm ■	22~25mm		
ADC2805		28mm ■	25~28mm		
ADC3205	透明	32mm ■	28~32mm	5枚	4,860円
ADC3505		35mm ■	32~35mm		
ADC3805		38mm ■	35~38mm		
ADC4505		45mm ■	38~45mm		
ADC5005		50mm ■	45~50mm		

※非課税

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 消化管術直後用装具

## アクティブライフ 術後用パウチ S



- 面板全面に肌に優しい「バリケア」を使用
- 術後のストーマケアが容易な幅広のオープンエンドストーマ袋

カスタムカット  
(輪ゴム10本付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
APS7010	透明	19mm	70mmまで	10枚	3,240円

※非課税

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 尿路用

## 平面

## アクティブライフ ウロストミーパウチ(尿路用)



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 尿の排出が簡単な回転式タップを採用
- 回転式タップの赤い印で開閉状態を確認可能
- 逆流防止弁付

プレカット  
(アダプター\*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00925		19mm ■	19mmまで		
00926		22mm ■	22mmまで		
00927	透明	25mm ■	25mmまで	10枚	10,260円
00928		28mm ■	28mmまで		
00929		32mm ■	32mmまで		

※非課税

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

## アクティブライフ ユリナパウチ(尿路用)



- 面板全面に肌に優しい「バリケア」を使用
- かさばらないパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付

カスタムカット  
(アダプター\*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
AUP4510	透明	19mm	45mmまで	10枚	9,180円

※非課税

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

## 尿路用

## 凸面

## アクティブライフ ユリナパウチ CD(尿路用)



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- なだらかな凸が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- かさばらないパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付

**プレカット  
(アダプター\*1個付)**

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
AUC1305		13mm	13mmまで		
AUC1605		16mm	13~16mm		
AUC1905		19mm	16~19mm		
AUC2205	透明	22mm	19~22mm	5枚	5,400円
AUC2505		25mm	22~25mm		
AUC2805		28mm	25~28mm		
AUC3205		32mm	28~32mm		
AUC3505		35mm	32~35mm		

\*非課税

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

## Two Piece

## 二品系ストーマ装具

面板とストーマ袋を組み合わせて使用する二品系ストーマ装具は、目的に合わせて面板を装着したままストーマ袋のみを交換できます。

- ナチュラ・アコーディオン シリーズ 嵌合圧を、おなかにかけずに手で受けるフランジ 豊富な製品ラインアップでさまざまなストーマに対応
- ナチュラ シリーズ
- パリケア オートロック シリーズ ストーマ袋の角度は装着したまま360度回転可能
- エスティーム シナジー シリーズ 単品系ストーマ装具のような軽くしなやかな装着感

## 浮動型の真打ち登場

# ナチュラ アコードィオン シリーズ



### リフトアップ機能

- リフター(透明の蛇腹)が上方に伸展することで、指の第一関節(個人差があります)まで入るスペースを確保します。
- フランジの直下まで指が入るためパウチとの嵌合が容易。
- セルフケアできる方、ケアする方、双方が操作しやすいデザイン。



「ナチュラ・アコードィオン シリーズ」なら誰にでも扱い易く、装着も安心!



### 面板はフィット+フランジは水平

### ニューフローティング

面板が腹壁の形状に合わせて屈曲してもフランジは独立して水平を保ちます。山型のおなかやヘルニアの方にも反発せずしっかりフィットします。

### グリップが効くワイドスペース

### ソフト・リム

着脱の際に指を沿える(つまむ)スペースが十分にあり、巧緻性の低い方、

視力の弱い方でもグリップが効きます。ソフトな素材で

HFS(ハンドフットシンドローム)の方にも「あたり」が優しいデザインとなっています。

### 音でしっかり装着確認

### スナップロック式嵌合

嵌合の際、バチという音と感触で確認でき、誰にでも扱いやすく簡単なため安心して装着できます。ライフスタイルや用途に合わせて

豊富なラインアップのナチュラシリーズのストーマ袋を選択することができます。

平面、凸面、モルダブルの3タイプから選べます。

### 平面

### カスタムカット

ストーマサイズに合わせて皮膚保護剤をカットします。

13mm~45mmまでのストーマサイズに対応可能なラインアップ。

45mm・57mm・70mm、3つのフランジサイズで豊富なバリエーション。

フランジサイズ	有効径
45mm	13~21mm
57mm	13~33mm
70mm	13~45mm

※モルダブルにはフランジサイズ45mmはありません。

### モルダブル

### モルダブルテクノロジー™

隙間なく、漏れもない


優れた皮膚保護剤がストーマ近接部を強力に保護します。



### コンベックス

### セキュア6.65

"6.65mm"のミッドレンジの程よい高さとユニークな凸面形状がストーマを押し出し、近接部をおさえ、しわやくぼみを補正して漏れを防ぎます。

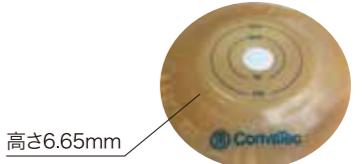

# ナチュラ・アコーディオン シリーズ

## 嵌合式浮動型 面板

### 平面 自在孔 テープ付

#### バリケア ナチュラ Mフランジ アコーディオン



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 指で成形、ハサミは不要。隙間なく、漏れも少ないモルダブルテクノロジー
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用

##### モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421030	57mmAS ■	13~22mm		
421031	57mmAM ■	22~33mm	5枚	3,500円
421032	70mmAL ■	33~45mm		

貼付日数の目安  
※非課税  
 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ アコーディオン



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 指で成形、ハサミは不要。隙間なく、漏れも少ないモルダブルテクノロジー
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用

##### モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421036	57mmAS ■	13~22mm		
421037	57mmAM ■	22~33mm	5枚	5,000円
421038	70mmAL ■	33~45mm		

貼付日数の目安  
※非課税  
 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。

### 平面 テープ付

#### バリケア ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用

##### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421455	45mm ■	13~21mm		
421459	57mm ■	13~33mm	5枚	3,500円
421463	70mm ■	13~45mm		

貼付日数の目安  
※非課税  
 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用

##### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421453	45mm ■	13~21mm		
421457	57mm ■	13~33mm	5枚	5,000円
421461	70mm ■	13~45mm		

貼付日数の目安  
※非課税  
 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 嵌合式浮動型 面板

### 凸面 テープ付

#### デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ アコーディオン



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ユニークで新しい凸面形状「セキュア6.65」
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ

##### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421633	45mm ■	13~22mm		
421635	57mm ■	13~35mm	5枚	6,000円
421637	70mm ■	13~48mm		

貼付日数の目安  
※非課税  
 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### デュラヘーシブ ナチュラ Cソフトフランジ アコーディオン



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ユニークで新しい凸面形状「セキュア6.65」
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

##### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
421632	45mm ■	13~22mm		
421634	57mm ■	13~35mm	5枚	6,000円
421636	70mm ■	13~48mm		

貼付日数の目安  
※非課税  
 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。

# ナチュラ シリーズ

音と感触で嵌合を確認できるため、いつでも安心。

プラスチックリングを嵌合するスナップロック式を採用。

嵌合の際、パチッという音と感触で確認ができ、扱いやすく手順も簡単なため、安心して装着できます。

豊富なラインアップの中から、ライフスタイルに合わせて製品をお選びいただけます。

## 嵌合式固定型 面板

### 平面 自在孔 テープ付

#### バリケア ナチュラ Mフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 周囲テープは肌に優しいハイドロテープ



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00295	45mm	S	13~22mm		
00296	45mm	M	22~33mm	5枚	4,480円
00297	57mm	L	33~45mm		
00298	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 \*XL(00298)の初孔の形は楕円です。  
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### バリケア ナチュラ ソフトMフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 周囲テープは通気性の高いアクリルテープ



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
413421	45mm	S	13~22mm		
413422	45mm	M	22~33mm	10枚	8,960円
413423	57mm	L	33~45mm		
413424	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 \*XL(413424)の初孔の形は楕円です。  
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 周囲テープは肌に優しいハイドロテープ



注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00305	45mm	S	13~22mm		
00306	45mm	M	22~33mm	5枚	5,940円
00307	57mm	L	33~45mm		
00308	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 \*XL(00308)の初孔の形は楕円です。  
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 嵌合式固定型 面板

### 平面 自在孔 テープ付

#### デュラヘーシブ ナチュラ ソフトMフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 周囲テープは通気性の高いアクリルテープ



#### モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
413417	45mm	S	13~22mm		
413418	45mm	M	22~33mm	10枚	11,880円
413419	57mm	L	33~45mm		
413420	70mm	XL	45~56mm*		

貼付日数の目安 \*XL(413420)の初孔の形は楕円です。  
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

### 平面 テープ付

#### バリケア ナチュラ ハイドロフランジ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 周囲テープは肌に優しいハイドロテープ



#### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00245	32mm	17mmまで		
00246	38mm	17~23mm		
00247	45mm	23~30mm	5枚	4,480円
00248	57mm	30~42mm		
00249	70mm	42~55mm		

貼付日数の目安 \*●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### バリケア ナチュラ ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 周囲テープは通気性の高いアクリルテープ
- 豊富なプレカットラインアップをご用意



#### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00260	32mm	17mmまで		
00261	38mm	17~23mm		
00262	45mm	23~30mm	5枚	4,260円
00263	57mm	30~42mm		

貼付日数の目安 \*●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00320	45mm	16mm	16mmまで		
00321	45mm	19mm	16~19mm		
00322	45mm	22mm	19~22mm		
00323	45mm	25mm	22~25mm	10枚	8,530円
00324	45mm	28mm	25~28mm		
00325	45mm	32mm	28~32mm		
00326	45mm	35mm	32~35mm		

貼付日数の目安 \*●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 嵌合式固定型 面板

## 平面 テープ付

## デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 周囲テープは通気性の高いアクリルテープ

## カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00277	38mm	23mmまで		
00278	45mm	23~30mm	5枚	5,670円
00279	57mm	30~42mm		

貼付日数の目安

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

\*排泄物の性状や発汗量により変化します。



## 平面 全面皮膚保護剤

## バリケア ナチュラ フランジ



- 面板全面に肌に優しい「バリケア」を使用

## カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00250	32mm	17mmまで		
00251	38mm	17~23mm		
00252	45mm	23~30mm	5枚	4,260円
00253	57mm	30~42mm		
00254	70mm	42~55mm	5枚	6,480円
00255	100mm	55~85mm	5枚	7,560円

貼付日数の目安

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

\*排泄物の性状や発汗量により変化します。



## デュラヘーシブ ナチュラ フランジ



- 面板全面に耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用

## カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00271	38mm	23mmまで		
00272	45mm	23~30mm	5枚	5,670円
00273	57mm	30~42mm		

貼付日数の目安

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

\*排泄物の性状や発汗量により変化します。



## バリケア ナチュラ コンベックスインサート(凸型嵌め込み具)



- バリケア ナチュラの  
凸型対応マークのある面板に  
挿入して使用
- 陥没・平坦なストーマの方に

注文番号	対応フランジサイズ	規格(内径)	ストーマサイズ	入数	本体価格(税抜)
00391	38mm	S(19mm)	13mm以下		
00392	38mm	M(22mm)	13~16mm		
00393	38mm	L(25mm)	16~19mm		
00394	45mm	S(29mm)	19~22mm		
00395	45mm	M(32mm)	22~25mm	5枚	1,080円
00396	45mm	L(35mm)	25~29mm		
00397	57mm	S(38mm)	29~32mm		
00398	57mm	M(41mm)	32~35mm		

\*選択にあたっては、医療従事者にご相談ください。

## 嵌合式固定型 面板

## 凸面 自在孔 テープ付

## デュラヘーシブ ナチュラ MCフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用

## モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00264	45mm	S	13~22mm		
00265	45mm	M	22~33mm	10枚	13,820円
00266	57mm	L	33~45mm		

貼付日数の目安

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---


\*排泄物の性状や発汗量により変化します。



\*非課税

## 凸面 テープ付

## デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ

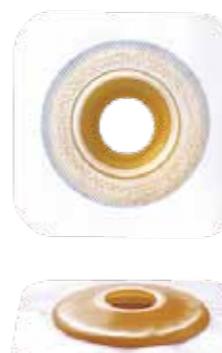

- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- なららかな凸が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用

## プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00281	45mm	13mm	13mmまで		
00282	45mm	16mm	13~16mm		
00283	45mm	19mm	16~19mm		
00284	45mm	22mm	19~22mm		
00285	45mm	25mm	22~25mm		
00286	45mm	28mm	25~28mm		
00287	45mm	32mm	28~32mm		
00288	45mm	35mm	32~35mm		

貼付日数の目安

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

\*排泄物の性状や発汗量により変化します。



\*非課税

## 嵌合式消化管用 ストーマ袋

## 下部開放型

## ナチュラプラス インビジクローズ ドレインパウチ



- 巻き上げ式のマジックテープで排出口をしっかりと閉鎖
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 処理のしやすい幅広タイプの排出口
- においてストーマ袋の膨らみを抑える高機能メンブレンフィルター

## フィルター付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
416414		38mm		
416416	透明	45mm	10枚	3,720円
416419		57mm		
416422		70mm		
416415		38mm		
416417	肌色	45mm	10枚	3,720円
416420		57mm		
416423		70mm		

新設計  
フィルター付  
ベルト対応

新設計  
フィルターなし  
ベルト対応

※写真は改良型ストーマ袋

## バリケア ナチュラ インビジクローズ ドレインパウチ



- クラシックタイプの下部開放型ストーマ袋
- 巻き上げ式マジックテープタイプ

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00327		38mm		
00328	透明	45mm	10枚	3,720円
00329		57mm		
00330		70mm		
00340		38mm		
00341	肌色	45mm	10枚	3,720円
00342		57mm		
00343		70mm		

フィルターなし  
ベルト対応

新設計  
フィルターなし  
ベルト対応

## バリケア ナチュラ ドレインパウチ



- クラシックタイプの下部開放型ストーマ袋
- クリップタイプ

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00310		32mm		
00311	透明	38mm	10枚	2,970円
00312		45mm		
00314		57mm		
00290		38mm		
00291	肌色	45mm	10枚	2,970円
00293		57mm		
00315	透明	70mm	10枚	3,240円
00316	透明	100mm	10枚	4,210円

新設計  
フィルターなし  
ベルト対応

新設計  
フィルターなし  
ベルト対応

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00313	透明	45mm	30枚	8,420円
00292	肌色			

※非課税

## 嵌合式消化管用 ストーマ袋

## 下部開放型

## バリケア ナチュラ イレオストミーパウチ



- イレオストミーや瘻孔のケアに
- 排泄物の性状によりクリップを使った管理も可能
- 逆流防止弁付

## クリップ/アダプター\*各1個、フィルター5個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
420695		45mm		
420696	透明	57mm	5枚	2,970円
420697		70mm		
00332		45mm		
00333	肌色	57mm	5枚	2,970円
00334		70mm		

新設計  
フィルター付  
ベルト対応

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

※非課税

## 嵌合式消化管用 ストーマ袋

## 閉鎖型

## ナチュラプラス クローズパウチ DX-P



- フィルター付の下部閉鎖型ストーマ袋

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
416406	肌色	45mm	30枚	7,450円
416409		57mm		

※非課税

## ナチュラプラス クローズパウチ



- フィルターなしの下部閉鎖型ストーマ袋

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
416404		38mm		
416407	肌色	45mm	30枚	6,800円
416410		57mm		

※非課税

## ナチュラプラス クローズパウチ S



- 入浴やスポーツ時に便利なミニサイズの下部閉鎖型ストーマ袋

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
416405		38mm		
416408	肌色	45mm	30枚	6,800円
416411		57mm		

※非課税

## 二品系ストーマ装具 バリケア オートロック シリーズ

### 嵌合式尿路用 ストーマ袋

#### ナチュラプラス ウロストミーパウチ



- 独自の仕切構造「Vセパレート機能」で袋の膨らみを軽減
- 逆流防止弁付
- シンプルな操作性のやわらかいキャップ式排出口



##### アダプター\*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
413435		32mm ■		
413436		38mm ■		
413437	透明	45mm ■	10枚	5,800円
413438		57mm ■		
413439		70mm ■		

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。  
※非課税

#### バリケア ナチュラ ウロストミーパウチ(尿路用)



- 尿の排出が簡単な回転式タップを採用
- 回転式タップの赤い印で開閉状態を確認可能
- 逆流防止弁付



##### アダプター\*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00370		32mm ■		
00371	透明	38mm ■	10枚	7,560円
00372		45mm ■		
00373		57mm ■		
00374	透明	70mm ■	10枚	7,660円

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。  
※非課税

#### バリケア ナチュラ ユリナパウチ(尿路用)



- かさばらないパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付



##### アダプター\*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格*
00361		38mm ■		
00362	透明	45mm ■	10枚	7,020円
00363		57mm ■		

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。  
※非課税

### 二品系嵌合式 面板

#### 平面

#### バリケア オートロック フランジ



- 面板全面に肌に優しい「バリケア」を使用

#### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00110	35mm ■	20mmまで		
00111	45mm ■	20~30mm	5枚	4,260円
00113	57mm ■	30~42mm		
00114	70mm ■	42~55mm	5枚	6,480円

\*非課税



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### バリケア オートロック ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 周囲テープは通気性の高いアクリルテープ

#### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00120	35mm ■	20mmまで		
00121	45mm ■	20~30mm	5枚	4,260円
00123	57mm ■	30~42mm		

\*非課税



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### バリケア オートロック デュラヘーシブ ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ」を使用
- 周囲テープは通気性の高いアクリルテープ

#### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00116	35mm ■	20mmまで		
00117	45mm ■	20~30mm	5枚	5,670円
00118	57mm ■	30~42mm		

\*非課税



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

#### バリケア オートロック コンベックスインサート(凸型嵌め込み具)



- バリケア オートロックの凸型対応マークのある面板に挿入して使用
- 陥没・平坦なストーマの方に

#### カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	規格(内径)	ストーマサイズ	入数	本体価格(税抜)
00182	35mm ■	S(19mm)	13mmまで		
00183	35mm ■	M(22mm)	13~16mm		
00184	35mm ■	L(25mm)	16~19mm		
00185	45mm ■	S(29mm)	19~22mm		
00186	45mm ■	M(32mm)	22~25mm	5枚	1,080円
00187	45mm ■	L(34mm)	25~29mm		
00188	57mm ■	S(38mm)	29~32mm		
00189	57mm ■	M(41mm)	32~35mm		

\*選択にあたっては、医療従事者にご相談ください。

## 二品系ストーマ装具

## エスティーム シナジー シリーズ

粘着式カップリング方式で、軽くしなやかな装着感。

嵌合するためのプラスチックリングがなく、腹圧をかけずに装着できます。

单品系ストーマ装具のような軽くしなやかな装着感で、

特にヘルニア、太鼓腹等の方に適しています。

## 二品系嵌合式 ストーマ袋

消化管用

## バリケア オートロック ドレインパウチ



- クラシックタイプの下部開放型ストーマ袋
- クリップタイプ

## クリップ1個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00131	透明	45mm	10枚	3,130円
00133	透明	57mm	10枚	3,240円
00134	透明	70mm	10枚	3,240円
00140		35mm	10枚	3,130円
00141	肌色	45mm	10枚	3,130円
00143		57mm	10枚	3,130円

※非課税

## バリケア オートロック クローズパウチ



- クラシックタイプの下部閉鎖型ストーマ袋

## クリップ1個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00137	肌色	45mm	15枚	4,050円
00138		57mm	15枚	4,050円

※非課税

## 尿路用

## バリケア オートロック ウロストミーパウチ(尿路用)



- 尿の排出が簡単な回転式タップを採用
- 回転式タップの赤い印で開閉状態を確認可能
- 360度回転するためベッドサイドでの管理が容易
- 逆流防止弁付

## アダプター\*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00150		35mm	10枚	7,770円
00151	透明	45mm	10枚	7,770円
00153		57mm	10枚	7,770円

※非課税

## バリケア オートロック ユリナパウチ(尿路用)



- かさばらないパイプ式タップを採用
- 360度回転するためベッドサイドでの管理が容易
- 逆流防止弁付

## アダプター\*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00146		35mm	10枚	7,230円
00147	透明	45mm	10枚	7,230円
00148		57mm	10枚	7,230円

※導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

※非課税

## 二品系粘着式 面板

## 平面 テープ付

## エスティーム シナジー ハイドロウェハー



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア」を使用
- 周囲テープは肌に優しいハイドロテープ
- 豊富なプレカットラインアップをご用意



注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09105	35mm	35mmまで	5枚	4,590円
09106	48mm	35~48mm	5枚	4,590円
09107	61mm	48~61mm	5枚	4,590円

※非課税

## カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09105	35mm	35mmまで	5枚	4,590円
09106	48mm	35~48mm	5枚	4,590円
09107	61mm	48~61mm	5枚	4,590円

※非課税

## プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09108	35mm	16mm	16mmまで	5枚	4,590円
09109	35mm	19mm	16~19mm	5枚	4,590円
09110	35mm	22mm	19~22mm	5枚	4,590円
09111	35mm	25mm	22~25mm	5枚	4,590円
09112	35mm	28mm	25~28mm	5枚	4,590円
09113	35mm	32mm	28~32mm	5枚	4,590円
09114	35mm	35mm	32~35mm	5枚	4,590円
09115	48mm	38mm	35~38mm	5枚	4,590円

※非課税

貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 平面 全面皮膚保護剤

## エスティーム シナジー ウェハー



- 面板全面に肌に優しい「バリケア」を使用



注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09066	35mm	35mmまで	5枚	4,590円
09067	48mm	35~48mm	5枚	4,590円
09068	61mm	48~61mm	5枚	4,590円
09069	89mm	61~89mm	5枚	4,590円

※非課税

貼付日数の目安




●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 二品系粘着式 面板

## 凸面 自在孔 テープ付

## エスティーム シナジー デュラヘーシブ MCウェハー

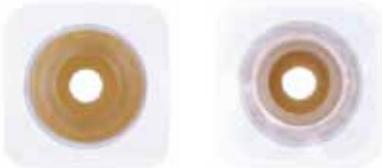

- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた  
「デュラヘーシブ」を使用



## モルダブル

注文番号	法兰ジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格*
09075	35mm ■	13~22mm		
09076	48mm ■■	22~33mm	5枚	7,230円
09077	61mm ■■■	33~45mm		

貼付日数の目安  
  
 ●排泄物の性状や発汗量により変化します。

※非課税

## 二品系粘着式 ストーマ袋

## 下部開放型

## エスティーム シナジー インビジクローズ ドレンパウチ



- 巻き上げ式のマジックテープで排出口をしっかりと閉鎖
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 処理のしやすい幅広タイプの排出口
- おないとストーマ袋の膨らみを抑える高機能メンブレンフィルター



注文番号	色	法兰ジサイズ	入数	本体価格*
416795		35mm ■		
416798	透明	48mm ■■	10枚	3,450円
416901		61mm ■■■		
416796		35mm ■		
416799	肌色	48mm ■■	10枚	3,450円
416902		61mm ■■■		


※非課税

※写真は改良型ストーマ袋

注文番号	色	法兰ジサイズ	入数	本体価格*
09009	透明	89mm ■■■	10枚	3,180円

※非課税

注文番号	色	法兰ジサイズ	入数	本体価格*
09009	透明	89mm ■■■	10枚	3,180円

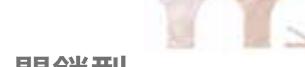

## クリップ10個付


※非課税

注文番号	色	法兰ジサイズ	入数	本体価格*
09009	透明	89mm ■■■	10枚	3,180円

注文番号	色	法兰ジサイズ	入数	本体価格*
09009	透明	89mm ■■■	10枚	3,180円

## 閉鎖型

## エスティーム シナジー クローズパウチ

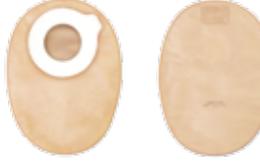


- 下部閉鎖型ストーマ袋
- フィルター付



注文番号	色	法兰ジサイズ	入数	本体価格*
416783	肌色	61mm ■■■	30枚	8,200円

※非課税

## エスティーム シナジー クローズパウチ(コンパクト)

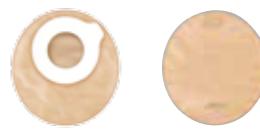

- 入浴やスポーツ時に便利なミニサイズの下部閉鎖型ストーマ袋



注文番号	色	法兰ジサイズ	入数	本体価格*
416777		35mm ■		
416781	肌色	48mm ■■	30枚	8,200円

※非課税

## For Children

## 小児用ストーマ装具

大切なお子さまのために、より一層の安心と快適を…。

お子さまのデリケートな肌に優しい小児用ストーマ装具リトルワン。

小児のストーマケアに携わる、

皮膚・排泄ケア認定看護師よりさまざまなアイデアをいただき、

小児のニーズに合わせて開発しました。

小児の皮膚特性を考慮し、皮膚保護剤は、すべて肌に優しい「バリケア」を使用しています。

## 单品系

## 消化管用

## リトルワン ワンピース インビジクローズ ドレインパウチ ESサイズ

4.5kgまでの  
お子さま用

- 保護剤剥離紙にカッティングガイドを印刷
- 巻き上げ式マジックテープタイプ
- 面板サイズ:44×50mm

カスタムカット		ストーマサイズ	入数	本体価格※
注文番号	色	縦25mmまで 横31mmまで	10枚	6,480円
00820	透明			
貼付日数の目安	0 1 2 3 4 5 6 7	※非課税		

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## バリケア ワンピース ドレインパウチ 小児用



- クリップを使って排出口を留めるストーマ袋

カスタムカット、ワイヤークリップ15本付		ストーマサイズ	入数	本体価格※
注文番号	色	50mmまで	15枚	6,480円
PDP5015	透明			
貼付日数の目安	0 1 2 3 4 5 6 7	※非課税		

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 尿路用

## バリケア ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用)



- 逆流防止弁付
- パイプ式尿タップで排出口を留めるストーマ袋

カスタムカット、アダプター*2個付		ストーマサイズ	入数	本体価格※
注文番号	色	25mmまで	15枚	10,360円
PUP2515	透明			
貼付日数の目安	0 1 2 3 4 5 6 7	※非課税		

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

\*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

## 二品系

## 面板 リトルワン ツーピース ウェバー ESサイズ

4.5kgまでの  
お子さま用

- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- おなかの形に沿う円形の皮膚保護剤を採用
- 面板サイズ:直径66mm

カスタムカット		ストーマサイズ	入数	本体価格※
注文番号	色	23mmまで	5枚	4,210円
00821	透明			
貼付日数の目安	0 1 2 3 4 5 6 7	※非課税		

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 消化管用ストーマ袋 リトルワン ツーピース インビジクローズ ドレインパウチ ESサイズ

4.5kgまでの  
お子さま用

- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- 巻き上げ式マジックテープタイプ

注文番号	色	入数	本体価格※
00824	透明	10枚	3,110円

※非課税

## 面板 リトルワン ツーピース ハイドロウェバー

4.5kgを  
超えた  
お子さま用

- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- おなかの形に沿う円形の皮膚保護剤を採用
- 面板サイズ:保護剤部直径60mm、テープ部85×85mm

カスタムカット		ストーマサイズ	入数	本体価格※
注文番号	色	4.8~31mm	5枚	4,210円
00823	透明			
貼付日数の目安	0 1 2 3 4 5 6 7	※非課税		

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

## 消化管用ストーマ袋 リトルワン ツーピース インビジクローズ ドレインパウチ 透明

4.5kgを  
超えた  
お子さま用

- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- 2段階閉鎖の巻き上げ式マジックテープタイプ
- フィルター付

注文番号	色	入数	本体価格※
00825	透明	10枚	3,110円

※非課税

## 消化管用ストーマ袋 リトルワン ツーピース クローズパウチ 透明

4.5kgを  
超えた  
お子さま用

- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- 下部閉鎖型ストーマ袋
- フィルター付

注文番号	色	入数	本体価格※
00828	透明	10枚	2,260円

※非課税

## Accessory

## アクセサリー製品

ストーマケア製品を快適にお使いいただくための各種アクセサリー製品をご紹介します。

- ニオフ消臭潤滑剤
- ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤
- コンパテック シール(用手成形皮膚保護剤)
- バリケア ウェバー(板状皮膚保護剤)
- バリケア ベースト(練状皮膚保護剤)
- バリケア パウダー(粉状皮膚保護剤)
- ニルタック(粘着剝離剤)
- シレッセ(皮膚被膜剤)
- コンパケア リムーバー(粘着剝離剤)
- コンパケア バリア(皮膚被膜剤)
- バリケア ベルト
- オストミーシーケット



### ✓ 消臭と潤滑、確かなWの実感

nioff独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭。高い潤滑作用で処理もスルッとスムーズです。

○抗菌成分(銅)で大腸菌の繁殖を抑制する抗菌性をもち、菌からのニオイの発生も抑制します。

### ✓ 安全性へのこだわり

高い品質と安全性にこだわった設計。肌の近くで使うものだから各種の安全性試験をクリアしています。

○ノンアルコール ○パラベンフリー ○無着色 素材自体(銅イオン)の青色

### ✓ ソフトな容器で押しやすく、入れやすい

容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。

中身が見えるので残量が確認しやすく、

1回分の使用量の目安になるメモリ付きです。



ボトル



ミニパック

**nioff 消臭潤滑剤  
優れた消臭のメカニズム**

**パナソニック独自の  
「リコンビネーション消臭」**

ニオイを香りでごまかすのではなく、銅イオンがニオイ分子に働きかけ、構造そのものを組み換えて消臭します。これがパナソニック独自の「リコンビネーション消臭」です。ニオイ分子自体が組み換わるため消えたニオイは戻りません。

1. ニオイ分子 銅イオン  
ニオイ分子に、銅イオンが触れると化学反応が発生します。

2. ニオイ分子(分解) 銅イオン  
ニオイ分子が化学反応で分解されます。

3. 反応物質 水  
ニオイ分子の分解後、水と反応物質(臭いの無い分子)に組み換えます。

**nioffシリーズを貫く  
安全設計**

**安全性に徹底して  
こだわっています**

素材のすべてを、肌にやさしい材料のみで構成しました。確かな「安心」をめざして、外部機関による安全性確認試験も重ねました。


- AMES試験(復帰突然変異試験)
- 急性経口毒性試験
- 皮膚刺激性試験
- 眼刺激性試験
- 皮膚感作性試験

(試験機関:(株)薬物安全性試験センター)

**使い方**


1. ストーマ袋交換時

ストーマ袋にあらかじめ約8mL(大さじ半分程度)を投入し、よくなじませてから装着する。

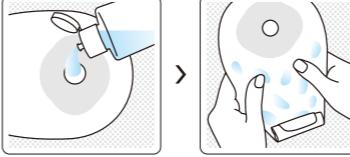

2. ストーマ袋装着中

装着中に排泄物を処理した際には、もう一度約8mL(大さじ半分程度)投入し、よくなじませる。

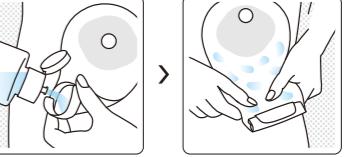

※使用により、便の色が黒くなる場合があります。

**ブーケ(若い女性オストメイトの会)アンケートより  
オストメイトの皆さまから  
多くの支持をいただいています。**

「nioff 消臭潤滑剤」の開発にあたり、ブーケの皆さまにご協力をいただきました。パナソニック エコソリューションズ化研はブーケを応援しています。

香りをかぶせるのではなく、ニオイ自体を消す消臭効果が強かった😊

排泄処理の時のトイレにこもるニオイに困っている。これは、パウチからも嫌なニオイがなくて良かった😊

色がさわやかで良いと思った😊

ニオイがかなり軽減されるので不快感や衣類へのニオイ移りが無く、かなり安心😊

フタの開閉がストレスなくできたこと。押し出す際もスムーズにできたこと😊

潤滑剤としてとてもスムーズで良かったです😊

# 臭いを防ぐ

## 消臭潤滑剤

### ニオフ消臭潤滑剤 ボトル



- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色
- ソフトな容器で押しやすく、入れやすい

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
05016	250ml	1本	2,600円

### ニオフ消臭潤滑剤 ミニパック



- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色
- 外出にも便利なミニパック

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
05017	8ml	10袋	1,230円

## 消臭・吸収ゲル化剤

### ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤



- 特許取得のアクティブワン消臭コントロールシステムが不快なニオイとガスを同時に軽減・除去します
- ガスの軽減・除去により、ストーマ袋の膨らみ(バルーニング)を軽減・防止します
- ゲル化により、排泄物の逆流や面板からの漏れを防ぎます。
- また手でストーマ袋を押えると形状を平たくできます
- ゲル化した排泄物は、そのままトイレへ流すことが可能

#### 携帯用ジップロック 1枚入

注文番号	入数	本体価格(税抜)
420791	100個	3,800円

### ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用




- 特許取得のアクティブワン消臭コントロールシステムが不快なニオイとガスを同時に軽減・除去します
- ガスの軽減・除去により、ストーマ袋の膨らみ(バルーニング)を軽減・防止します
- ゲル化により、排泄物の逆流や面板からの漏れを防ぎます。
- また手でストーマ袋を押えると形状を平たくできます
- ゲル化した排泄物は、そのままトイレへ流すことが可能
- 携帯に便利な5個入り

注文番号	入数	本体価格(税抜)
420792	5個	300円

# 漏れを防ぐ

## 用手成形皮膚保護剤

### コンパテック シール

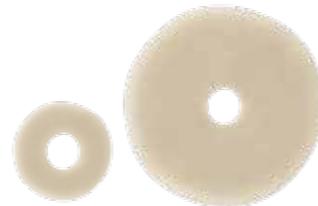

- ストーマ周囲のしわやくぼみを補正する用手成形皮膚保護剤
- しわやくぼみにあわせ、必要量を手で練って自由に成形
- 水分吸収性に優れ、皮膚を排泄物の刺激からしっかり保護
- アルコールを含まず、乾燥しません
- バリケアペーストとの併用も可能

#### 48mm薄型

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
413504	厚さ3.0mm×外径48mm	10枚	4,000円

#### 48mm

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
413503	厚さ4.0mm×外径48mm	10枚	4,500円

#### 98mm

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
413505	厚さ3.0mm×外径98mm	10枚	5,700円

## 練状皮膚保護剤

### バリケア ペースト



- ストーマ周囲の細かいしわ・浅いくぼみを埋め、排泄物の漏れを防ぐ練状皮膚保護剤
- 皮膚保護剤「バリケア」の親水性コロイド成分のみをペースト状にした製品

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
PA60	56.7g	1本	3,020円

## 板状皮膚保護剤

### バリケア ウェハー



- ストーマ周囲の深いしわ・くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- 皮膚保護剤「バリケア」を使用

#### 10×10cm

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
AC1010	10×10cm	10枚	8,420円

#### 20×20cm

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
AC2005	20×20cm	5枚	13,500円

## 粉状皮膚保護剤

### バリケア パウダー



- 水分を吸収しゲル状になり、排泄物の刺激から皮膚を保護
- 皮膚保護剤「バリケア」の親水性コロイド成分のみを粉状にした製品

注文番号	規格	入数	本体価格(税抜)
PW30	28.3g	1本	1,290円



# Irrigation Equipments

## 洗腸製品

自然排便法によるセルフケアが可能な方のための  
洗腸製品をご紹介します。

### 片手で操作できる、洗腸器です

無段階で流量を調節できるロールクランプ式調節器採用。  
自然排便法によるセルフケアが可能な左側結腸ストーマの方に、  
操作がしやすい洗腸関連製品をご紹介します。

#### バリケア 新洗腸器 ストーマコーン付



- 無段階で流量を調整できるロールクランプ式調節器採用
- 注水口が大きく開くオープントップタイプ
- 注入量と排出量が一目で分かる100cc単位大型水量目盛付

注文番号	入数	本体価格(税抜)
S101	1セット	5,400円

一般医療機器 ストーマ用洗浄キット  
届出番号:13B1X10071000001

#### バリケア ナチュラ 洗腸スリーブ



##### クリップ1個付

注文番号	法兰ジサイズ	入数	本体価格(税抜)
00382	45mm	5枚	4,860円
00383	57mm	5枚	4,860円



#### バリケア 洗腸スリーブ用クリップ



注文番号	入数	本体価格(税抜)
IL10	10本	3,880円

#### バリケア 洗腸用ストーマコーン



注文番号	入数	本体価格(税抜)
IC01	1個	2,160円

一般医療機器 ストーマ用洗浄キット  
届出番号:13B1X10071000001



#### バリケア ナチュラ 洗腸用フェースプレート



注文番号	規格	ストーマサイズ	入数	本体価格(税抜)
00387	45mm	44mmまで	1個	1,620円



#### 洗腸法を行うにあたって

必ず自然排便法によるセルフケアが行えることが前提となります。  
下記の点を考慮し、**医師と相談のうえ**、実施してください。

- 左側結腸ストーマであること
- ストーマ合併症がないこと
- 心疾患がないこと
- 一人で行えること

※高齢の方や一時的なストーマの場合は、不適応となります。

# How to use




## 製品の使用方法

- 単品系ストーマ装具の使用方法
- 二品系ストーマ装具の使用方法
- ストーマ袋の閉鎖具の使用方法
- アクセサリー製品の使用方法




## 単品系ストーマ装具の使用方法

### エスティーム モルダブル製品の場合




#### モルダブルディスクを準備します

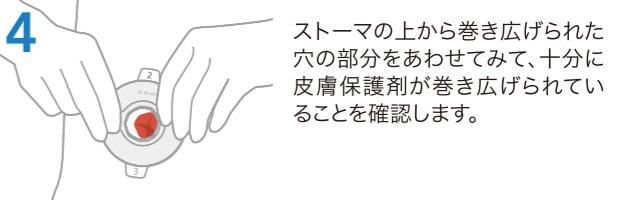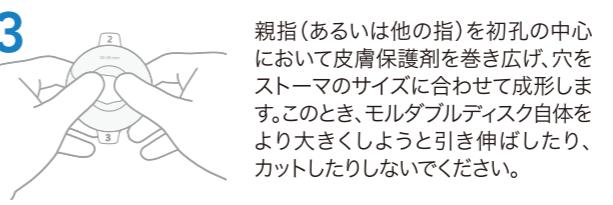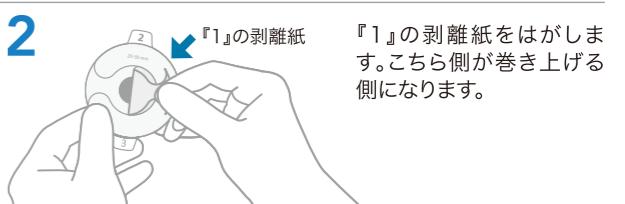

#### モルダブルディスクを貼付します

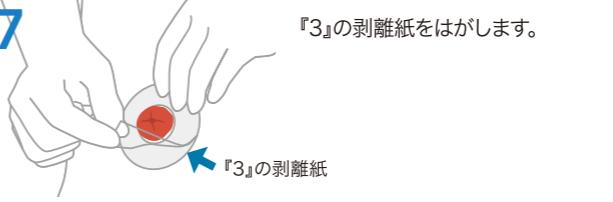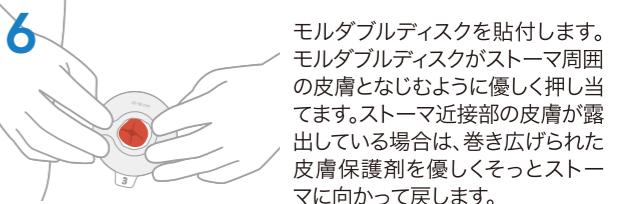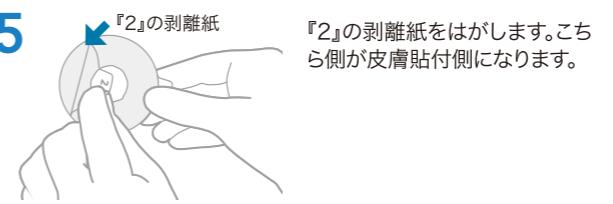

#### ストーマ袋についている面板を貼付します

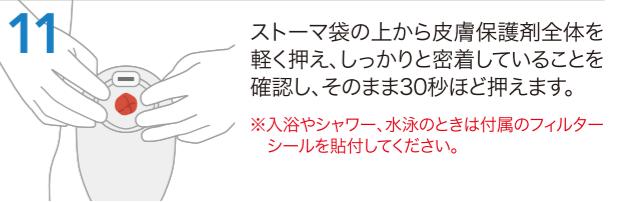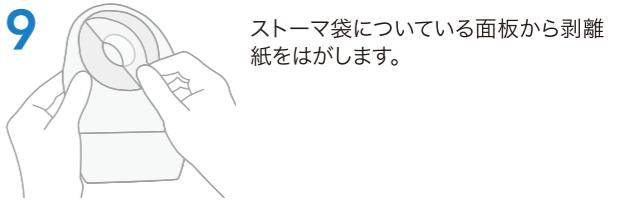
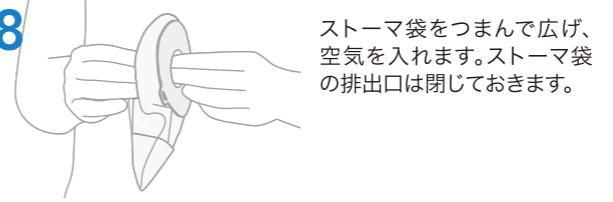


## 二品系ストーマ装具の使用方法

### カスタムカットの場合



### プレカットの場合

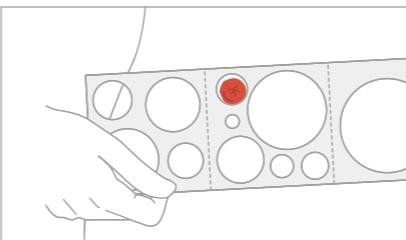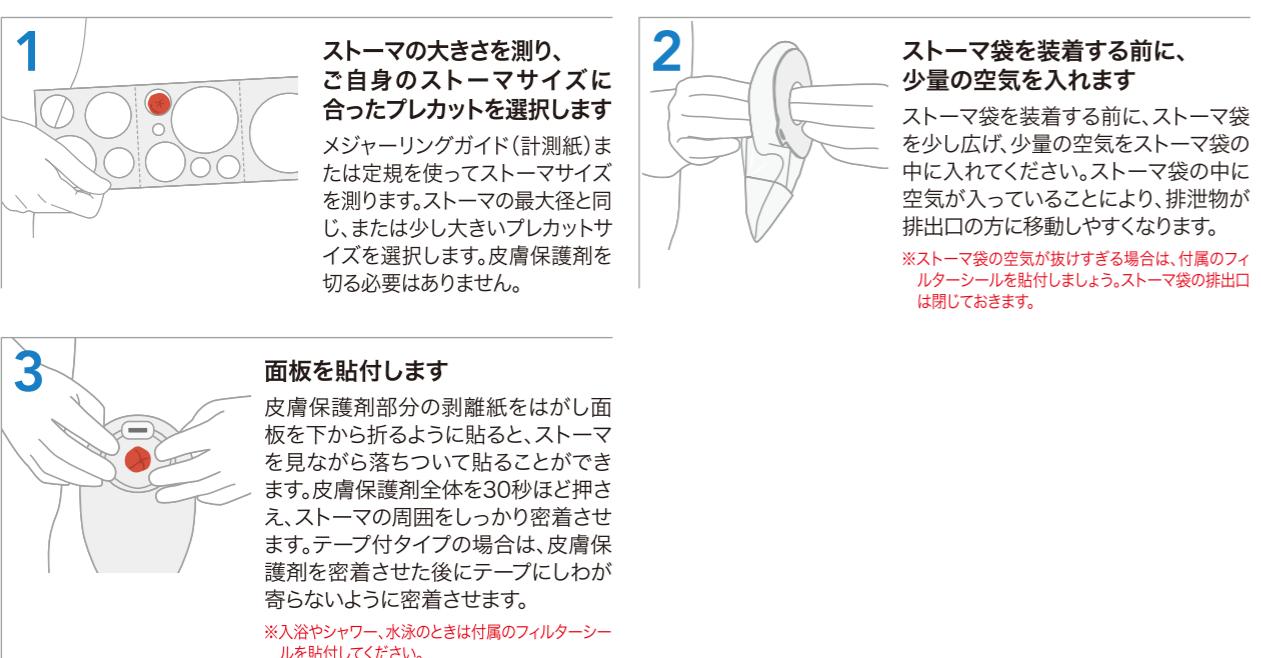


#### ストーマの大きさを測ります

メジャーリングガイド(計測紙)または定規を使ってストーマサイズを測ります。

### 面板を成形し貼付します

#### モルダブル製品(平面)の場合

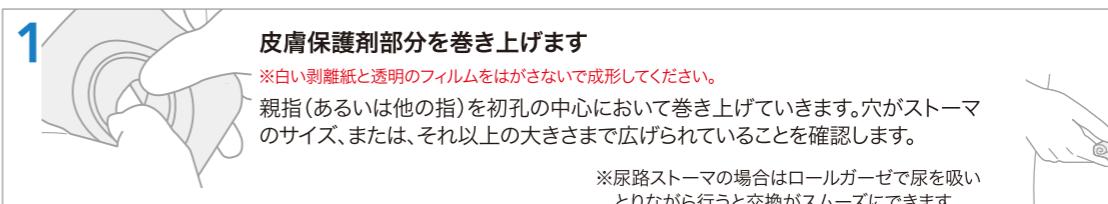





#### モルダブル製品(凸面)の場合



## ストーマ袋の閉鎖具の使用方法

### インビジクローズ ドレインパウチの場合

#### ナチュラプラス/エスティーム シナジー/エスティーム(新設計ストーマ袋)

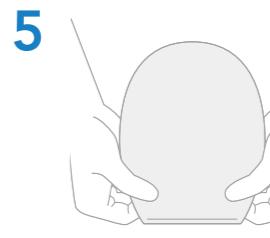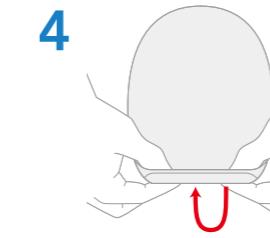
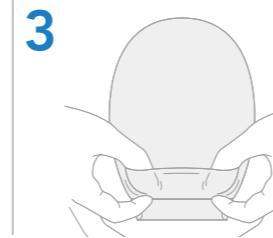
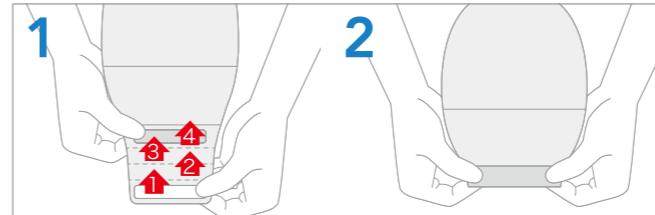


排出口端の白いプレートを4回折り上げます。重なったマジックテープ部がチチチと音がするまでしっかりと押して、排出口を閉じます。これで手順は完了です。

外側のポケットに指を引っかけ、折りたたんだ排出口ごと内側へひっくり返せば、排出口を収納し、袋をコンパクトにすることができます。




### インビジクローズ ドレインパウチ 改良型の場合

#### ナチュラプラス/エスティーム シナジー/エスティーム 排出口を閉じる

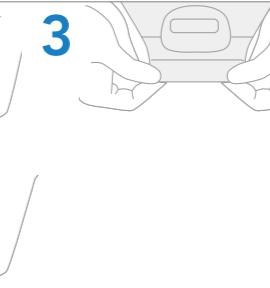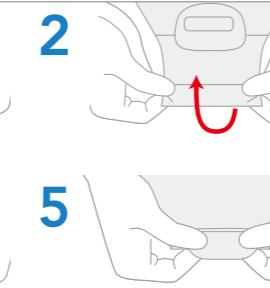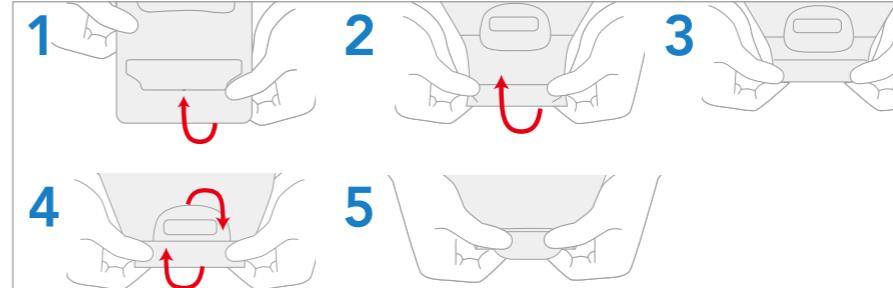




- ①排出口端のプレートを折り上げます。
- ②プレートを1回折り上げた状態。
- ③プレートを2回折り上げた状態。
- ④プレートを3回折り上げた状態。
- ⑤フラップをおろし、マジックテープを合わせ排出口を閉じます。

#### 排出口をパウチポケットに収納

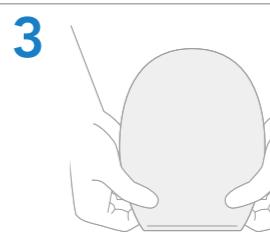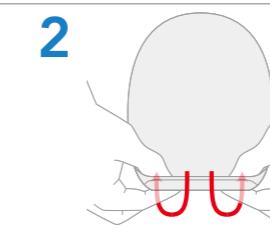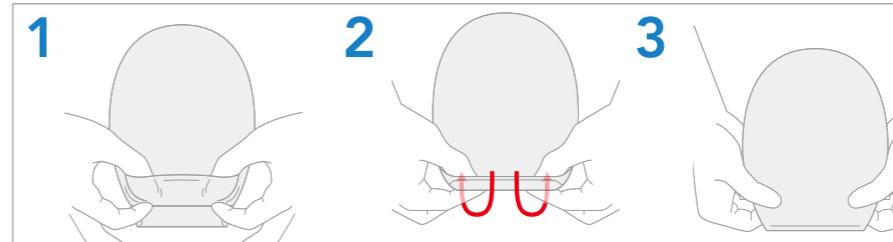

- ①外側のポケットに両手の親指を差し込みます。
- ②折りたたんだ部分全体を内側にひっくり返します。
- ③排出口を収納し、袋をコンパクトにすることができます。

#### 排出口を開く

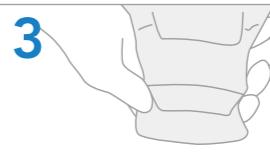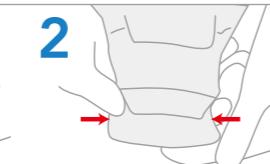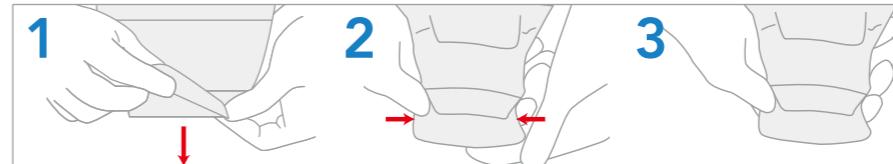


- ①フラップを持ち上げ、マジックテープを剥がします。
- ②プレート両端のくぼみ位置に指を合わせます。
- ③排出口を開きます。

### カスタムカットの場合



ストーマのサイズに合わせて面板を切りります


面板の裏側に、ストーマの形に印をつけ、印の外側をハサミで切れます。ストーマに面板をあてて、穴のサイズを確認しながら、適したサイズに切ってください。穴の切り口は指でなでて滑らかにしておきます。

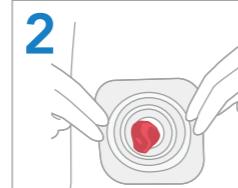

面板を貼付します

皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして貼ります。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかり密着させます。テープ付タイプの場合は、テープにしづが寄らないように密着させます。


### プレカットの場合

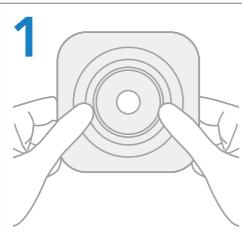

ご自身のストーマサイズに合ったプレカットサイズを選びます

ストーマの最大径と同じ、または少し大きいサイズを選択します。皮膚保護剤を切る必要はありません。

※白い剥離紙ははがさないでください。

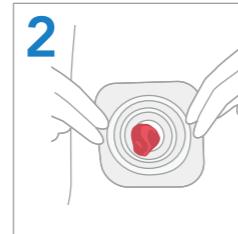

面板を貼付します

皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして面板を貼ります。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかり密着させます。皮膚保護剤部分を密着させてから、テープにしづが寄らないように密着させます。

※排泄物が出る場合はストーマ袋を装着してからテープを貼付します。

### ストーマ袋を装着する前に、少量の空気を入れます



ストーマ袋を装着する前に、ストーマ袋を少し広げ、少量の空気をストーマ袋の中に入れてください。ストーマ袋の中に空気が入っていることにより、排泄物が排出口の方に移動しやすくなります。

※ストーマ袋の空気が抜けすぎる場合は、付属のフィルターシールを貼付しましょう。

### ストーマ袋の装着と取り外し



いずれのタイプの製品をお使いの場合も、面板とストーマ袋を嵌合した後は、ストーマ袋を優しく引っ張り、確実に装着されたことを確認してください。

#### (バリケア ナチュラの場合)

面板とストーマ袋の嵌合リング下部の溝を合わせ、「パチッパチッ」という音を確認しながら、下から順に上部に向かって嵌めてください。

#### (エスティーム シナジーの場合)

ストーマ袋の粘着部の下側から順にウェハー(面板)に粘着させて装着します。

#### (バリケア オートロックの場合)

嵌合リングの溝を合わせ「パチッ」という音がするように嵌めてください。




ストーマ袋をはずすときは、ストーマ袋のつまみを下方向に引いて面板からはずしてください。

※バリケア オートロックは、面板のつまみを操作した後、ストーマ袋を面板から外してください。

バリケアナチュラ、  
バリケア オートロック  
の場合




エスティーム  
シナジー  
の場合

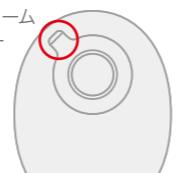

## インビジクローズ ドレンパウチの場合


### バリケア ナチュラのみ

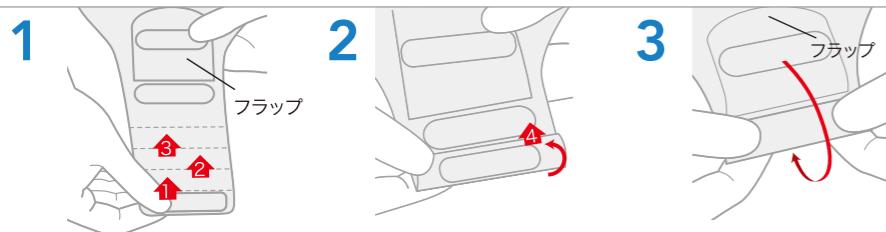

ストーマ袋前面のフラップを持ち上げて、中央のマジックテープが見えるようにします。それを手前に向かって4回折り上げて、マジックテープを閉じます。ブチブチという音を確認して、全面を閉じます。最後にフラップをまわしこみ、再度ブチブチという音を確認して全面を確実に閉じます。


## やわらか凸(消化管用)の場合

### 装具の貼り方

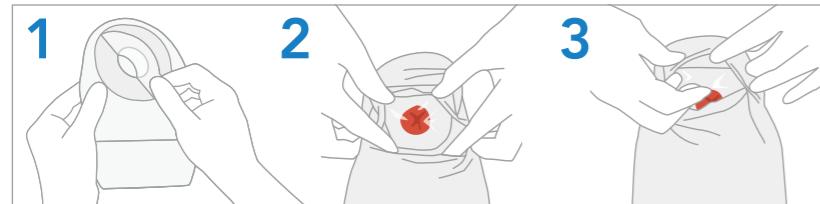

- ①剥離紙をとります。
- ②スリットからストーマを観察しながら貼付します。
- ③必要に応じてフィルターシールを貼ります。

### 排出口の閉じ方 排出口端にあるプレートを5回折り上げます。

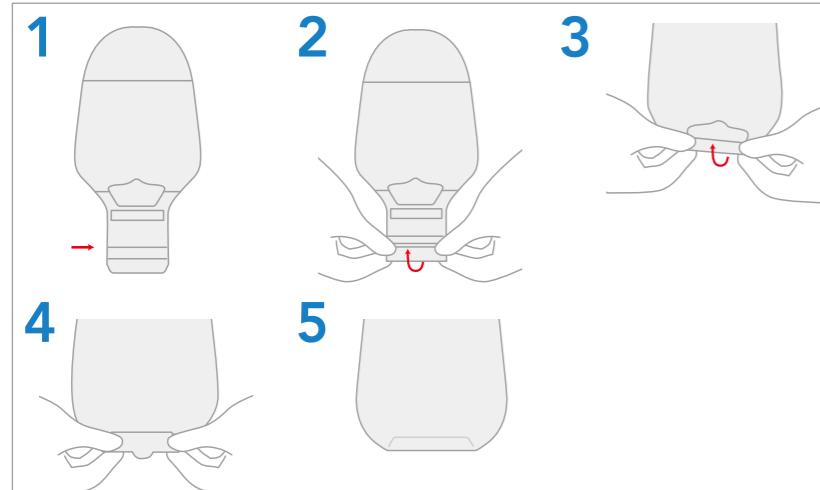

- ②1回折り上げた状態。
- ③5回折り上げた状態。
- ④フラップをおろし、マジックテープを合わせ排出口を閉じます。
- ⑤閉じた排出口を不織布の裏側へ隠すことができます。


## やわらか凸 ウロ(尿路用)の場合

### 装具の貼り方



- ①剥離紙をとります。
- ②スリットからストーマを観察しながら貼付します。


### 排出口の開け方・閉じ方

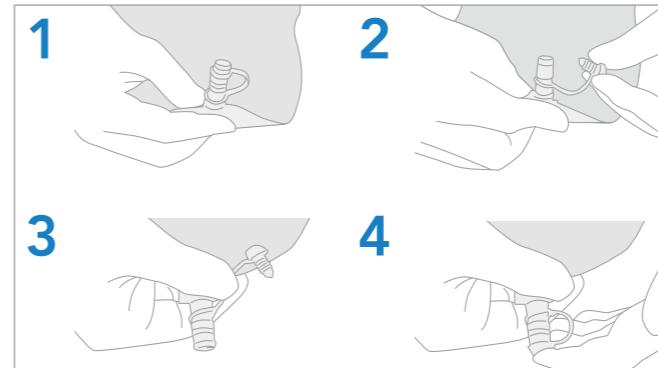

- ①排出口を上向けにします。
- ②キャップを外します。
- ③キャップをつまみながら下向きにして排出します。
- ④キャップを閉めます。


## 尿路用ストーマ袋の場合

### ウロストミーパウチ

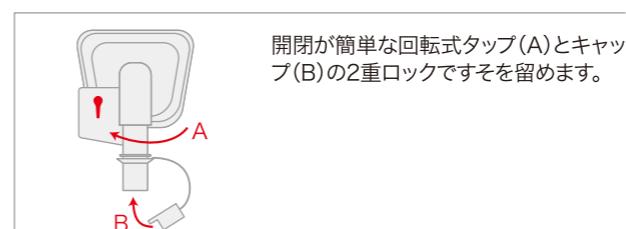

開閉が簡単な回転式タップ(A)とキャップ(B)の2重ロックでそれを留めます。

### ユリナパウチ

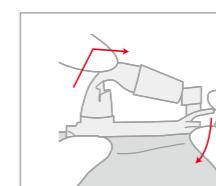

排出口を上向きにしてキャップを外し、キャップをつまみながら、下向きにして排出します。

# アクセサリー製品の使用方法

## 補正用アクセサリー製品の使い分け

### ストーマ周囲皮膚にしわやくぼみがある場合


#### コンバテック シール

しわやくぼみに合わせて、自由に成形して使用します。  
アルコールを含んでいません。




#### バリケア ペースト

細かいしわがある場合に使用します。剥離紙をはがした後、しわの位置に応じて開けた穴のまぎわにペーストを塗ります。細かいしわが平坦になる程度の少量を塗るのが効果的です。30秒ほどペーストを乾かした後、装具を貼付してください。アルコールを含んでいるため、傷がある場合には直接塗らないでください。

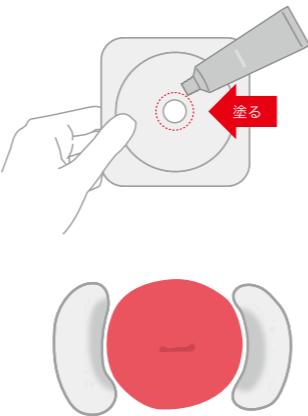

#### バリケア ウェハー


コンバテック シールでは補正しきれない深いしわやくぼみを補正します。深いしわやくぼみが平坦になるよう、ハサミで切って使用します。排泄物が水様性の場合には、バリケア ウェハーと皮膚の段差をバリケア ペーストやコンバテック シールなどでなだらかになるよう整えるとよいでしょう。

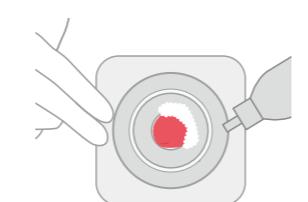

### ストーマと皮膚保護剤の間に隙間がある場合


#### バリケア パウダー

ストーマと皮膚保護剤の小さな隙間にふりかけます。水分を吸収するとゲル状になり、排泄物の刺激から皮膚を保護します。  
※単品系装具をお使いの場合、バリケア パウダーをストーマ周囲にふりかけた後、余分な粉をはたいてから、装具を貼付します。

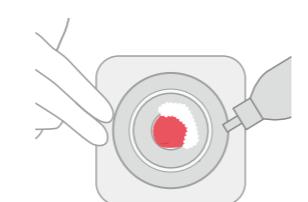

## 皮膚被膜剤(バリア) 使用方法

面板貼付前に“皮膚被膜剤(バリア)”でストーマ周辺を拭き、乾かします。皮膚被膜剤は、薄い被膜を皮膚に作るもので、この被膜が粘着テープなどの剥離刺激を軽減し、排泄物が皮膚へ付着するのを防ぎます。  
形状には個包装のワイプタイプと、スプレータイプがあります。

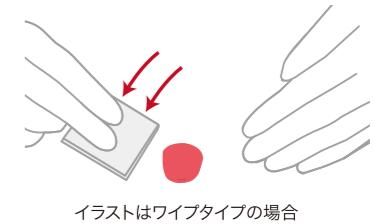

イラストはワイプタイプの場合


## 粘着剥離剤(リムーバー) 使用方法

皮膚保護剤や粘着テープをはがすときに使用します。端から少しだけ“粘着剥離剤(リムーバー)”をふきかけながらゆっくりはがしていきます。このとき、端から少しづつめくっています。  
形状には個包装のワイプタイプと、スプレータイプがあります。



イラストはスプレータイプの場合

## ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤

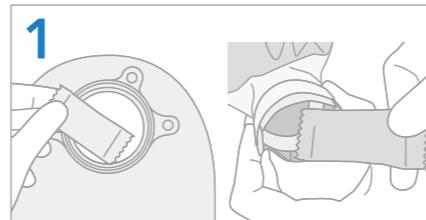

#### ストーマ袋をご使用前に


個包装された本品1個を開封せずに、ストーマ袋の中に入れます。



- 活性炭により、排泄物が通常より黒っぽくなります。
- 手でストーマ袋を押さえることで、形状を平たくできます。

#### 排泄物をしっかりゲル化


数分すると水様性の排泄物がゲル化されます。ストーマ袋の中の排泄物は、通常と同様の方法で便器へ廃棄します。

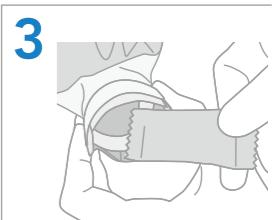

#### 排泄物廃棄後


排出口から新たな本品1個をストーマ袋の中に入れます。

## ニオフ消臭潤滑剤 使用方法

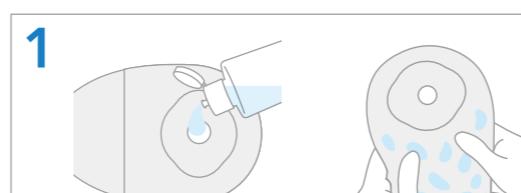

#### ストーマ袋交換時

ストーマ袋にあらかじめ約8ml(大さじ半分程度)を投入し、よくなじませてから装着します。

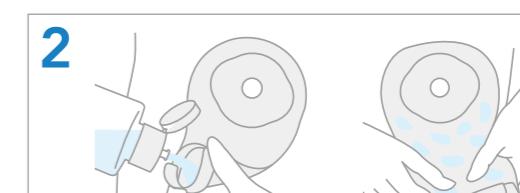

#### ストーマ袋装着中

装着中に排泄物を処理した際には、もう一度約8ml(大さじ半分程度)を投入し、よくなじませます。

# Index

## 索引

● 五十音順

● 製品番号順

## 索引(五十音順)

品名	ページ
アクティブライフ 術後用パウチ S	27
アクティブライフ ドレインパウチ CD	27
アクティブライフ ドレインパウチ DX	27
アクティブライフ ドレインパウチ ST-2	27
アクティブライフ ユリナパウチ CD(尿路用)	28
アクティブライフ ユリナパウチ(尿路用)	27
アクティブライフ ウロストミーパウチ(尿路用)	27
エスティーム インビジクローズ ドレインパウチCVX	25
エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ 中長期	24
エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ	23
エスティーム ウロ 長期	26
エスティーム クローズパウチ (コンパクト)	26
エスティーム クローズパウチ	25
エスティーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ	44
エスティーム シナジー クローズパウチ (コンパクト)	44
エスティーム シナジー クローズパウチ	44
エスティーム ドレインパウチ	24
エスティーム モルダブル	23
エスティーム やわらか凸 ウロ(尿路用)	22
エスティーム やわらか凸(消化管用)	21
エスティーム シナジー ウェハー	43
エスティーム シナジー デュラヘーシブ MCウェハー	44
エスティーム シナジー ドレインパウチ ELサイズ	44
エスティーム シナジー ハイドロウェハー	43
オストミーシークリット アルーレ 女性用	53
オストミーシークリット ヴィクセン ラップ 女性用	53
オストミーシークリット クラシック(コットン) 女性用	53
オストミーシークリット クラシック(マイクロファイバー) 女性用	53
オストミーシークリット クラシック ラップ 女性&男性用	53
オストミーシークリット スイム ラップ 女性&男性用	53
オストミーシークリット ボクサーブリーフ 男性用	53
コンバケア バリア	52
コンバケア リムーバー	52
コンバテック シール	51
シレッセ 皮膚被膜剤	52
ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤	50
デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ	37
デュラヘーシブ ナチュラ MCフランジ	37
デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ	34
デュラヘーシブ ナチュラ ソフトMフランジ	35
デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ	36
デュラヘーシブ ナチュラ フランジ	36
デュラヘーシブ ナチュラ Cソフトフランジ アコードイオン	33
デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ アコードイオン	33
デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ アコードイオン	32
デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ アコードイオン	32
ナチュラプラス インビジクローズ ドレインパウチ	38

品名	ページ
ナチュラプラス ウロストミーパウチ	40
ナチュラプラス クローズパウチ DX-P	39
ナチュラプラス クローズパウチ S	39
ナチュラプラス クローズパウチ	39
ニオフ消臭潤滑剤	50
ニルタック 粘着剥離剤	52
バリケア ウェハー	51
バリケア オートロック ウロストミーパウチ(尿路用)	42
バリケア オートロック クローズパウチ	42
バリケア オートロック コンベックスインサート(凸型嵌め込み具)	41
バリケア オートロック ソフトフランジ	41
バリケア オートロック デュラヘーシブ ソフトフランジ	41
バリケア オートロック ドレインパウチ	42
バリケア オートロック フランジ	41
バリケア オートロック ユリナパウチ(尿路用)	42
バリケア 新洗腸器 ストーマコーン付	55
バリケア 洗腸スリーブ用クリップ	55
バリケア 洗腸用ストーマコーン	55
バリケア ナチュラ Mフランジ	34
バリケア ナチュラ Mフランジ アコードイオン	32
バリケア ナチュラ イレオストミーパウチ	39
バリケア ナチュラ インビジクローズ ドレインパウチ	38
バリケア ナチュラ ウロストミーパウチ(尿路用)	40
バリケア ナチュラ コンベックスインサート(凸型嵌め込み具)	36
バリケア ナチュラ ソフトMフランジ	34
バリケア ナチュラ ソフトフランジ	35
バリケア ナチュラ ソフトフランジ アコードイオン	32
バリケア ナチュラ デュラヘーシブ	38
バリケア ナチュラ ハイドロフランジ	35
バリケア ナチュラ フランジ	36
バリケア ナチュラ ユリナパウチ(尿路用)	40
バリケア ナチュラ 洗腸スリーブ	55
バリケア ナチュラ 洗腸用フェースプレート	55
バリケア パウダー	51
バリケア ペースト	51
バリケア ベルト	53
バリケア ワンピース ドレインパウチ 小児用	46
バリケア ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用)	46
やわらか平面 イレオ	22
やわらか凸 イレオ	21
リトルワン ツーピース インビジクローズ ドレインパウチ ESサイズ	46
リトルワン ツーピース インビジクローズ ドレインパウチ 透明	46
リトルワン ツーピース ウェハー ESサイズ	46
リトルワン ツーピース クローズパウチ 透明	46
リトルワン ツーピース ハイドロウェハー	46
リトルワン ワンピース インビジクローズ ドレインパウチ ESサイズ	46

# 索引(製品番号順) 00110 - 00823

製品番号	品名		ページ
00110	バリケア オートロック フランジ	カスタムカット 35mm 20mmまで	41
00111		カスタムカット 45mm 20-30mm	41
00113		カスタムカット 57mm 30-42mm	41
00114		カスタムカット 70mm 42-55mm	41
00116	バリケア オートロック デュラヘーシブ ソフトフランジ	カスタムカット 35mm 20mmまで	41
00117		カスタムカット 45mm 20-30mm	41
00118		カスタムカット 57mm 30-42mm	41
00120	バリケア オートロック ソフトフランジ	カスタムカット 35mm 20mmまで	41
00121		カスタムカット 45mm 20-30mm	41
00123		カスタムカット 57mm 30-42mm	41
00131	バリケア オートロック ドレインパウチ	45mm 透明	42
00133		57mm 透明	42
00134		70mm 透明	42
00137	バリケア オートロック クローズパウチ	45mm 肌色 フィルター付	42
00138		57mm 肌色 フィルター付	42
00140	バリケア オートロック ドレインパウチ	35mm 肌色	42
00141		45mm 肌色	42
00143		57mm 肌色	42
00146	バリケア オートロック ユリナパウチ(尿路用)	35mm 透明	42
00147		45mm 透明	42
00148		57mm 透明	42
00150	バリケア オートロック ウロストミーパウチ(尿路用)	35mm 透明	42
00151		45mm 透明	42
00153		57mm 透明	42
00182	バリケア オートロック コンベックスインサート	35mm S(19mm) 13mmまで	41
00183	(凸型嵌め込み具)	35mm M(22mm) 13-16mm	41
00184		35mm L(25mm) 16-19mm	41
00185		45mm S(29mm) 19-22mm	41
00186		45mm M(32mm) 22-25mm	41
00187		45mm L(34mm) 25-29mm	41
00188		57mm S(38mm) 29-32mm	41
00189		57mm M(41mm) 32-35mm	41
00200	アクティブライフ ドレインパウチ ST-2	カスタムカット 19-64mm 透明	27
00245	バリケア ナチュラ ハイドロフランジ	カスタムカット 32mm 17mmまで	35
00246		カスタムカット 38mm 17-23mm	35
00247		カスタムカット 45mm 23-30mm	35
00248		カスタムカット 57mm 30-42mm	35
00249		カスタムカット 70mm 42-55mm	35
00250	バリケア ナチュラ フランジ	カスタムカット 32mm 17mmまで	36
00251		カスタムカット 38mm 17-23mm	36
00252		カスタムカット 45mm 23-30mm	36
00253		カスタムカット 57mm 30-42mm	36
00254		カスタムカット 70mm 42-55mm	36
00255		カスタムカット 100mm 55-85mm	36
00260	バリケア ナチュラ ソフトフランジ	カスタムカット 32mm 17mmまで	35
00261		カスタムカット 38mm 17-23mm	35
00262		カスタムカット 45mm 23-30mm	35
00263		カスタムカット 57mm 30-42mm	35
00264	デュラヘーシブ ナチュラ MCフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm	37
00265		モルダブル 45mm M 22-33mm	37
00266		モルダブル 57mm L 33-45mm	37
00271	デュラヘーシブ ナチュラ フランジ	カスタムカット 38mm 23mmまで	36
00272		カスタムカット 45mm 23-30mm	36
00273		カスタムカット 57mm 30-42mm	36
00277	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ	カスタムカット 38mm 23mmまで	36
00278		カスタムカット 45mm 23-30mm	36
00279		カスタムカット 57mm 30-42mm	36
00281	デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ	プレカット 45mm 13mm	37
00282		プレカット 45mm 16mm	37
00283		プレカット 45mm 19mm	37
00284		プレカット 45mm 22mm	37
00285		プレカット 45mm 25mm	37

製品番号	品名		ページ
00286	デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ	プレカット 45mm 28mm	37
00287		プレカット 45mm 32mm	37
00288		プレカット 45mm 35mm	37
00290	バリケア ナチュラ ドレインパウチ	38mm 肌色	38
00291		45mm 肌色	38
00292		45mm 肌色	38
00293		57mm 肌色	38
00295	バリケア ナチュラ Mフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm	34
00296		モルダブル 45mm M 22-33mm	34
00297		モルダブル 57mm L 33-45mm	34
00298		モルダブル 70mm XL 45-56mm	34
00305	デュラヘーシブ ナチュラ Mフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm	34
00306		モルダブル 45mm M 22-33mm	34
00307		モルダブル 57mm L 33-45mm	34
00308		モルダブル 70mm XL 45-56mm	34
00310	バリケア ナチュラ ドレインパウチ	32mm 透明	38
00311		38mm 透明	38
00312		45mm 透明	38
00313		45mm 透明	38
00314		57mm 透明	38
00315		70mm 透明	38
00316		100mm 透明	38
00320	バリケア ナチュラ ソフトフランジ	プレカット 45mm 16mm	35
00321		プレカット 45mm 19mm	35
00322		プレカット 45mm 22mm	35
00323		プレカット 45mm 25mm	35
00324		プレカット 45mm 28mm	35
00325		プレカット 45mm 32mm	35
00326		プレカット 45mm 35mm	35
00327	バリケア ナチュラ インビジクローズ ドレインパウチ	38mm 透明 フィルター付	38
00328		45mm 透明 フィルター付	38
00329		57mm 透明 フィルター付	38
00330		70mm 透明 フィルター付	38
00332	バリケア ナチュラ イレオストミーパウチ	45mm 肌色 フィルター付	39
00333		57mm 肌色 フィルター付	39
00334		70mm 肌色 フィルター付	39
00340	バリケア ナチュラ インビジクローズ ドレインパウチ	38mm 肌色 フィルター付	38
00341		45mm 肌色 フィルター付	38
00342		57mm 肌色 フィルター付	38
00343		70mm 肌色 フィルター付	38
00361	バリケア ナチュラ ユリナパウチ(尿路用)	38mm 透明	40
00362		45mm 透明	40
00363		57mm 透明	40
00370	バリケア ナチュラ ウロストミーパウチ(尿路用)	32mm 透明	40
00371		38mm 透明	40
00372		45mm 透明	40
00373		57mm 透明	40
00374		70mm 透明	40
00382	バリケア ナチュラ 洗腸スリーブ	45mm	55
00383		57mm	55
00387	バリケア ナチュラ 洗腸用フェースプレート	45mm	55
00391	バリケア ナチュラ コンベックスインサート	38mm S(19mm) 13mm以下	36
00392	(凸型嵌め込み具)	38mm M(22mm) 13-16mm	36
00393		38mm L(25mm) 16-19mm	36
00394		45mm S(29mm) 19-22mm	36
00395		45mm M(32mm) 22-25mm	36
00396		45mm L(35mm) 25-29mm	36
00397		57mm S(38mm) 29-32mm	36
00398		57mm M(41mm) 32-35mm	36
00820	リトルワン ワンピース インビジクローズ ドレインパウチ ESサイズ	カスタムカット 透明 縦25mmまで 横31mmまで	46
00821	リトルワン ツーピース ウェハー ESサイズ	カスタムカット 23mmまで	46
00823	リトルワン ツーピース ハイドロウェハー	カスタムカット 4.8-31mm	46

# 索引(製品番号順) 00824 - 416727

製品番号	品名	ページ
00824	リトルワン ツーピース インビジクローズ ドレンパウチ ESサイズ 透明	46
00825	リトルワン ツーピース インビジクローズ ドレンパウチ 透明 フィルター付	46
00828	リトルワン ツーピース クローズパウチ 透明 フィルター付	46
00925	アクティブライフ ウロストミーパウチ(尿路用) プレカット 19mm 透明	27
00926	プレカット 22mm 透明	27
00927	プレカット 25mm 透明	27
00928	プレカット 28mm 透明	27
00929	プレカット 32mm 透明	27
05016	ニオフ消臭潤滑剤 ボトル 250ml	50
05017	ニオフ消臭潤滑剤 ミニパック 8ml	50
09009	エスティー ム シナジー ドレンパウチ ELサイズ 89mm 透明	44
09066	エスティー ム シナジー ウエハー カスタムカット 35mm 35mmまで	43
09067	カスタムカット 48mm 35-48mm	43
09068	カスタムカット 61mm 48-61mm	43
09069	カスタムカット 89mm 61-89mm	43
09075	エスティー ム シナジー デュラヘーシブ MCウェハー モルダブル 35mm 13-22mm	44
09076	モルダブル 48mm 22-33mm	44
09077	モルダブル 61mm 33-45mm	44
09105	エスティー ム シナジー ハイドロウェハー カスタムカット 35mm 35mmまで	43
09106	カスタムカット 48mm 35-48mm	43
09107	カスタムカット 61mm 48-61mm	43
09108	プレカット 35mm 16mm	43
09109	プレカット 35mm 19mm	43
09110	プレカット 35mm 22mm	43
09111	プレカット 35mm 25mm	43
09112	プレカット 35mm 28mm	43
09113	プレカット 35mm 32mm	43
09114	プレカット 35mm 35mm	43
09115	プレカット 48mm 38mm	43
09550	オストミー シークレット クラシック(マイクロファイバー) 女性用 S ベージュ	53
09551	M ベージュ	53
09552	L ベージュ	53
09553	S ブラック	53
09554	M ブラック	53
09555	L ブラック	53
09556	クラシック(コットン) 女性用 S ホワイト	53
09557	M ホワイト	53
09558	L ホワイト	53
09559	S ライラック	53
09560	M ライラック	53
09561	L ライラック	53
09562	アルーレ 女性用 S ブラック	53
09563	M ブラック	53
09566	ボクサーブリーフ 男性用 S グレー	53
09567	M グレー	53
09568	L グレー	53
09569	S ブラック	53
09570	M ブラック	53
09571	L ブラック	53
09575	スイム ラップ 女性&男性用 S ブラック	53
09576	M ブラック	53
09577	L ブラック	53
09578	S ベージュ	53
09579	M ベージュ	53
09580	L ベージュ	53
09581	クラシック ラップ 女性&男性用 M ブラック	53
09582	L ブラック	53
09583	XL ブラック	53
09584	M ブラウン	53
09585	L ブラウン	53
09586	XL ブラウン	53

製品番号	品名	ページ
09587	オストミー シークレット ヴィクセン ラップ 女性用 S ブラック	53
09588	M ブラック	53
413417	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトMフランジ モルダブル 45mm S 13-22mm	35
413418	モルダブル 45mm M 22-33mm	35
413419	モルダブル 57mm L 33-45mm	35
413420	モルダブル 70mm XL 45-56mm	35
413421	バリケア ナチュラ ソフトMフランジ モルダブル 45mm S 13-22mm	34
413422	モルダブル 45mm M 22-33mm	34
413423	モルダブル 57mm L 33-45mm	34
413424	モルダブル 70mm XL 45-56mm	34
413435	ナチュラプラス ウロストミーパウチ 32mm 透明	40
413436	38mm 透明	40
413437	45mm 透明	40
413438	57mm 透明	40
413439	70mm 透明	40
413503	コンパテック シール 48mm 厚さ4mm×外径48mm	51
413504	48mm薄型 厚さ3mm×外径48mm	51
413505	98mm 厚さ3mm×外径98mm	51
413515	エスティー ム モルダブル モルダブル M 21-30mm 透明 フィルター付	23
413516	モルダブル L 31-40mm 透明 フィルター付	23
413517	モルダブル XL 41-50mm 透明 フィルター付	23
413518	モルダブル M 21-30mm 透明	23
413519	モルダブル L 31-40mm 透明	23
413521	モルダブル M 21-30mm 肌色 フィルター付	23
413522	モルダブル L 31-40mm 肌色 フィルター付	23
413523	モルダブル XL 41-50mm 肌色 フィルター付	23
416404	ナチュラプラス クローズパウチ 38mm 肌色	39
416405	ナチュラプラス クローズパウチ S 38mm 肌色	39
416406	ナチュラプラス クローズパウチ DX-P 45mm 肌色 フィルター付	39
416407	ナチュラプラス クローズパウチ 45mm 肌色	39
416408	ナチュラプラス クローズパウチ S 45mm 肌色	39
416409	ナチュラプラス クローズパウチ DX-P 57mm 肌色 フィルター付	39
416410	ナチュラプラス クローズパウチ 57mm 肌色	39
416411	ナチュラプラス クローズパウチ S 57mm 肌色	39
416414	ナチュラプラス インビジクローズ ドレンパウチ 38mm 透明 フィルター付	38
416415	38mm 肌色 フィルター付	38
416416	45mm 透明 フィルター付	38
416417	45mm 肌色 フィルター付	38
416418	45mm 透明	38
416419	57mm 透明 フィルター付	38
416420	57mm 肌色 フィルター付	38
416421	57mm 透明	38
416422	70mm 透明 フィルター付	38
416423	70mm 肌色 フィルター付	38
416424	70mm 透明	38
416472	100mm 透明	38
416700	エスティー ム クローズパウチ カスタムカット 20-70mm 透明 フィルター付	25
416701	カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	25
416702	エスティー ム クローズパウチ (コンパクト) カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	26
416703	エスティー ム クローズパウチ プレカット 25mm 透明 フィルター付	25
416704	プレカット 25mm 肌色 フィルター付	25
416706	プレカット 30mm 透明 フィルター付	25
416707	プレカット 30mm 肌色 フィルター付	25
416712	プレカット 40mm 透明 フィルター付	25
416713	プレカット 40mm 肌色 フィルター付	25
416717	エスティー ム ドレンパウチ カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	24
416718	カスタムカット 20-70mm 透明 フィルター付	23
416719	カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	23
416723	エスティー ム ドレンパウチ プレカット 25mm 肌色 フィルター付	24
416724	エスティー ム インビジクローズ ドレンパウチ プレカット 25mm 透明 フィルター付	23
416725	エスティー ム インビジクローズ ドレンパウチ プレカット 25mm 肌色 フィルター付	23
416727	エスティー ム ドレンパウチ プレカット 30mm 肌色 フィルター付	24

# 索引(製品番号順)

416728 – VB01

製品番号	品名		ページ
416728	エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ	プレカット 30mm 透明 フィルター付	23
416729		プレカット 30mm 肌色 フィルター付	23
416732		プレカット 35mm 透明 フィルター付	23
416733		プレカット 35mm 肌色 フィルター付	23
416735	エスティーム ドレインパウチ	プレカット 40mm 肌色 フィルター付	24
416736	エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ	プレカット 40mm 透明 フィルター付	23
416737		プレカット 40mm 肌色 フィルター付	23
416738	エスティーム インビジクローズ ドレインパウチCVX	プレカット 19mm 透明 フィルター付	25
416739		プレカット 19mm 肌色 フィルター付	25
416740		プレカット 22mm 透明 フィルター付	25
416741		プレカット 22mm 肌色 フィルター付	25
416742		プレカット 25mm 透明 フィルター付	25
416743		プレカット 25mm 肌色 フィルター付	25
416744		プレカット 28mm 透明 フィルター付	25
416745		プレカット 28mm 肌色 フィルター付	25
416746		プレカット 32mm 透明 フィルター付	25
416747		プレカット 32mm 肌色 フィルター付	25
416748		プレカット 35mm 透明 フィルター付	25
416749		プレカット 35mm 肌色 フィルター付	25
416750		プレカット 38mm 透明 フィルター付	25
416751		プレカット 38mm 肌色 フィルター付	25
416777	エスティーム シナジー クローズパウチ (コンパクト)	35mm 肌色 フィルター付	44
416781		48mm 肌色 フィルター付	44
416783	エスティーム シナジー クローズパウチ	61mm 肌色 フィルター付	44
416795	エスティーム シナジー インビジクローズ ドレインパウチ	35mm 透明 フィルター付	44
416796		35mm 肌色 フィルター付	44
416798		48mm 透明 フィルター付	44
416799		48mm 肌色 フィルター付	44
416901		61mm 透明 フィルター付	44
416902		61mm 肌色 フィルター付	44
416975	エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ 中長期	カスタムカット 19-64mm 肌色 フィルター付	24
416976		カスタムカット 19-64mm 透明 フィルター付	24
420695	バリケア ナチュラ イレオストミーパウチ	45mm 透明 フィルター付	39
420696		57mm 透明 フィルター付	39
420697		70mm 透明 フィルター付	39
420787	ニルタック 粘着剥離剤 スプレー	50ml	52
420788	ニルタック 粘着剥離剤 ワイプ		52
420789	シレッセ 皮膚被膜剤 ワイプ		52
420790	シレッセ 皮膚被膜剤 スプレー	50ml	52
420791	ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤		50
420792	ダイヤモンド 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用		50
421020	エスティーム インビジクローズ ドレインパウチ 中長期	プレカット 25mm 透明 フィルター付	24
421021		プレカット 28mm 透明 フィルター付	24
421022		プレカット 32mm 透明 フィルター付	24
421023		プレカット 35mm 透明 フィルター付	24
421024		プレカット 38mm 透明 フィルター付	24
421025		プレカット 25mm 肌色 フィルター付	24
421026		プレカット 28mm 肌色 フィルター付	24
421027		プレカット 32mm 肌色 フィルター付	24
421028		プレカット 35mm 肌色 フィルター付	24
421029		プレカット 38mm 肌色 フィルター付	24
421030	バリケア ナチュラ Mフランジ アコーディオン	モルダブル 57mmAS 13-22mm	32
421031		モルダブル 57mmAM 22-33mm	32
421032		モルダブル 70mmAL 33-45mm	32
421036	デュラヘーシブナチュラ Mフランジ アコーディオン	モルダブル 57mmAS 13-22mm	32
421037		モルダブル 57mmAM 22-33mm	32
421038		モルダブル 70mmAL 33-45mm	32
421453	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 45mm 13-21mm	32
421455	バリケア ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 45mm 13-21mm	32
421457	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 57mm 13-33mm	32
421459	バリケア ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 57mm 13-33mm	32
421461	デュラヘーシブ ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 70mm 13-45mm	32

製品番号	品名		ページ
421463	バリケア ナチュラ ソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 70mm 13-45mm	32
421615	エスティーム やわらか凸(消化管用)	カスタムカット 20-40mm L 肌色 フィルター付	21
421617		プレカット 30mm L 肌色 フィルター付	21
421618		プレカット 35mm L 肌色 フィルター付	21
421619		カスタムカット 20-30mm M 肌色 フィルター付	21
421621		プレカット 30mm M 肌色 フィルター付	21
421623	エスティーム やわらか凸 ウロ(尿路用)	カスタムカット 10-40mm L 肌色	22
421625		プレカット 20mm L 肌色	22
421626		カスタムカット 10-30mm M 肌色	22
421628		カスタムカット 10-18mmまで S 肌色	22
421631	エスティーム ウロ 長期	カスタムカット 13-45mm 透明	26
421632	デュラヘーシブ ナチュラ Cソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 45mm 13-22mm	33
421633	デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ アコーディオン	カスタムカット 45mm 13-22mm	33
421634	デュラヘーシブ ナチュラ Cソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 57mm 13-35mm	33
421635	デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ アコーディオン	カスタムカット 57mm 13-35mm	33
421636	デュラヘーシブ ナチュラ Cソフトフランジ アコーディオン	カスタムカット 70mm 13-48mm	33
421637	デュラヘーシブ ナチュラ Cフランジ アコーディオン	カスタムカット 70mm 13-48mm	33
421934	やわらか平面 イレオ	カスタムカット 20-60mm 肌色 フィルター付	22
421935	やわらか凸 イレオ	カスタムカット 15-40mm L 肌色 フィルター付	21
421936		カスタムカット 15-30mm M 肌色 フィルター付	21
421937		カスタムカット 15-20mm S 肌色 フィルター付	21
422159	エスティーム やわらか凸(消化管用)	カスタムカット 20-55mm XL 肌色 フィルター付	21
AC1010	バリケア ウェバー	10X10cm	51
AC2005		20X20cm	51
ADC1905	アクティブライフ ドレインパウチ CD	プレカット 19mm 透明	27
ADC2205		プレカット 22mm 透明	27
ADC2505		プレカット 25mm 透明	27
ADC2805		プレカット 28mm 透明	27
ADC3205		プレカット 32mm 透明	27
ADC3505		プレカット 35mm 透明	27
ADC3805		プレカット 38mm 透明	27
ADC4505		プレカット 45mm 透明	27
ADC5005		プレカット 50mm 透明	27
ADD6410	アクティブライフ ドレインパウチ DX	カスタムカット 19-64mm 透明	27
APS7010	アクティブライフ 術後用パウチ S	カスタムカット 19-70mm 透明	27
AUC1305	アクティブライフ ユリナパウチ CD(尿路用)	プレカット 13mm 透明	28
AUC1605		プレカット 16mm 透明	28
AUC1905		プレカット 19mm 透明	28
AUC2205		プレカット 22mm 透明	28
AUC2505		プレカット 25mm 透明	28
AUC2805		プレカット 28mm 透明	28
AUC3205		プレカット 32mm 透明	28
AUC3505		プレカット 35mm 透明	28
AUP4510	アクティブライフ ユリナパウチ(尿路用)	カスタムカット 19-45mm 透明	27
COB50	コンバケア バリア		52
COR50	コンバケア リムーバー		52
IC01	バリケア 洗腸用ストーマコーン		55
IL10	バリケア 洗腸スリーブ用クリップ		55
PA60	バリケア ベースト	56.7g	51
PDP5015	バリケア ワンピース ドレインパウチ 小児用	カスタムカット 50mmまで 透明	46
PUP2515	バリケア ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用)	カスタムカット 25mmまで 透明	46
PW30	バリケア パウダー	28.3g	51
SI01	バリケア 新洗腸器 ストーマコーン付		55
VB01	バリケア ベルト	55-106cm	53