

キレイに治ります

キズを乾燥させない治療法

モイスト・ウンド・ヒーリング (湿潤療法)

皮膚を再生させる。

それが、キズが完治するということです。

かさぶたは、キズを治そうとする細胞が乾燥のため、働けずに死んでしまったもの。

モイスト・ウンド・ヒーリングは

従来の治療法と異なり、

キズを乾燥させるのではなく、

キズを密閉(カバー)し、湿潤状態を保ち

治療させる方法です。

乾かすのではなく、キズ口を潤すことで

細胞を活性化し、再生を早めます。

また、露出した神経が空気に触れるのを防ぐので

ヒリヒリとした痛みが和らぎます。

モイスト・ウンド・ヒーリングに基づき 治療に使われる創傷被覆材



アクアセル[®]Ag Extra

アクアセル[®]Agの利点をそのままに、「吸収力」と「強度」が増して、更に使いやすく。

- ハイドロファイバー[®]テクノロジーに、銀イオンの抗菌効果をプラス。
- 広範囲な抗菌スペクトル。
- 即効性と持続性のある抗菌効果。
- クリティカルコロナイゼーションに対する選択肢。

医療機器承認番号：22600BZX00199000



デオアクティブ[®]ET

薄く半透明で、貼付下でも創部の観察可能。

- 適度な湿潤環境を維持し、治療を促進。
- 創傷特有の疼痛を緩和。
- 半透明なので貼付下の傷の観察が可能。
- 防水性外層のため、入浴やシャワーが可能。

医療機器承認番号：20700BZY00181000



カルトスタット[®]

止血を促進し、治療に適した湿潤環境を維持。

- 優れた吸水力で滲出液を吸収し、ゲルを形成。
- 止血作用を促進。
- 疼痛を緩和。二次損傷を防止。
- 貼付・交換が容易。

医療機器承認番号：20400BZY01037000



ふぉーむらいと[®] Foam Lite

創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシング。

- シリコーン粘着技術で、貼るのものがすのめやさしい。
- すべりが良く快適です。
- シャワー入浴ができます。

医療機器届出番号：13B1X10071000004

創傷被覆材製品に関して、詳しくは主治医にご相談ください。

製造販売元

コンバテック ジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

お客様相談窓口

☎ 0120-532384

<http://www.convatec.com>

000190

AP-5.2019.WT027 2019.06.(03)PV

モイスト・ウンド・ヒーリング (湿潤療法)



痛みを和らげる。

早く・キレイに治る。

監修：北里大学名誉教授、NPO法人 創傷治療センター理事長
塩谷信幸先生

すりきず等の創傷に。

自然治癒力に着目した新しい治療法です。

 ConvaTec

キズは、潤すことで早く・キレイに治ります

けがをしたらどうしますか？



キズは、
必ず消毒し、
乾かす。

消毒時・ガーゼを
はがすときなどの
痛みは、がまんする。

かさぶたは、
キズが治っている証拠
だから、放っておく。

キズを乾かすと細胞が死んでしまい、治癒力が弱まります。
治る過程での痛みも増してしまいます。

また、消毒剤はバイ菌だけでなく新しい皮膚の細胞に対しても障害があります。バイ菌は、流水で洗うことで十分減らすことができます。生きているものは皮膚も含めすべて、水分が必要なのです。


**痛みを和らげ、早く・キレイに
治す治療法があります。**

モイスト・ウインド・ヒーリング



キズはどのようにして治るの？

すりむいたときの一般的なキズの治り方を見てみましょう。

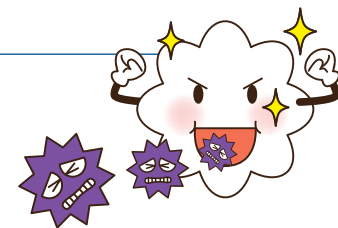

1

転んだりすることで
皮膚が欠損、出血

2

血を止めるため
血小板が集まってくる

3

白血球などの
免疫細胞が
バイ菌を除去

4

新しい皮膚
(表皮細胞)が再生、
キズがふさがる

血を止めるための血小板も、除菌のための免疫細胞も、新しい表皮細胞もすべて生きている細胞です。そのため乾いた状態よりも潤った環境のほうが活動が活発になります。かさぶたは、バイ菌や白血球が死んだものが乾燥して固まったものです。かさぶたがあるとキズが乾燥し、治癒が遅くなります。

なぜ痛くないの？¹⁾

モイスト・ウインド・ヒーリング(湿潤療法)ハイドロコロイド創傷被覆材のしくみ

慈恵会相澤病院外傷治療センター提供

皮膚を欠損したことによりむき出しになってしまった神経の末端を湿潤した環境でカバー(創傷被覆材を貼付)することにより、空気や外部刺激から守るため、痛みが和らぎます。

また、従来のガーゼなどと異なり、キズにくっつかないので交換時の痛みや出血がほとんどありません。

水仕事や入浴も可能なので、普段通りの生活ができます。また、早く治って痛みがありません。

モイスト・ウインド・ヒーリングは人間の自然治癒力に着目した新しい治療法なのです。



貼付前



貼付直後



貼付5日後



デュオアクティブ®ET
(ハイドロコロイド・ドレッシング)

痛みがなくなるしくみ

キズをハイドロコロイドで被覆することにより神経の末端をカバーします。防水性の外層により外部刺激からも保護します。

いつもどおり、
水仕事も
できるのよ。



1) 棚瀬信太郎, "適切なドレッシングを選ぶために,"ドレッシング 新しい創傷管理, 穴澤貞夫編, へるす出版, 1995, p.101-117.