

ポイントは開封前に、 ウォーターサックを割ること

親水性物質があらかじめカテーテルに練りこまれています。

パッケージ内のウォーターサックを割ると

カテーテルが水に触れることで表面が滑らかになります。



ウォーターサックを片手で割ることが難しい場合
下記のどちらかの方法でお試しください。



青いマーカー部分に圧がかかるよう、
ウォーターサックを強く押します。



ウォーターサックに圧がかかるよう、内側
に折りまげて上から強く押しつぶします。

潤滑剤の準備も不要、素早く、簡便。

簡便

「使い捨てタイプ」の親水性コーディング

- 親水性コーディングカテーテルなので、潤滑剤の準備は不要。開封後すぐに使えます。
- 減菌済・使い捨てのため、使用後の洗浄・消毒は不要。清潔に保つことができ、外出時にも便利です。
- 摩擦も少なく表面も滑らか。自己導尿をスムーズに行えます。

衛生面も安心、より快適な毎日を。

衛生的



カテーテルに触れずに導尿が行える 「保護スリーブ」

パッケージからの開封時や挿入・抜去時を通じてカテーテルに直接触れることなく、より清潔に操作ができます。また挿入時には、潤滑剤によるすべりを軽減できます。

販売名：ジェントルカテ Glide
医療機器認証番号：229ADBZX00075000
機械器具(51) 医療用 sondage tube及び体液誘導管
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル JMDNコード：36125000

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

ConvaTec


000807

快適

FeelClean™
Technology

独自の「Feel Clean」 技術を採用

潤滑剤の残渣が少なく、液だれもしにくいため、使用時に衣服や手に潤滑剤がつく心配が少なく安心。より快適な毎日を過ごすことができます。

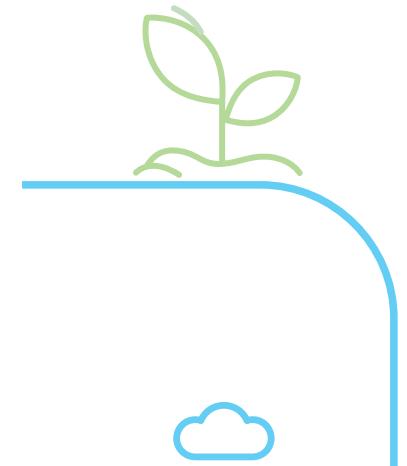

使い捨てタイプの親水性コーティング
自己導尿カテーテル
ジェントルカテ Glide
使い方ガイド
男性用

ジェントルカテ Glide
that's a relief

ConvaTec

AP4..2018.CCC007 2018.04.(02)PV

「ジェントルカテ Glide」の手順


使用前の準備



① 清潔な状態で


使用前に石鹼で手を洗い、陰部周辺を清拭しましょう。

減菌精製水をカテーテル全体へ

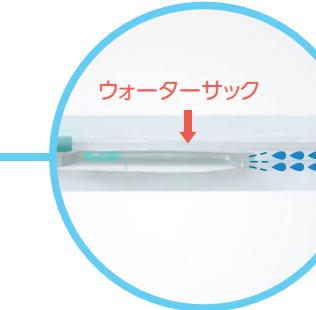

ウォーターサック
↓

開封前に
行なうこと!

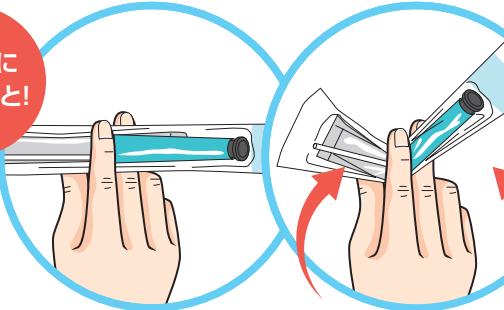


② ウォーターサックを割る

パッケージを開封する前に、内部のウォーターサックを割りましょう。



減菌精製水が排出されたら、カテーテル先端部までいき渡るように、よくなじませてください。

パッケージを開封

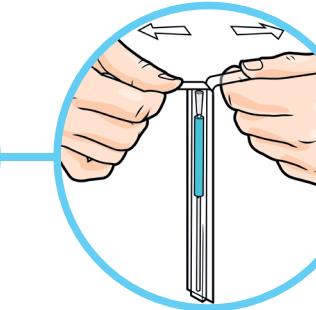

カテーテルに
触れない!

保護スリーブ
を持つ!

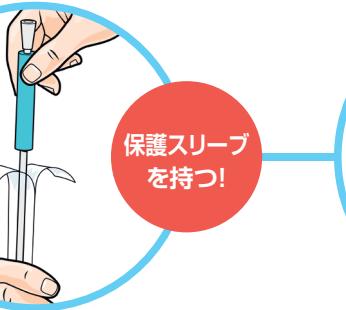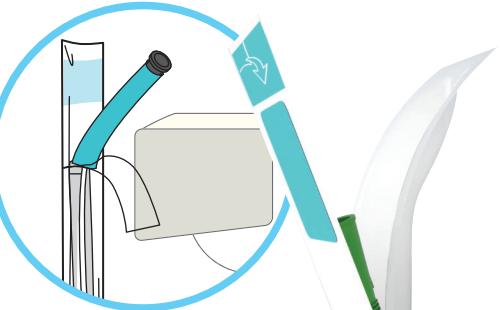

④ 保護スリーブを使って取り出す


手が直接カテーテルに触れないよう保護スリーブを使って、カテーテルを取り出します。

パッケージ取り出し後は、カテーテル表面が乾燥しないよう2分以内にご使用ください。

開封した後

パッケージ外側の粘着テープの剥離紙をはがすと、トイレの壁などに貼付して使用することもできます。

カテーテルの挿入

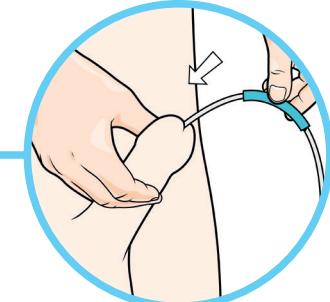


⑤ 保護スリーブを持って挿入

保護スリーブを使ってカテーテルを持ち、尿が出始めるまでカテーテルをゆっくり尿道に挿入しましょう。陰茎を腹部の方に持ち上げると膀胱内に挿入しやすくなります。


尿道口を塞がないようにするため陰茎は強く握らないでください。

カテーテルの抜去・廃棄

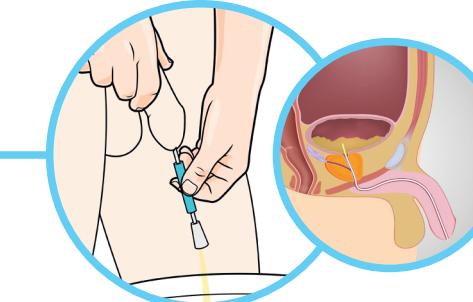


⑥ 確実に挿入

尿が出始めたら、カテーテルを1~2cm押し、膀胱内に確実に挿入しましょう。

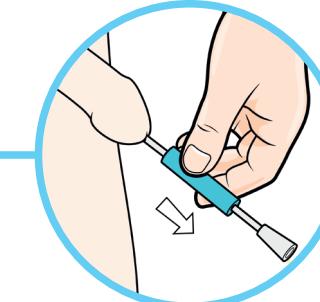

⑦ 抜去

膀胱を完全に空にするため、カテーテルをゆっくり抜去しましょう。
尿がさらに出始めたら止めてください。尿が出てなくなったらカテーテルを最後までゆっくり抜去しましょう。

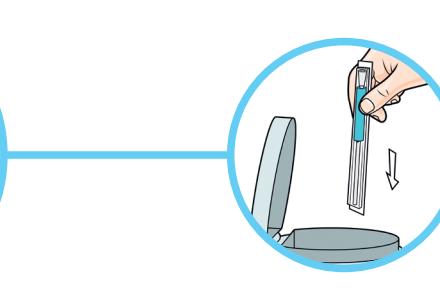

⑧ 廃棄

各自治体の廃棄方法に従って廃棄しましょう。
トイレに流さないよう、注意してください。

