

ふぉーむらいと

FoamLite™
ConvaTec

お肌にやさしいシリコーン粘着技術を取り入れた救急絆創膏

キズをやさしくまもる3層構造

防水性外層 <ポリウレタン>

すべりが良く快適です。
シャワー・入浴ができます¹。
紫外線をカットします。

吸水性パッド <ポリウレタン>

吸収力があります。
やわらかいクッションになります。

創傷接触面 <シリコーン>

やさしく安全に貼りつきます。
はがすときにもやさしい
粘着剤です^{1,2}。

様々な部位にフィットします。




❗ 本品をカットして使用する場合は、包帯やテープで固定して下さい。


写真提供: ConvaTec image library (AP-017256-US)

貼り方

- 1 本品を貼付する前に、キズを洗淨し水分を拭き取ります。

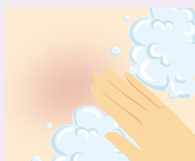

- 2 吸水性パッドの大きさがキズよりも周囲1cm程度大きいサイズの製品を選びます。

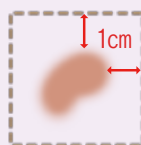

- 3 外周の部分にシワが入らないように注意してお貼りください。



❗ 関節など曲がる部位には曲げた状態で本品を貼付します。

はがし方

- 1 本品をはがす時は、周囲の皮膚を押えながら本品の隅をゆっくりと持ち上げるようにはがしてください。



- 2 <交換の時期>
キズから出てくるジクジクした液体が漏れ出してくる前、または、貼付中の本パッド部の汚れが確認出来た時点で、新しいものに交換してください。
※最長でも7日以内に新しい本品に交換してください。

使用上の注意



- ❗ 本品を使用中にキズの周辺が赤く熱を持つ、腫れる、痛みが持続する場合には本品の使用を中止し、医療機関にて適切な治療を受けてください。

販売名：ふぉーむらいと

注文番号	規格(パッドサイズ)	包装	メーカー希望小売価格
00475	5.5×12cm (2.5×9.5cm)	10枚/箱	¥2,100+消費税
00476	8×8cm (5×5cm)		¥2,100+消費税
00477	10×10cm (6.5×6.5cm)		¥2,600+消費税
00478	15×15cm (11×11cm)		¥5,200+消費税
00479	5×5cm (2.5×2.5cm)		¥1,500+消費税
00480	10×20cm (6.5×15cm)		¥5,200+消費税



医療機器届出番号:13B1X10071000004
医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード:34864000

参考文献

1.MS D Kesteven. In Vitro Performance Characteristics of Foam Lite™ ConvaTec. WHRI4680 MS132 Rev1. 16 May 2016; 1-9.
2.Meuleneire F, Rücknagel H. Soft silicones Made Easy. Wounds International 2013 (May). Available from: www.woundsinternational.com

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

®はConvaTec Inc.の登録商標です。© 2019 ConvaTec Inc.



製造販売元
コンバテック ジャパン株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木1丁目8番7号

お客様相談窓口
0120-532384
<http://www.convatec.com>