

手術治療のさらなる進歩へ

高度管理医療機器
医療機器承認番号 23000BZX00097000

PELNAC[®]Gplus[®] ベルナック Gプラス[®]

アルカリ処理ゼラチン プラス

〈原寸サイズ(mm)〉

ConvaTec GUNZE

120x240

LL

200x240

3L

82x120

L

82x90

M

40x60


SS

82x60

S

40x30

3S

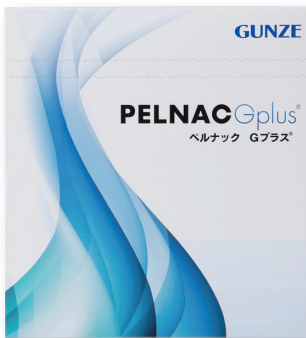

使用目的又は効果

下記の疾患、並びに創傷により生じた全層皮膚欠損創における肉芽の形成。
①熱傷Ⅲ度 ②外傷性皮膚欠損 ③腫瘍・母斑切除後の皮膚欠損 ④皮弁採取部 など


製品概要

コラーゲンスポンジ（アルカリ処理ゼラチン含有）及びシリコンフィルムからなる二層性のコラーゲン使用人工皮膚です。
また、コラーゲンスポンジ（アルカリ処理ゼラチン含有）のみの単層のもの並びに滲出液排出のためのドレーンスリットを付与したものがあります。

原理


全層皮膚欠損創に本品を貼付することにより、埋植部からスポンジ層の空隙内に侵入した線維芽細胞によって新しい真皮様組織が形成されます。

規格

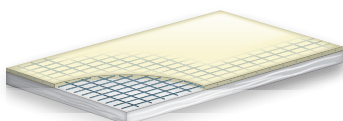

メッシュ補強タイプ
トレックスガーゼを組み込むことで強度がアップし、スムーズに縫合できます。

製品番号	サイズ (mm)	包装単位
PNG-F40030	3S (40 × 30)	1 枚 / 1 箱
PNG-F40060	SS (40 × 60)	
PNG-F82060	S (82 × 60)	
PNG-F82090	M (82 × 90)	
PNG-F82120	L (82 × 120)	

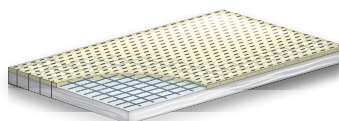

ドレーン孔タイプ
メッシュ補強タイプにスリットを入れ、滲出液管理に優れます。

製品番号	サイズ (mm)	包装単位
PNG-D40030	3S (40 × 30)	1 枚 / 1 箱
PNG-D40060	SS (40 × 60)	
PNG-D82060	S (82 × 60)	
PNG-D82090	M (82 × 90)	
PNG-D82120	L (82 × 120)	
PNG-D120240	LL (120 × 240)	
PNG-D200240	3L (200 × 240)	



単層タイプ
シリコンフィルムを必要としない創に適しています。

製品番号	サイズ (mm)	包装単位
PNG-S40030	3S (40 × 30)	1 枚 / 1 箱
PNG-S82060	S (82 × 60)	



単層ドレーン孔タイプ
単層タイプにスリットを入れ、滲出液管理に優れます。

製品番号	サイズ (mm)	包装単位
PNG-SD40030	3S (40 × 30)	1 枚 / 1 箱
PNG-SD82060	S (82 × 60)	

※製品をご使用の際は添付文書を必ずお読みください。
一般的名称：コラーゲン使用人工皮膚 承認番号：23000BZX00097000

保険適用
分野番号：102 分野名：真皮欠損用グラフ

製造販売業者

グンゼ株式会社

〒623-8513 京都府綾部市青野町棗ヶ市46

販売業者

コンバテック ジャパン株式会社

お客様相談窓口 ☎ **0120-532384**
<http://www.convatec.com>