
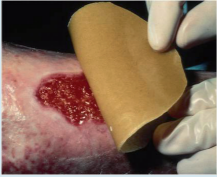


















Effektiv sårbehandling med ConvaTec

Symptomer fra såret	Førstevalg	Indikasjoner	Fordeler	Praktiske tips*	Effektive kombinasjoner
Lett væskende  		<ul style="list-style-type: none"> Trykksår (Grad 1-2) Bensår Post-operative sår Delhudsbrannskader Skrubb- og gnagsår Okklusjonsbehandling 	Hydrokolloid bandasje <ul style="list-style-type: none"> Fremmer sårtilheling utgjør en viral og bakteriell barriere¹ Skånsom å fjerne Pasienten kan dusje med bandasjen 	<ul style="list-style-type: none"> Minst 3 cm margin utenfor sårkanten Varm opp med hånden for best feste Mulig å klippe til Unngå bruk av salver eller oljeholdig såpe på huden rundt såret Kan ligge på i opp til 7 dager, men skiftes før hvis det er klinisk indisert 	Dekkbandasje DuoDERM® Primærbandasje AQUACEL® AQUACEL® EXTRA™ AQUACEL® Ag AQUACEL® Ag+
Moderat væskende  		<ul style="list-style-type: none"> Bensår Trykksår Diabetes fotsår Post-operative sår Donorflater Delhudsbrannskader 	Geldannende skumbandasje med AQUACEL® som kontaktlag mot såroverflaten. <ul style="list-style-type: none"> Absorberer, binder inne og holder på væske og bakterier - også under kompresjon.² Holder sårkantene intakte og forhindrer macerasjon.² Mye og smidig. Klebekant av silikon. AQUACEL® Ag Foam har bred, rask og kontinuerlig antimikrobiell effekt.³ 	<ul style="list-style-type: none"> Den absorberende overflaten skal dekke såret med en marginal på 1 cm. Finnes tilgjengelig i størrelsen sacrum, hæl og rektangulære. Klippbar. Kan sitte på i opptil 7 dager, men byttes tidligere dersom det er klinisk indisert. Bruk AQUACEL® Ag Foam bandasje til væskende, overflatiske sår som er infisert eller har en høy risiko for infeksjon. 	Dekkbandasje AQUACEL® Foam Primærbandasje AQUACEL® AQUACEL® EXTRA™ AQUACEL® Ag AQUACEL® Ag+
Moderat til kraftig væskende  		<ul style="list-style-type: none"> Bensår Trykksår Fotsår hos diabetikere Delhudsbrannskader Post-operative sår Sårhuler 	Geldannende AQUACEL® bandasje med og uten forsterkende tråder. <ul style="list-style-type: none"> Absorberer, binder inne og holder på væske og bakterier - også ved kompresjon.² Holder sårkantene intakte, forhindrer macerasjon.² AQUACEL® Extra™ har unike, innsyde forsterkende tråder og sikrer ekstra absorpsjon og holdfasthet.^{4a} 	<ul style="list-style-type: none"> Dekk såret med 2 cm margin til sårkanten. Legg på flere lag der økt absorpsjon er ønskelig. Kan med fordel brukes sammen med kompresjon Kan ligge på i opp til 7 dager, men skiftes før hvis det er klinisk indisert 	Dekkbandasje AQUACEL® Foam Primærbandasje AQUACEL® AQUACEL® EXTRA™ 1 – 4 lag
Kirurgiske incisjoner  		<ul style="list-style-type: none"> Post operative sår 	Post operativ bandasje med AQUACEL® som kontaktlag mot såret og hudvennlig hydrokolloid klebekant. <ul style="list-style-type: none"> Alt-i-ett bandasje med rask og høy absorpsjon. Fleksibel bandasje som følger kroppens bevegelser og muliggjør rask mobilisering. Reduserer risiko for post operative komplikasjoner som blødder og infeksjoner.⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> Velg en størrelse på bandasjen så kontaktlaget mot incisionen dekkes med en marginal på 2 cm. Sett på bandasjen og varm den med hendene på huden for bedre feste, pass godt på kantene. Kan sitte i opptil 7 dager eller byttes når det er klinisk indisert. Bruk AQUACEL® Ag Surgical bandasje til infiserte sår eller sår med stor risiko for infeksjon. 	Dekkbandasje AQUACEL® Surgical Primærbandasje AQUACEL® AQUACEL® EXTRA™ AQUACEL® Ag AQUACEL® Ag+
Delhudsbrannskader 		<ul style="list-style-type: none"> Delhudsbrannskader Donorsted / donorflate 	Geldannende AQUACEL® bandasje med forsterkende tråder av nylon. <ul style="list-style-type: none"> Spesialt utviklet for behandling av brannskader. Redusert krymping av bandasjen og økt mobilitet. Absorberer, binder inne og holder på væske og bakterier. AQUACEL® Ag Burn har bred, snabb og bibehållen antimikrobiell effekt.³ 	<ul style="list-style-type: none"> Dekk hele brannskaden med en marginal på 2 cm ut på uskadet hud. Dekk til og fiksér bandasjen med gaskompresser og fest dette. Bandasjen kan sitte på i opptil 21 dager. 	Dekkbandasje Gaskompress Primærbandasje AQUACEL® Burn AQUACEL® Ag Burn
Sår med infeksjon eller høy fare for infeksjon*** + Biofilm 		<ul style="list-style-type: none"> Bensår Trykksår Fotsår hos diabetikere Post-operative sår Sårhuler 	Geldannende AQUACEL® bandasje med sølvioner. <ul style="list-style-type: none"> Bred, rask og kontinuerlig antimikrobiell effekt.³ AQUACEL® Ag+ løser opp og bryter ned, samt forhindrer gjenoppbygging av biofilm.⁶ Absorberer, binder inne og holder på væske og bakterier – også ved kompresjon.² AQUACEL® Ag+ bandasje har unike, innsyde forsterkende tråder som sikrer ekstra holdfasthet.^{4a} 	<ul style="list-style-type: none"> Dekk såret med 2 cm margin til sårkanten Legg på i flere lag der økt absorpsjon er ønskelig. Kan forhåndsfuktes med NaCl eller sterilt vann Kan ligge på i opp til 7 dager, men skiftes før hvis det er klinisk indisert 	Dekkbandasje AQUACEL® Foam Primærbandasje AQUACEL® Ag+ Extra AQUACEL® Ag+ sårfiller AQUACEL® Ag
Illeluktende sår 		<ul style="list-style-type: none"> Bensår Trykksår Fotsår hos diabetikere Kreftsår Kirurgiske sår 	Geldannende bandasje med kol <ul style="list-style-type: none"> Effektiv absorpsjon av lukt⁷ og væske Ikke-heftende, og dermed skånsom mot huden Enkel å bruke 	<ul style="list-style-type: none"> Fiberoverflaten mot såret. Festes med hudvennlig tape, tubegas eller elastisk bind 3 dagers luktabsorberende effekt Minst 3,5 cm margin til sårkanten 	Dekkbandasje CarboFlex™ Primærbandasje AQUACEL® Ag AQUACEL® Ag+ AQUACEL® AQUACEL® EXTRA™

Tilgjengelig i ditt område DuoDERM® AQUACEL® Foam AQUACEL® AQUACEL® Surgical AQUACEL® Burn AQUACEL® Ag CarboFlex™ AQUACEL® Ag Foam AQUACEL® Extra* AQUACEL® Ag Surgical AQUACEL® Ag Burn AQUACEL® Ag+

* Se bruksanvisningen i pakningen for ytterligere produktinformasjon.
 ** Bruk vannfast tape for å sikre godt feste i hjørnene ved bruk av ikke-heftende bandasje, eller bandasje som er klippet til.
 *** Som en del av behandlingen av infiserte sår

^a Sammenlignet med AQUACEL® bandasje

Referanseliste 1. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds. 1993;5:1-8. 2. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. Wounds UK, 2010, Vol 6, No 2. 3. Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parsons D. Controlling wound bioburden with a novel silver-containing hydrofiber® dressing. Wound Repair Regen. 2004;12:288-294. 4. Preliminary assessment of the physical properties of AQUACEL™ EXTRA vs AQUACEL™. Scientific Background Report. WHR3461 TA214 Rev. 1 2011. Data on File, ConvaTec Inc. 5. Clarke JV, Deakin AH, Dillon JM, Emmerson S, Kinninmonth AWG. A prospective clinical audit of a new dressing design for lower limb arthroplasty wounds. J Wound Care. 2009;19(11):5-11. 2. 6. Caruso DM, Foster KN, Blome-Eberwein SA, et al. Randomized clinical study of Hydrofiber dressing with silver or silver sulfadiazine in the management of partial-thickness burns. J Burn Care Res. 2006;27(3):298-309. 7. Holloway S, Bale S, Harding K, Robinson B, Ballard K. Evaluating the effectiveness of a dressing for use in malodorous, exuding wounds. Ostomy/Wound Management 2002;48(5):22-28. 8. Physical Disruption of Biofilm by AQUACEL® Ag+ Wound Dressing. Scientific Background Report. WHR3850 MA232, 2013, Data on file, ConvaTec Inc.