



neria™ guard

infusieset gebruiksinstructie

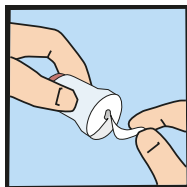


- 1.** Verwijder voorzichtig de afdekfolie van de fixatiepleister.

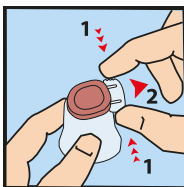


- 2.** Verwijder de beveiliging van het inbrengmechanisme door zachtjes in de zijkant van de beveiliging te knippen en trek deze eruit.




- 3.** Plaats neria™ guard op de huid en druk de rode activeringsknop volledig in om de infusieset in te brengen.

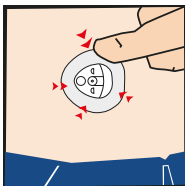

- 4.** Druk de fixatiepleister op de huid.

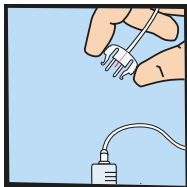

- 5.** Sluit aan op de pomp en vul de slang volgens de bijgeleverde instructies.

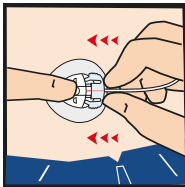

- 6.** Leg een vinger op de canulebehuizing en duw tegelijkertijd het aansluitstuk recht naar binnen totdat u een 'klik' hoort.

Houd er rekening mee dat deze instructie slechts enkele van de stappen illustreert die moeten worden gevolgd bij het plaatsen van neria™ guard en dat het geen vervanging is voor het lezen van de bijgesloten gebruiksaanwijzing.



neria™ guard infusieset

neria™ guard is een infusieset voor subcutane toediening met geïntegreerd inbrengsysteem en zachte canule. Eenvoudig in te brengen met een druk op de knop. De intrekbare naald kan prikaccidenten voorkomen en het inbrengen vereenvoudigen.

Product Specificaties

Canule:	Zacht	Fixatiepleister:	Geïntegreerd, huidvriendelijk, non-woven polyester, kleefzijde van acryl
Insteekhoek:	90 graden (recht naar binnen)	Naaldbescherming:	Ja, naald is niet zichtbaar voor, tijdens en na het inbrengen
Loskoppelen:	Ja, mogelijk bij de canulebehuizing	Inbrengsysteem:	Ja, geïntegreerd in het product
Gauge inbrengnaald:	G27		
Diameter zachte canule:	0,68 mm (G23)		

Omschrijving	Naald/ canule lengte	Slang lengte	Gauge	Verpakt per	Bestel- nummer
neria™ guard 12 cm / 6 mm	6 mm	12 cm	G27	10	510455
neria™ guard 12 cm / 9 mm	9 mm	12 cm	G27	10	510456
neria™ guard 60 cm / 6 mm	6 mm	60 cm	G27	10	510461
neria™ guard 60 cm / 9 mm	9 mm	60 cm	G27	10	510462
neria™ guard 110 cm / 6 mm	6 mm	110 cm	G27	10	510467
neria™ guard 110 cm / 9 mm	9 mm	110 cm	G27	10	510468

De neria™ guard infusiesets zijn verpakt per 10 stuks. Afzonderlijke canules en slangonderdelen zijn ook verpakt per 10 stuks.

Ga naar www.neria.com voor meer informatie